

## Was ist die Nuance Audio™ Glasses?

Die Nuance Audio™ Glasses sind mehr als nur ein „Klangverstärker“ – sie sind ein echtes medizinisches Gerät. Diese Brillenfassungen sind mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet und integrieren ein Luftleitungshörgerät (Medizinisches Gerät der Klasse IIa), das in Deutschland als rezeptfreies „OTC“-Hörgerät erhältlich ist. Sie wurden speziell für Erwachsene (ab 18 Jahren) entwickelt, die eine leichte bis moderate Hörminderung wahrnehmen. Falls erforderlich, können die Nuance Audio™ Glasses auch mit Korrekturgläsern kombiniert werden, um Sehfehler zu korrigieren.

Nuance Audio™ Glasses sind so konzipiert, dass sie den ganzen Tag getragen werden können. Über die begleitende App lassen sie sich einfach an jede Lebenssituation anpassen – von Geschäftstreffen bis zum Familienalltag.

Die Nuance Audio™ Glasses bieten folgende Vorteile:

- **Diskrete Open-Ear-Technologie**
- **Bequemes und stilvolles Design**
- **Einfache Handhabung und Aussehen wie herkömmliche Brillen**
- **Kombination von Seh- und Hörfunktionen in einer integrierten Lösung (optional)**

## Warum ist die Nuance Audio™ Glasses die richtige Lösung für meine Schwerhörigkeit?

Nuance Audio™ Glasses bieten die perfekte Lösung für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust oder für diejenigen, die in geräuschvollen Umgebungen Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen.

Die Nuance Audio™ Glasses sind ideal, wenn Sie:

- mehr soziale Interaktionen suchen und eine Lösung benötigen, die Ihre Fähigkeit verbessert, mit Familie und Freunden zu kommunizieren;
- nach einer Lösung suchen, die Ihre Lebensqualität, Ihr sensorisches Erleben und Ihr allgemeines Wohlbefinden steigert;
- Wert auf Stil und Aussehen legen und Produkte bevorzugen, die Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen und Ihnen Komfort bieten.

Die Nuance Audio™ Glasses sind für Menschen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust konzipiert und bieten eine unsichtbare, einfache und komfortable Lösung zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Tragen der Nuance Audio™ Glasses verbessert die akustische Wahrnehmung, indem die Sprachverständlichkeit der Person, mit der Sie sprechen, verstärkt wird. Diese Brille ist mit einem innovativen Mikrofon-Array und einer fortschrittlichen „Beamforming“-Technologie ausgestattet, die einen fokussierten Klangstrahl in die Richtung lenkt, in die Sie schauen.

Der Ton in diesem Bereich wird verstärkt, während umliegende Geräusche unverändert bleiben.

Dadurch wird die Sprachverständlichkeit für die Person direkt vor Ihnen optimiert, was insbesondere in lauten Umgebungen eine große Hilfe für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust darstellt. Mit der „Beamforming“-Technologie und dem offenen Ohr-Design hören Sie klaren, natürlichen Klang und fangen Geräusche ein, die Sie vielleicht sonst überhört hätten. Nuance Audio™ Glasses bieten nicht nur Komfort und Funktionalität, sondern auch eine hervorragende Klangqualität.

## Welche Vorteile bietet Nuance Audio™ Glasses gegenüber anderen freiverkäuflichen oder herkömmlichen Hörgeräten/Hörunterstützungen?

Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede zwischen Nuance Audio™ Glasses und herkömmlichen Hörgeräten:

- Design: Nuance Audio™ Glasses profitieren von der F&E-Kompetenz und dem Designwissen von EssilorLuxottica. Das Ergebnis ist eine Brille, die ihre fortschrittliche Technologie elegant in ein modernes, stilvolles Gestell integriert.
- Komfort: Viele Träger von herkömmlichen oder freiverkäuflichen Hörgeräten berichten von Unannehmlichkeiten im Gehörgang. Nuance Audio™ Glasses bieten sowohl Seh- als auch Hörvorteile in einem einzigen, nahtlosen Produkt. Die Open-Ear-Technologie vermeidet die unangenehmen Empfindungen, die mit herkömmlichen Innenohrgeräten verbunden sind.
- Richtungsfokus: Im „Frontal“-Audiomodus können Nutzer ihre Aufmerksamkeit gezielt auf den Sprecher gegenüber richten. Für Momente, in denen eine breitere Klangwahrnehmung gewünscht ist, bietet Nuance Audio™ Glasses auch den „Rundum“-Modus, der ohne den Beamforming-Algorithmus arbeitet und die Geräusche aus der Umgebung verstärkt.
- Benutzerfreundlichkeit: Nuance Audio™ Glasses erfordert keine komplexe Anpassung. Über die Nuance Audio™ App können Sie ganz einfach Einstellungen wie Lautstärke, Hintergrundgeräusche und Audiomodus nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit nur wenigen Klicks können Sie aus voreingestellten Programmen wählen und die Unterstützung ganz individuell gestalten.
- Zugänglichkeit: Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist Nuance Audio™ Glasses ein rezeptfreies Produkt, das direkt im [Geschäft](#) erworben werden kann. Es ist weder ein Hörtest noch eine ärztliche Bescheinigung erforderlich.

## Verwendet die Nuance Audio™ Glasses Knochenleitungstechnologie?

Nein, die Brille nutzt nicht die Knochenleitung, sondern die Luftleitung. Sie ist mit Lautsprechern ausgestattet, die in das Gestell in der Nähe Ihrer Ohren eingebettet sind.

## Können Personen in der Nähe den verstärkten Ton hören?

Menschen in Ihrer Umgebung (in geringer Entfernung) sollten die verstärkten Geräusche nicht hören oder dadurch gestört werden.