

Che cosa sono i Nuance Audio Glasses?

I Nuance Audio Glasses non si limitano ad amplificare il suono e sono un vero e proprio dispositivo medico. Si tratta di montature dotate di una tecnologia innovativa che integra alla perfezione un dispositivo acustico a conduzione aerea (Dispositivo Medico di Classe IIa, vendibile senza bisogno di prescrizione medica), progettato per amplificare il suono per utenti adulti (dai 18 anni in su) con una perdita dell'udito percepita da lieve a moderata. I Nuance Audio Glasses possono essere abbinati a lenti graduate, se necessario, per rispondere alle esigenze di chi necessita anche di una correzione visiva. I Nuance Audio Glasses possono essere indossati tutto il giorno e sono facilmente configurabili tramite l'App, per adattarsi a qualsiasi situazione, dalle riunioni di lavoro ai momenti in famiglia.

I Nuance Audio Glasses sono caratterizzati da:

- **Discreta tecnologia open-ear**
- **Design comodo ed elegante**
- **Facilità d'uso e design tipico da occhiale da vista**
- **Supporto per vista e udito in un'unica soluzione (opzionale)**

Perché i Nuance Audio™ Glasses sono la soluzione giusta per la mia perdita uditiva?

I Nuance Audio™ Glasses sono ideali per chi soffre di una perdita uditiva moderata o per chi ha difficoltà di comprensione del parlato in situazioni di rumore.

I Nuance Audio™ Glasses sono la soluzione giusta per te se:

- Desideri aumentare le tue interazioni sociali e vuoi trovare un modo per migliorare la tua comunicazione con parenti e amici
- Cerchi una soluzione in grado di migliorare la qualità della vita, l'esperienza sensoriale e il benessere generale
- Tieni allo stile e preferisci prodotti in linea con i tuoi gusti, in grado di farti sentire a tuo agio

I Nuance Audio™ Glasses sono indicati nel caso di perdita uditiva da lieve a moderata e garantiscono invisibilità, semplicità e comfort con il miglior rapporto qualità-prezzo.

I Nuance Audio™ Glasses aiutano a sentire meglio, amplificando il suono e rendendo più chiare le parole di chi ti parla davanti. Grazie a un sistema di microfoni innovativo e alla rivoluzionaria tecnologia di amplificazione direzionale, questi occhiali indirizzano il suono nella direzione in cui stai guardando. In questo modo, il suono viene amplificato nell'area mirata, riducendo al minimo i rumori ambientali. Ciò consente di amplificare al massimo la voce della persona che ti sta di fronte, aiutando significativamente chi soffre di perdita uditiva da lieve a moderata a comprendere il parlato in ambienti rumorosi. La nostra tecnologia di amplificazione direzionale avanzata, insieme all'audio open ear e al suono naturale, ti consente di cogliere senza sforzo i suoni che potrebbero sfuggirti, soprattutto in ambienti rumorosi. I Nuance Audio™ Glasses sono una soluzione comoda dal buon rapporto qualità-prezzo, che assicura una qualità del suono elevata.

Quali sono i vantaggi dei Nuance Audio™ Glasses rispetto ad altri dispositivi acustici?

I Nuance Audio™ Glasses presentano molte differenze rispetto ai tradizionali dispositivi acustici:

- **Stile:** i Nuance Audio™ Glasses si affidano alle competenze di ricerca e sviluppo, alla maestria artigianale e all'esperienza nel design di EssilorLuxottica. Ecco perché la tecnologia di Nuance Audio™ Glasses si integra perfettamente in una montatura di tendenza.
- **Comfort:** le persone che utilizzano dispositivi acustici tradizionali tendono a lamentarsi del fastidio provato nel condotto uditivo. I Nuance Audio™ Glasses offrono vantaggi visivi e uditivi in un unico prodotto. Grazie alla tecnologia open-ear, il disagio provato nel condotto uditivo comunemente associato ai tradizionali dispositivi sarà solo un ricordo.
- **Direzionalità:** l'ascoltatore può concentrarsi sul suo interlocutore diretto grazie alla modalità audio "Frontale". Per i momenti in cui vorresti vivere l'ambiente circostante senza concentrarti su chi hai davanti, i Nuance Audio™ Glasses offrono anche la "Modalità 360", che amplifica i suoni in base al profilo selezionato (preimpostato) senza utilizzare l'algoritmo direzionale.

- Semplicità: non è richiesto nessun adattamento o configurazione. È possibile regolare le impostazioni dei Nuance Audio™ Glasses direttamente dalla Nuance Audio™ App, in modo semplice e rapido. Gli occhiali Nuance Audio™ Glasses sono molto facili da usare e non richiedono agli utenti di essere esperti in tecnologia. È possibile configurare facilmente i Nuance Audio™ Glasses tramite la Nuance Audio™ App scegliendo (i) il programma preimpostato (quattro opzioni disponibili) che più si adatta al proprio profilo. Inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente l' dispositivio regolando (ii) il volume, (iii) il rumore di sottofondo e (iv) la "modalità audio". Queste quattro impostazioni sono disponibili sulla homepage della Nuance Audio™ App.
- Accessibilità: a differenza dei tradizionali dispositivi acustici, i Nuance Audio™ Glasses possono essere acquistati direttamente in [negozio](#). Non sono quindi richiesti test dell'udito o certificazioni.

I Nuance Audio™ Glasses sfruttano la conduzione ossea?

No, gli occhiali non sfruttano la conduzione ossea, bensì la conduzione aerea. Si servono di altoparlanti integrati nella montatura, vicino alle orecchie.

Le persone vicino a me possono sentire l'audio amplificato?

Chi ti sta vicino (a una distanza non troppo ravvicinata) non dovrebbe sentire né essere disturbato dai suoni amplificati.