


Empezar: creación de cuenta, emparejamiento, calibración



Desembalaje



Desembalaje

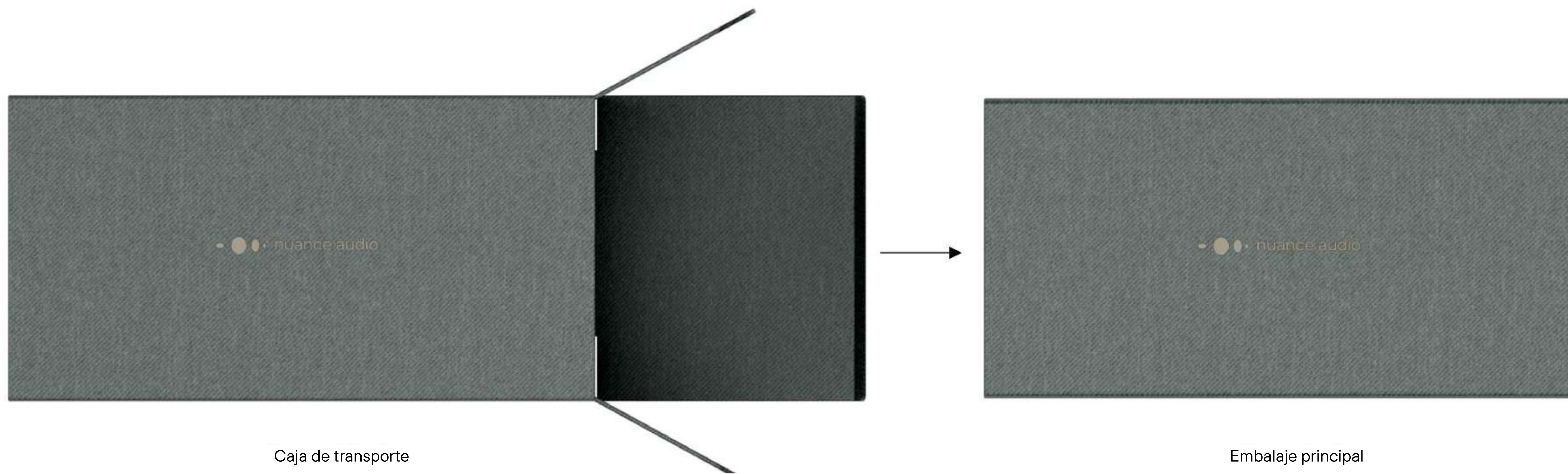




Desembalaje



Gafas^s




Charging Pad

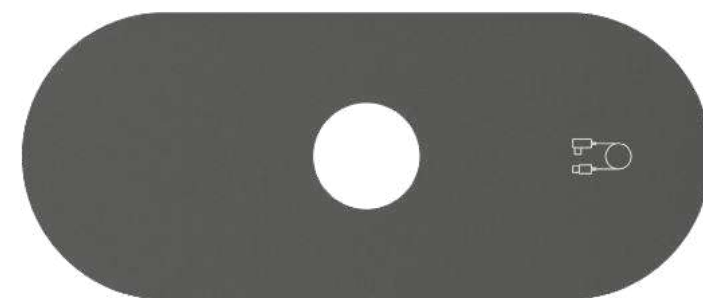

Funda para cables



Funda plegable

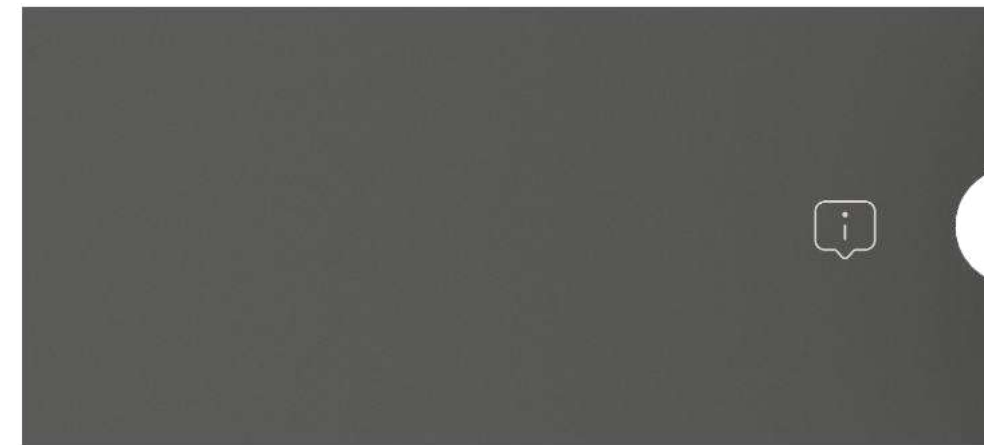


Sobre^{pe}




Guía del usuario



Seguridad y garantía

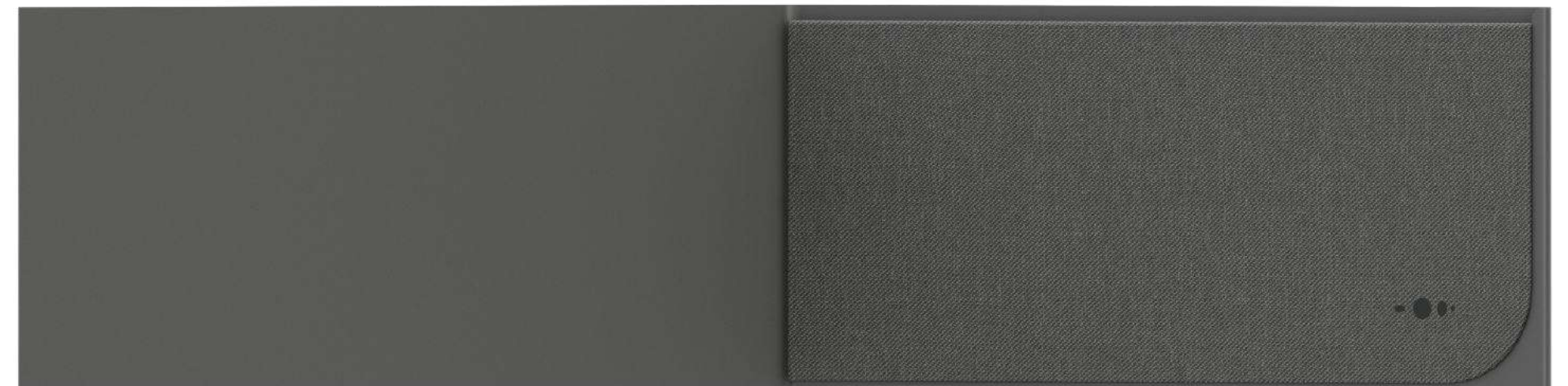

Sobre con/ paño de limpieza + paño de limpieza

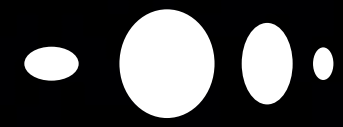


Activa y configura tus Nuance Audio Glasses



Busca Nuance Audio App

Para facilitar el uso de tus Nuance Audio Glasses, nuestra intuitiva aplicación móvil te permite cambiar las modalidades de audio, controlar el volumen y reducir el ruido de fondo, todo desde tu teléfono.

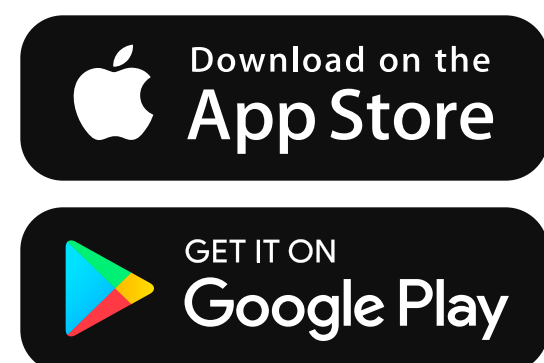


Opción A.

Escanea el código QR con tu móvil y [descarga la aplicación](#)





Notas

También puedes encontrar el código QR en la caja principal

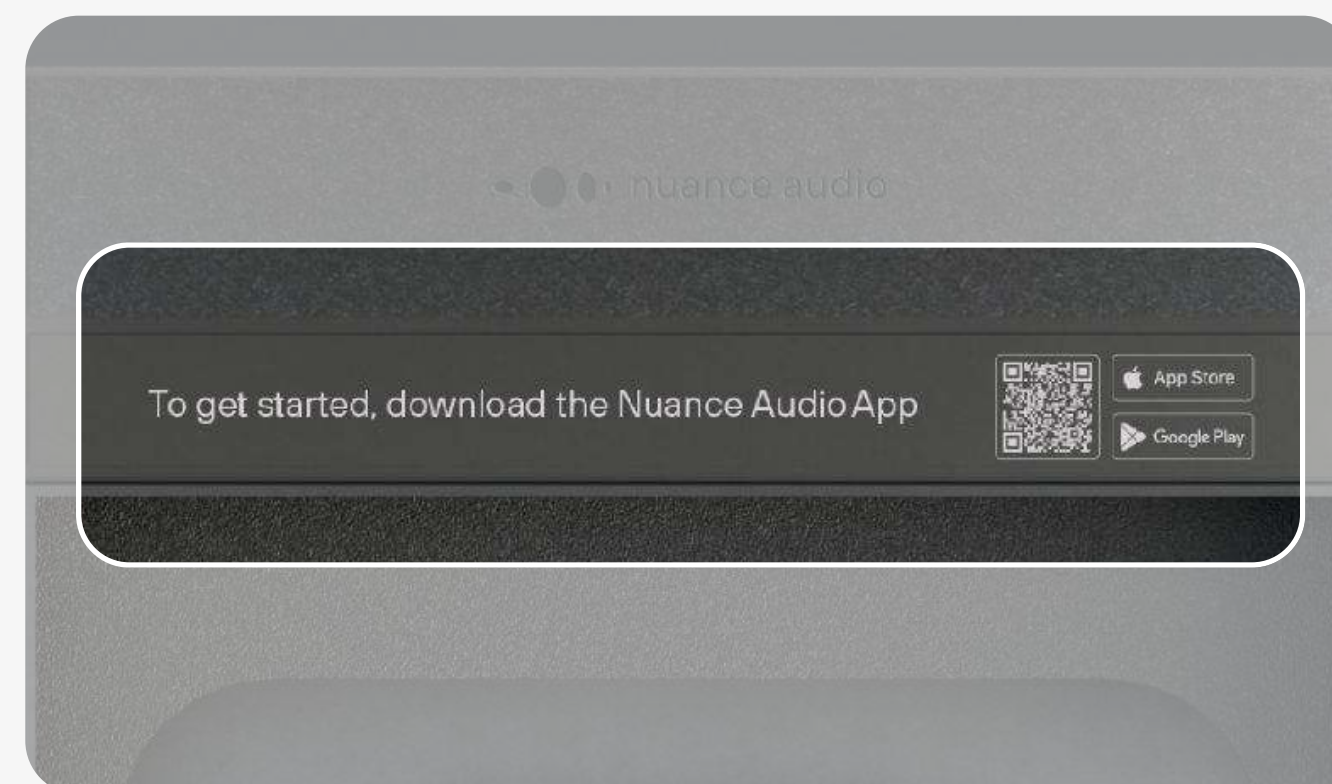

Opción B.


Busca "Nuance Audio" en la App Store o en Google Play Store y [descárgala](#)

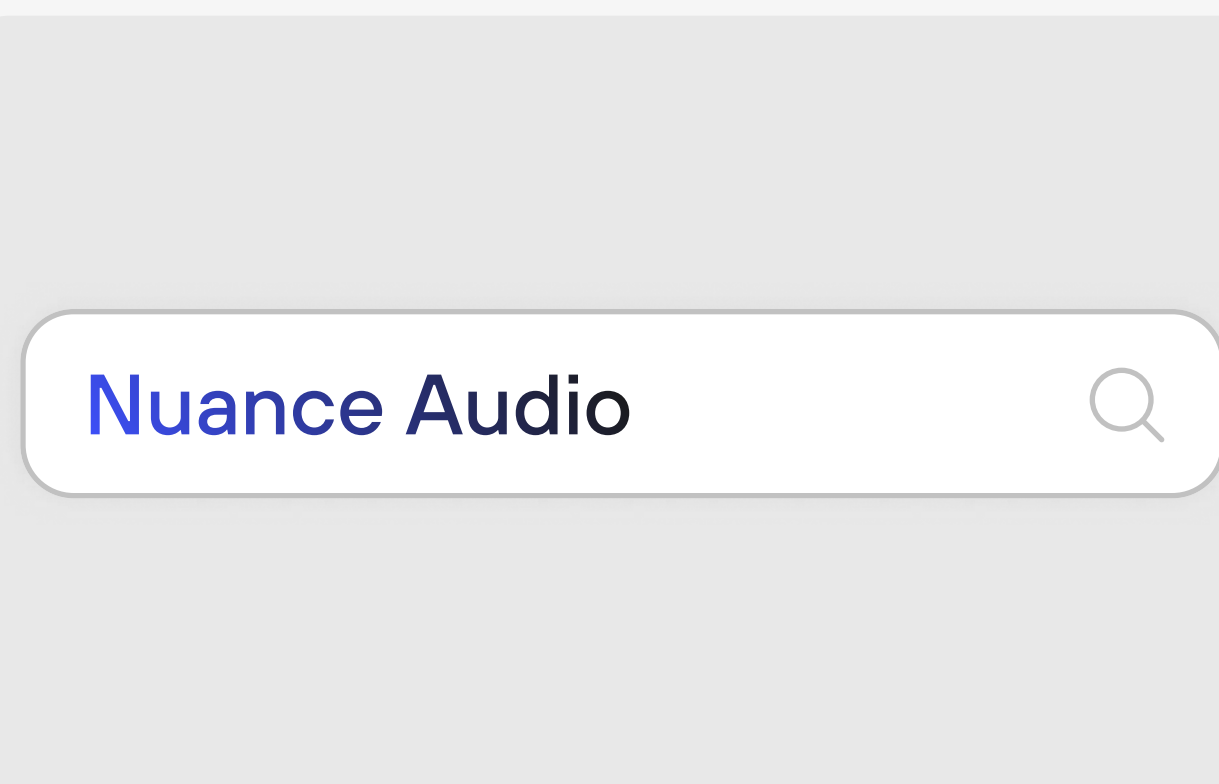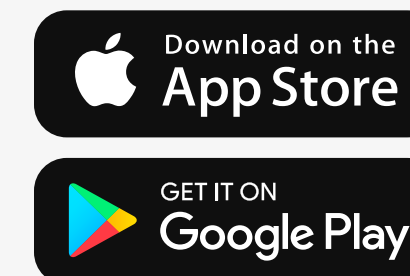




Descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo

Para activar y personalizar tus Nuance Audio Glasses, **descarga Nuance Audio App** desde la App Store en iOS o Google Play Store.

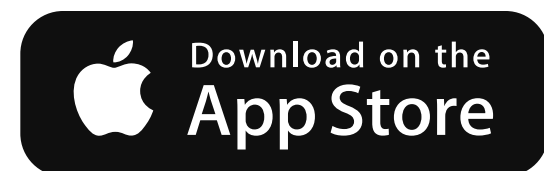


Apple App Store

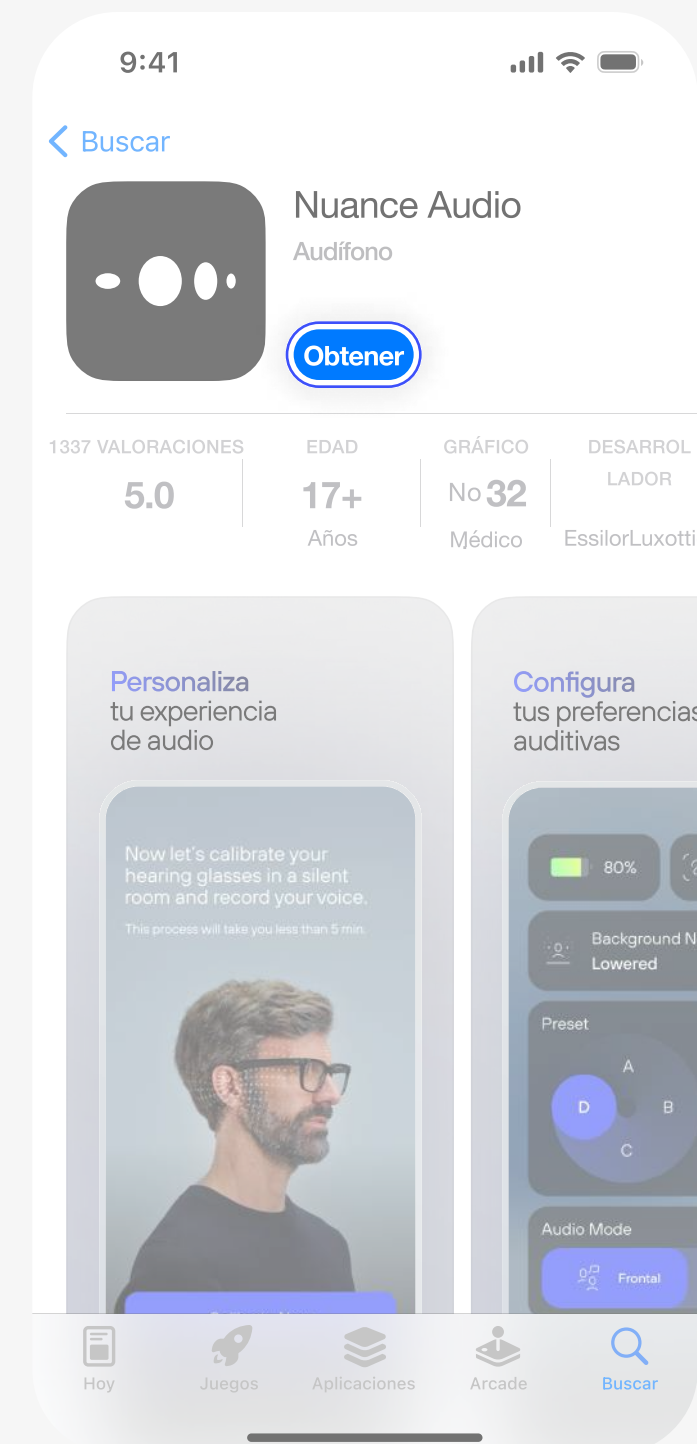

Busca "Nuance Audio" en la App Store de iOS y toca **Obtener**

el botón Obtener cambiará a Abrir. Podrás iniciar la aplicación desde la App Store o encontrarla en tu pantalla principal.

Google Play Store

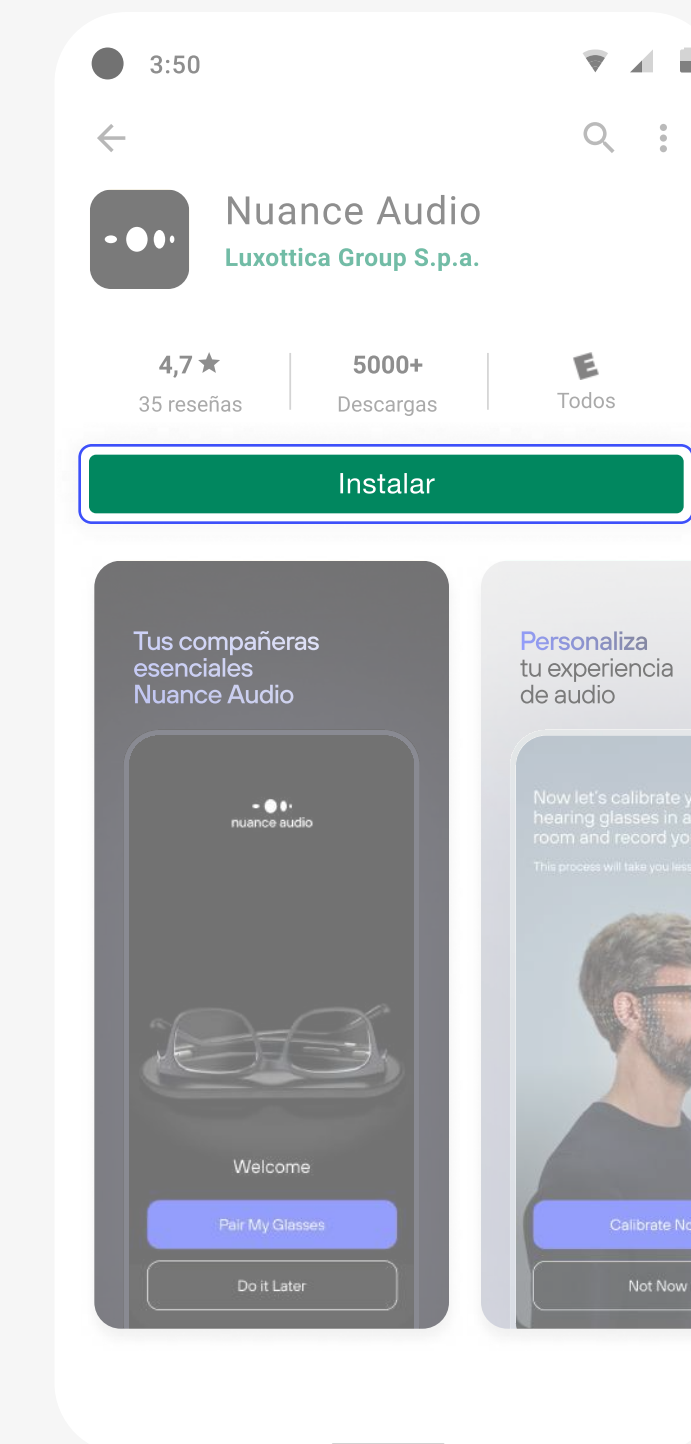


Busca "Nuance Audio" en Google Play Store y toca **Instalar**

el botón Obtener cambiará a Abrir. Podrás iniciar la aplicación desde la tienda o encontrarla en tu pantalla principal.



Regístrate

Una vez que hayas descargado la aplicación, podrás continuar con el registro.

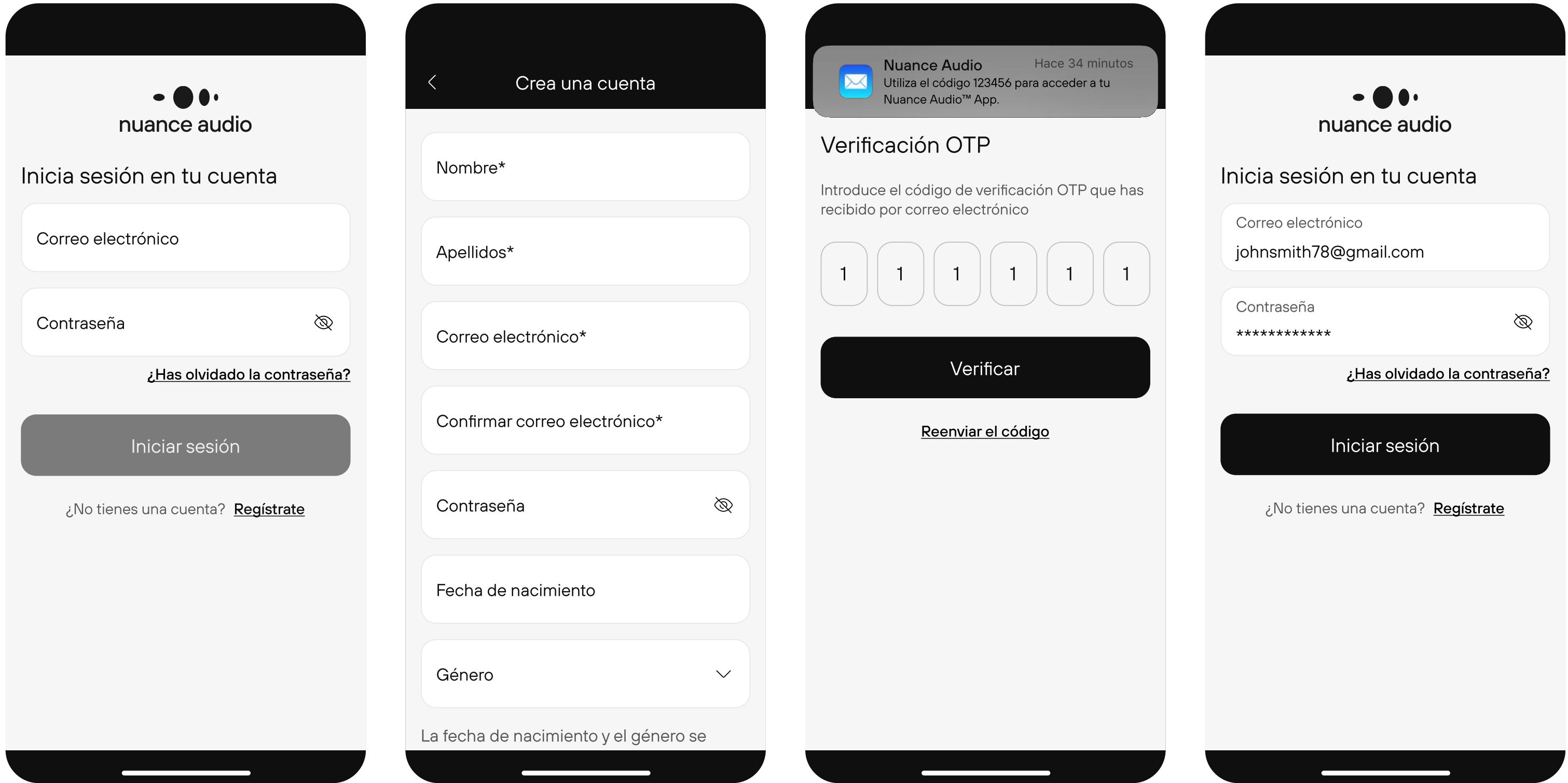




Emparejamiento de gafas y teléfono



Inicia el emparejamiento.
Presiona Comenzar

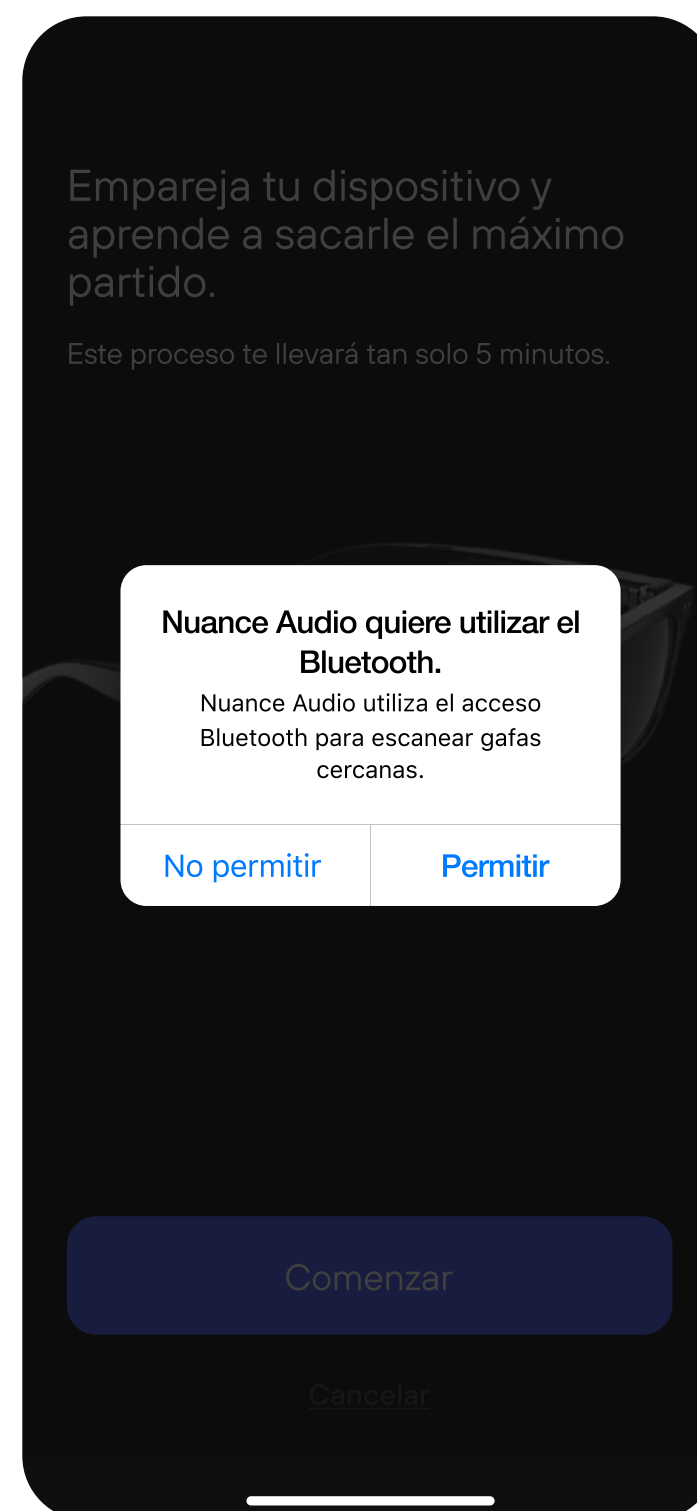

Habilita los permisos de Bluetooth.
Presiona Permitir




Accede al modo de emparejamiento **manteniendo pulsado el botón multifuncional** hasta que el led azul







Emparejamiento de gafas y teléfono

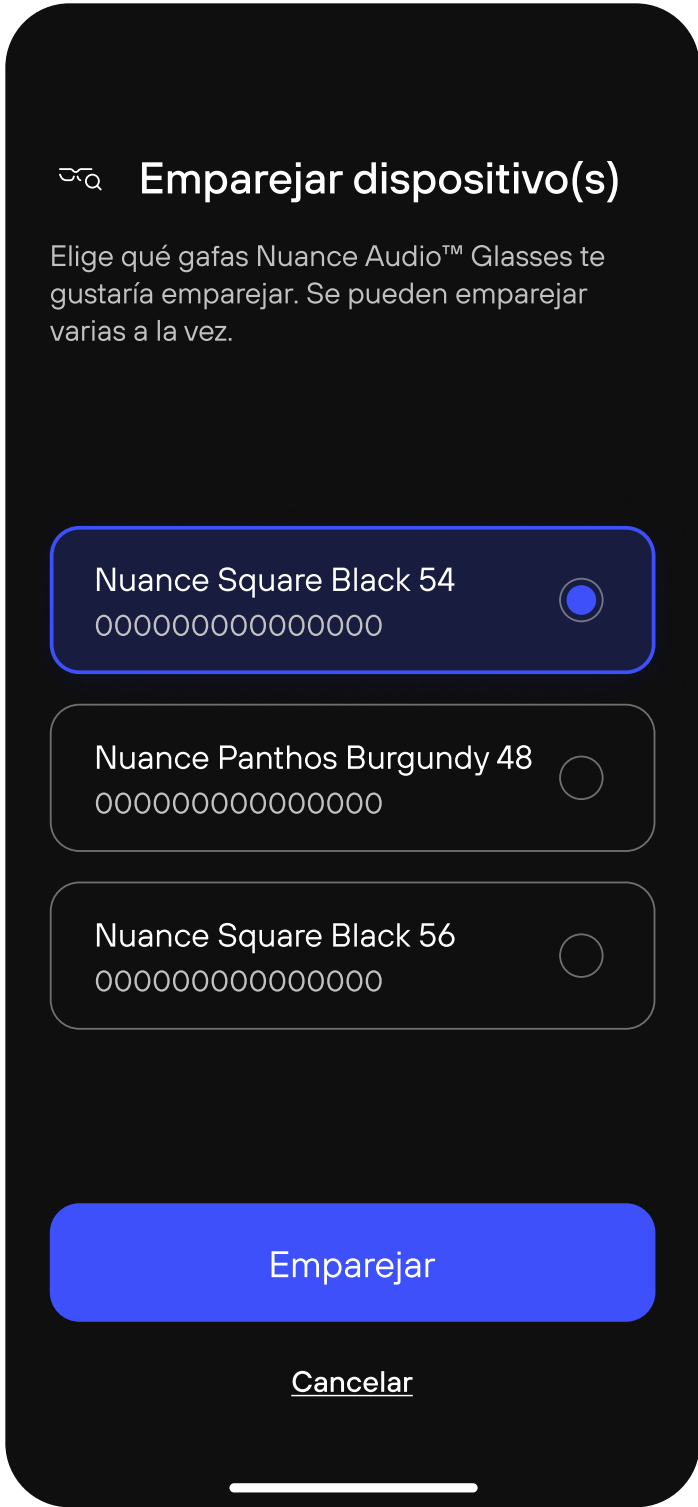

Selecciona las Nuance Audio Glasses de la lista. Presiona **Emparejar**

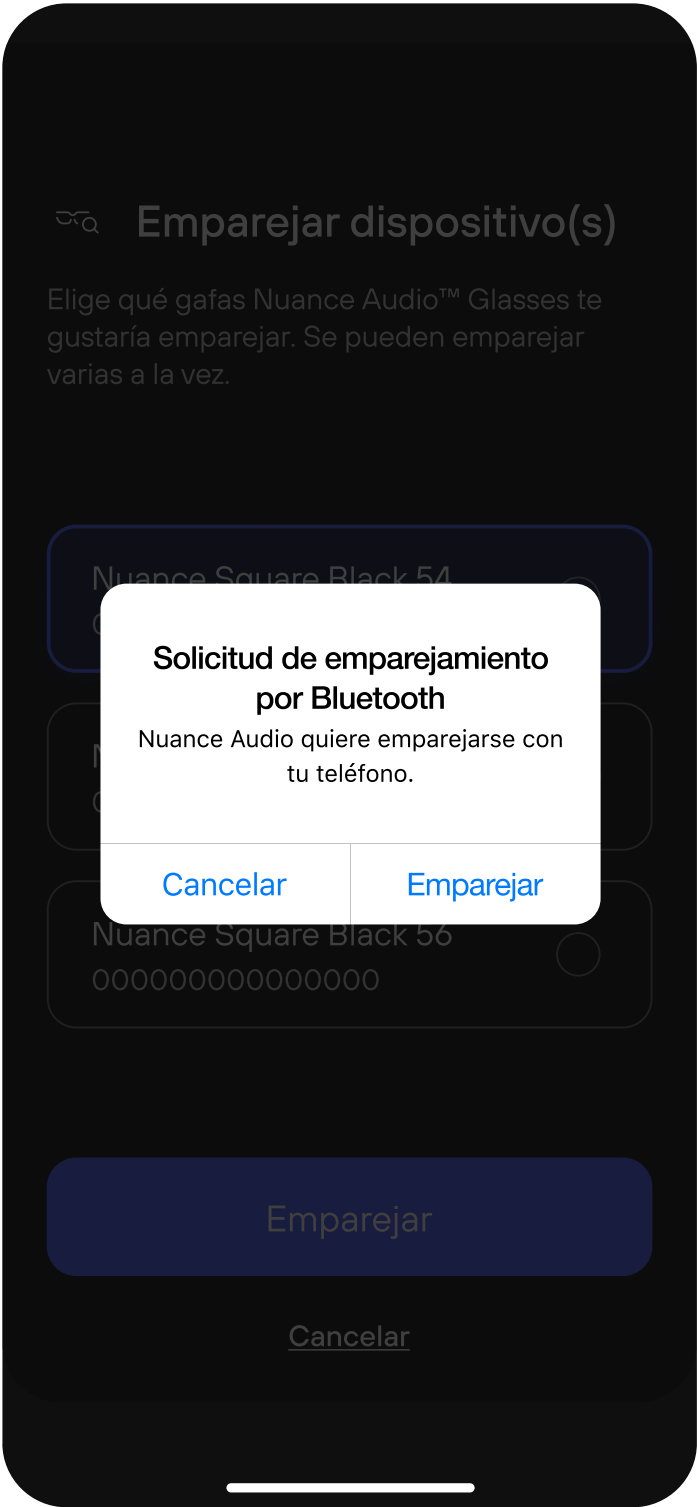

Acepta la solicitud para emparejar con tu iPhone. Presiona **Emparejar**

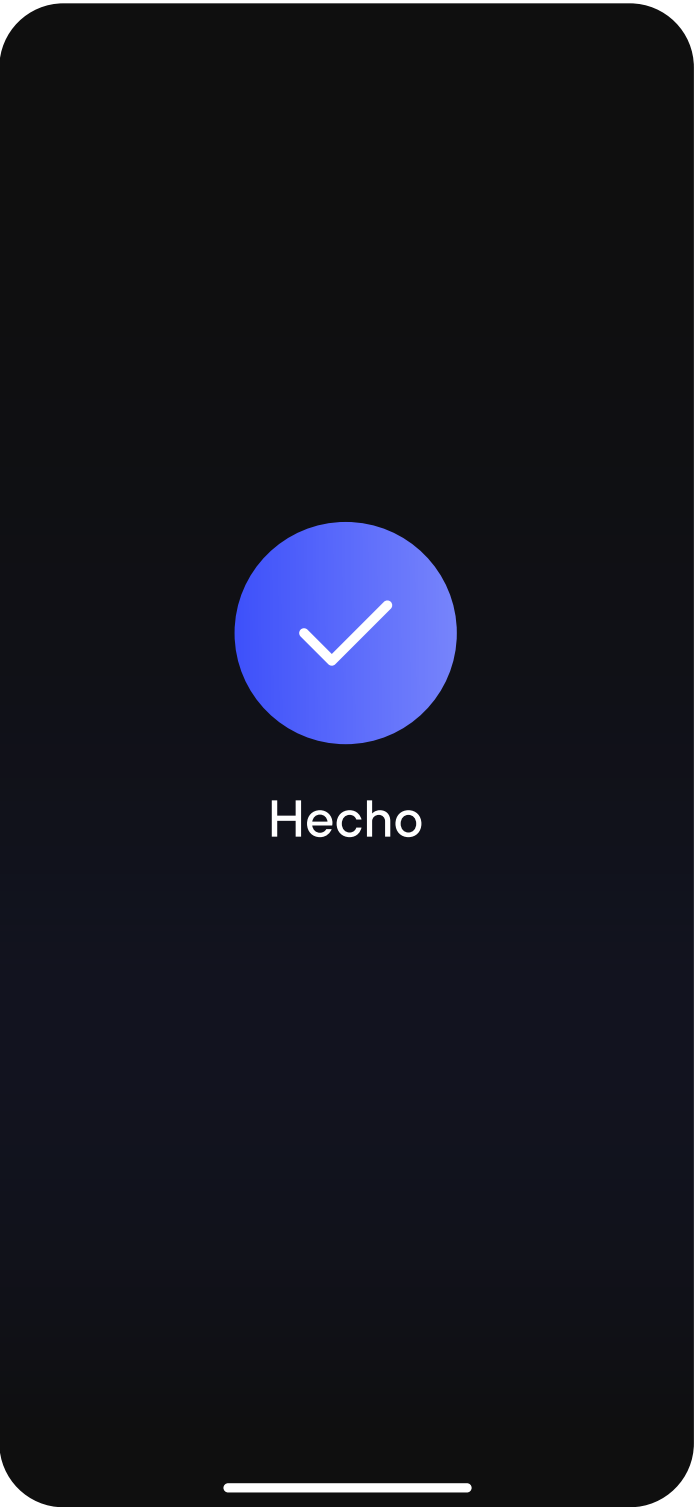

Emparejamiento completado.



¿Cómo sacar el máximo partido a la calibración?

La calibración solo tarda un minuto, pero te ayuda a sacarles el máximo partido a tus Nuance Audio Glasses.

Si tienes varias gafas, calibra cada una de ellas de forma individual.

Consejos para optimizar Calibración personal:

- Busca un lugar tranquilo en tu casa y evita espacios grandes o abiertos.
- Mantente lejos de áreas con muchas o grandes ventanas.
- Evita las habitaciones con techos altos donde el ruido de fondo puede ser impredecible.
- Colócate lejos de las esquinas y evita mirar de frente a los espejos.
- Lo ideal es que te quedes lo más cerca posible del centro de la habitación para obtener una calidad de sonido óptima.
- Consejo final: Tu dormitorio es a menudo la mejor opción.

Consejos para optimizar Calibración de la voz:

- Habla en voz alta, pero sin gritar.
- Proyecta tu voz como si estuvieras hablando con alguien al otro lado de la habitación.
- Minimiza las pausas tanto como sea posible.



Calibración personal




La calibración optimizará el rendimiento de audio de tus gafas según la forma de tu cabeza, incluyendo:

- Reducción de retroalimentación acústica
- Reducción de mi propia voz
-

Para empezar a calibrar, busca una habitación silenciosa.

Presiona **Calibra ahora**

Notas
La función de calibración se puede encontrar en la configuración. Recomendamos realizar la calibración cada 6 meses.

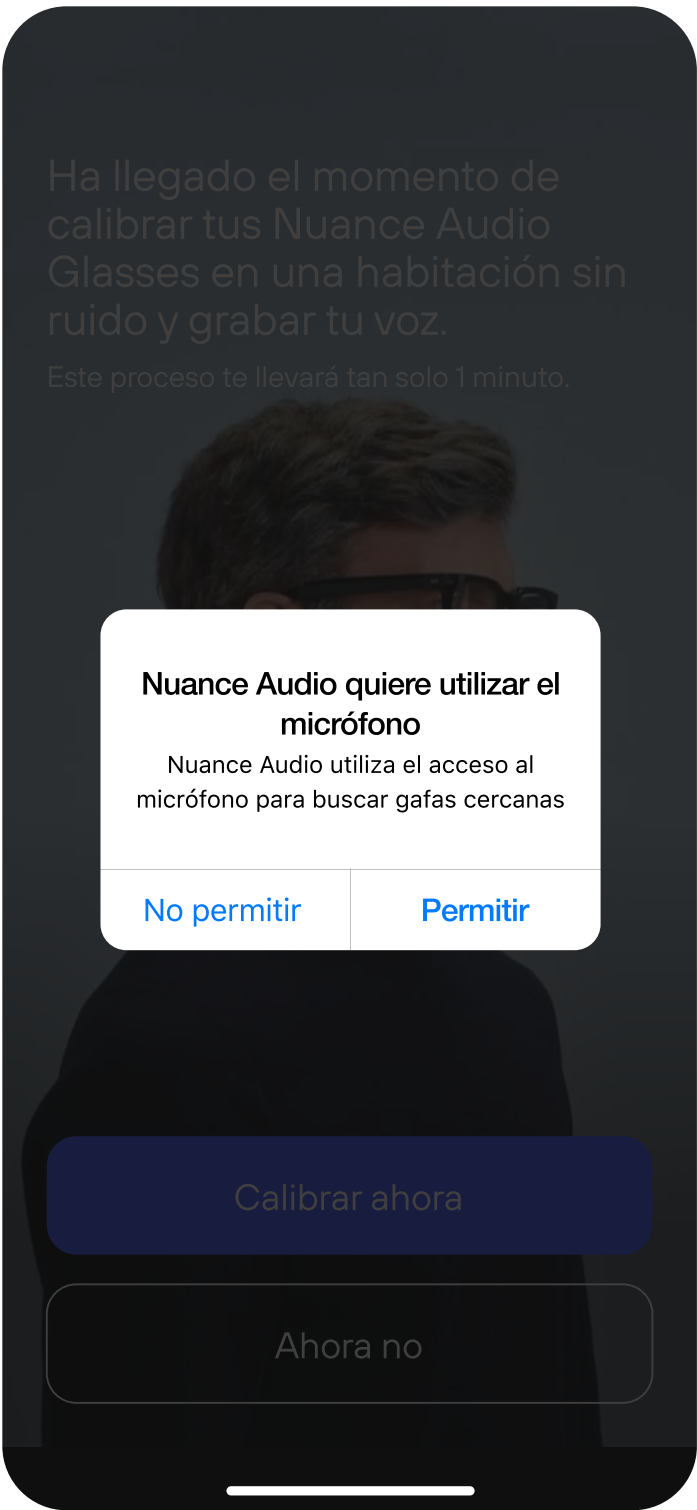

Permite que el micrófono de tu teléfono mida y valide los sonidos. Presiona **Permitir**




Un aviso emergente te recordará que **debes llevar puestas tus Nuance Audio Glasses** durante todo el proceso.




Calibración personal



Paso 1.1
Medición del ruido ambiental.
Mantén tus gafas puestas y toca **Reproducir el audio de muestra**

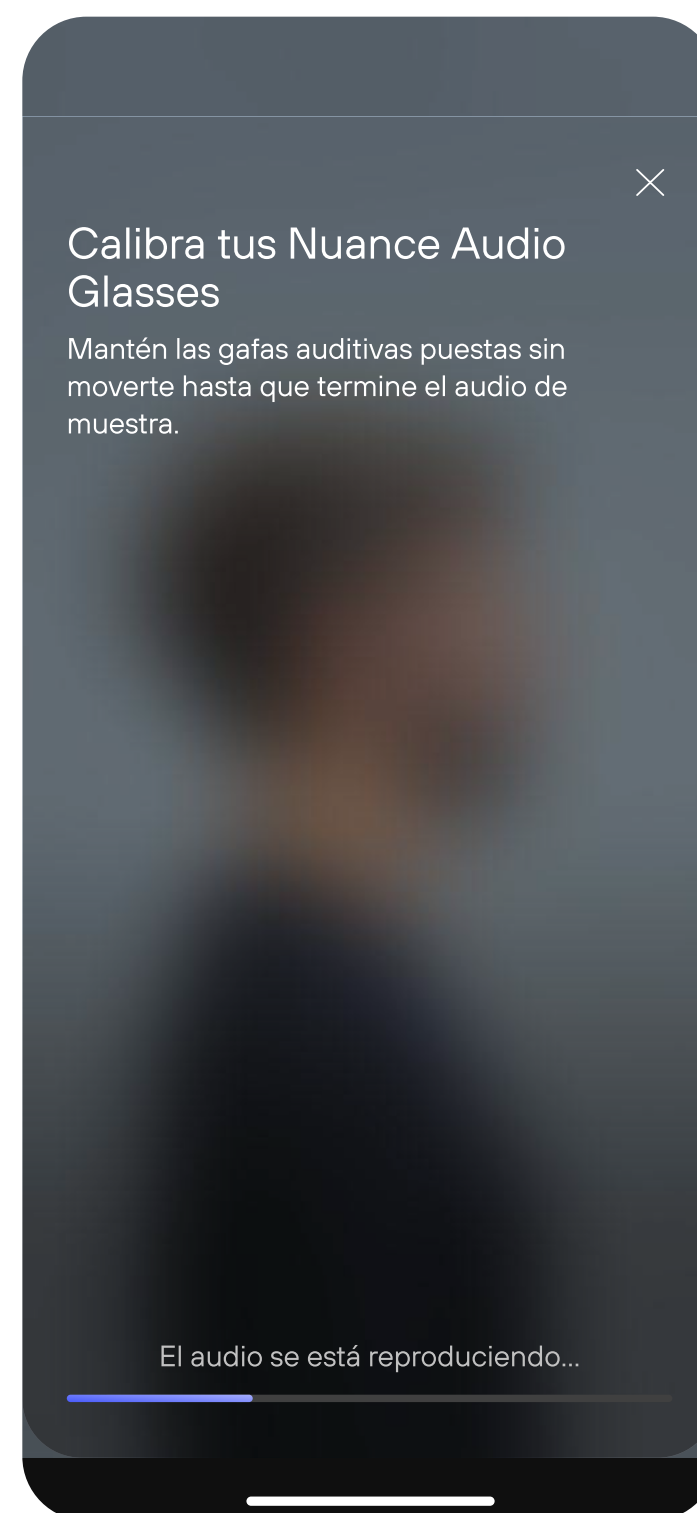

Paso 1.2
No te muevas y no te quites las gafas, **espera hasta el final del audio de muestra.**

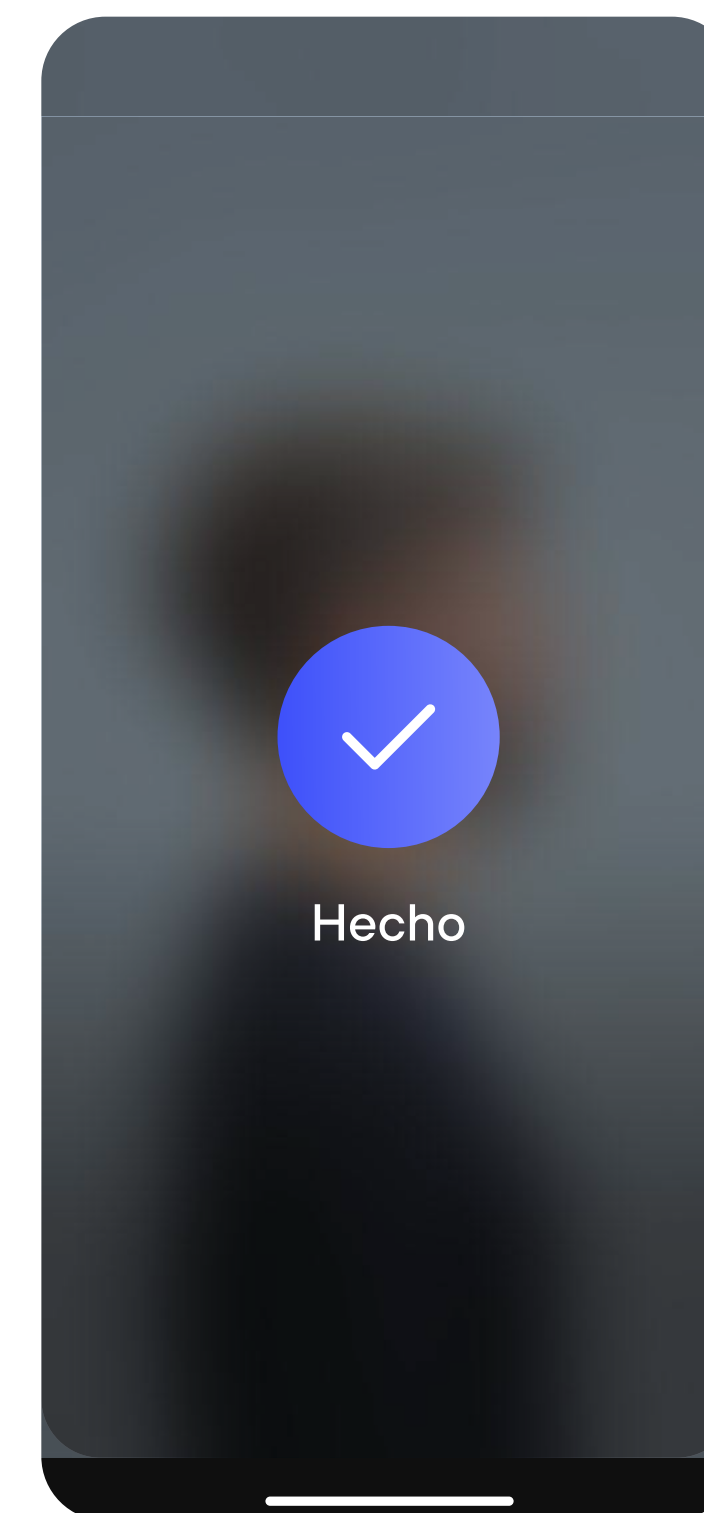


Paso 1.3
Medición del ruido ambiental completada.




Calibración de la voz



Paso 2. 1
Calibración de mi propia VOZ.
No te muevas y no te quites las gafas.
Presiona **Iniciar la grabación**

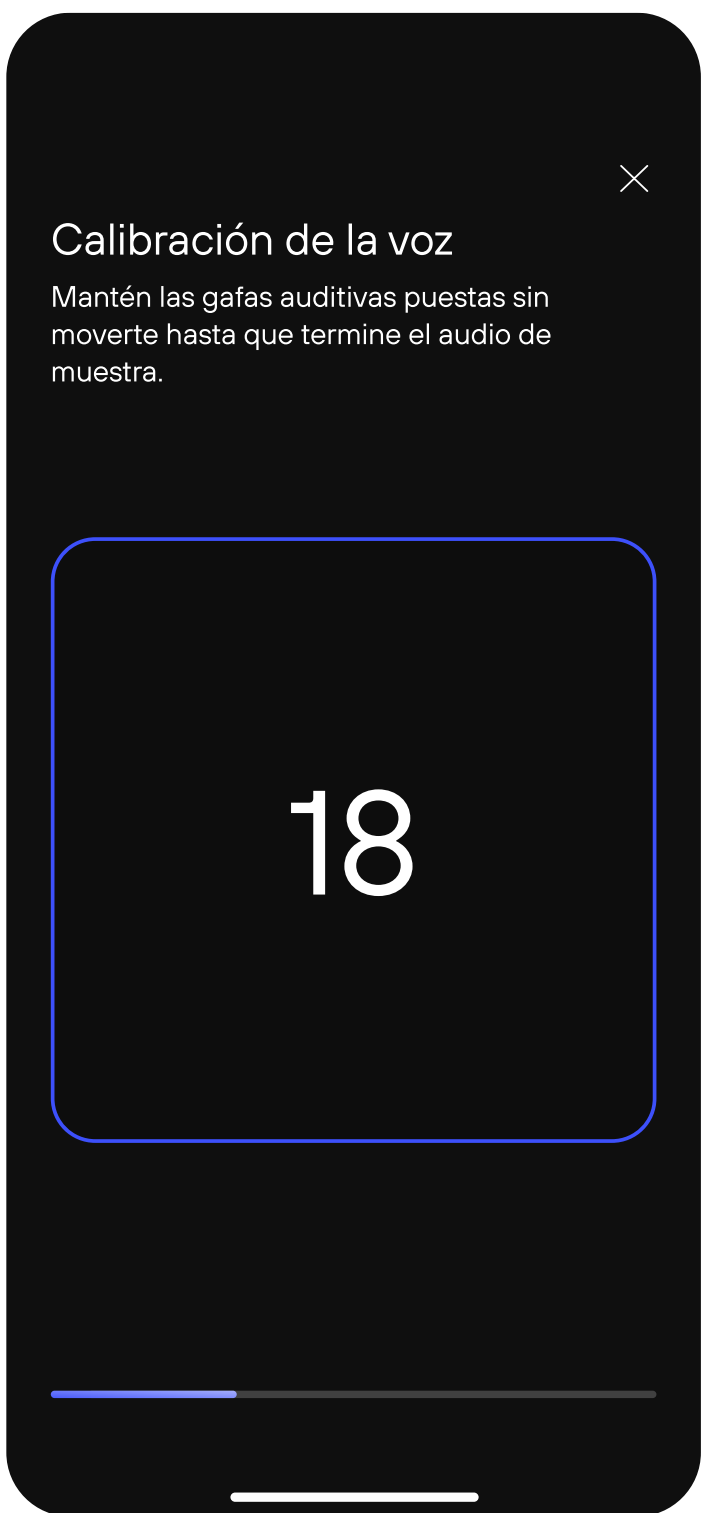

Paso 2. 2
Cuenta en voz alta hasta que la barra de progreso llegue al final.

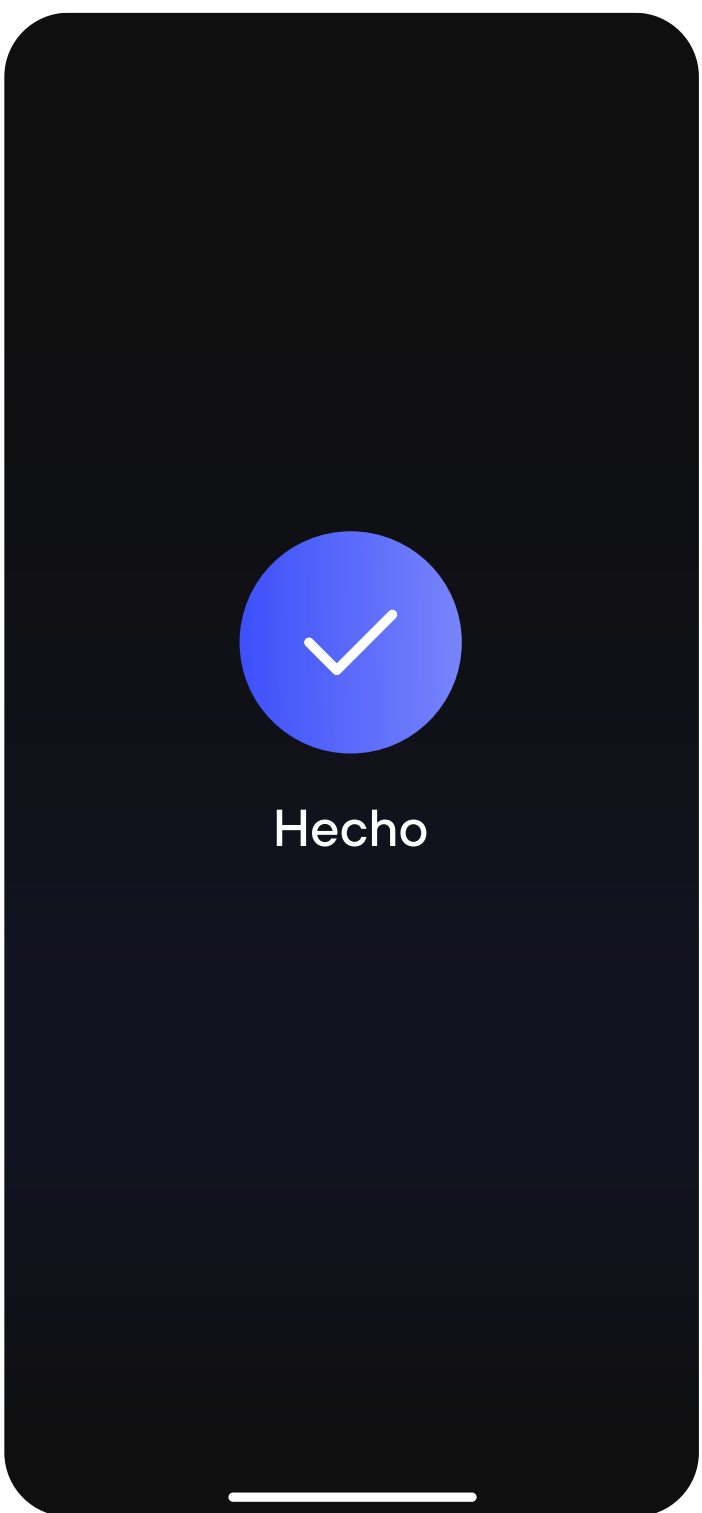

Paso 2. 2
Calibración personal completada correctamente.



Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,
sigue este enlace

[➤ Ver instrucciones de uso](#)