

Configuraciones de audición: Volumen de las gafas




¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?

Puedes ajustar los niveles de volumen de las Nuance Audio Glasses de varias maneras.

Con Nuance Audio Glasses

Puedes pulsar brevemente el botón en la varilla derecha para ajustar el nivel del volumen. Cuando escuches un aviso de audio, el nivel se habrá cambiado.

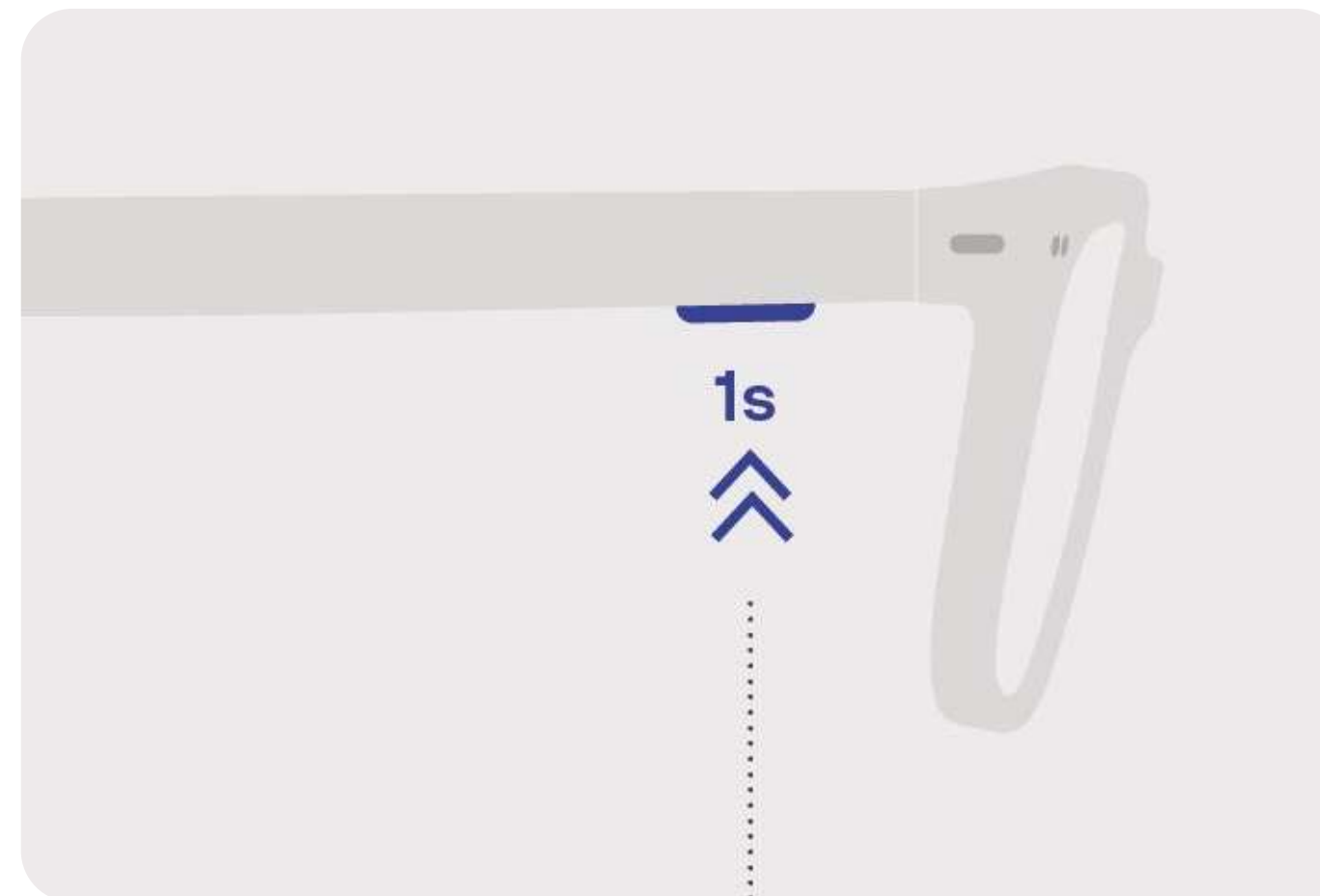

Con Remote Control

Puedes utilizar los niveles de volumen específicos pulsando los botones + y - para aumentar o disminuir el volumen.






¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?

Con Nuance Audio App






Otra forma es utilizar el control deslizante de volumen que verás en la pantalla de inicio de la aplicación para ajustar el volumen a tu gusto.

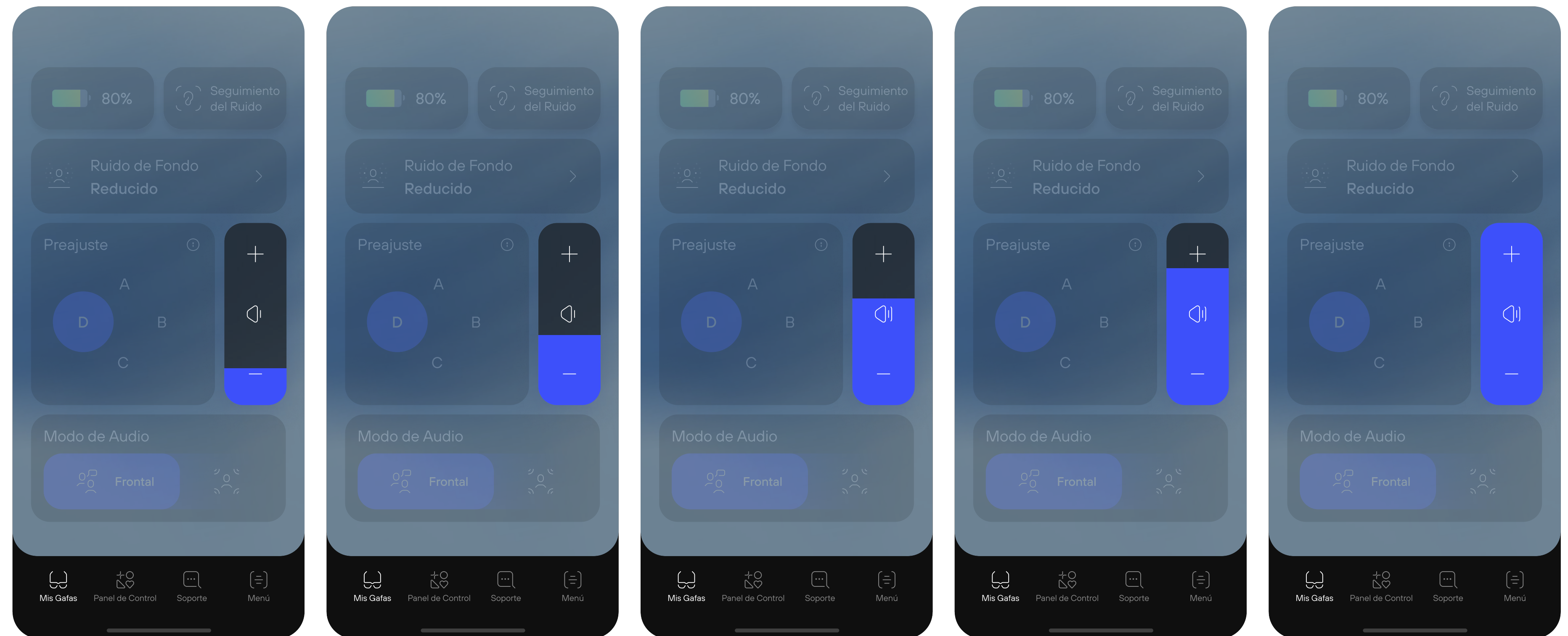



¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?

Con Nuance Audio App
Además, en la sección Configuración de la aplicación, puedes seleccionar y configurar cómodamente tus tres rangos de volumen preferidos para un acceso fácil.

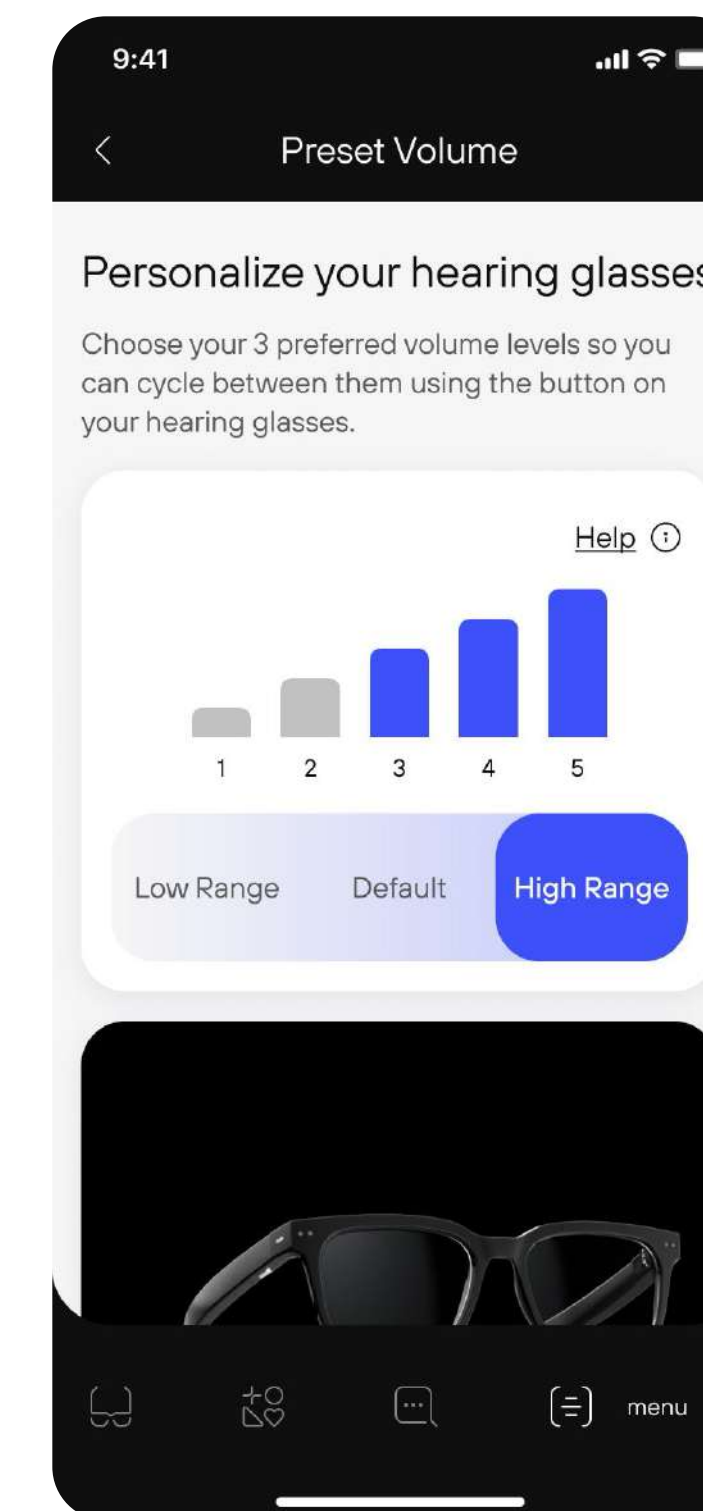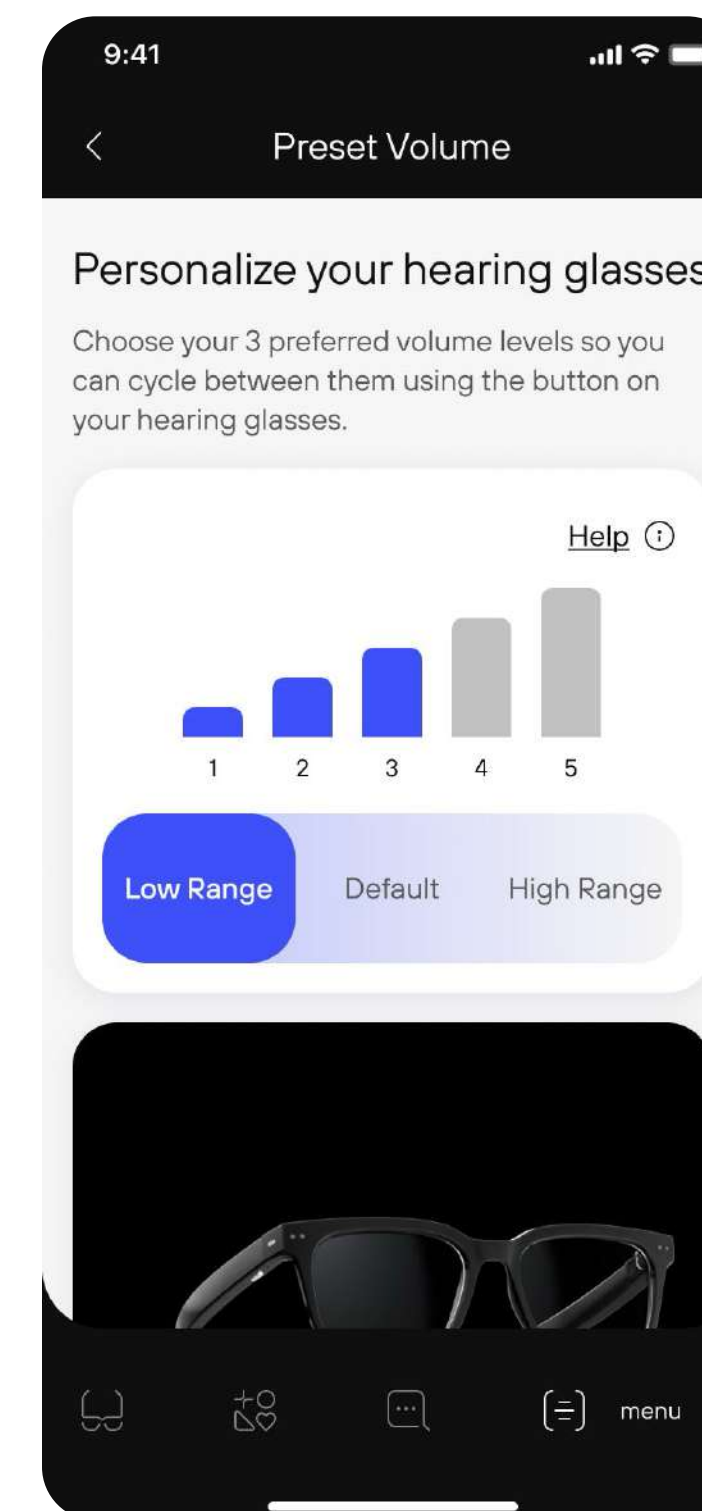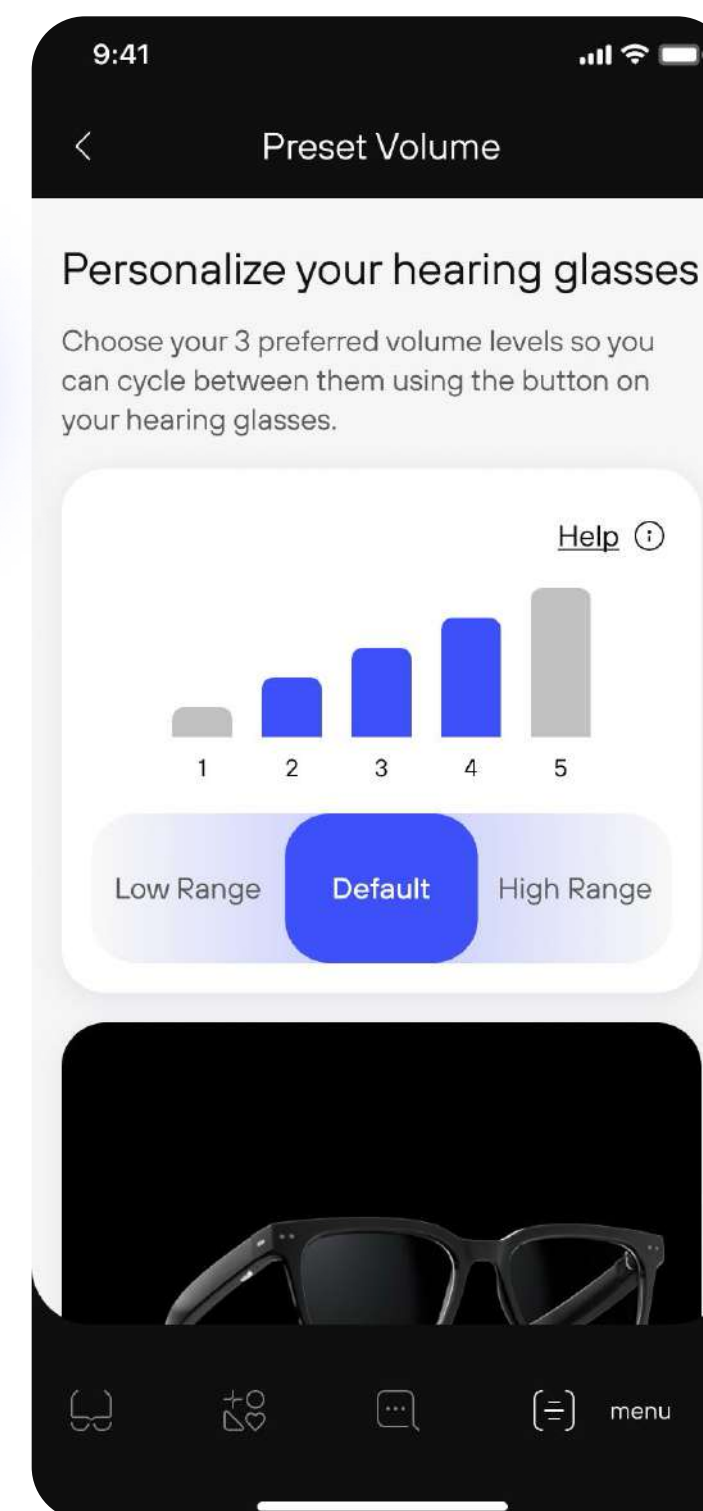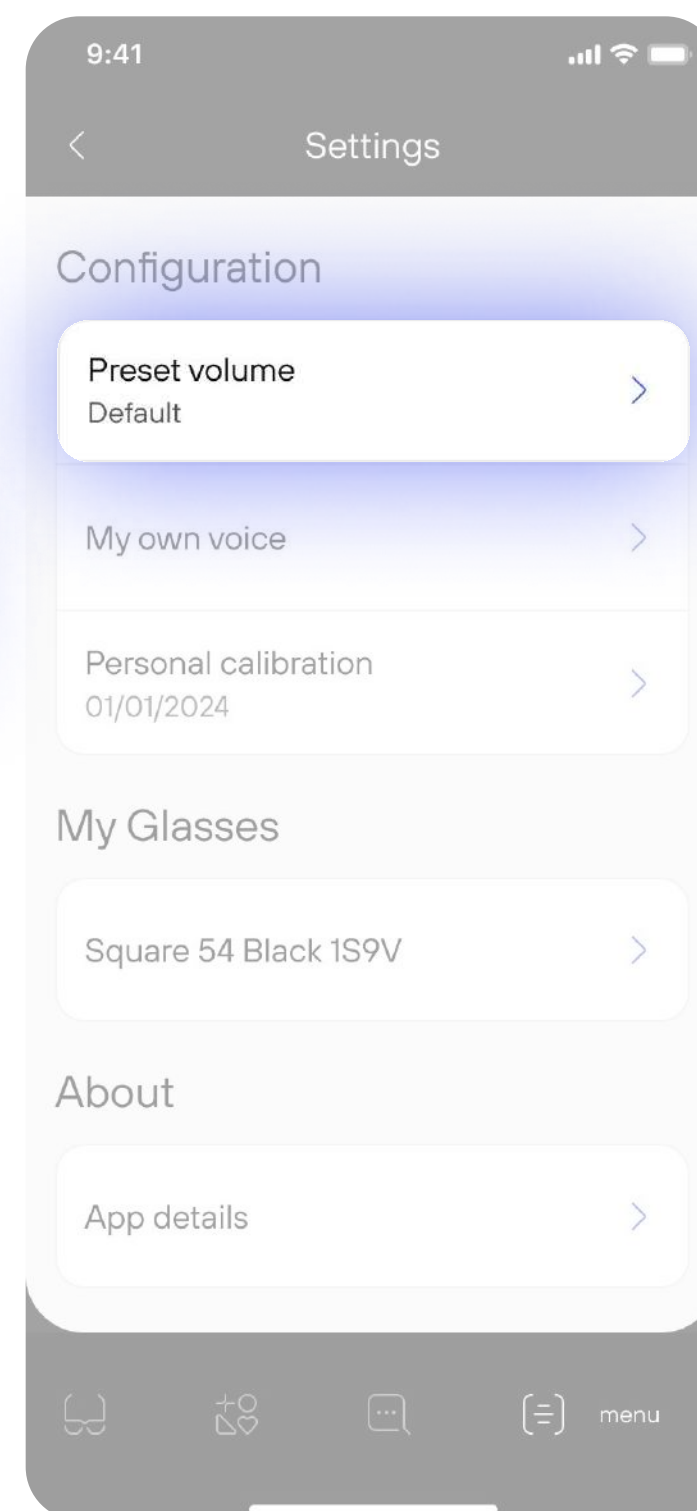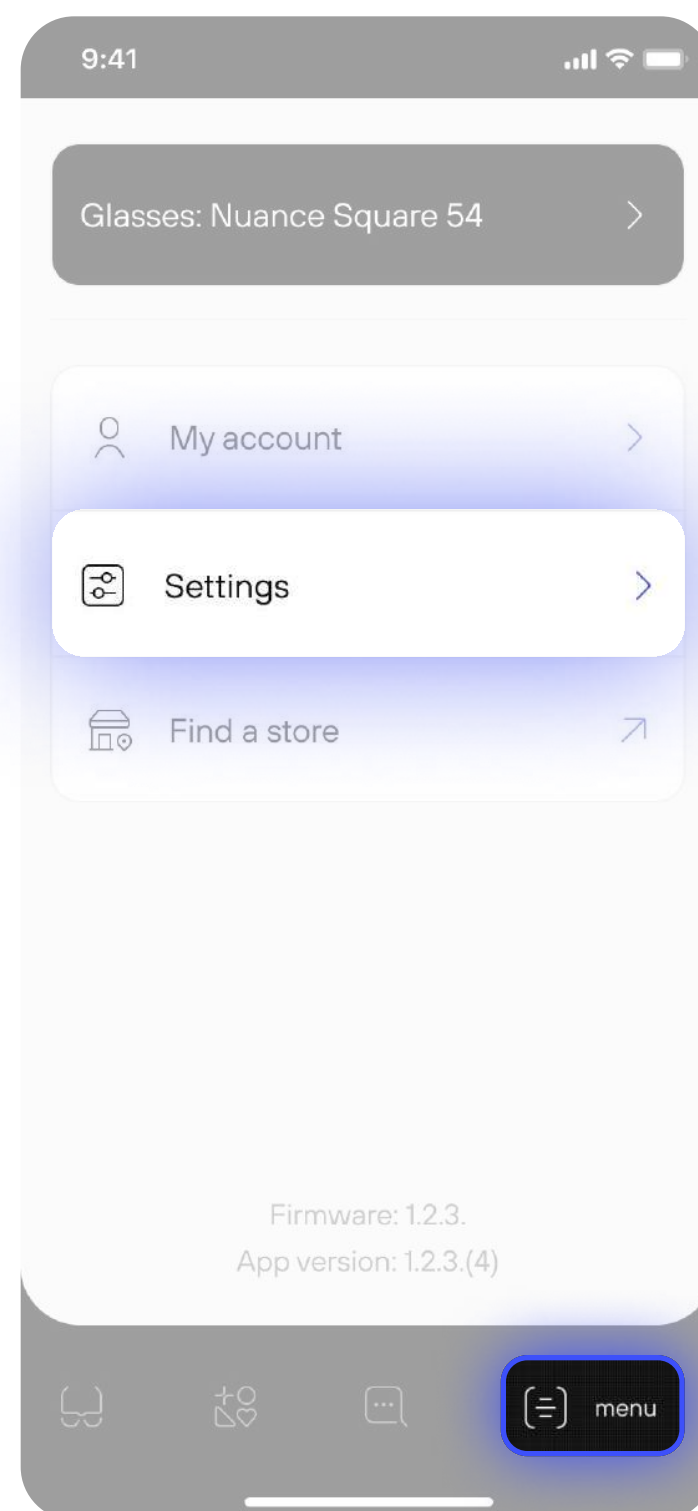



Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,
sigue este enlace

[↗ Ver instrucciones de uso](#)