


# Configuraciones de audición: Mi propia voz



## ¿Cómo calibras tu propia voz?


Nuance Audio te permite calibrar tu propia voz para que puedas decidir con qué claridad te gustaría oírla y así disfrutar de una mayor comodidad.

## ¿Cómo calibras tu propia voz?

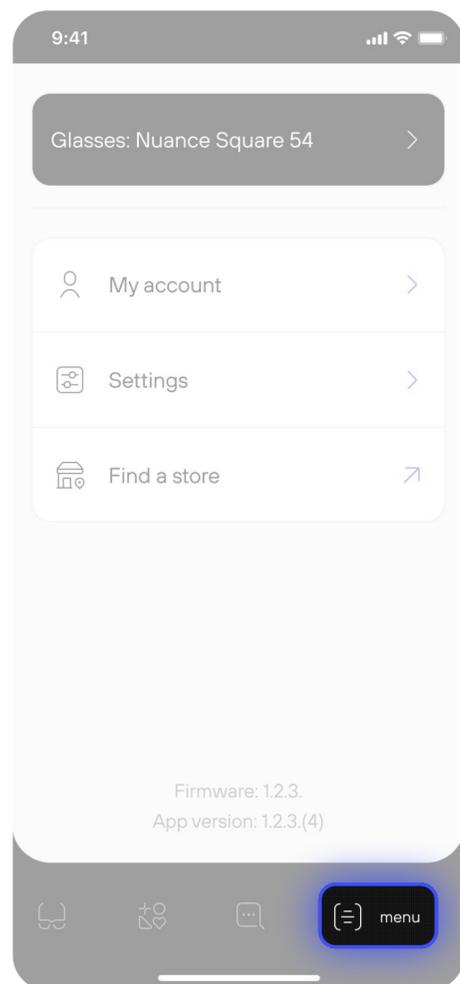


Dentro del panel de Nuance Audio App, toca Menú (esquina inferior derecha en la barra de navegación).

En el menú, toca **Configuración**

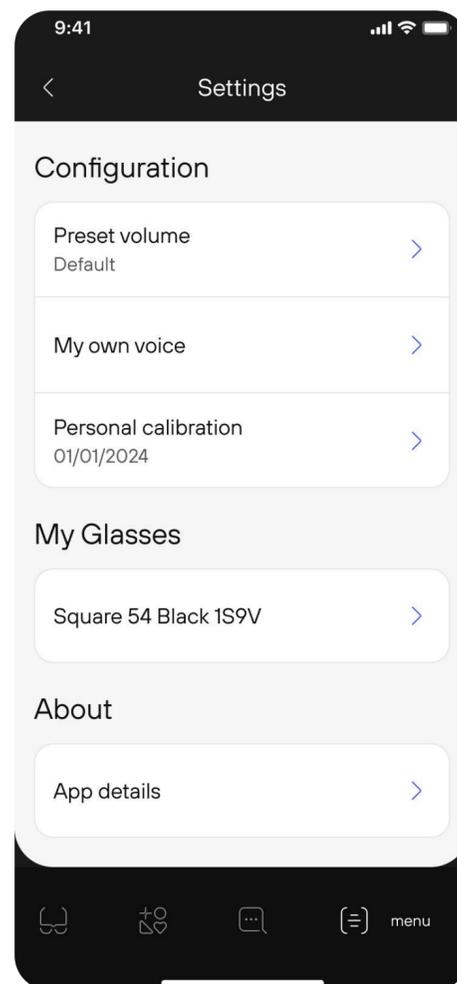

En Configuración, selecciona **Mi propia voz**

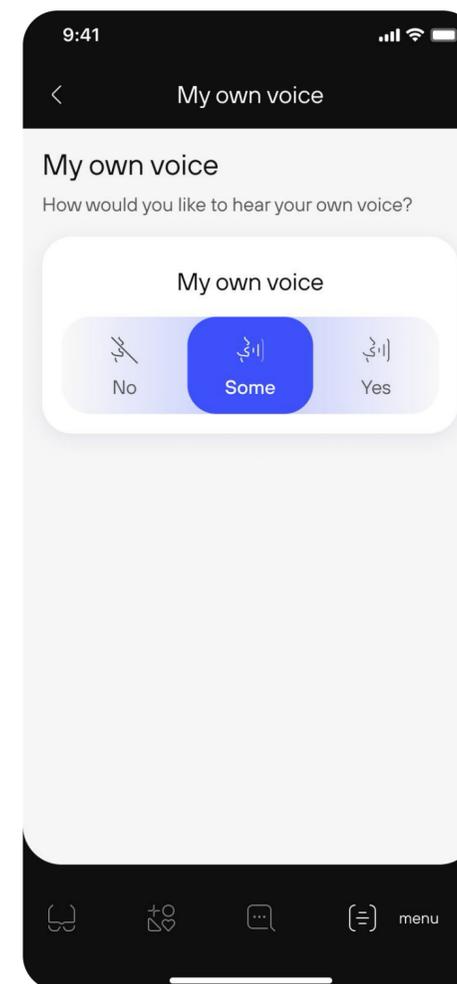

Ahora puedes ajustar libremente **tus niveles de amplificación** a lo que mejor se adapte a ti y a tu entorno.

### Notas

Ten en cuenta que configurar la **calibración personal también es importante** para optimizar tu experiencia general, ya que garantiza un sonido más natural y claro para tu propia voz, así como para otras configuraciones de audio.



Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,  
sigue este enlace

[➤ Ver instrucciones de uso](#)