


# Cómo cargar



## ¿Todo listo para cargar tus Nuance Audio Glasses?


### Paso 1

Primero conecta tu Charging Pad utilizando un cargador USB-C estándar o una fuente de alimentación USB-C (mínimo 5V) para conectar el Charging Pad suministrado y el cable USB-C.

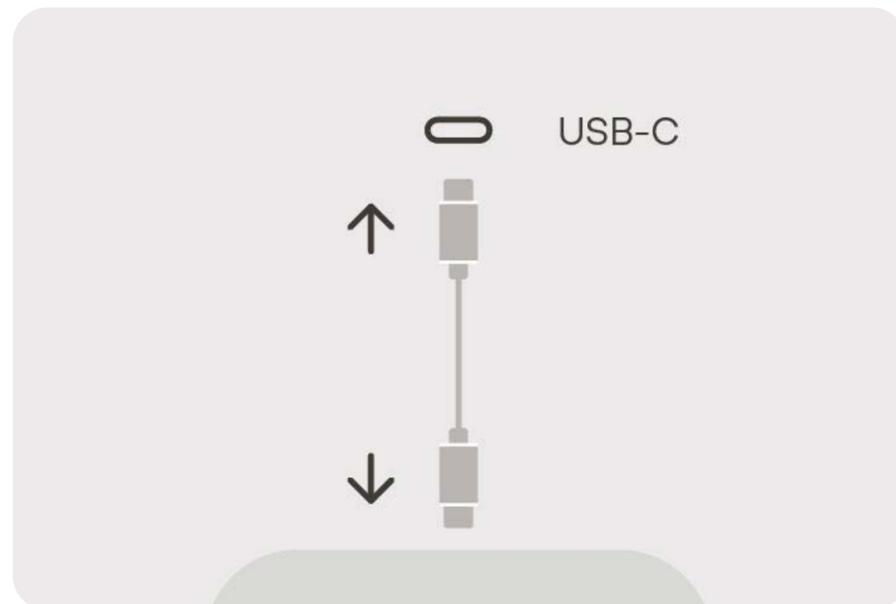

### Paso 2

Luego, cierra las Nuance Audio Glasses y colócalas directamente sobre el Charging Pad exactamente como se muestra. Los imanes dentro del Charging Pad te ayudarán a posicionarlas correctamente.

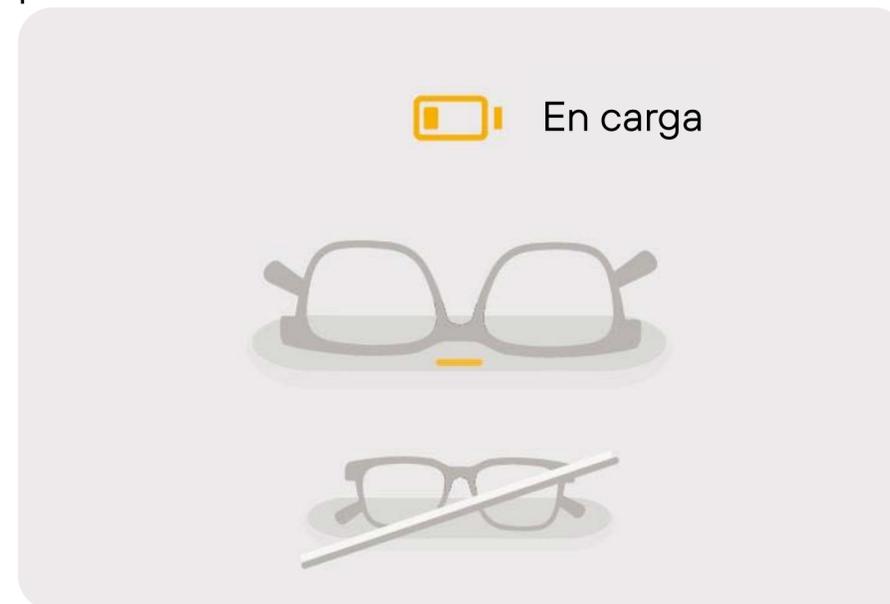



## ¿Cómo saber cuándo están cargadas las gafas?


### Led naranja

La carga está en curso.



### Led verde

Las gafas están completamente cargadas (al menos 96%).

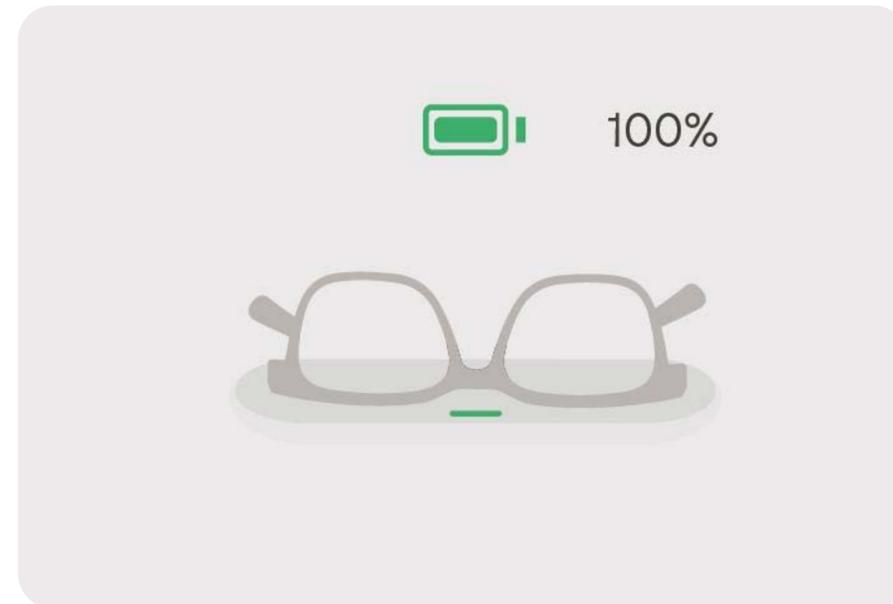




## Indicadores del nivel de batería

Cuando cojas tus gafas, tanto el led del Charging Pad como el led de la montura indicarán el nivel de batería durante unos segundos.

### Led rojo

El nivel de batería es inferior al 20%.

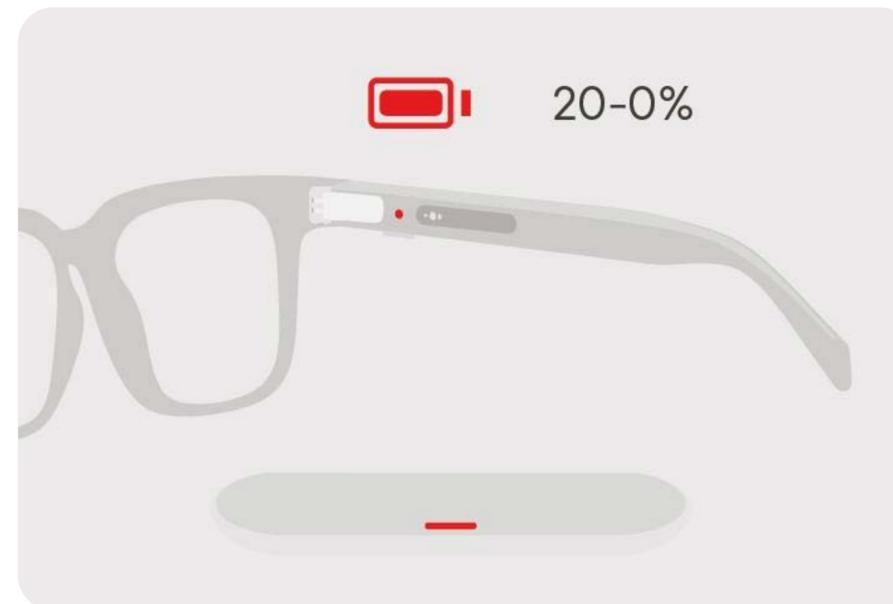

### Led verde

El nivel de batería es superior al 20%.





Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,  
sigue este enlace

[↗ Ver instrucciones de uso](#)