

Consejos de mantenimiento



¿Las Nuance Audio Glasses son resistentes al agua?

El diseño de las gafas Nuance Audio™ Glasses cuenta con un grado de protección IPX4, incluidas las áreas de los micrófonos. Dicha clasificación ofrece protección contra salpicaduras de agua, por lo que se pueden usar durante entrenamientos o cuando cae llovizna. Aunque no sean sumergibles, cuentan con protección contra salpicaduras menores.





¿Pueden el sudor, el maquillaje u otros productos químicos comunes dañar las gafas Nuance Audio?

El diseño de las gafas Nuance Audio™ Glasses es resistente a productos químicos comunes como el desinfectante de manos, limpiadores, jabón de manos, gomina y protector solar.





¿Cómo debo limpiar las lentes y las monturas?

Limpieza diaria:

Utiliza un paño humedecido y jabón neutro (rociálo en el paño, no directamente en las lentes). Evita todo tipo de aerosoles, disolventes, productos químicos o soluciones de limpieza que contengan alcohol o amoníaco. No limpies las gafas bajo el grifo ni utilices ninguna otra herramienta de limpieza (como un cepillo para audífonos, un palillo o aire a presión).

Limpieza profunda:

Para limpiar las lentes, utiliza un spray para lentes y asegúrate de rociarlo sobre el paño y no directamente sobre las lentes. Limpia suavemente las partes exteriores de las gafas, incluidos los 6 micrófonos y 4 altavoces.

Protección:

Asegúrate de guardar tus gafas en su estuche específico cuando no las estés usando.

En caso de contacto con agua salada, agua de piscina u otros productos químicos como cosméticos, laca para el cabello, protector solar y repelentes de insectos, te recomendamos limpiar inmediatamente tus gafas con un paño húmedo no abrasivo.



Para obtener las instrucciones de uso más actualizadas,
sigue este enlace

[➤ Ver instrucciones de uso](#)