



Mise à jour du logiciel



Commencer la mise à jour du logiciel


C'est le logiciel spécialisé intégré dans vos lunettes Nuance Audio qui contrôle leur fonctionnement.

Les mises à jour du logiciel améliorent la performance, ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou corrigent des bugs dans l'appareil.

Pour que vos lunettes Nuance Audio fonctionnent de manière optimale et restent en bon état, il est important de mettre régulièrement à jour le logiciel.


Vérifiez le niveau de batterie des lunettes Nuance Audio :

Assurez-vous que le niveau de batterie de vos lunettes est supérieur à 30 %. Les mises à jour du logiciel ne peuvent pas être effectuées si la batterie est trop basse.

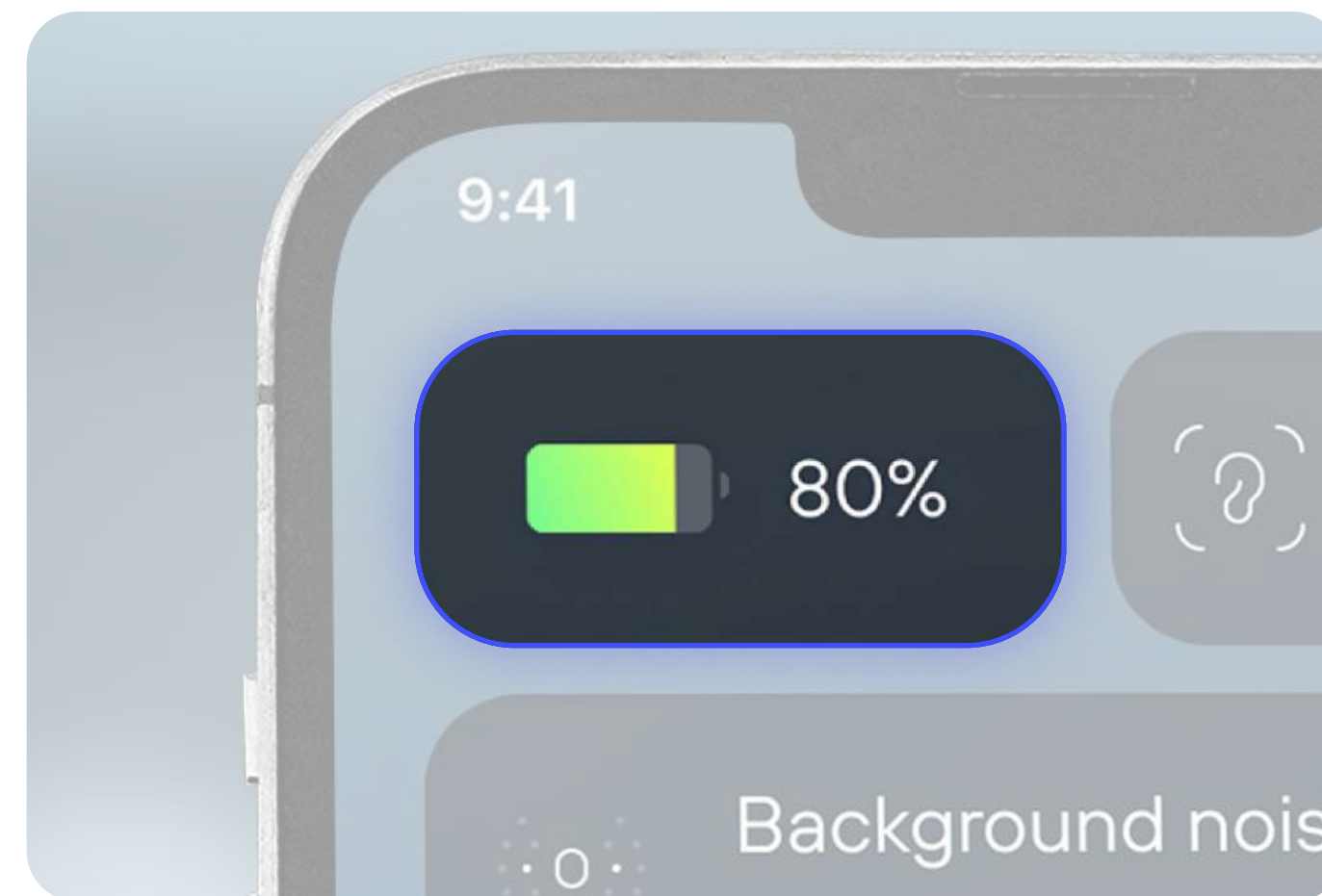

Vérifiez la connexion de l'appareil :


Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi stable ou à un réseau de données mobiles pour d'éventuelles mises à jour.

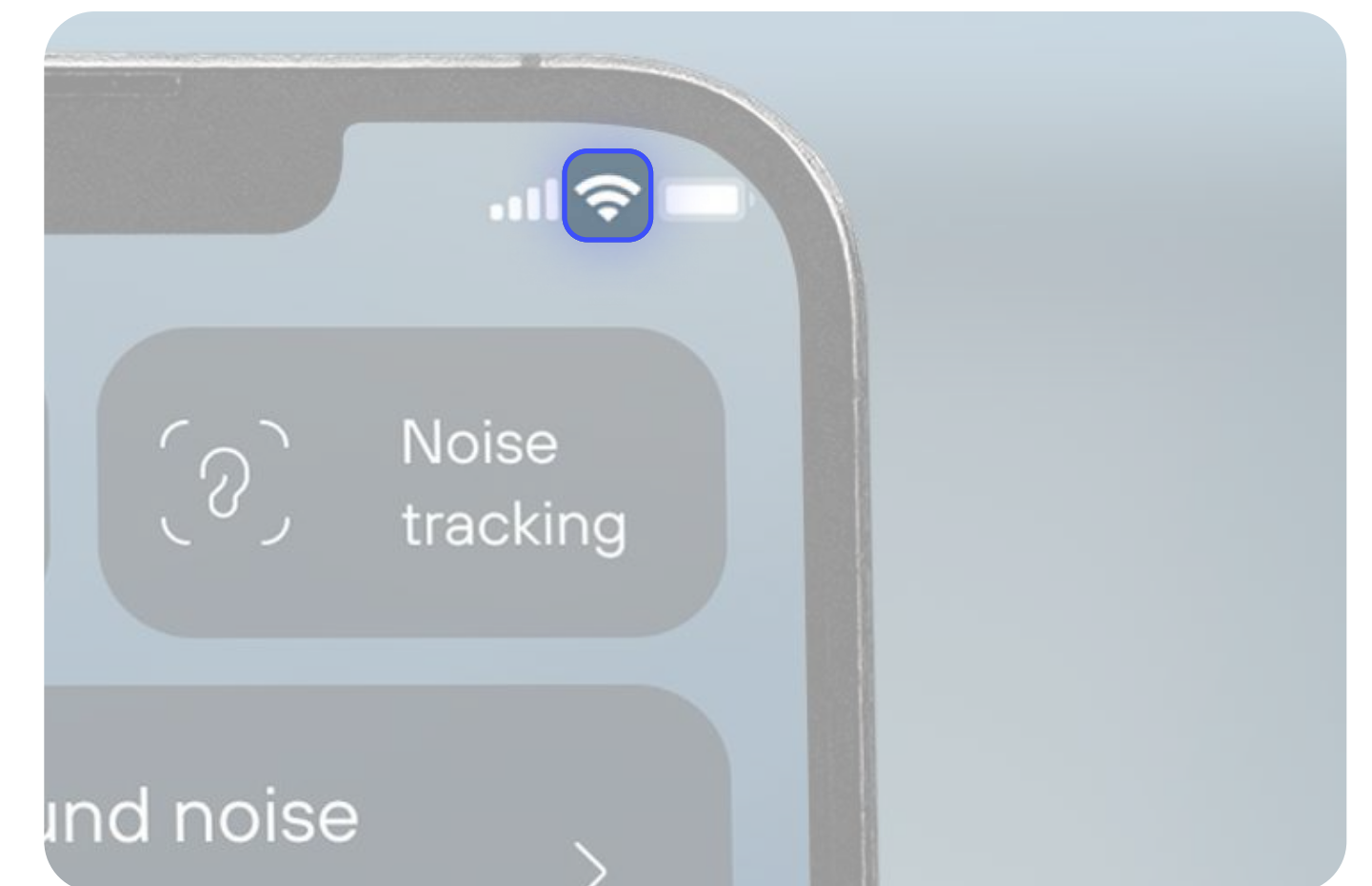




Comment effectuer la mise à jour du logiciel ?

Une fois que vous avez vérifié les niveaux de batterie et la connexion de l'appareil, vous pouvez mettre à jour le logiciel en suivant ces étapes :

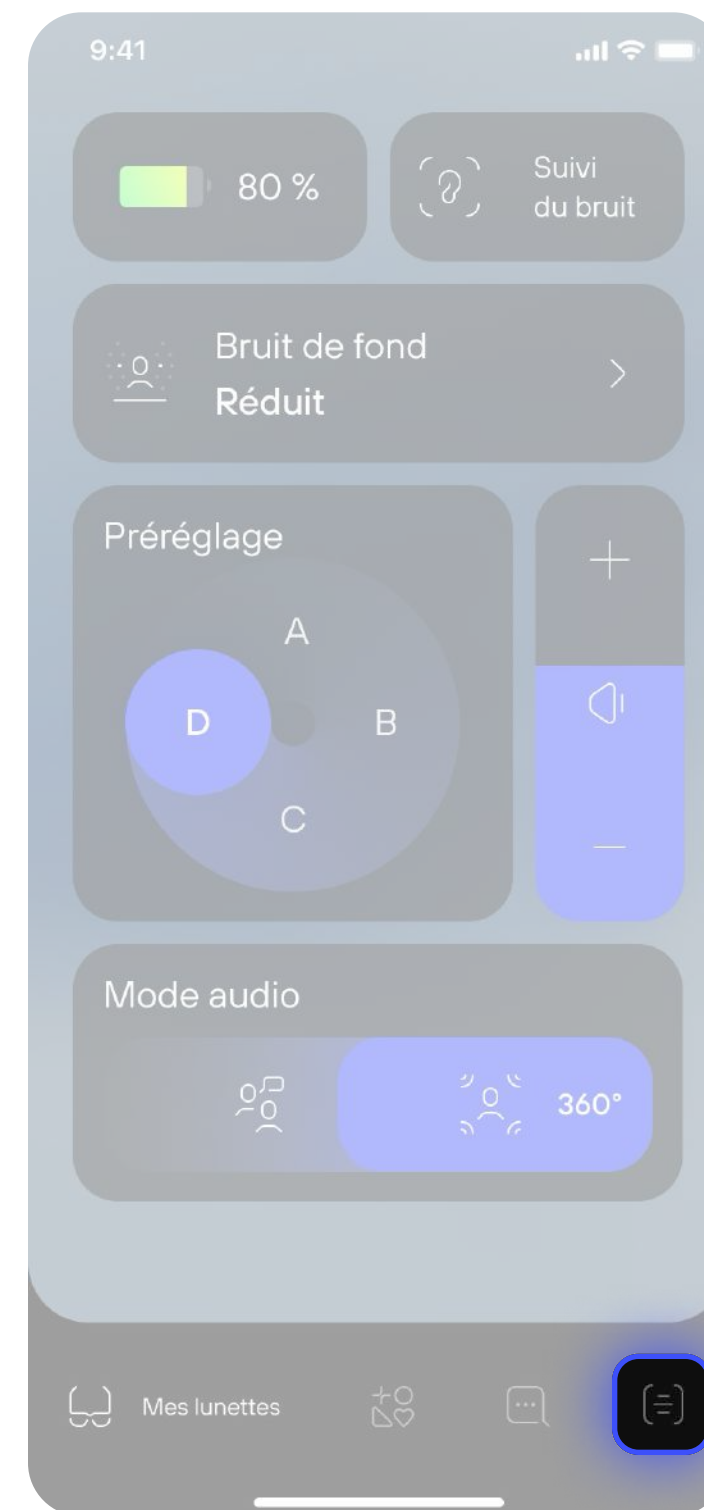

Étape 1
Ouvrez l'application Nuance Audio sur votre téléphone. Cliquez ensuite sur l'**icône Menu** située dans le coin inférieur droit de la barre de navigation de la page d'accueil.

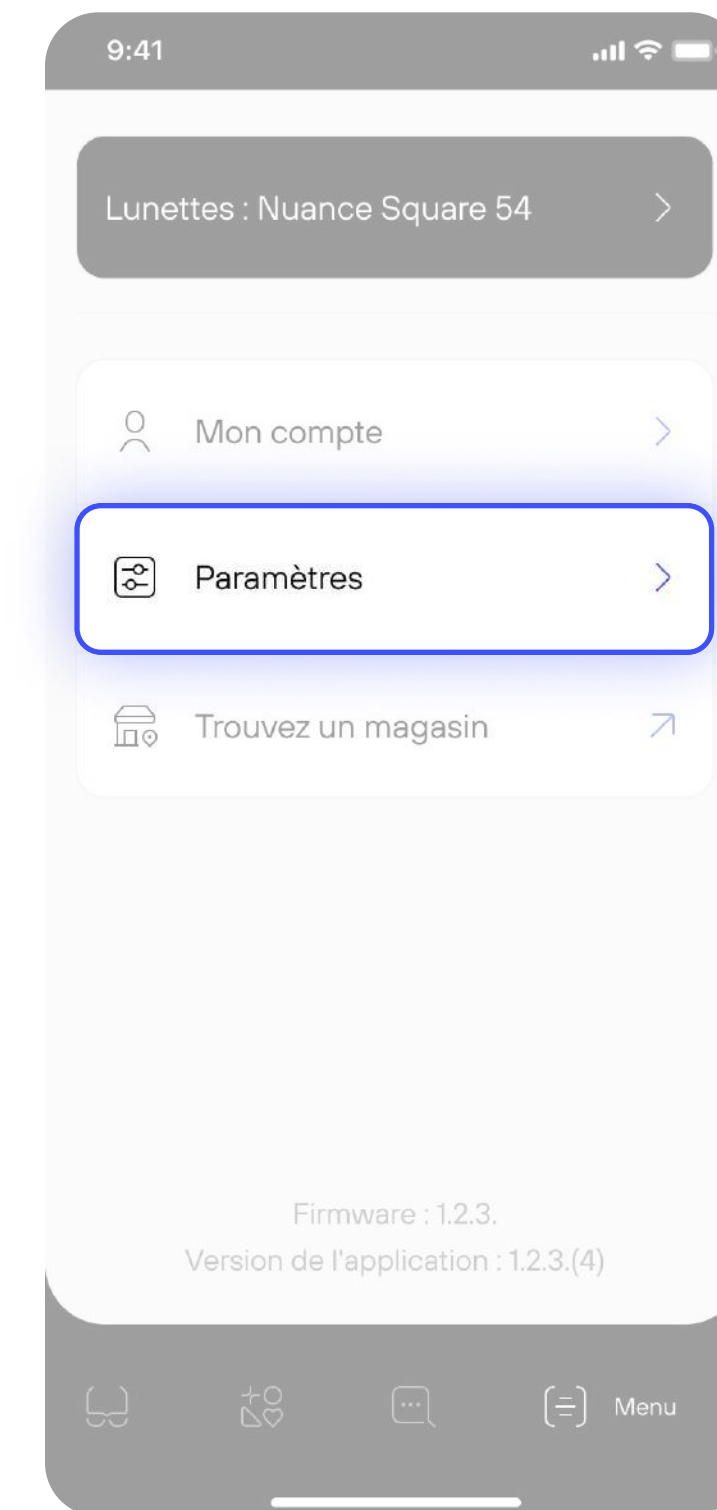


Étape 2
Cliquez sur **Paramètres**.



Comment effectuer la mise à jour du logiciel ?



Étape 3
Appuyez sur le nom des lunettes affiché juste en dessous de la section **Mes Lunettes** et vérifiez les mises à jour du logiciel.

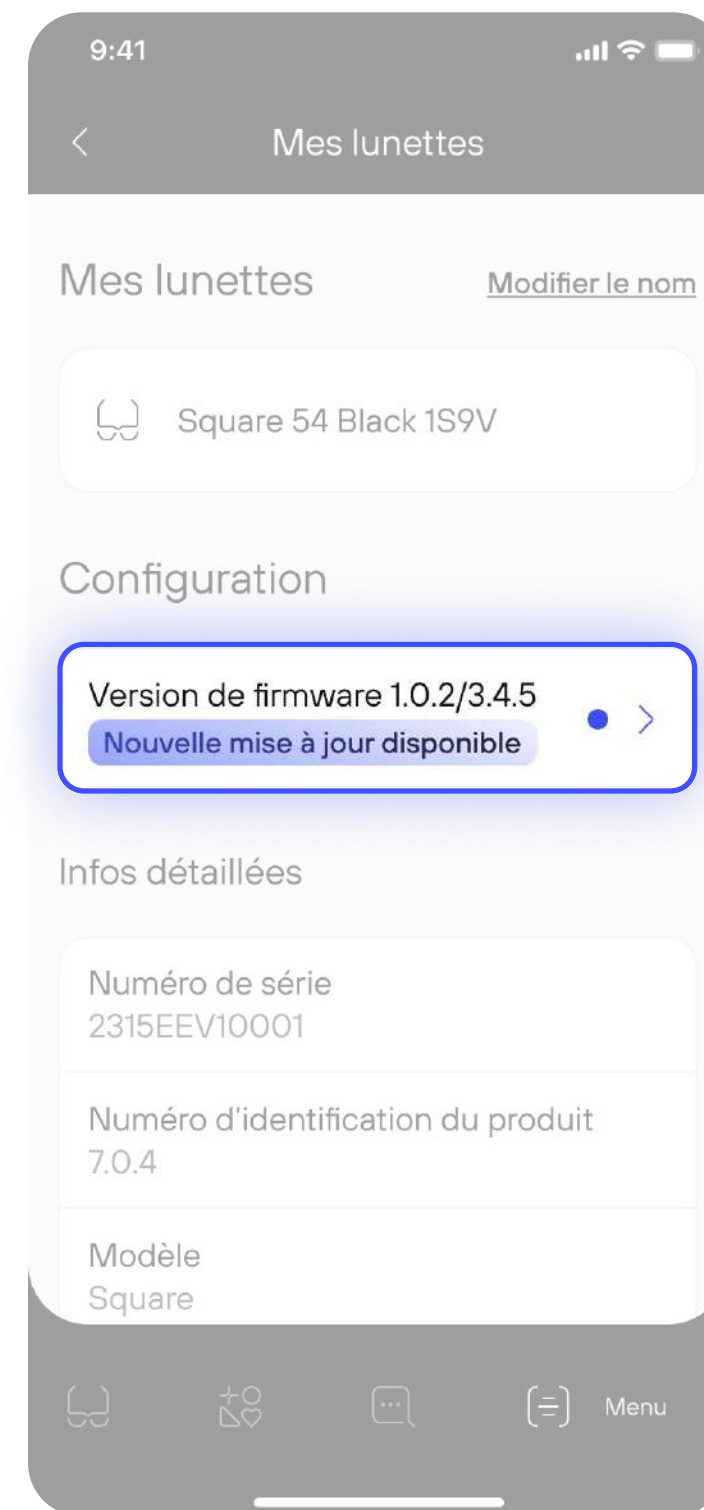

Étape 4
Dans la section Mes lunettes, vous verrez l'état actuel du logiciel et les mises à jour disponibles. Pour commencer la mise à jour du logiciel, cliquez **sur l'onglet Version du logiciel**.

Remarques

L'Application vous notifiera sur la page d'accueil si une nouvelle version du logiciel est disponible.



Étape 5
Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions dans l'application Nuance Audio pour effectuer la mise à jour du logiciel en toute sécurité.




Comment effectuer la mise à jour du logiciel

Étape 6

La mise à jour du logiciel sera **téléchargée sur l'application** puis **téléchargée sur vos lunettes Nuance Audio**.

Une fois le processus terminé, vos lunettes redémarreront automatiquement et vous serez redirigé automatiquement à la page d'accueil de l'Application.

Si vous rencontrez des difficultés lors du processus de mise à jour, vous pouvez contacter notre [Centre de support](#) pour obtenir de l'aide.

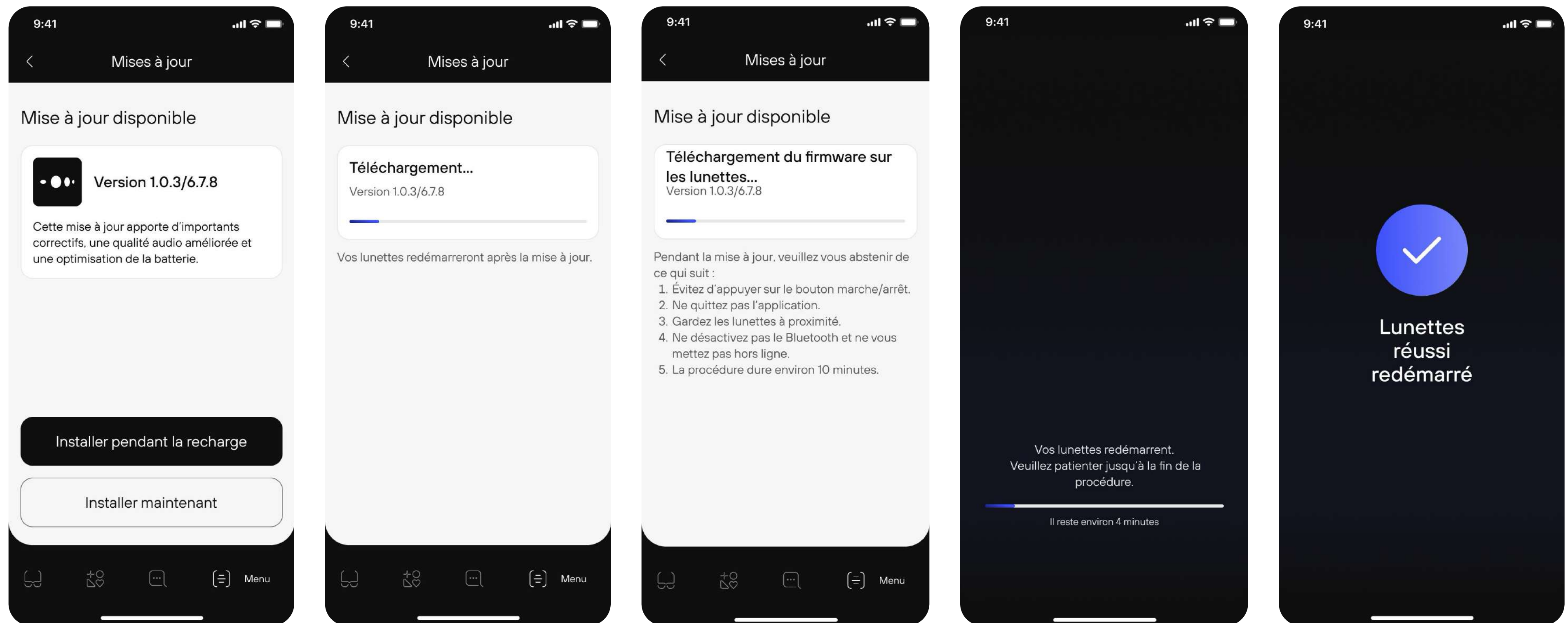



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)