



Débuter avec les lunettes Nuance Audio

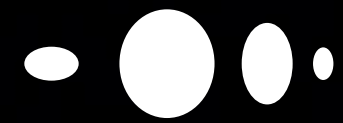

Débuter avec les lunettes Nuance Audio



Débuter avec les lunettes Nuance Audio

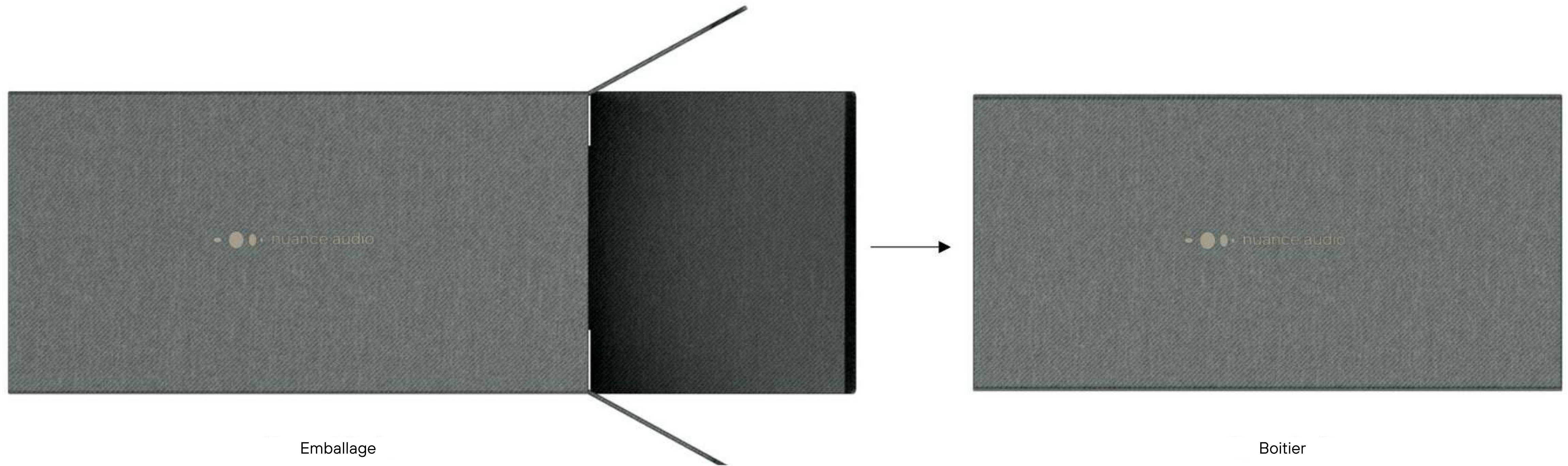




Débuter avec les lunettes Nuance Audio



Lunettes



Socle de charge

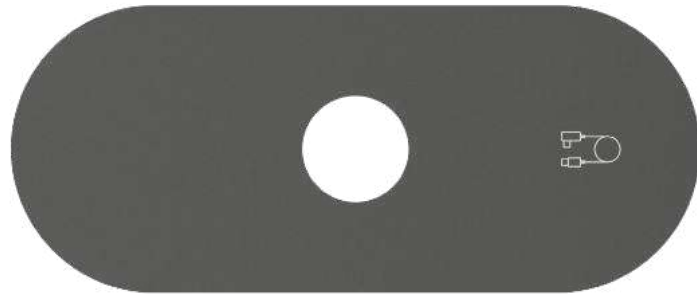

Cable de charge



Etui à lunettes




Enveloppe




Guide utilisateur



Sécurité et garantie

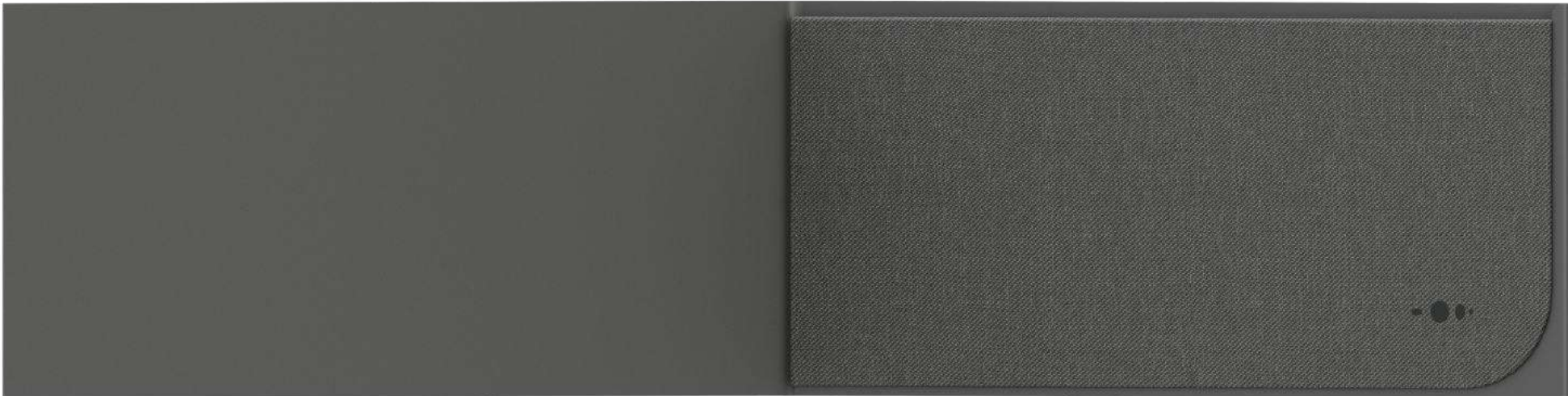

Chiffon de nettoyage

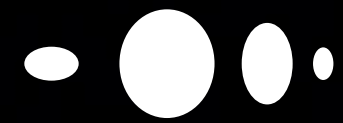

Activez et configurez vos lunettes Nuance Audio



Cherchez l'app Nuance Audio™

Pour faciliter l'utilisation de vos lunettes Nuance Audio™, notre application mobile intuitive vous permet de changer les modes audio, de contrôler le volume et de réduire le bruit de fond – le tout depuis votre téléphone.




Option A.

Scannez le code QR avec votre téléphone et
Téléchargez




Remarques

Vous pouvez également trouver le code QR sur la boîte principale

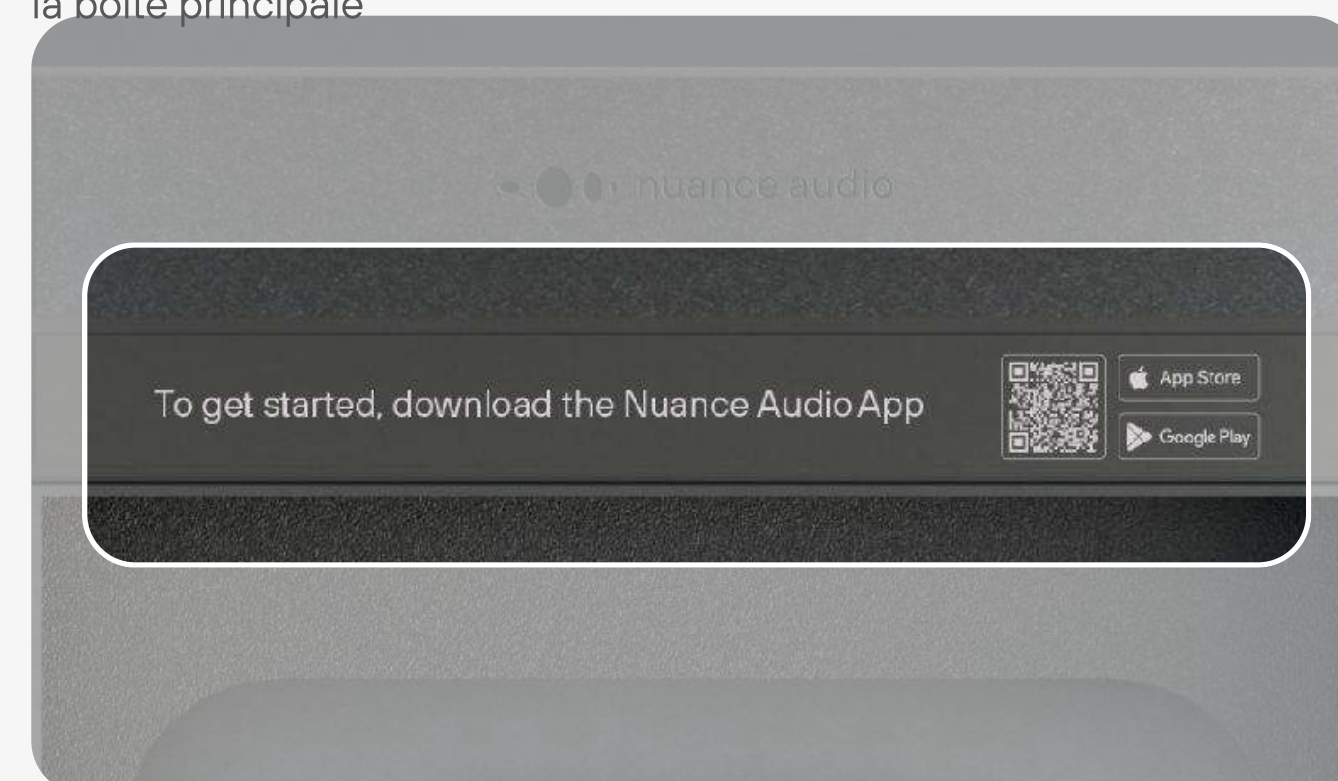

Option B.

Recherchez « Nuance Audio » dans l'App Store ou le Google Play Store et
Téléchargez

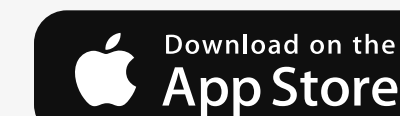


Nuance Audio






Téléchargez depuis l'App Store de votre dispositif

Pour activer et personnaliser vos lunettes Nuance Audio™, **téléchargez l'app Nuance Audio™** depuis l'App Store iOS ou le Google Play Store.

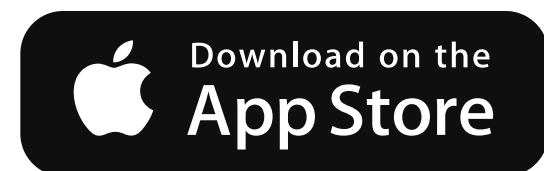


Apple App Store

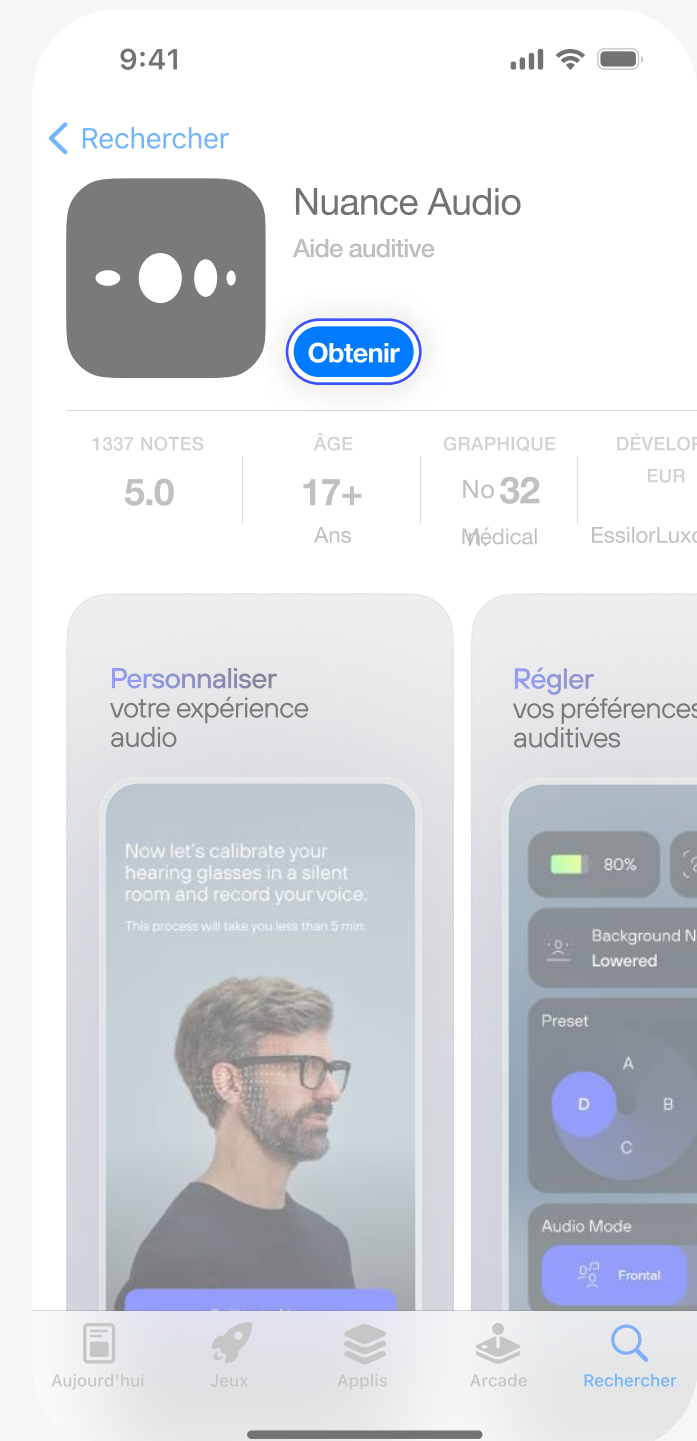

Recherchez « Nuance Audio » dans l'App Store iOS et appuyez sur **Obtenir**

le bouton Obtenir changera en Ouvrir. Vous pouvez lancer l'application depuis l'App Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.

Google Play Store

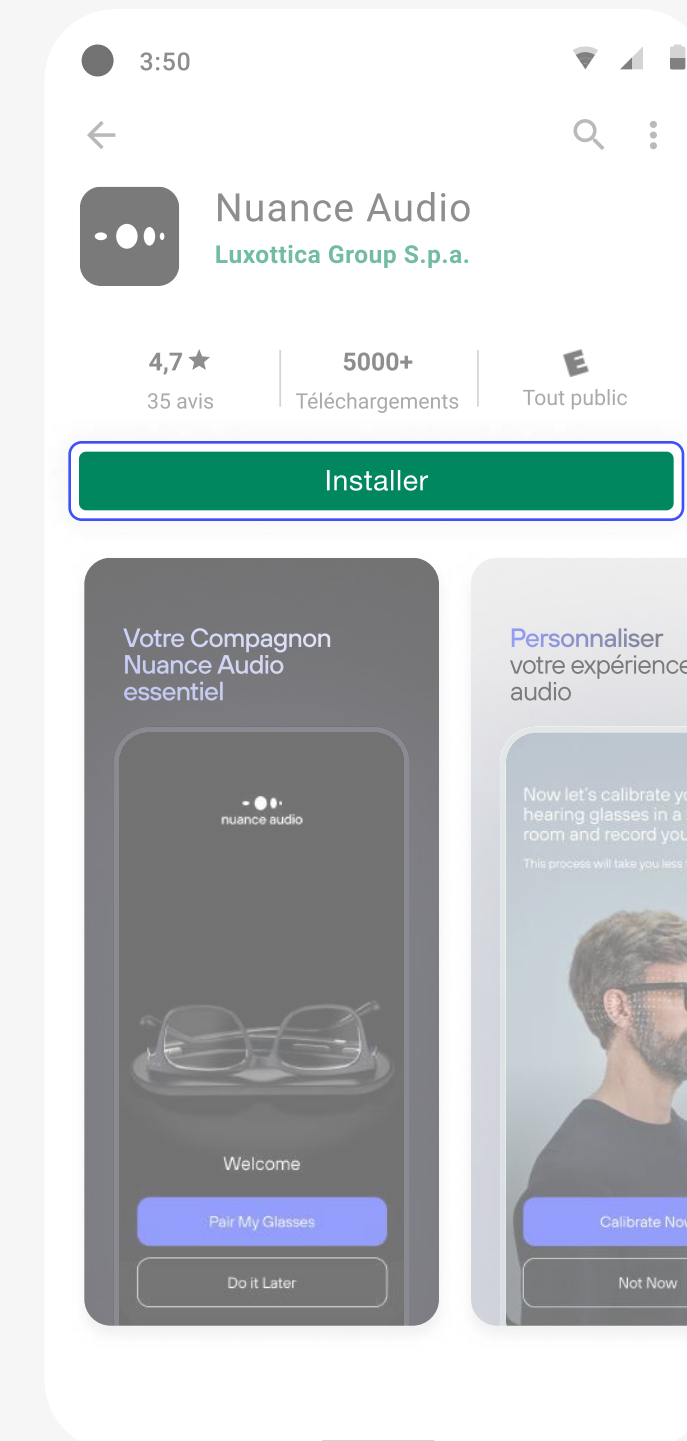

Recherchez « Nuance Audio » dans le Google Play Store et appuyez sur **Installer**

le bouton Obtenir changera en Ouvrir. Vous pouvez lancer l'application depuis l'App Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.



Inscrivez-vous

Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez procéder à l'inscription.

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail

Mot de passe

Mot de passe ?

S'identifier

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous

<Créez votre compte

Prénom*

Nom*

E-mail*

Confirmer l'e-mail*

Mot de passe

Date de naissance

Sexe

La date de naissance et le genre sont

Nuance Audio

Il y a 34 minutes

Utilisez le code 123456 pour accéder à votre Nuance Audio™ App.

Authentication OTP

Entrez le code d'authentification OTP reçu par e-mail

1

1

1

1

1

1

Vérifier

Renvoyer le code

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail

johnsmith78@gmail.com

Mot de passe

Mot de passe ?

S'identifier

Vous n'avez pas de compte ?


Inscrivez-vous



Appairage lunettes-téléphone



Commencez l'appairage.
Appuyez sur Démarrer

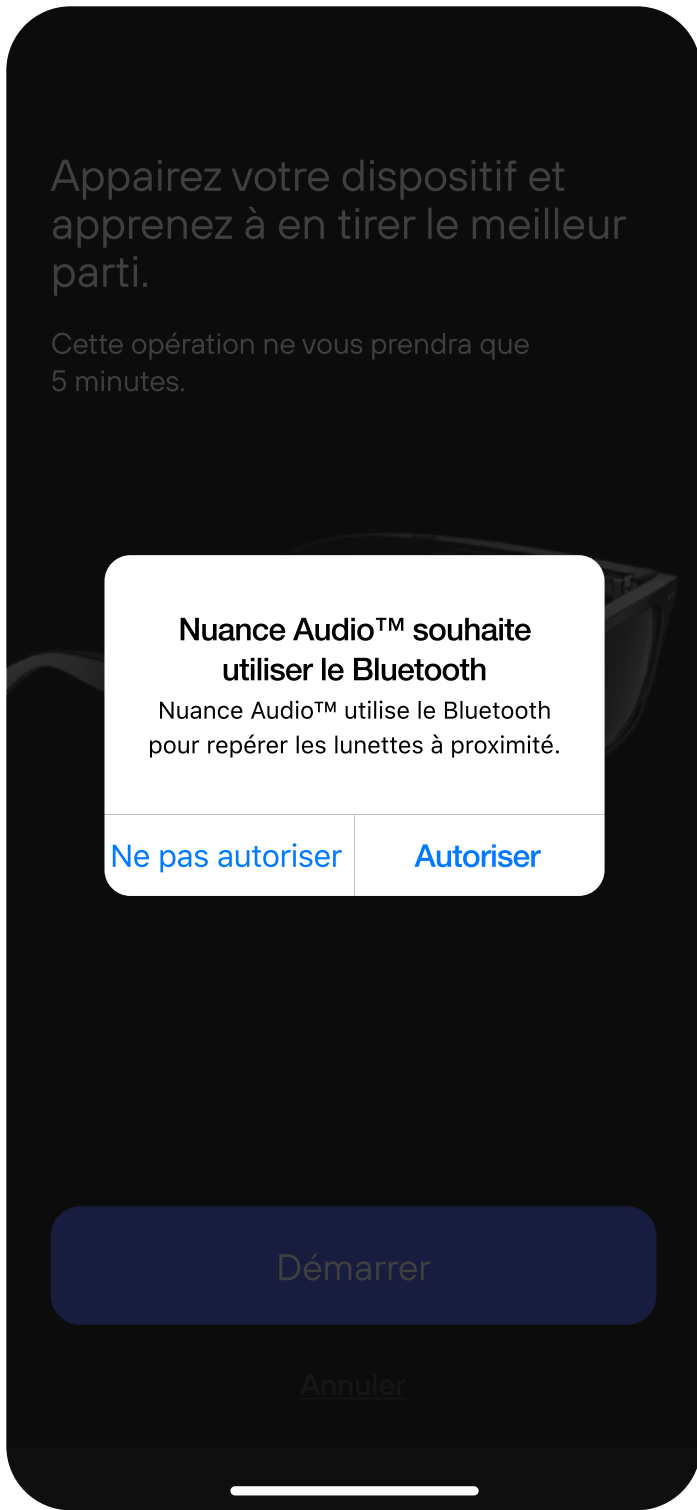

Autorisez l'accès Bluetooth.
Appuyez Autoriser




Entrez en mode appairage en **appuyant et maintenant enfoncé le bouton multifonction** jusqu'à ce que la LED




e.




Appairage lunettes-téléphone

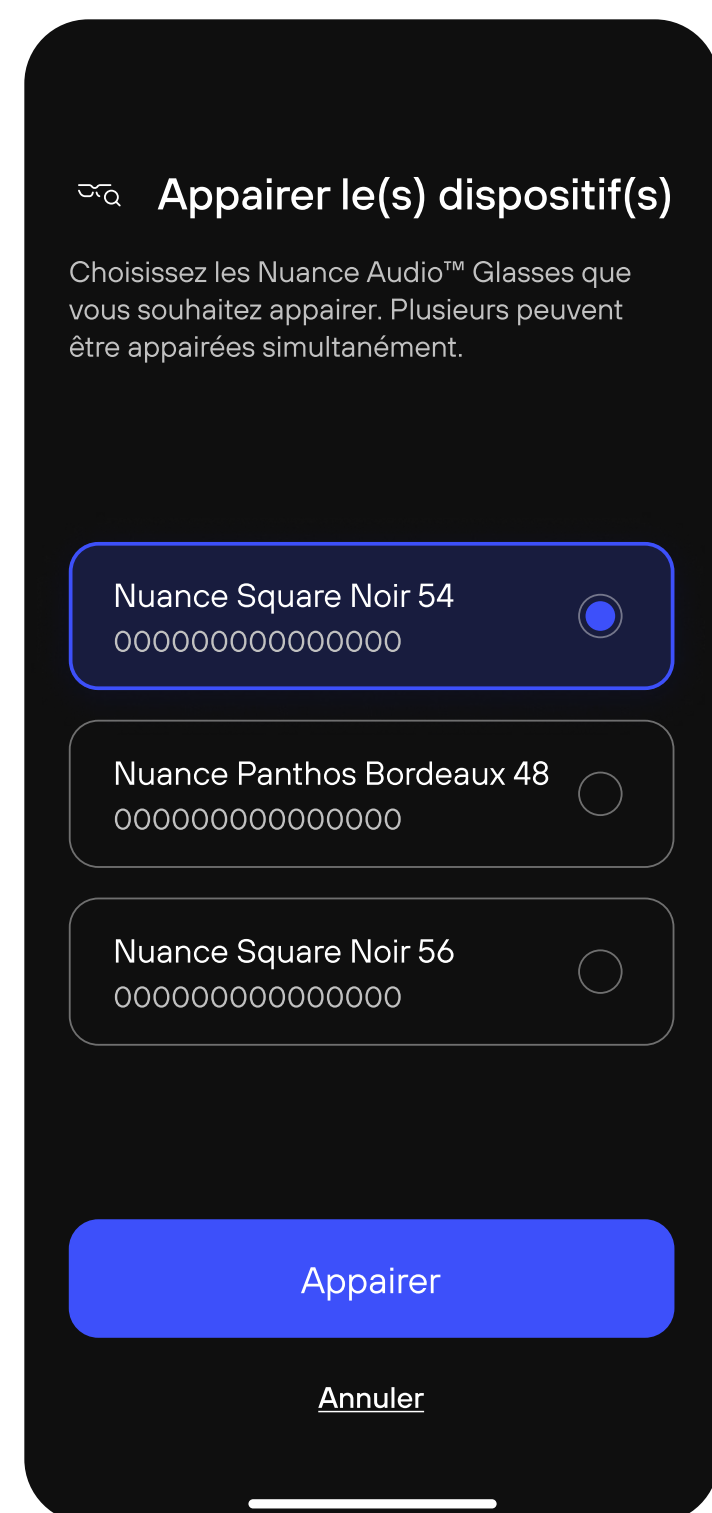

Sélectionnez les Nuance Audio™ Glasses dans la liste.
Appuyez sur **Appairer**

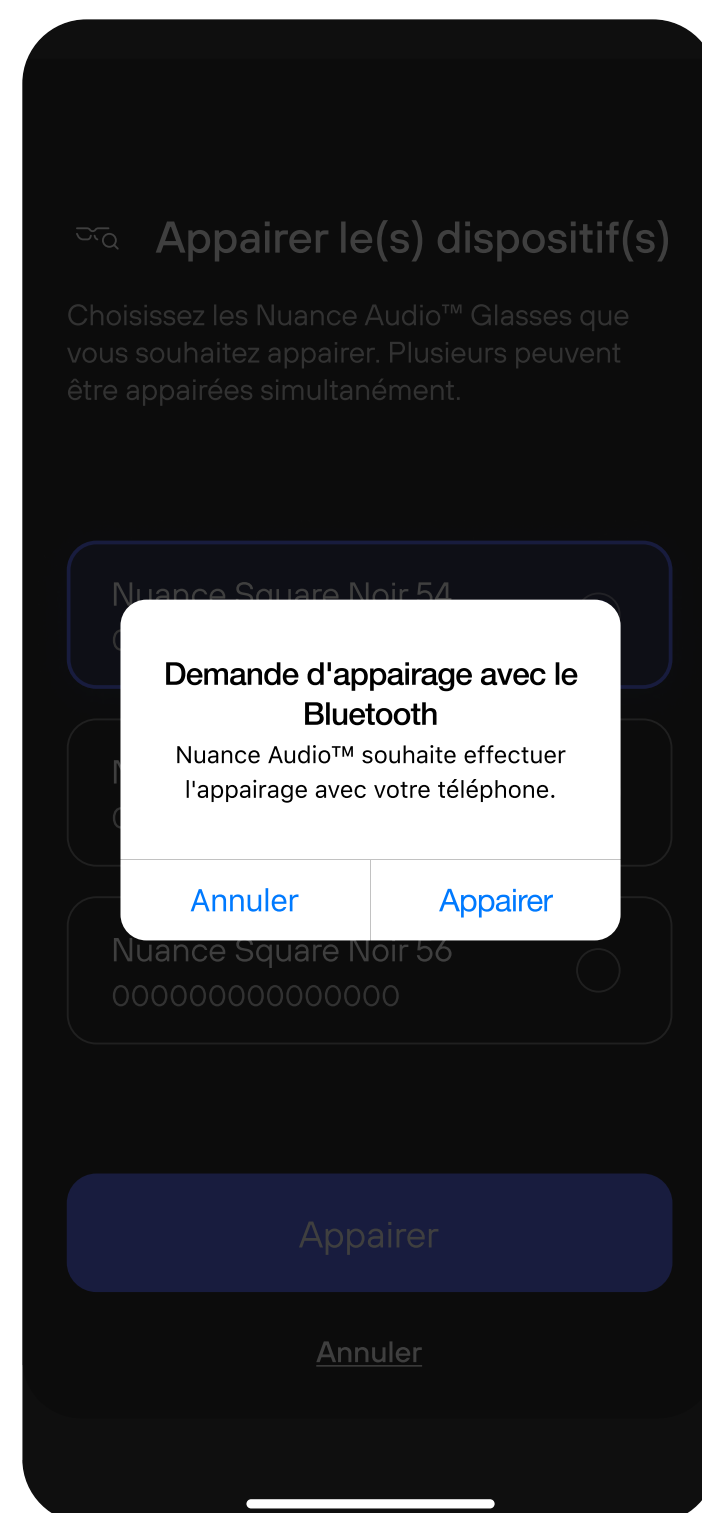

Acceptez la demande d'appairage avec votre iPhone.
Appuyez sur **Appairer**

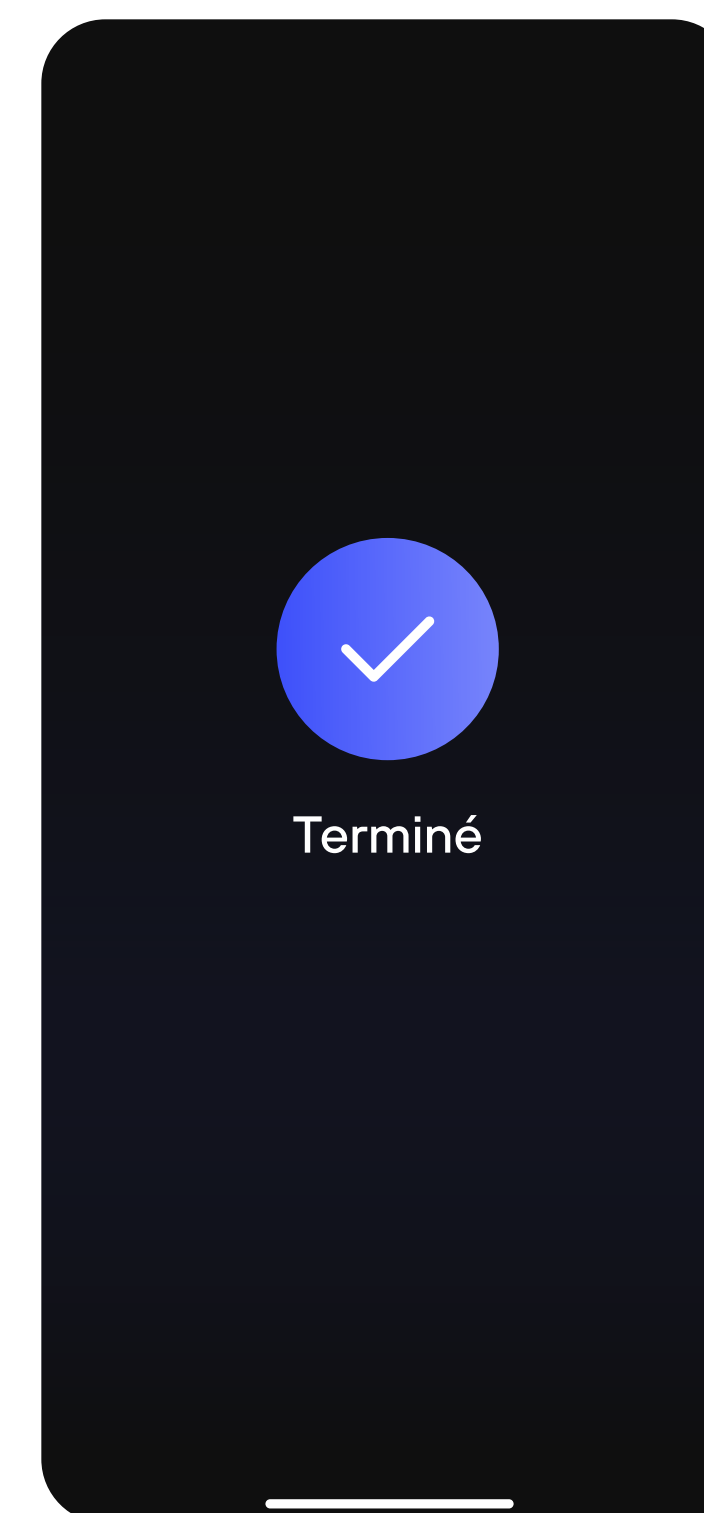

Appairage terminé.



Comment tirer le meilleur parti de votre calibration ?

La calibration ne prend qu'une minute, mais elle vous aide à tirer le meilleur parti de vos Nuance Audio™ Glasses. Si vous possédez plusieurs paires, calibrez chacune individuellement.

Quelques conseils pour optimiser la Calibration personnelle :

- Trouvez un endroit silencieux chez vous, en évitant les grandes pièces ou les espaces ouverts.
- Éloignez-vous des zones avec de nombreuses ou grandes fenêtres.
- Évitez les pièces avec des plafonds élevés où le bruit de fond peut être imprévisible.
- Positionnez-vous loin des coins et évitez de faire face aux miroirs.
- Idéalement, restez aussi près que possible du centre de la pièce pour une qualité sonore optimale.
- Dernier conseil : votre chambre est souvent la meilleure option.

Quelques conseils pour optimiser la Calibration de la voix :

- Parlez fort mais sans crier.
- Projetez votre voix comme si vous parliez à quelqu'un de l'autre côté de la pièce.
- Minimisez les pauses autant que possible.



Calibration personnelle




Le calibrage optimisera la performance audio de vos lunettes en fonction de la forme de votre tête et en agissant sur les éléments suivants:

- Réduction du retour acoustique
- Réduction de votre voix


Pour commencer à calibrer, trouvez une pièce silencieuse.

Cliquez sur **Démarrer la calibration**

Remarques
La fonction de calibration se trouve dans les réglages. Nous recommandons de procéder à la calibration tous les 6 mois.

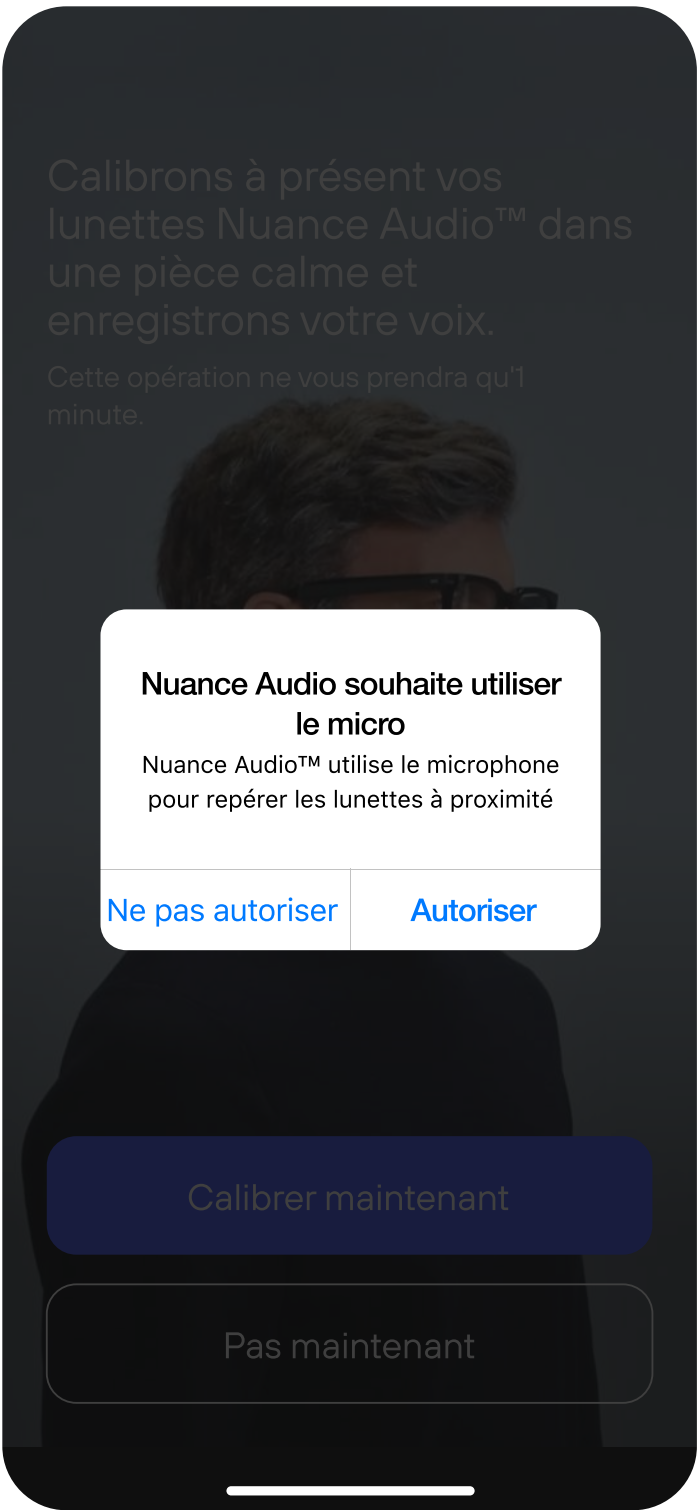

Autorisez le microphone de votre téléphone à mesurer et valider les sons.
Cliquez sur **Autoriser**

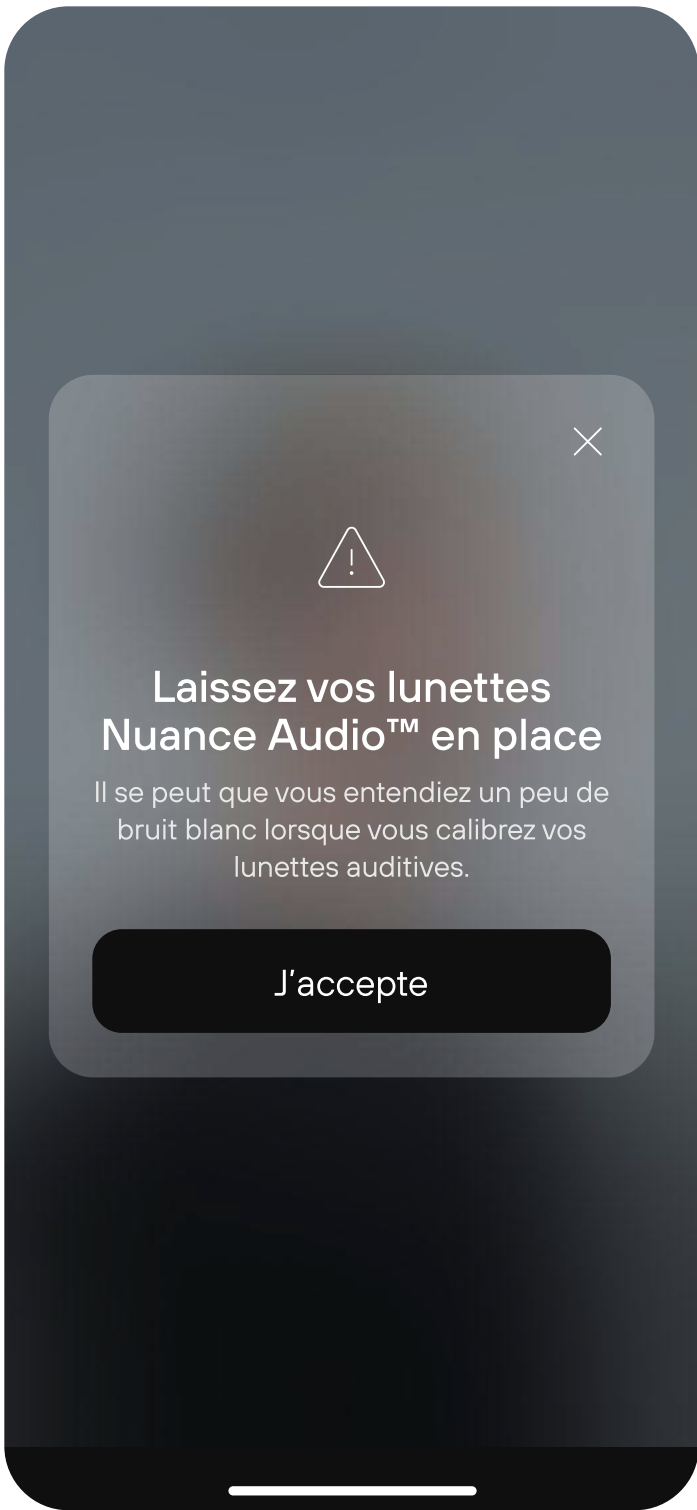


Une fenêtre contextuelle vous rappellera de **garder vos Nuance Audio™ Glasses** pendant tout le processus.




Calibration personnelle



Étape 1.1
Mesure du bruit ambiant.
Gardez vos lunettes et
cliquez sur **Écouter un
extrait audio**

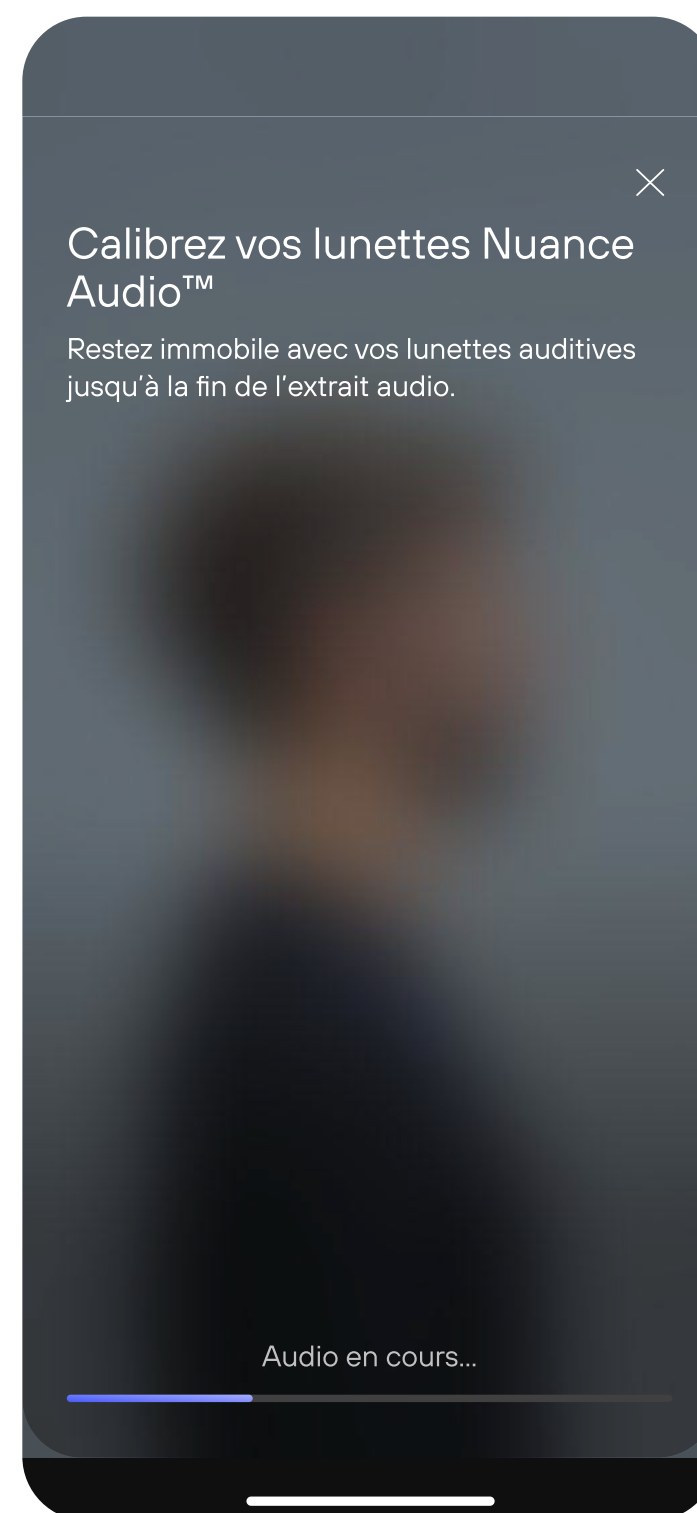


Étape 1.2
Restez immobile et ne
retirez pas vos lunettes,
**attendez la fin de
l'extrait audio.**

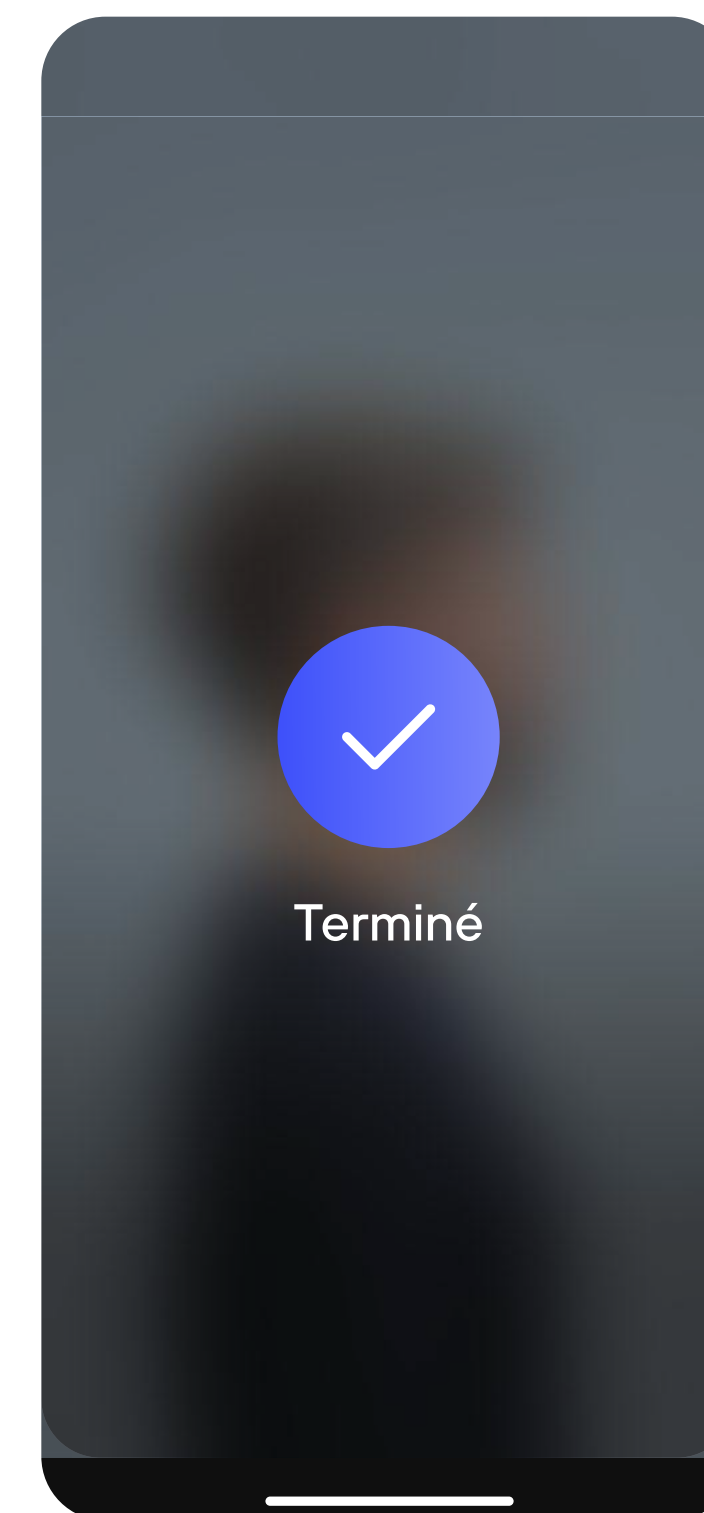


Étape 1.3
Mesure du bruit
environnemental
terminée.




Calibration de la voix

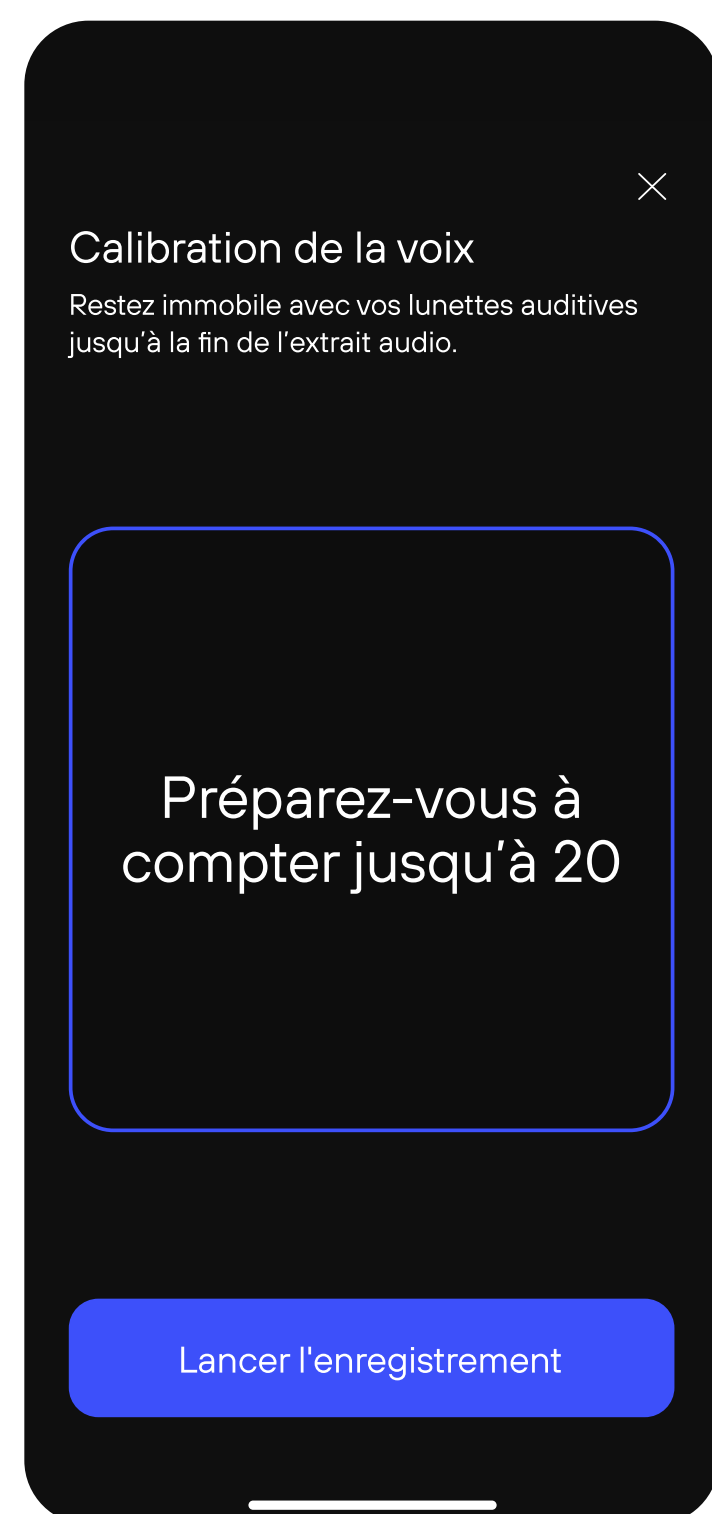

Étape 2. 1
Calibration de votre voix.
Restez immobile et ne retirez pas vos lunettes
Appuyez sur **Lancer l'enregistrement**

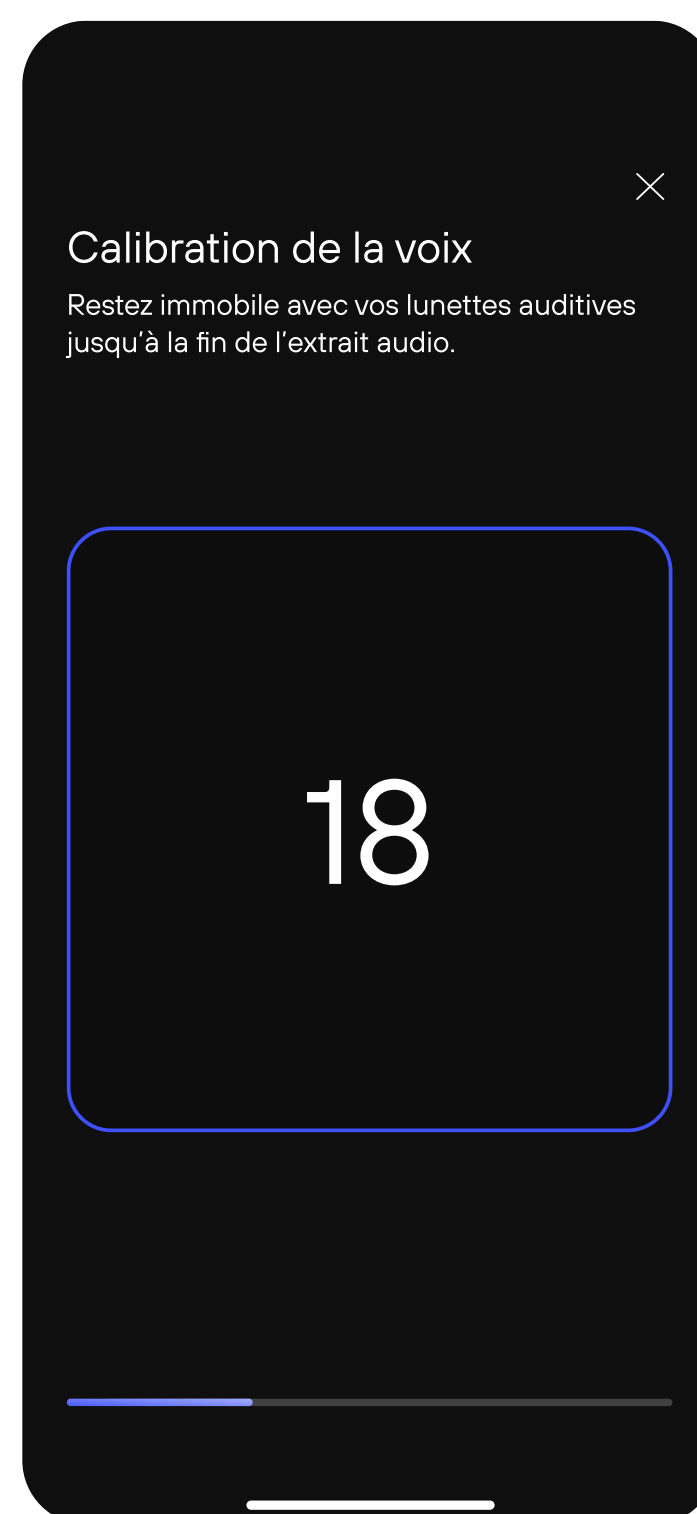

Étape 2. 2
Comptez à voix haute jusqu'à ce que la barre de progression atteigne la fin.

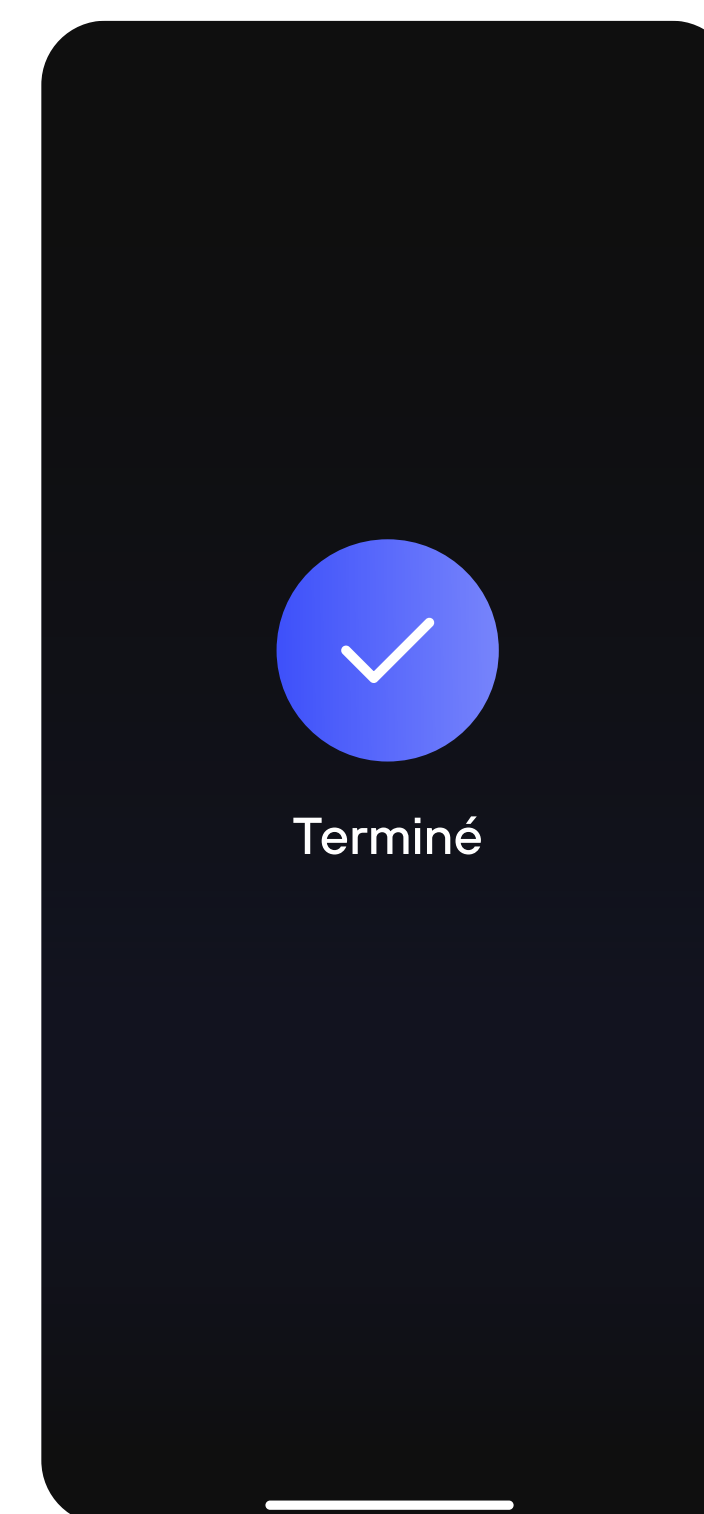

Étape 2. 2
Calibration personnelle terminée avec succès.



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)