

# Configurations: Préréglages audio



## Répartition des préréglages

L'application Nuance Audio propose **4 préréglages pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**

Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos lunettes Nuance Audio. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.


Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.

Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre application Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre quotidien, en fonction de vos besoins et de votre environnement.

### Préréglage A Pour une perte auditive légère, homogène en fréquence

Idéal pour les personnes qui ont besoin d'une légère amplification sur toutes les fréquences, qui a un peu de difficulté à comprendre le langage pourraient qui pourrait bénéficier d'un coup de pouce.

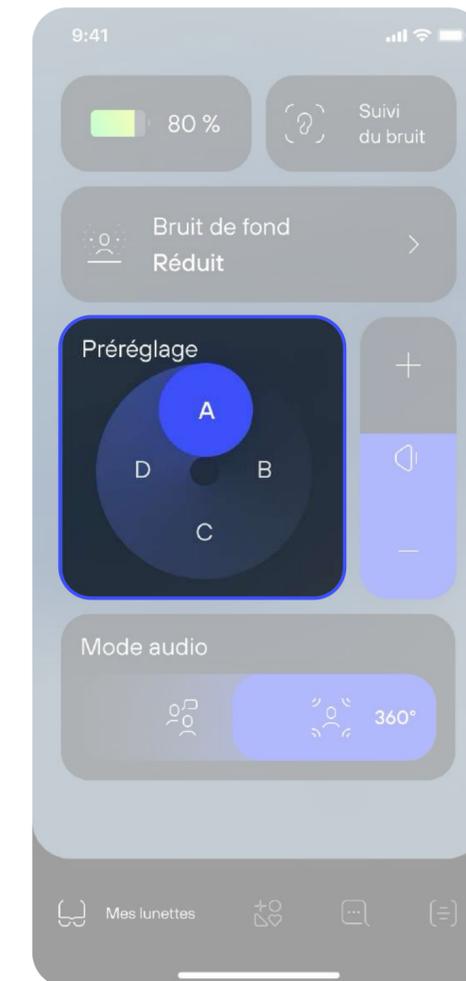



## Répartition des préréglages

L'application Nuance Audio™ propose **4 préréglages pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**

Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos lunettes Nuance Audio™. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.

Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.


Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre application Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre quotidien, en fonction de vos besoins et de votre environnement.

### Préréglage B Pour une perte auditive légère, prédominante dans les aigus

Idéal pour :

- Les personnes qui perçoivent bien les basses fréquences (sons graves), mais qui ont besoin d'un léger renfort dans les hautes fréquences (sons aigus).
- Les personnes qui ne rencontrent pas de difficultés majeures dans des conditions idéales, comme un environnement calme ou une conversation en tête-à-tête, mais qui peuvent être gênée dans des situations plus complexes, telles qu'un environnement bruyant ou une conversation avec plusieurs interlocuteurs.

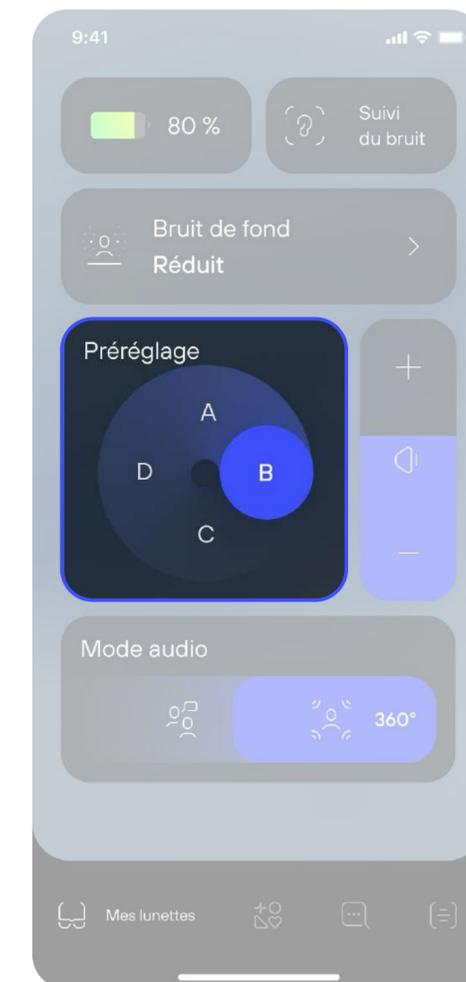



## Répartition des préréglages

L'application Nuance Audio™ propose **4 préréglages pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**

Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos lunettes Nuance Audio™. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.

Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.


Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre application Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre quotidien, en fonction de vos besoins et de votre environnement.

### Préréglage C Pour une perte auditive modérée, prédominante dans les aigus

Idéal pour :

- Les personnes qui éprouvent des difficultés importantes à comprendre dans des environnements complexes.
- Les personnes qui ont tendance à mal interpréter certains sons de la parole ou manquer des fragments de conversation.
- Les personnes qui cherchent constamment des indices contextuels, voire qui utilisent la lecture labiale, pour compenser leur compréhension.

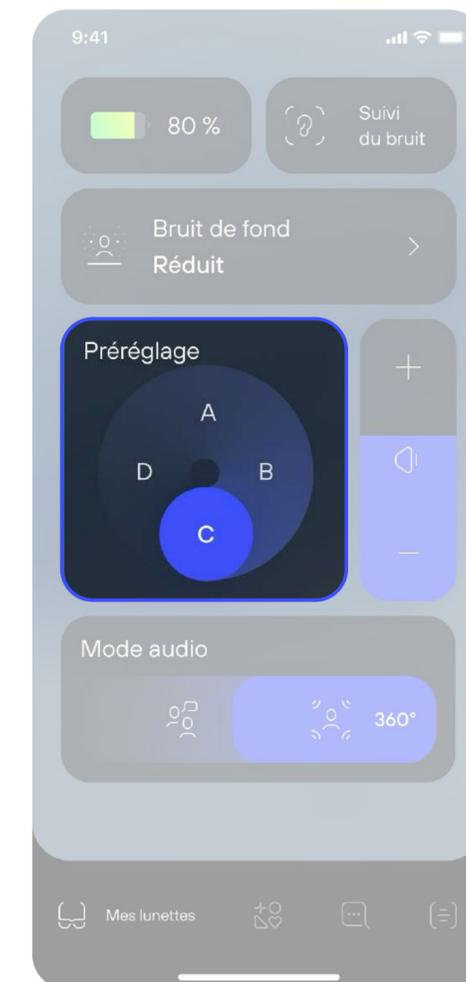



## Répartition des préréglages

L'application Nuance Audio propose **4 préréglages pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour vos besoins auditifs.**

Les préréglages sont des paramètres d'amplification préconfigurés conçus pour améliorer votre expérience d'écoute avec vos lunettes Nuance Audio™. Chaque préréglage répond à différents besoins d'amplification en ajustant diverses fréquences.


Commencez d'abord par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.

Ensuite, allez sur la page d'accueil de votre application Nuance Audio™ et basculez entre les 4 préréglages – A, B, C et D.

Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours modifier vos réglages et les adapter à votre quotidien, en fonction de vos besoins et de votre environnement.

### Préréglage D Pour une perte auditive modérée, homogène en fréquence

Idéal pour les personnes qui éprouvent des difficultés même dans des environnements calmes – Les personnes qui peuvent entendre la parole étouffée et s'efforcent de comprendre les conversations.

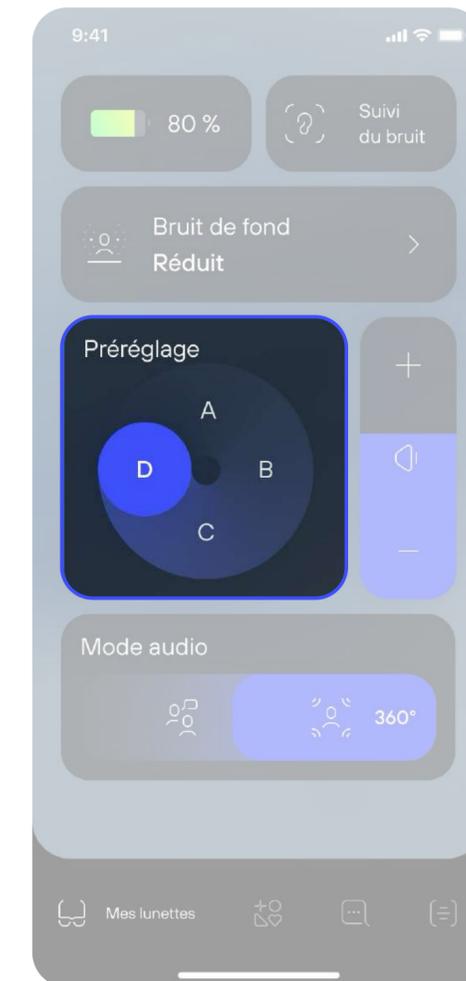



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes  
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)