

Configurations: Volume des lunettes




Comment ajuster le volume des lunettes ?

Vous pouvez régler le volume de vos lunettes Nuance Audio™ de plusieurs manières.

Depuis la monture

Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de la branche droite pour changer le volume. Un message audio confirmera chaque changement.

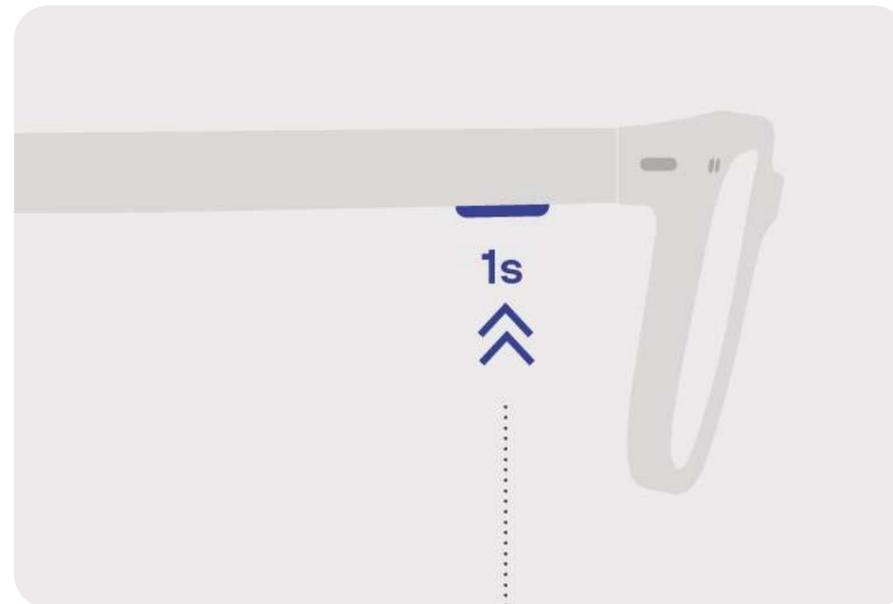

Depuis la télécommande

Vous pouvez régler le volume en appuyant sur les boutons + et - pour l'augmenter ou le diminuer.






Comment ajuster le volume des lunettes ?

Avec l'application Nuance Audio™

Vous pouvez utiliser le curseur de volume sur l'écran d'accueil de votre application Nuance Audio™ pour ajuster le volume selon vos préférences.

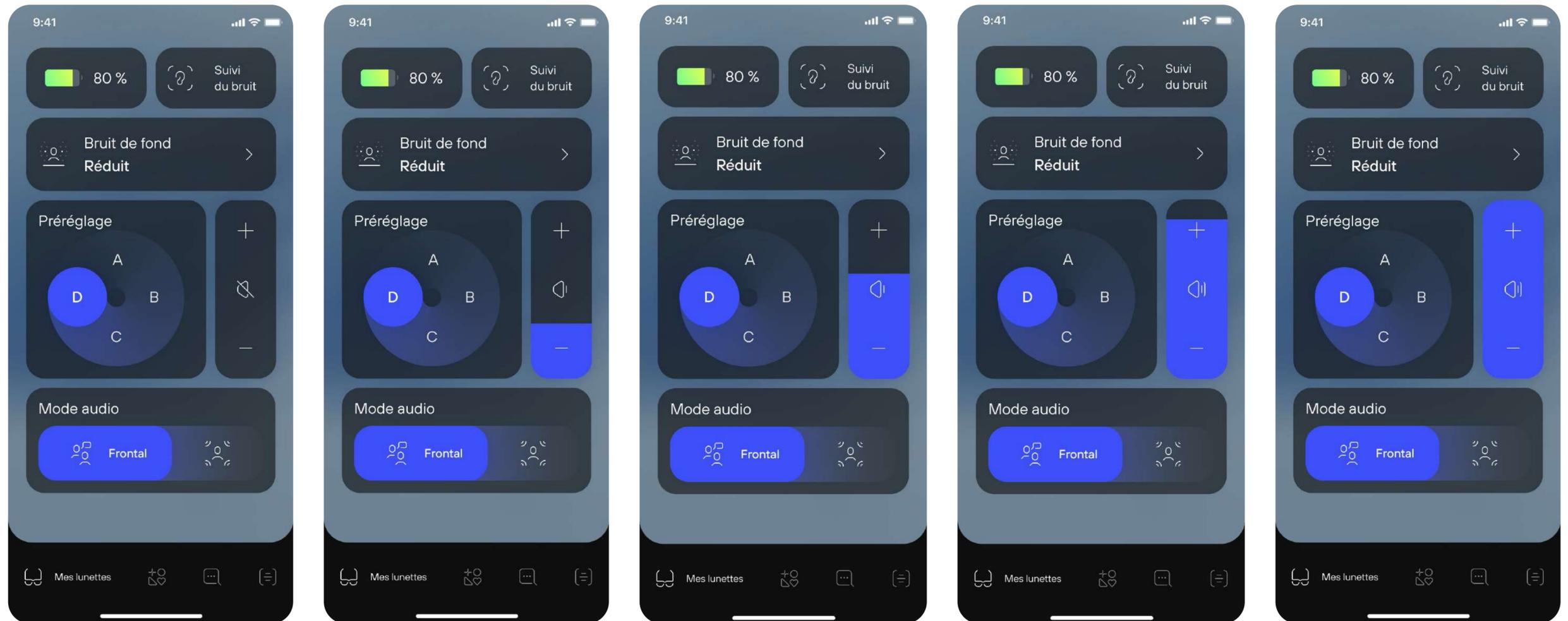




Comment ajuster le volume des lunettes ?

Avec l'application Nuance Audio™

Dans la section Réglages de l'Application, vous pouvez sélectionner et définir facilement vos trois plages de volume préférées pour un accès rapide.

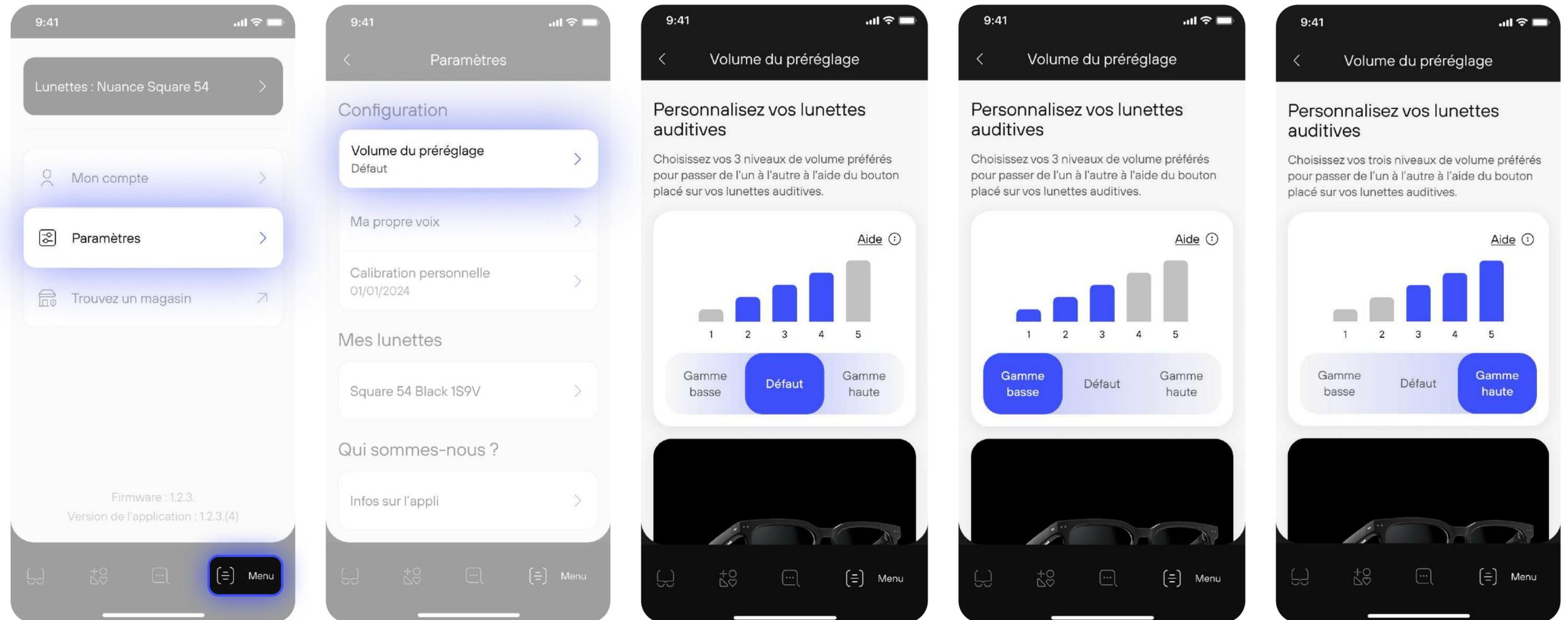



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)