




# Configurations: Ma propre voix



## Comment calibrer votre propre voix?


L'application Nuance Audio™ vous permet d'ajuster la perception de votre propre voix pour optimiser votre confort d'écoute.

## Comment calibrer votre propre voix?

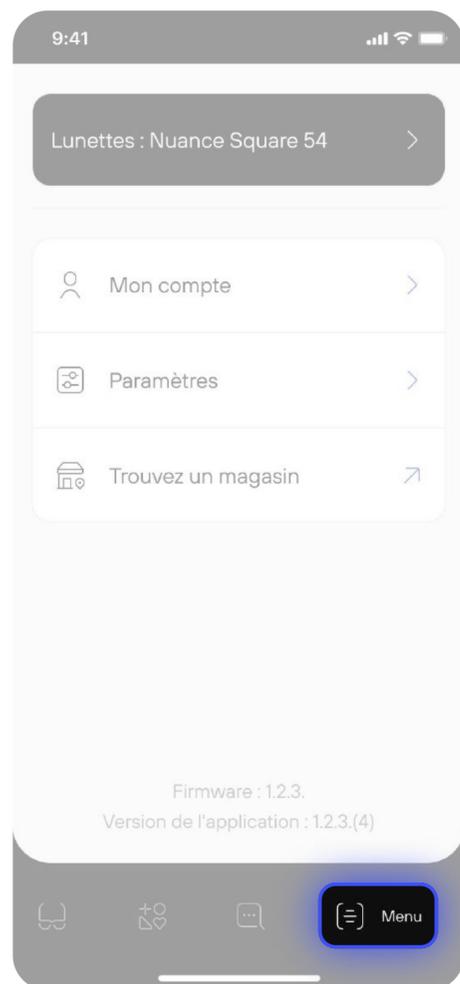

Dans le tableau de bord de l'application Nuance Audio™, cliquez sur Menu (coin inférieur droit de la barre de navigation).

Dans le menu, cliquez sur **Réglages**

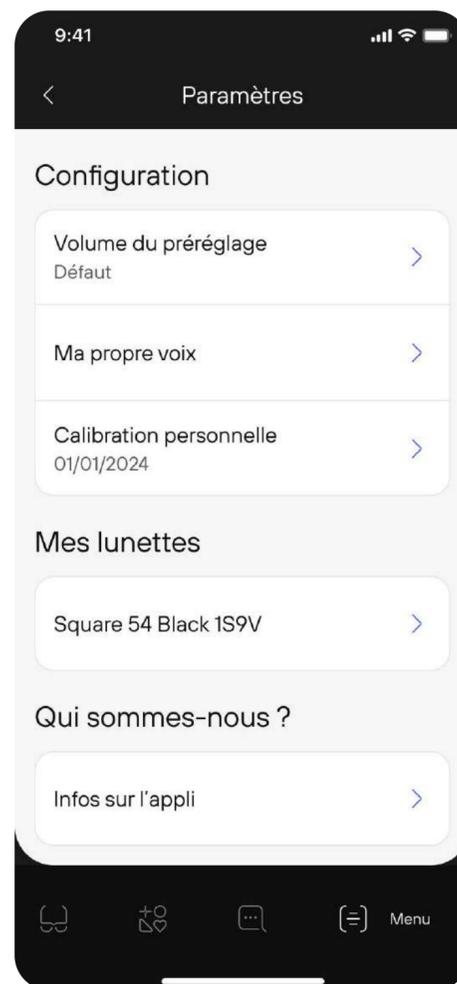

Dans Réglages, sélectionnez **Ma propre voix**



Vous pouvez maintenant librement **ajuster vos niveaux d'amplification** selon vos préférences.

### Remarques

La Calibration Personnelle est essentielle pour vivre une expérience audio optimale, avec une restitution naturelle de votre voix et un équilibre global des réglages sonores.



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes  
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)