




Comment charger les lunettes



Comment recharger vos lunettes Nuance Audio?


Étape 1

Connectez votre socle de chargement à l'aide d'un chargeur USB-C standard ou d'une source d'alimentation USB-C (minimum 5 V).

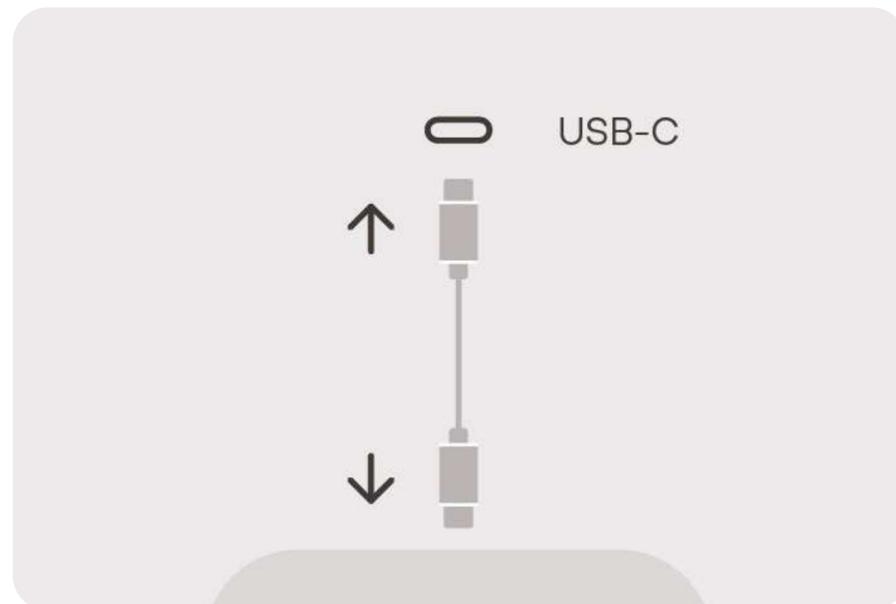

Étape 2

Repliez vos lunettes Nuance Audio et placez-les directement sur le socle de chargement comme indiqué. Les aimants à l'intérieur du socle de chargement aideront à positionner les lunettes correctement.

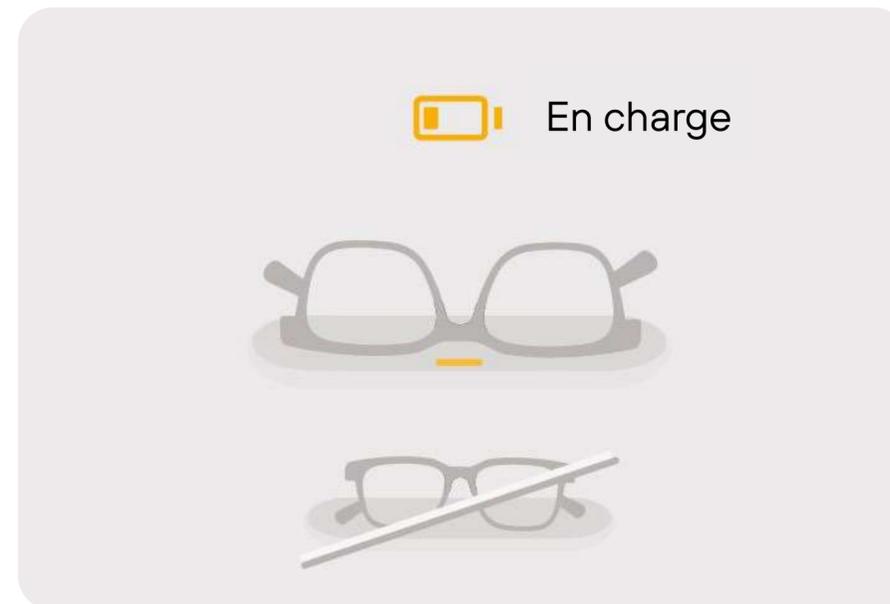




Comment savoir quand vos lunettes sont chargées?


LED orange

La charge est en cours.

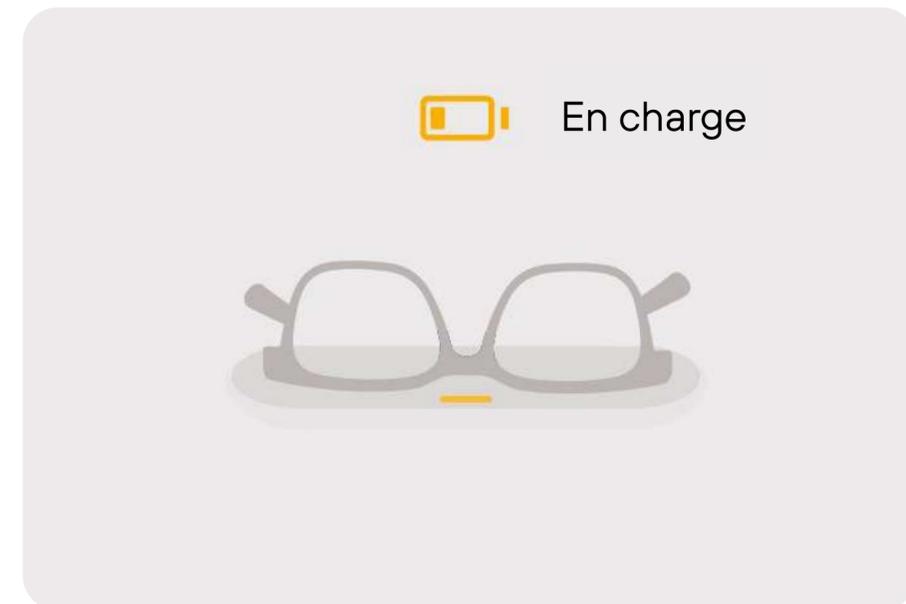

LED verte

Les lunettes sont complètement chargées (au moins 96 %).

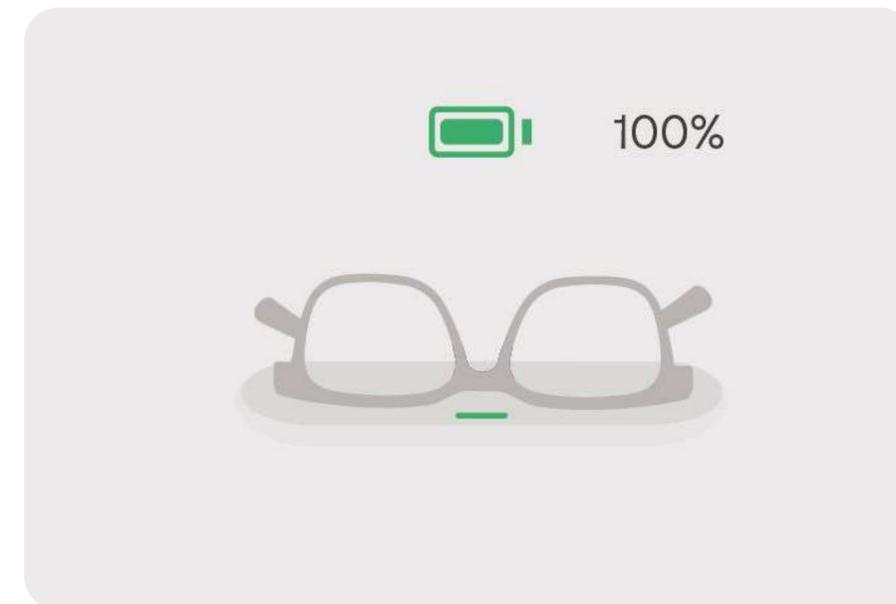



Indications du niveau de batterie

Lorsque vous prenez vos lunettes, la LED du socle de chargement et la LED de la monture indiquent le niveau de batterie pendant quelques secondes.

LED rouge

Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.



LED verte

Le niveau de batterie est supérieur à 20 %.





Pour les instructions d'utilisation les plus récentes
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)