



Conseils d'entretien



Les lunettes Nuance Audio sont-elles étanches?

De par leur conception, les lunettes Nuance Audio sont conformes à la norme IPX4, y compris au niveau des microphones. Cet indice protège des éclaboussures d'eau, ce qui les rend adaptées aux entraînements ou à la pluie légère. Bien qu'elles ne soient pas adaptées à la plongée, elles sont protégées contre les éclaboussures mineures.





Que faire si mes lunettes Nuance Audio sont en contact avec de l'eau salée, du maquillage et d'autres produits chimiques courants ?

En cas de contact avec de l'eau salée, de l'eau de piscine ou d'autres produits chimiques tels que les cosmétiques, la laque, la crème solaire et les insectifuges, nous vous recommandons d'essuyer immédiatement vos lunettes avec un chiffon humide et non abrasif.





Comment dois-je laver les verres et la monture?

Nettoyage quotidien :

Utilisez un chiffon humide non abrasif, en évitant tout produit chimique, savon, solvant ou alcool. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs qui pourraient abîmer les verres, ne pas passer les lunettes sous l'eau, ne pas utiliser d'autres outils de nettoyage (tels qu'une brosse, un cure-dent ou un mini aspirateur). Conservez le chiffon à l'abri de la poussière. Séchez vos lunettes avant de les remettre dans l'étui, de les porter ou de les placer sur le socle de recharge pour la recharge sans fil.

Nettoyage en profondeur :

Pour nettoyer les verres de lunettes, utilisez un spray pour verres, disponible dans le commerce. Veillez à vaporiser le produit sur un chiffon et non directement sur les verres. Nettoyez délicatement la poussière sur les parties extérieures des lunettes avec un chiffon humide non abrasif. Les 6 mailles du microphone et les 4 mailles du haut-parleur doivent être nettoyées avec soin.

Protection :

Rangez vos lunettes dans leur étui lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



Pour les instructions d'utilisation les plus récentes
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)