

Firmware-Update



Die ersten Schritte zur Durchführung eines Firmware-Updates

Bei der Firmware handelt es sich um eine bestimmte Art von Software, die in Ihre Nuance Audio™ Glasses integriert ist und den Betrieb der Brille steuert.


Firmware-Updates verbessern die Leistung, fügen neue Funktionen hinzu oder beheben Fehler im Gerät.

Um sicherzustellen, dass Ihre Nuance Audio™ Glasses optimal funktionieren und in gutem Zustand bleiben, ist es wichtig, die Firmware regelmäßig zu aktualisieren. Hier erfahren Sie, wie:

Überprüfen Sie die Nuance Audio™ Glasses


Akku-Ladestand:

Stellen Sie sicher, dass der Akkuladestand Ihrer Brille über 30 % liegt. Firmware-Updates können nicht durchgeführt werden, wenn die Batterie zu niedrig ist.

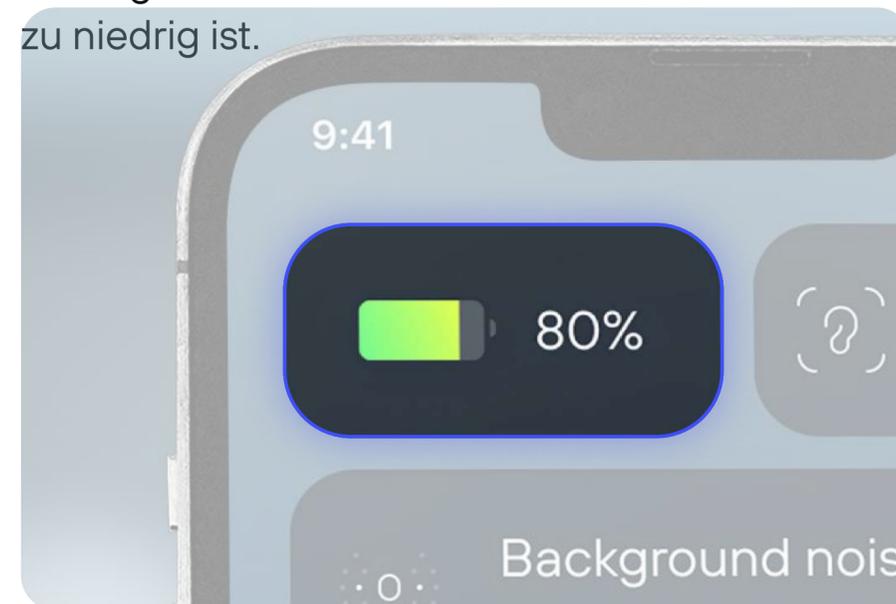

Überprüfen Sie die Geräteverbindung:


Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit einem stabilen WLAN- oder Mobilfunknetz verbunden ist, um mögliche Updates zu erhalten.

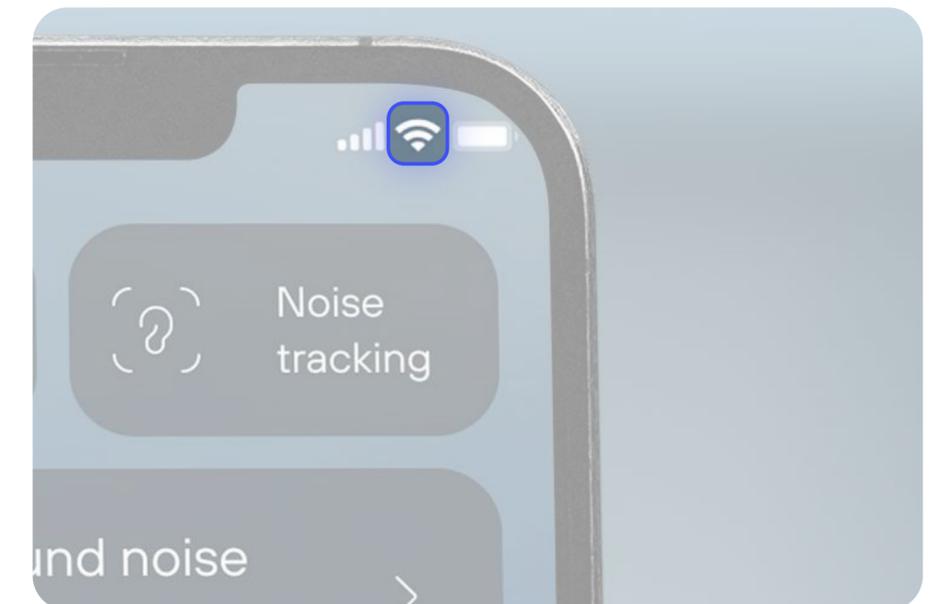




Wie man ein Firmware-Update durchführt

Sobald Sie die Batteriestände und die Geräteverbindung überprüft haben, können Sie die Firmware aktualisieren, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

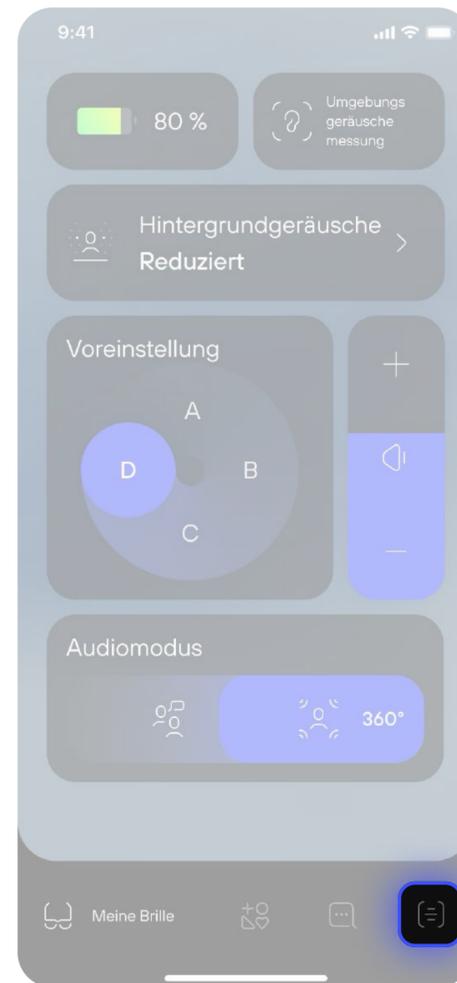

Schritt 1
Öffnen Sie die Nuance Audio™ App auf Ihrem mobilen Gerät. Tippen Sie dann auf das **Menü-Symbol** unten rechts in der Navigationsleiste der Startseite.

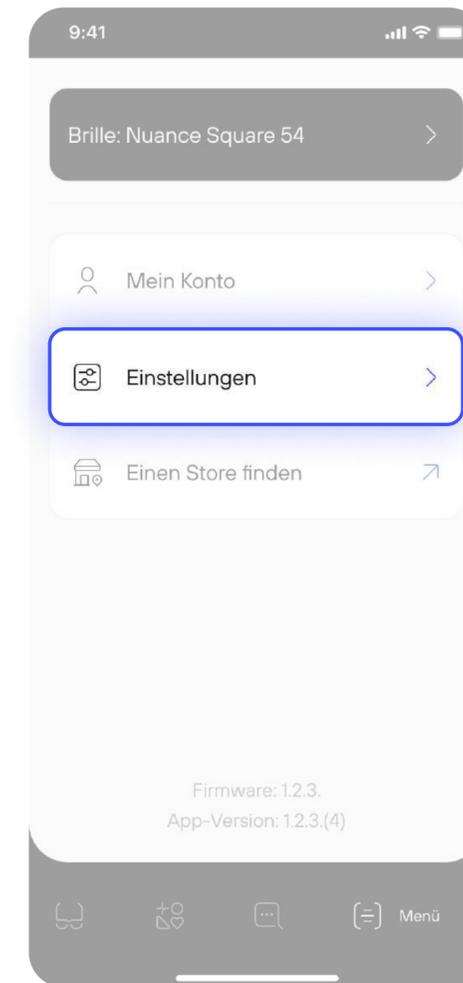


Schritt 2
Tippen Sie auf **Einstellungen**.



Wie man ein Firmware-Update durchführt



Schritt 3
Tippen Sie auf den Namen der Nuance Audio™ Glasses unten im Abschnitt **Meine Brille** und suchen Sie nach Firmware-Updates.

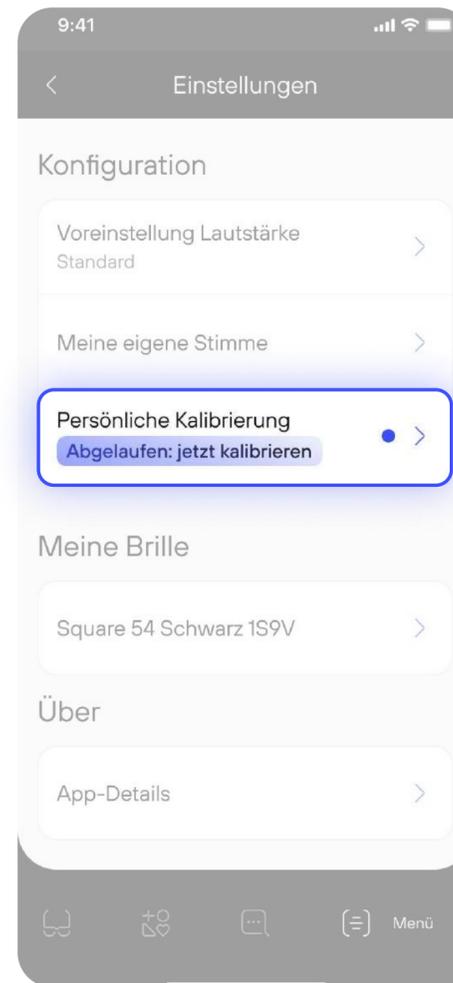

Schritt 4
Im Abschnitt „Meine Brille“ sehen Sie den aktuellen Firmware-Status und alle verfügbaren Updates. Um das Firmware-Update zu starten, **tippen Sie auf die registerkarte Firmware-Version.**

Hinweise
Die App benachrichtigt Sie auf der Startseite, wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist.



Schritt 5
Wenn ein Update verfügbar ist, folgen Sie den Anweisungen in der Nuance Audio App, um das Firmware-Update sicher durchzuführen.




Wie man ein Firmware-Update durchführt

Schritt 6

Die Firmware-Aktualisierung wird **in der App heruntergeladen** und dann **auf Ihre Nuance Audio™ Glasses hochgeladen**.

Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird Ihre Brille automatisch neu gestartet und Sie gelangen direkt zur Startseite der App.

Falls Sie während des Aktualisierungsvorgangs Probleme haben, können Sie sich an unser [Nuance Support Center wenden](#), um Unterstützung zu erhalten.

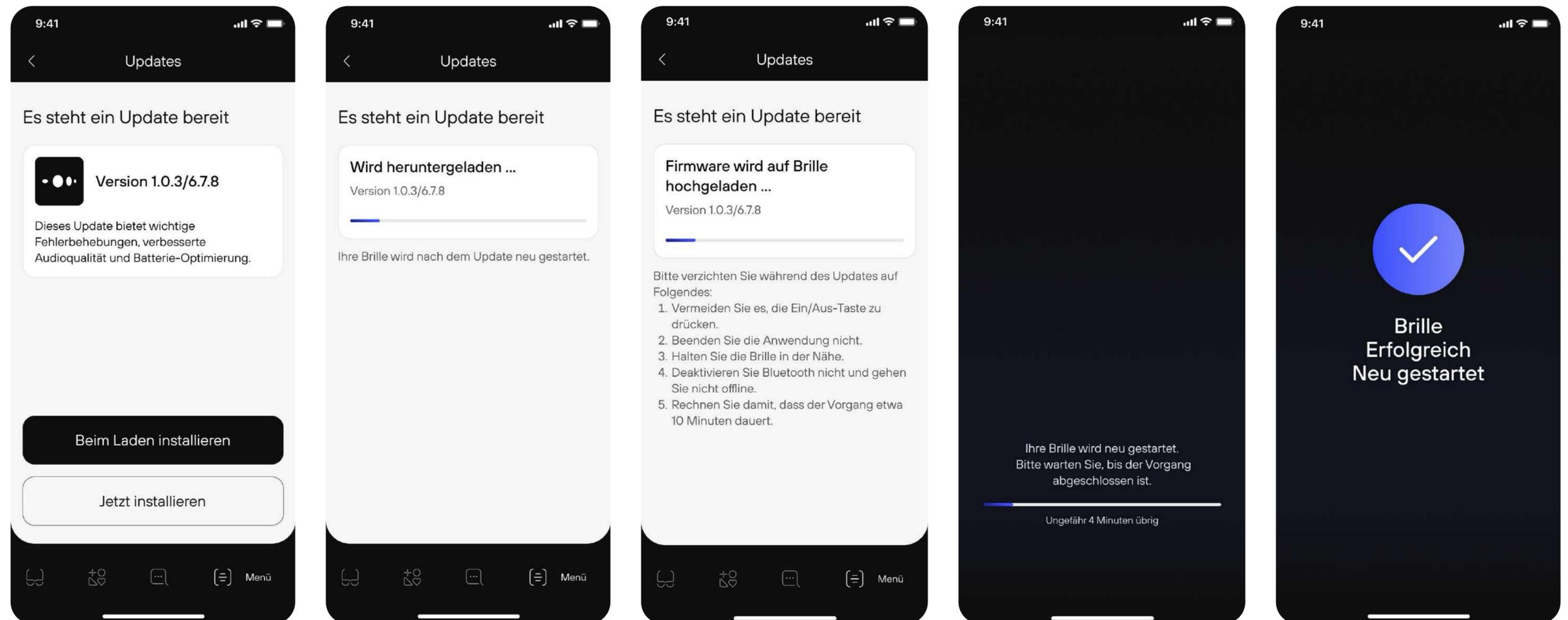



Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)