


Erste Schritte: Kontoeinrichtung, Koppelung, Kalibrierung



Auspacken



Auspacken

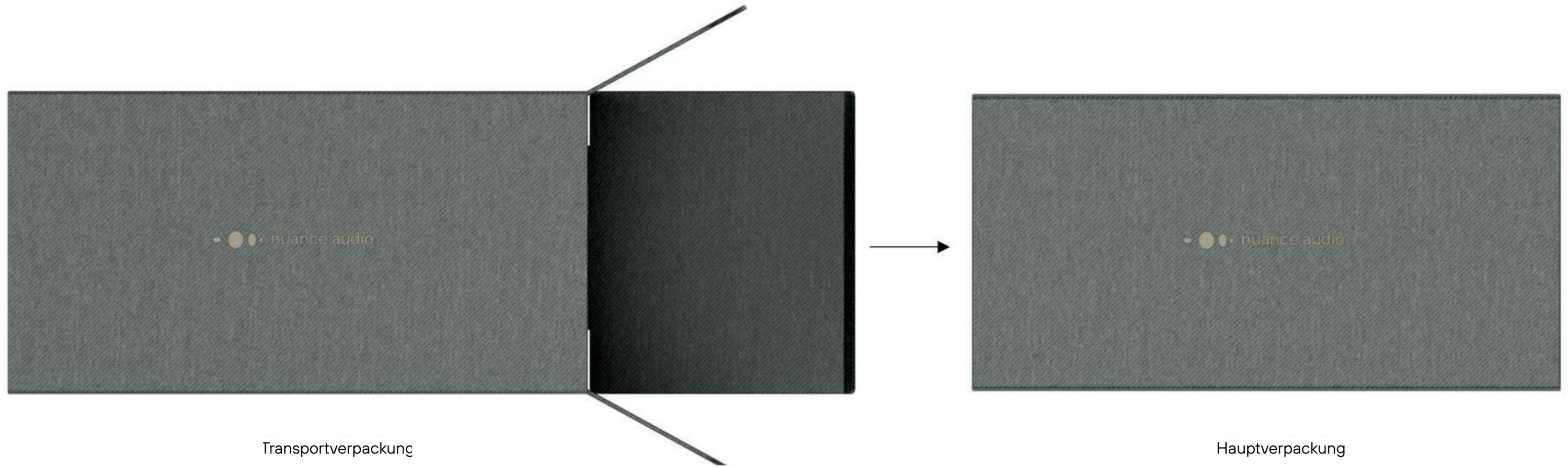




Auspacken



Brillen³




Ladepad^{ad}

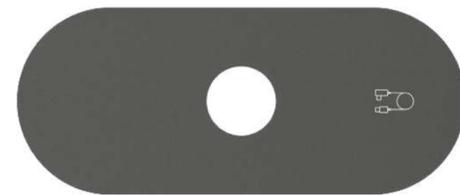

Kabelpaket



Faltetui

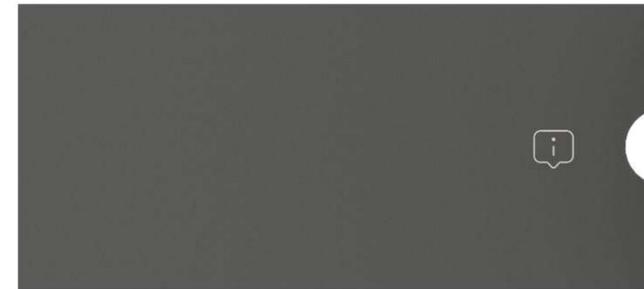


Etui



Gebrauchsanleitung



Sicherheit & Garantie

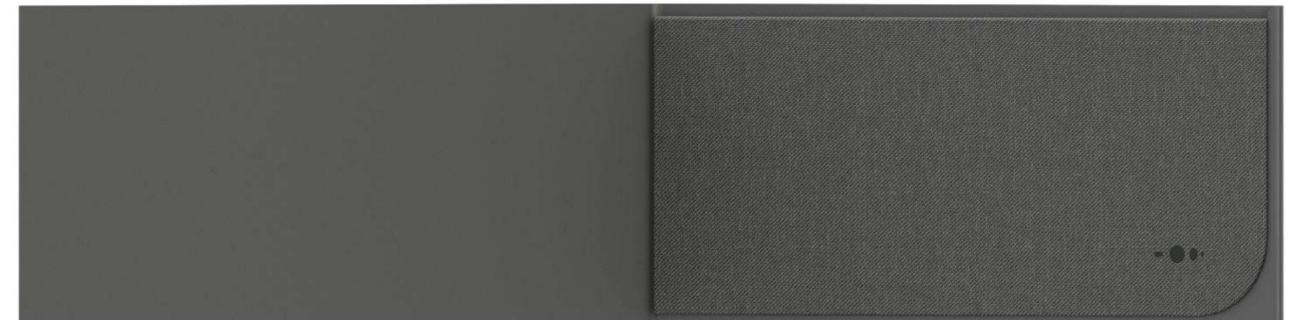

Reinigungstuchbeutel + Reinigungstuch




Aktivieren und konfigurieren Sie Ihre Nuance Audio™ Glasses



App herunterladen & anmelden



Um Ihre Nuance Audio™ Glasses zu aktivieren und zu personalisieren, **laden Sie die Nuance Audio™ App** aus dem iOS App Store oder Google Play Store herunter, die die Gebrauchsanweisung enthält.

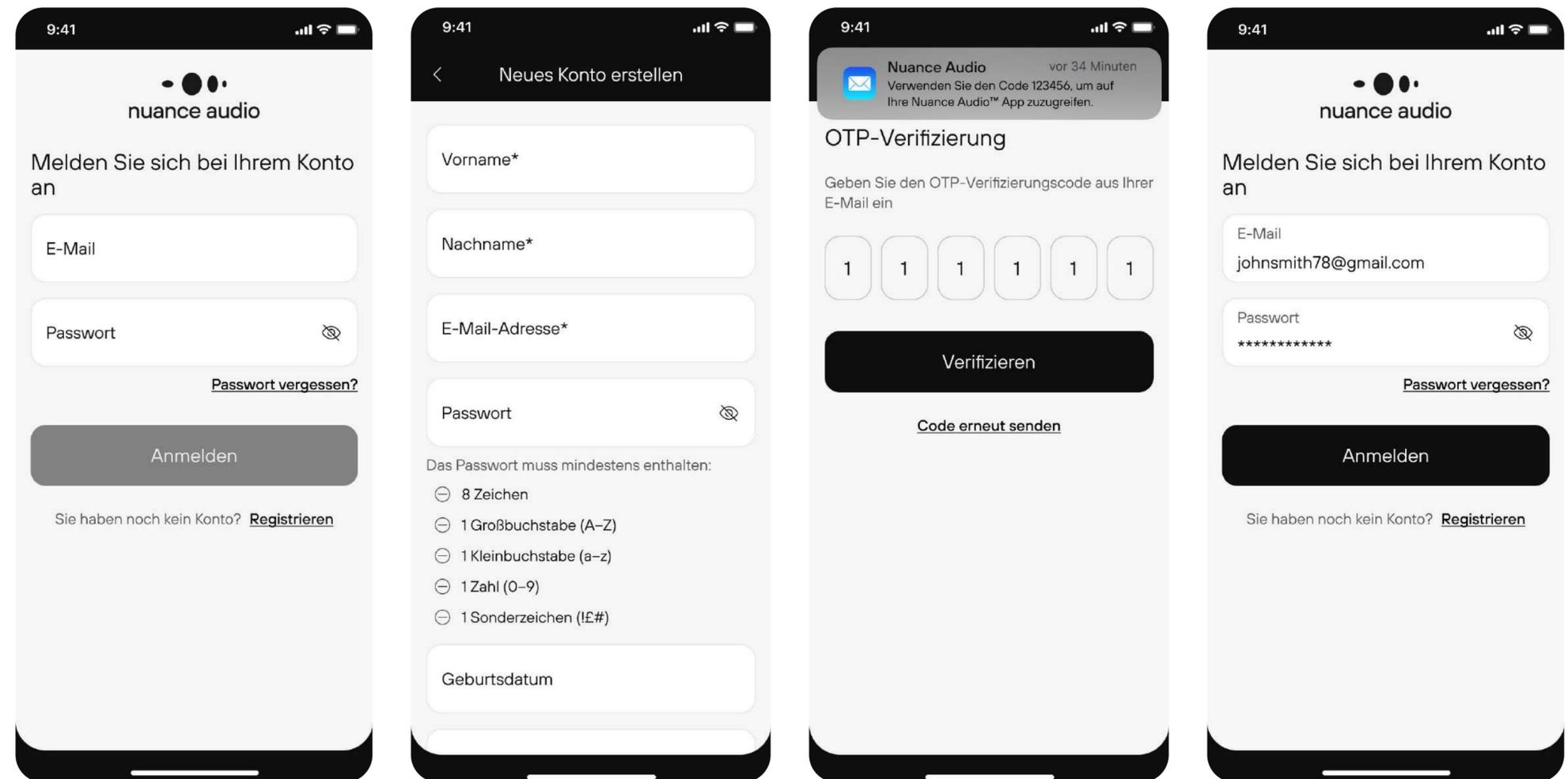

Öffnen Sie die Nuance Audio™ App und registrieren Sie sich oder melden Sie sich an. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um zu starten.




Koppelung Brille-Telefon



Starten Sie die Koppelung.

Drücken Sie **Start**

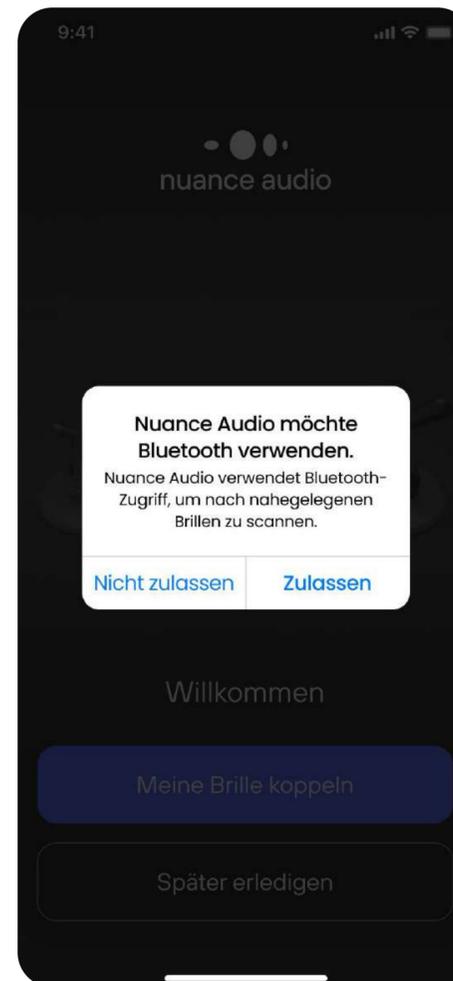

Erteilen Sie die Bluetooth-Berechtigung.

Drücken **Erlauben**




Aktivieren Sie den Koppelungsmodus, indem Sie die **Multifunktionstaste drücken und halten**, bis die blaue LED blinkt.






Koppelung Brille-Telefon

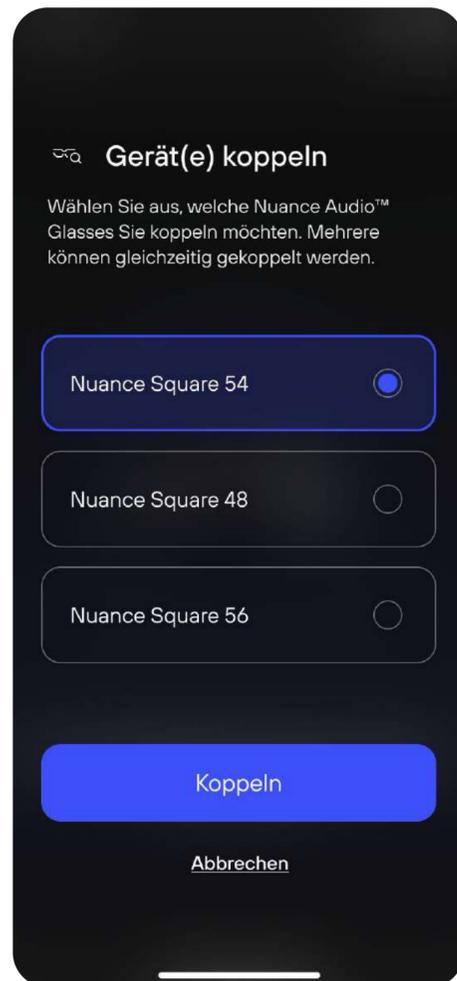

Wählen Sie die Nuance Audio™ Glasses aus der Liste aus.
Drücken Sie **Koppeln**



Akzeptieren Sie die Anfrage, um sich mit Ihrem iPhone zu verbinden.
Drücken Sie **Koppeln**

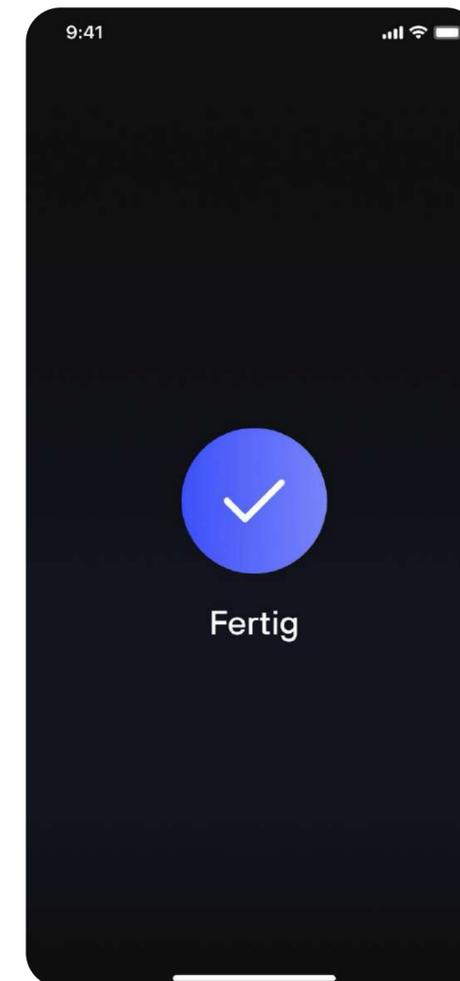

Koppelung abgeschlossen.



Wie holen Sie das Beste aus Ihrer Kalibrierung heraus?

Die Kalibrierung dauert nur eine Minute, hilft Ihnen jedoch, das Beste aus Ihren Nuance Audio™ Glasses herauszuholen. Wenn Sie mehrere Brillen besitzen, kalibrieren Sie jede einzeln.

Einige Tipps zur Optimierung **Persönliche Kalibrierung:**

- Finden Sie einen ruhigen Ort in Ihrem Zuhause und vermeiden Sie große oder offene Räume.
- Halten Sie sich von Bereichen mit vielen oder großen Fenstern fern.
- Vermeiden Sie Räume mit hohen Decken, in denen Hintergrundgeräusche unvorhersehbar sein können.
- Halten Sie sich von Ecken fern und vermeiden Sie es, Spiegeln gegenüberzustehen.
- Idealerweise sollten Sie so nah wie möglich in der Mitte des Raumes stehen, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.
- Letzter Tipp: Ihr Schlafzimmer ist oft die beste Option.

Einige Tipps zur Optimierung **Sprachkalibrierung:**

- Sprechen Sie laut, aber ohne zu schreien.
- Projizieren Sie Ihre Stimme, als würden Sie mit jemandem am anderen Ende des Raumes sprechen.
- Minimieren Sie Pausen so weit wie möglich.

Persönliche Kalibrierung



Durch die Kalibrierung wird die Audioleistung Ihrer Brille entsprechend der Form Ihres Kopfes optimiert, einschließlich:


- Verringerung der akustischen Rückkopplung
- Reduzierung der eigenen Stimme
-

Um mit der Kalibrierung zu beginnen, suchen Sie einen ruhigen Raum.


Drücken Sie **Kalibrierung starten**

Hinweise

Die Kalibrierungsfunktion finden Sie in den Einstellungen. Wir empfehlen, die Kalibrierung alle 6 Monate durchzuführen.

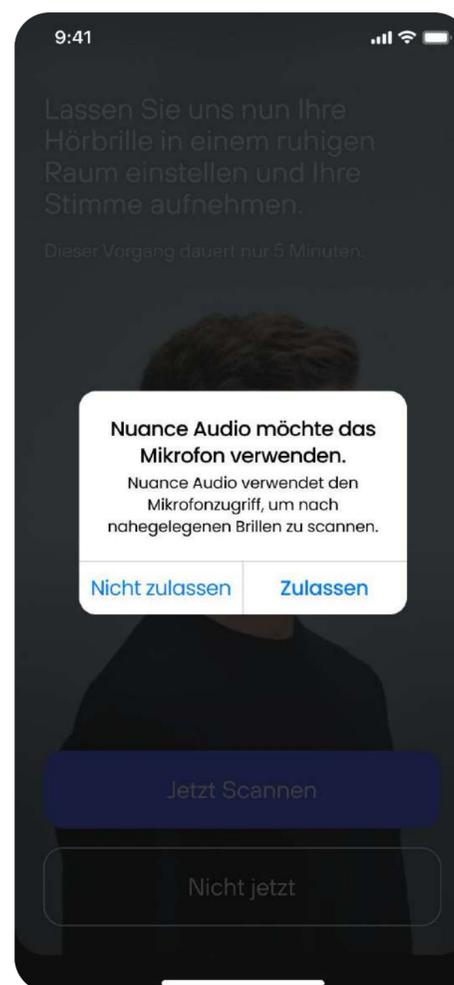

Erlauben Sie dem Mikrofon Ihres Telefons, Geräusche zu messen und zu validieren. Drücken Sie **Erlauben**

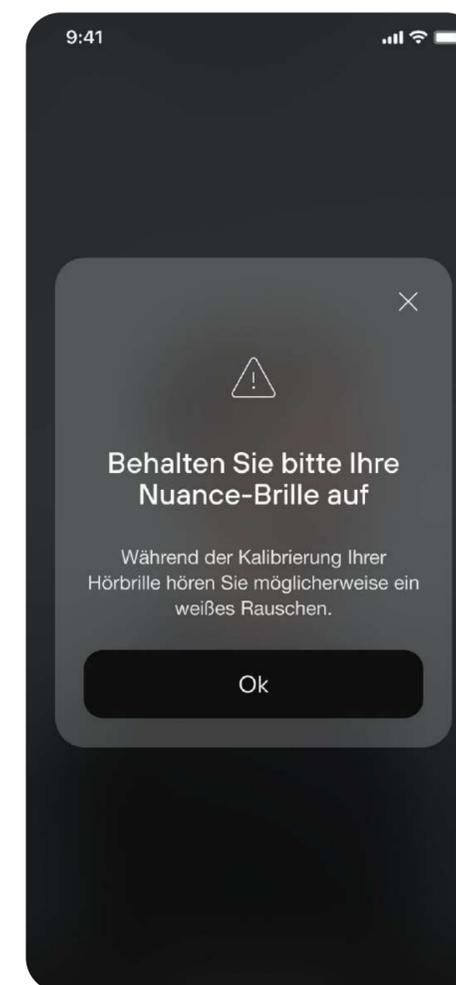


Ein Pop-up erinnert Sie daran, Ihre **Nuance Audio™ Glasses** während des gesamten Prozesses aufzubehalten.




Persönliche Kalibrierung



Schritt 1.1
Umgebungsgeräuschmessung..
Lassen Sie Ihre Brille auf
und tippen Sie **Audio-
Beispiel abspielen**

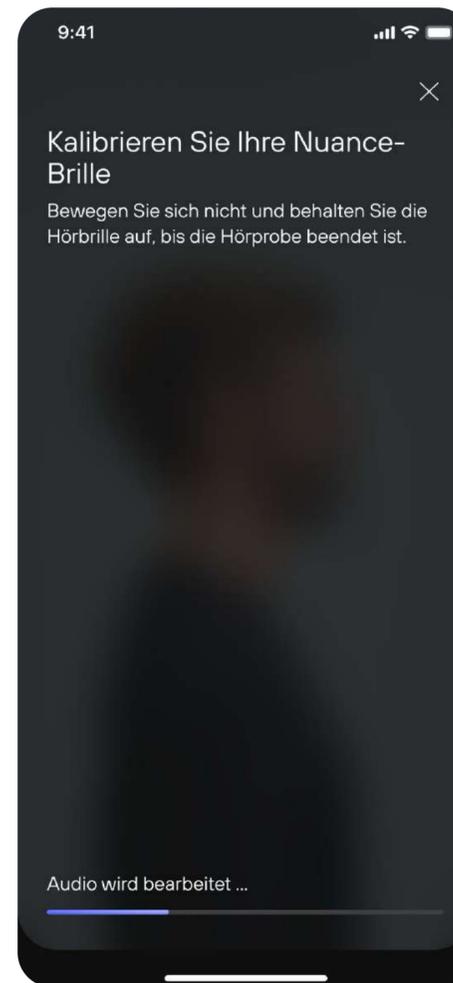


Schritt 1.2
Bewegen Sie sich nicht
und nehmen Sie die Brille
nicht ab, **warten Sie bis
zum Ende des Audio-
Beispiels.**

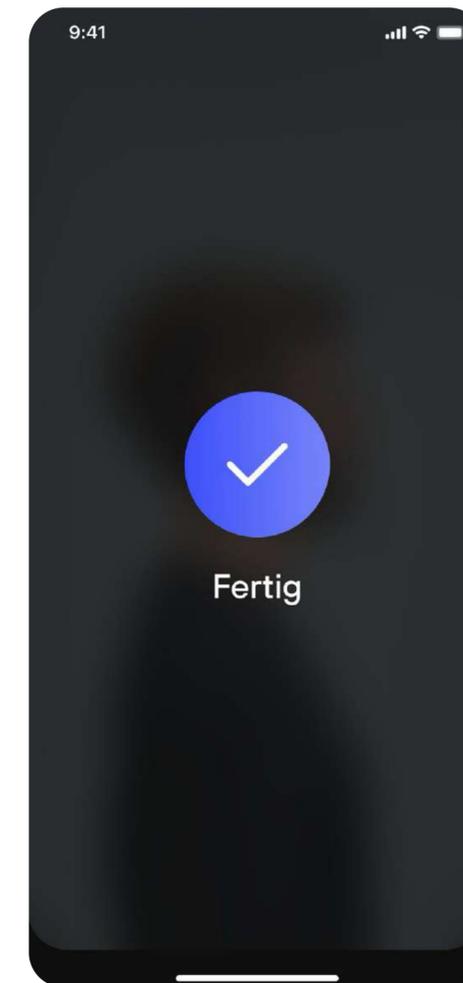


Schritt 1.3
Umgebungsgeräuschmessung abgeschlossen.



Sprachkalibrierung

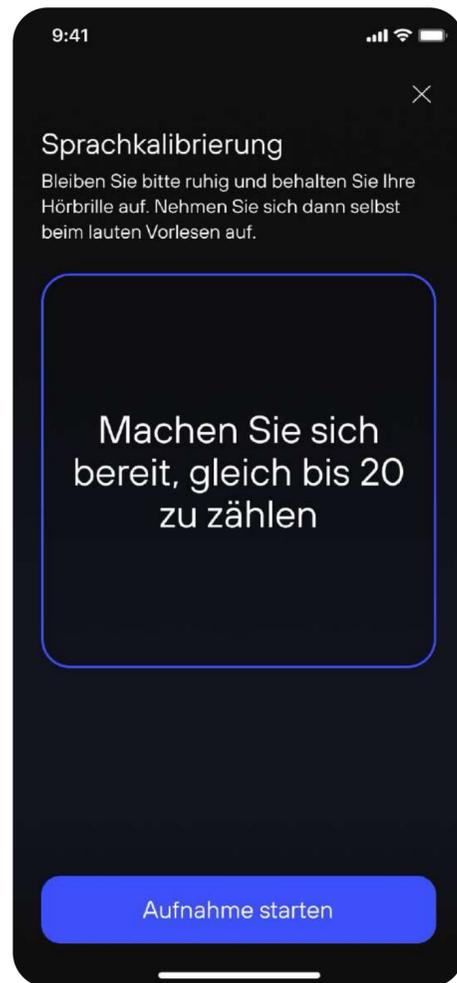

Schritt 2.1
Kalibrierung meiner eigenen Stimmen.
Bewegen Sie sich nicht und nehmen Sie die Brille nicht ab
Drücken Sie **Aufnahme starten**

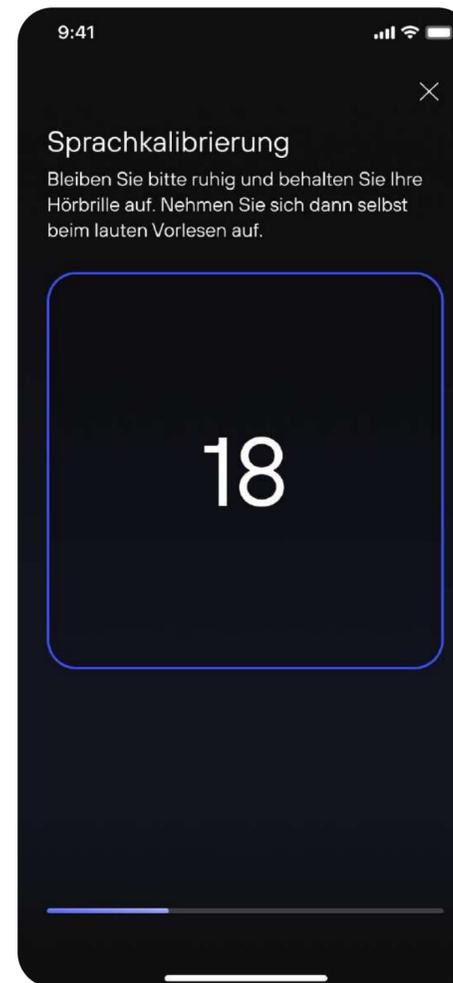

Schritt 2.2
Zählen Sie laut, bis die Fortschrittsanzeige das Ende erreicht.



Schritt 2.2
Die persönliche Kalibrierung wurde erfolgreich abgeschlossen.



Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)