

Hörkonfigurationen: Audiomodus



Was ist der Audiomodus?

Im Audiomodus können Sie entscheiden, worauf Sie sich konzentrieren möchten. Sie haben die Wahl zwischen den Geräuschen, die vor Ihnen oder um Sie herum zu hören sind.

Wählen Sie zwischen diesen beiden Optionen:

Frontalmodus

Verstärkt die Geräusche vor Ihnen, sodass Sie sich auf ein Gespräch konzentrieren können, insbesondere in lauten Umgebungen.



Rundum-Modus

Dieser Modus verstärkt Geräusche und Sprache aus allen Richtungen, was ideal für Situationen wie Gehen oder Fahren ist, in denen Sie Ihre Umgebung im Auge behalten müssen.







Wie wird der Audiomodus eingestellt?

Sie können auf verschiedene Arten zwischen den Modi wechseln: über die Nuance Audio™ Glasses, mit der Nuance Audio™ Remote Control oder über die Nuance Audio™ App.

Auf den Nuance Audio™ Glasses
Doppeltippen Sie auf den Bereich am rechten Bügel. Ein akustisches Signal bestätigt Ihre Eingabe.

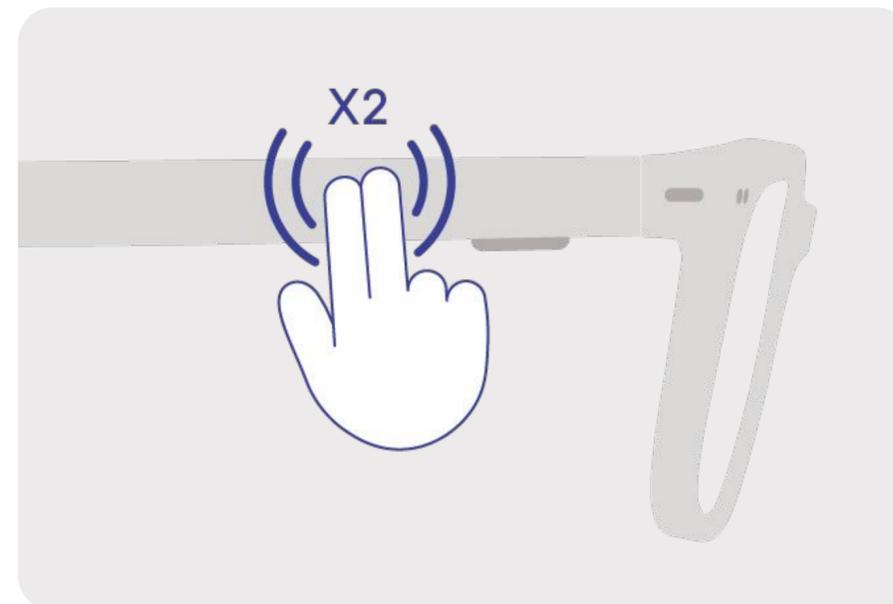

Mit Nuance Audio™ Remote Control
Drücken Sie die Taste für den Audiomodus.

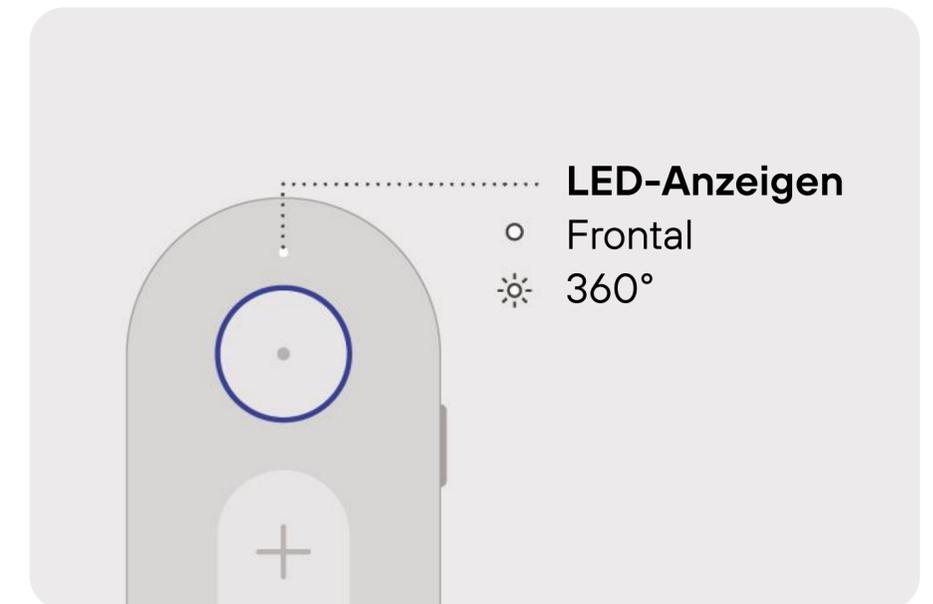




Wie wird der Audiomodus eingestellt?

Mit der Nuance Audio™ App

Wischen oder tippen Sie auf den **Audiomodus-Schalter**, der auf der Startseite der App verfügbar ist.

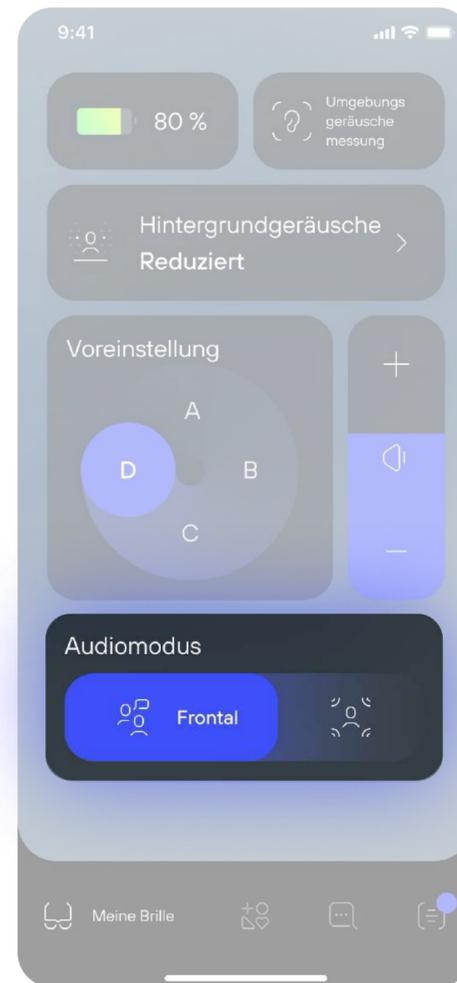

Frontalmodus

Dieser Modus verstärkt die Geräusche vor Ihnen, wodurch es einfacher wird, sich auf Gespräche mit jemandem direkt zu konzentrieren.





Wie wird der Audiomodus eingestellt?

Mit der Nuance Audio™ App

Wischen oder tippen Sie auf den **Audiomodus-Schalter**, der auf der Startseite der App verfügbar ist.



Rundum-Modus

Dieser Modus verstärkt Geräusche und Sprache aus allen Richtungen, was ideal für Situationen wie Gehen oder Fahren ist, in denen Sie sich Ihrer Umgebung bewusst sein müssen.





Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)