

# Hörkonfigurationen: Lautstärke der Brille




## Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

Wenn es um Ihre Nuance Audio™ Glasses geht, können Sie die Lautstärke auf verschiedene Weise anpassen.

### Mit Nuance Audio™ Glasses

Drücken Sie kurz auf die Taste am rechten Bügel, um die Lautstärke zu ändern. Ein akustisches Signal bestätigt die Änderung.

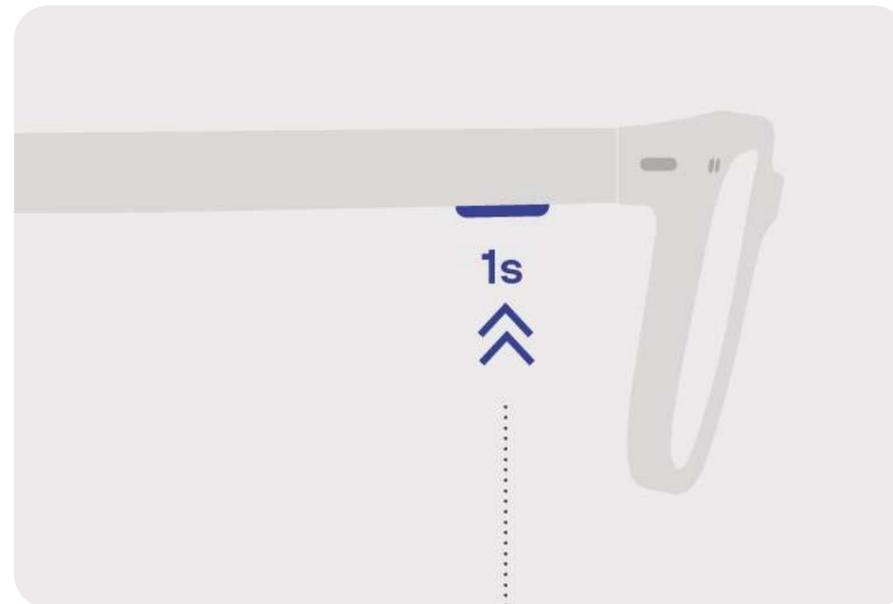

### Mit Nuance Audio™ Remote Control






## Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

### Mit der Nuance Audio™ App

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Lautstärkeregler auf dem Startbildschirm Ihrer Nuance Audio™ App zu verwenden, um die Lautstärke nach Ihren Wünschen anzupassen.





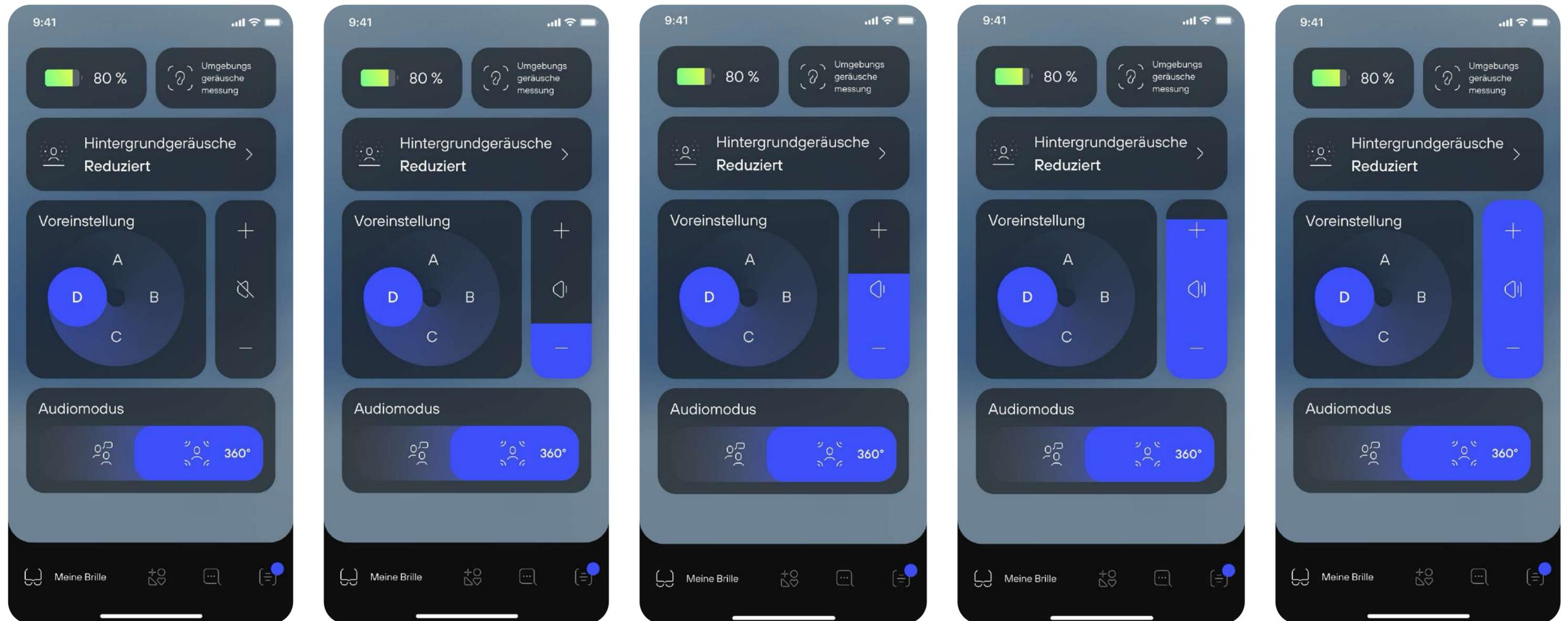




## Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

### Mit der Nuance Audio™ App

Zusätzlich können Sie im Einstellungsbereich der App bequem Ihre drei bevorzugten Lautstärkebereiche für einen einfachen Zugriff auswählen und einstellen.

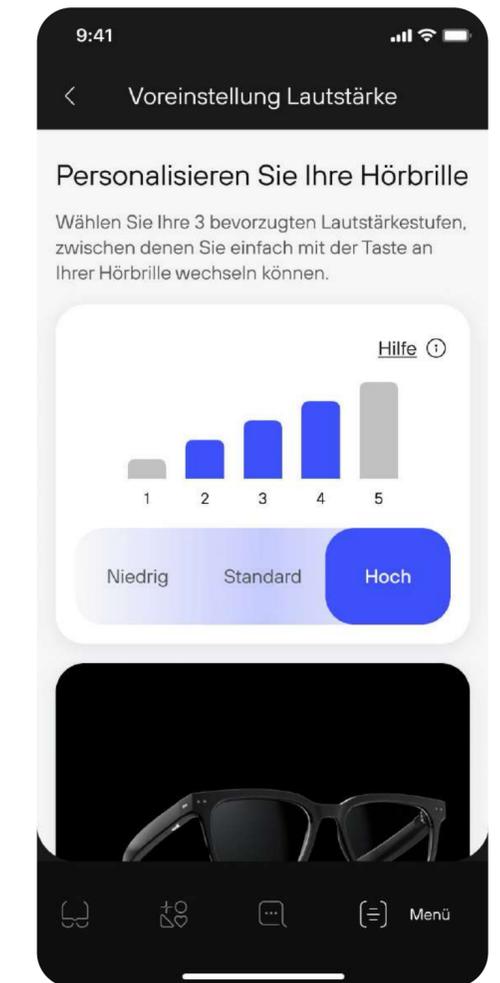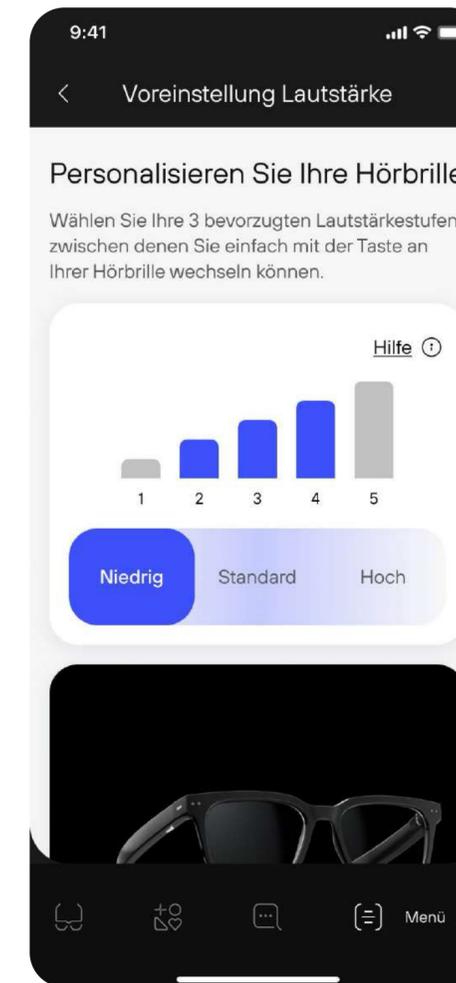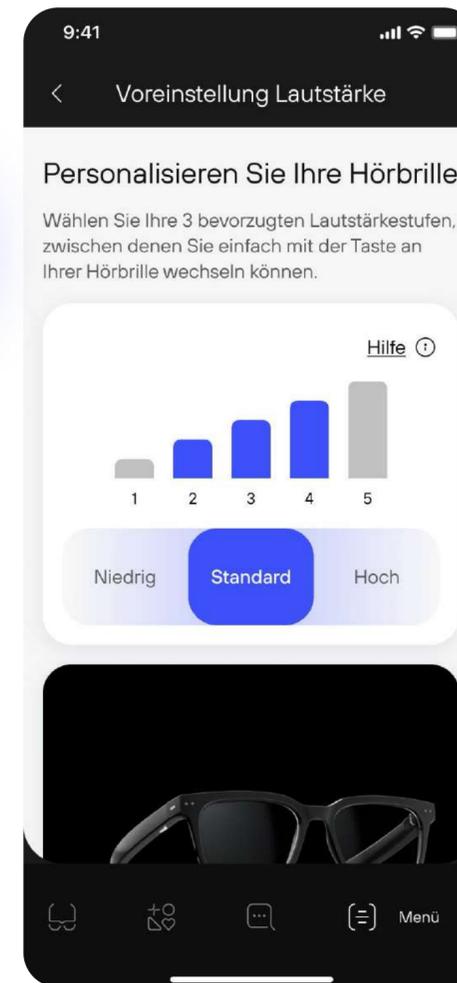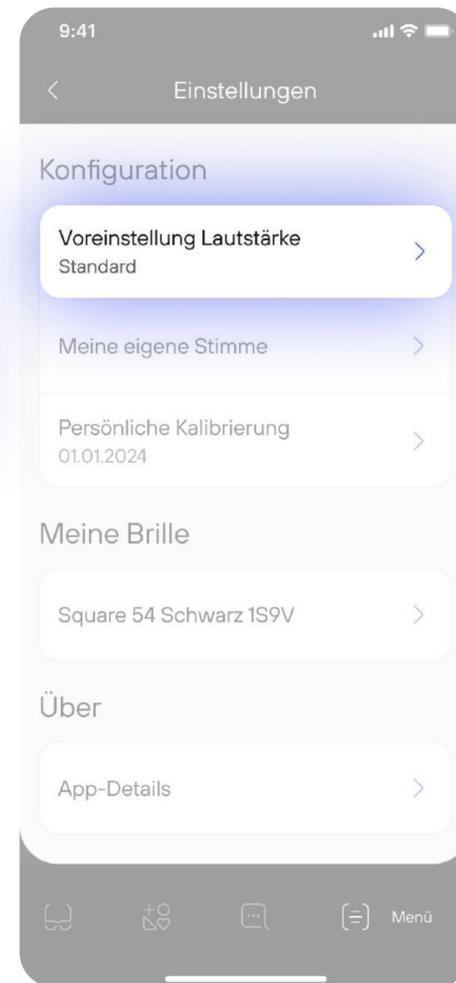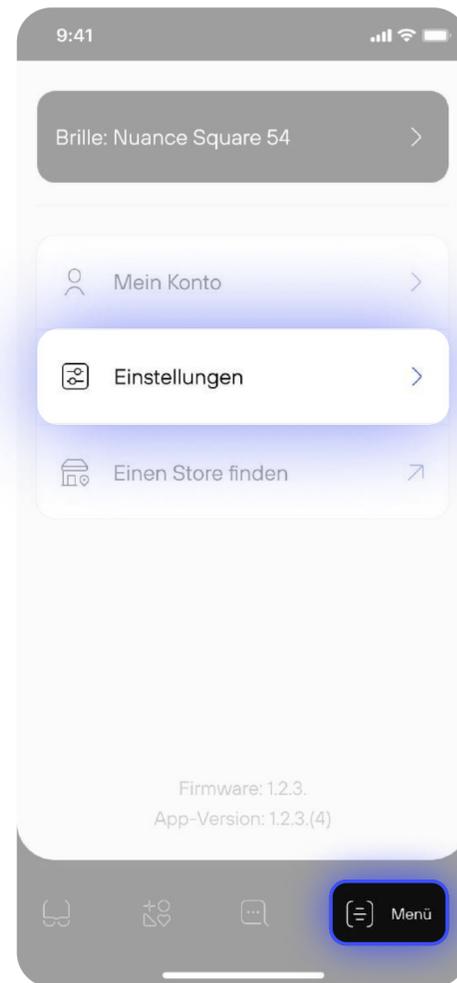



Für die aktuellsten Anweisungen  
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)