

Hörkonfigurationen: Meine eigene Stimme




Wie wird die eigene Stimme kalibriert?

Nuance Audio ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Stimme zu kalibrieren, sodass Sie selbst bestimmen können, wie klar Sie sie für Ihren eigenen Hörkomfort hören möchten.




Wie wird die eigene Stimme kalibriert?

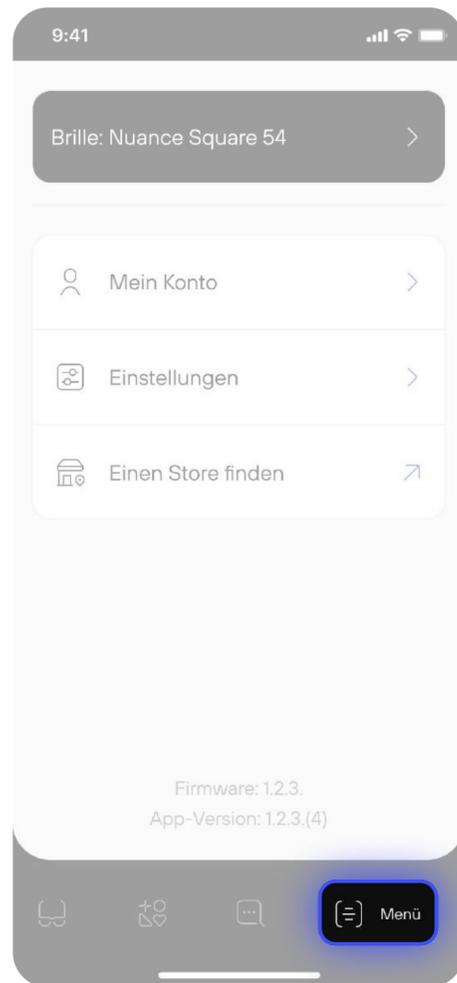


Tippen Sie im Dashboard der Nuance Audio™ App auf Menü (untere rechte Ecke in der Navigationsleiste).

Tippen Sie im Menü auf **Einstellungen**

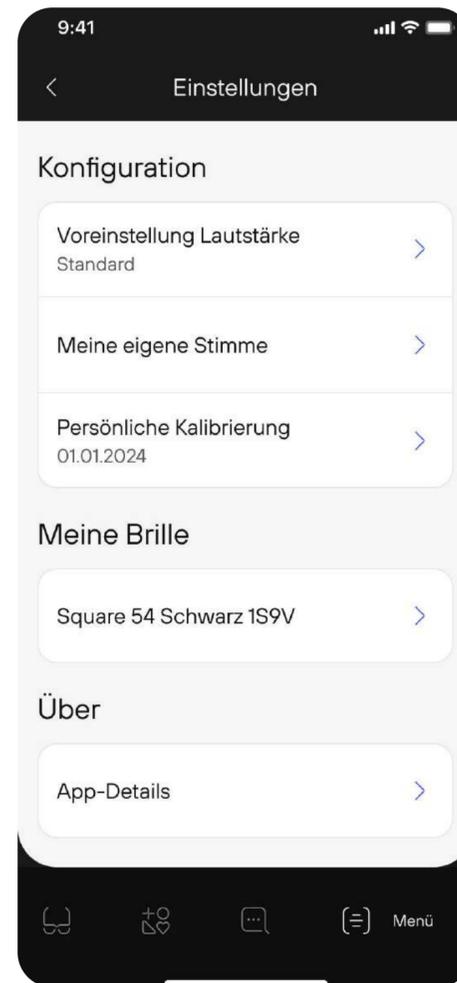

Wählen Sie in den Einstellungen **Meine eigene Stimme**

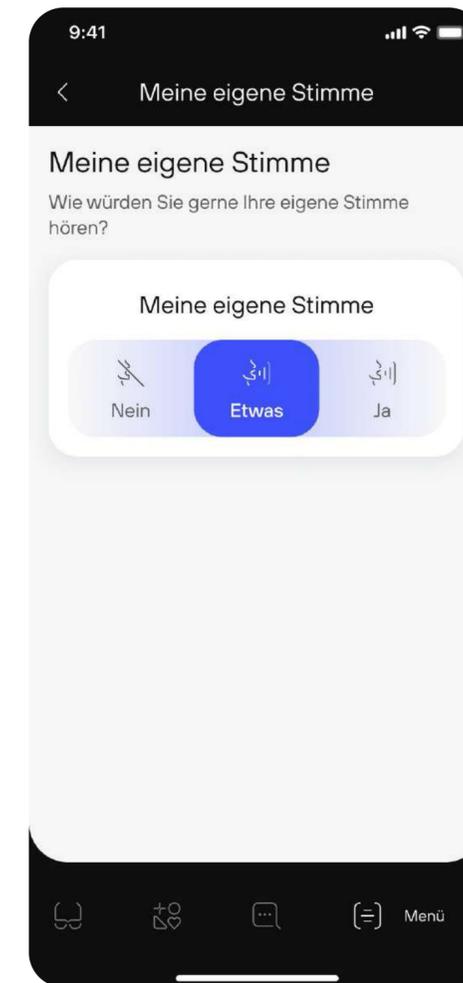

Sie können jetzt **die Verstärkungsstufen frei** an Ihre Bedürfnisse und Ihre Umgebung anpassen.

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die Einstellung der **persönlichen Kalibrierung auch relevant ist**, um Ihr Gesamterlebnis zu optimieren, um den natürlichsten Klang und die Klarheit Ihrer eigenen Stimme sowie anderer Audioeinstellungen zu gewährleisten.



Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)