


Wie man auflädt



Sind Sie bereit, Ihre Nuance Audio™ Glasses aufzuladen?


Schritt 1

Schließen Sie das Nuance Audio™ Charging Pad mit einem Standard-USB-C-Ladegerät oder einem USB-C-Netzteil (mindestens 5 V) an, um das Nuance Audio™ Charging Pad und das USB-C-Kabel anzuschließen.

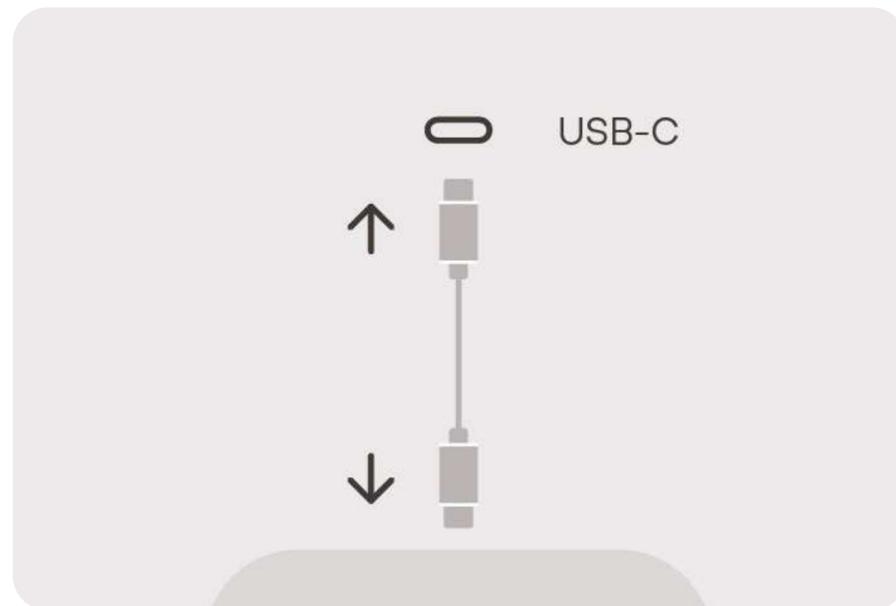

Schritt 2

Falten Sie dann Ihre Nuance Audio™ Glasses und legen Sie sie direkt auf das Ladepad, genau wie gezeigt. Dank der im Inneren des Ladepads befindlichen Magneten können Sie Ihre Brille richtig positionieren.

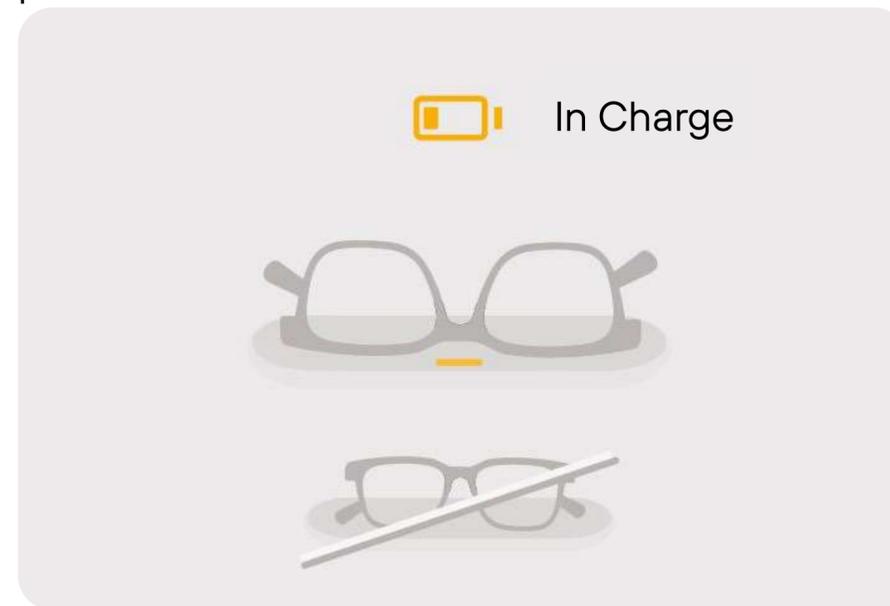




Wie erkennt man, wann die Brille aufgeladen ist?


Orangefarbene LED

Der Ladevorgang ist im Gange.

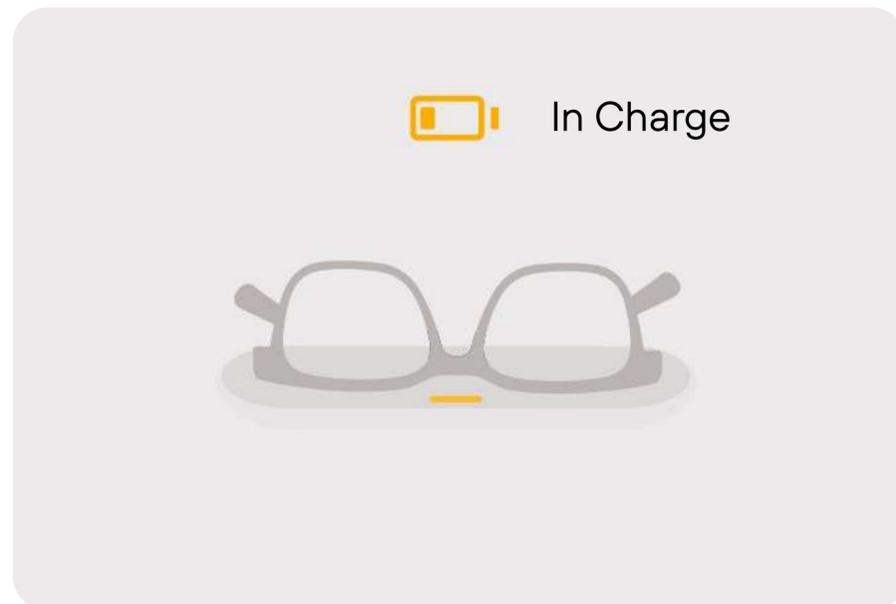

Grüne LED

Die Brille ist vollständig aufgeladen
(mindestens 96 %).

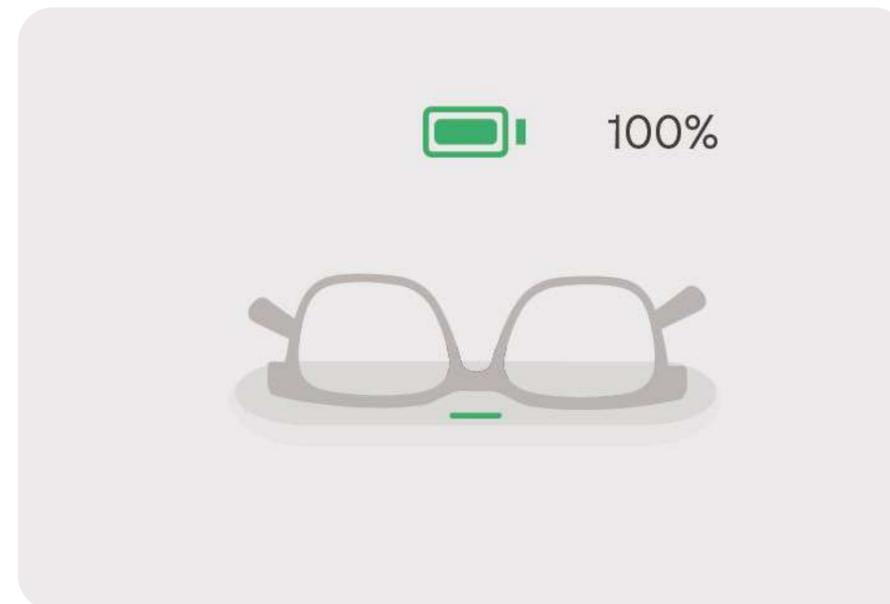



Akkustandanzeige

Wenn Sie Ihre Brille in die Hand nehmen, zeigen sowohl die LED des Ladepads als auch die LED des Rahmens einige Sekunden lang den Akkustand an.

Rote LED

Der Akkustand liegt unter 20 %.



Grüne LED

Der Akkustand liegt über 20 %.





Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)