

Pflegehinweise



Sind Nuance Audio™ Glasses wasserdicht?

Die Nuance Audio™ Glasses sind standardmäßig IPX4-konform, einschließlich der Mikrofonbereiche. Diese Klassifizierung bietet Schutz vor Wasserspritzern und ist somit für Workouts oder leichten Regen geeignet. Zwar sind sie nicht für ein Eintauchen ins Wasser geeignet, Spritzwasser kann ihnen jedoch nichts anhaben.





Können Schweiß, Make-up und andere gängige chemische Stoffe meine Nuance Audio Brille beschädigen?

Das Design der Nuance Audio™ Glasses ist so konzipiert, dass sie gegen gängige Chemikalien wie Handdesinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Handseife, Haargel und Sonnenschutzmittel beständig ist.





Wie sollte ich die Gläser und das Gestell reinigen?

Tägliche Reinigung:

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und neutrale Seife (auf das Tuch sprühen, nicht direkt auf die Gläser). Vermeiden Sie alle Arten von Sprays, Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die Alkohol oder Ammoniak enthalten. Halten Sie Ihre Brille nicht unter fließendem Wasser und verwenden Sie kein anderes Reinigungswerkzeug (wie eine Hörgerätbürste, einen Zahnstocher oder Druckluft) zur Reinigung.

Tiefenreinigung:

Um die Gläser zu reinigen, verwenden Sie ein Brillenspray und sprühen Sie es auf das Tuch und nicht direkt auf die Gläser. Reinigen Sie sanft die äußeren Teile der Brille, einschließlich der 6 Mikrofone und 4 Lautsprecher.

Schützen:

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Brille in ihrem vorgesehenen Etui aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird.

Im Falle eines Kontakts mit Salzwasser, Poolwasser oder anderen Chemikalien wie Kosmetika, Haarspray, Sonnencreme und Insektenschutzmitteln empfehlen wir, Ihre Brille sofort mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch abzuwischen.



Für die aktuellsten Anweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

[➤ Anleitung anzeigen](#)