

Aggiornamento Firmware



I primi passi per effettuare l'aggiornamento del firmware


Il firmware è una tipologia specifica di software integrato nei tuoi Nuance Audio™ Glasses che controlla il funzionamento degli occhiali.

Gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni, aggiungono nuove funzionalità o risolvono bug all'interno del dispositivo.

Per garantire il funzionamento ottimale dei tuoi Nuance Audio™ Glasses, è importante aggiornare regolarmente il firmware. **Ecco come fare:**


Verifica il livello della batteria Nuance Audio™ Glasses:

Assicurati che il livello della batteria degli occhiali sia superiore al 30%. Il firmware non può essere aggiornato se la batteria è troppo bassa.

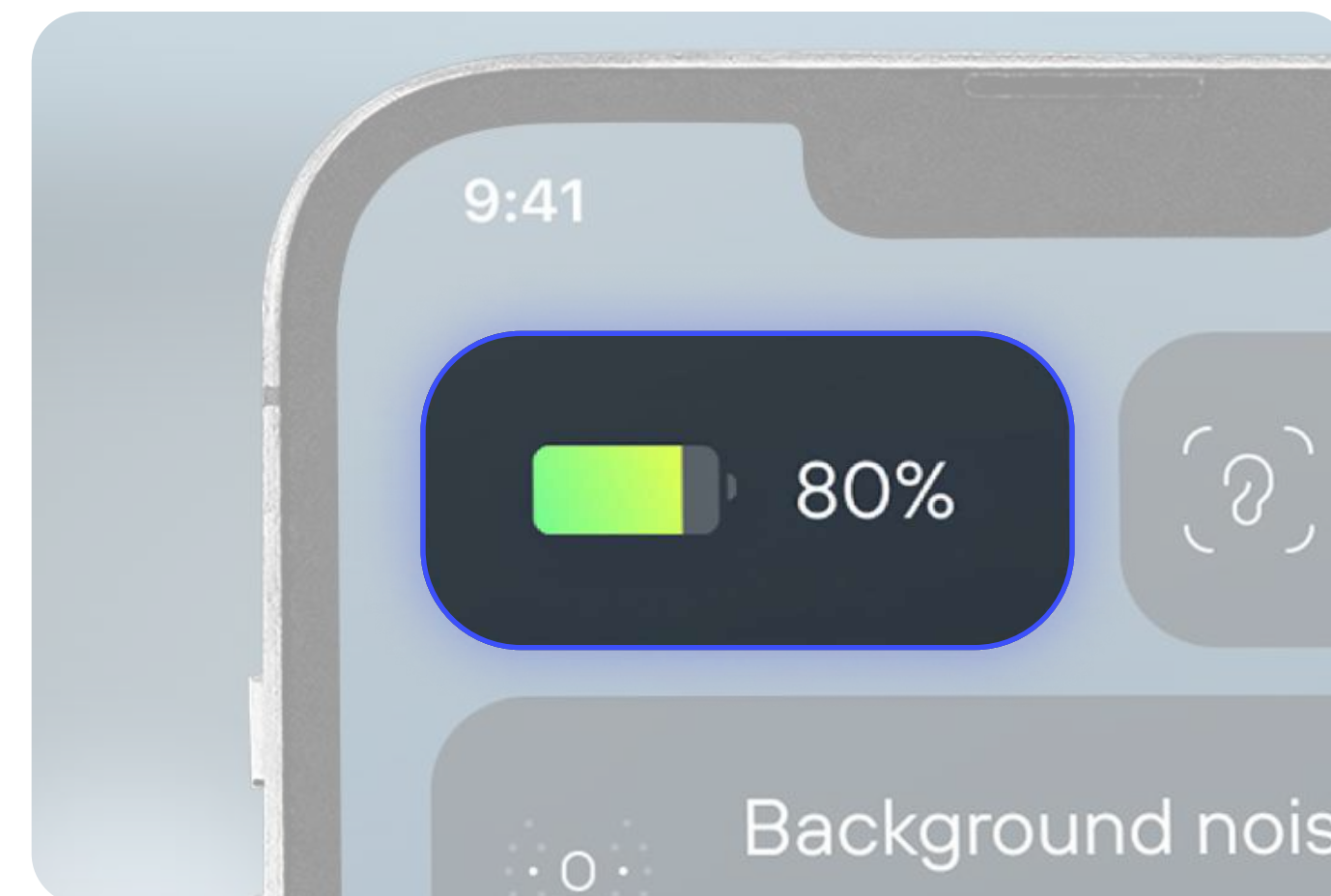

Controlla la connessione del dispositivo:


Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso a un Wi-Fi stabile o a una rete dati mobile per eventuali aggiornamenti.

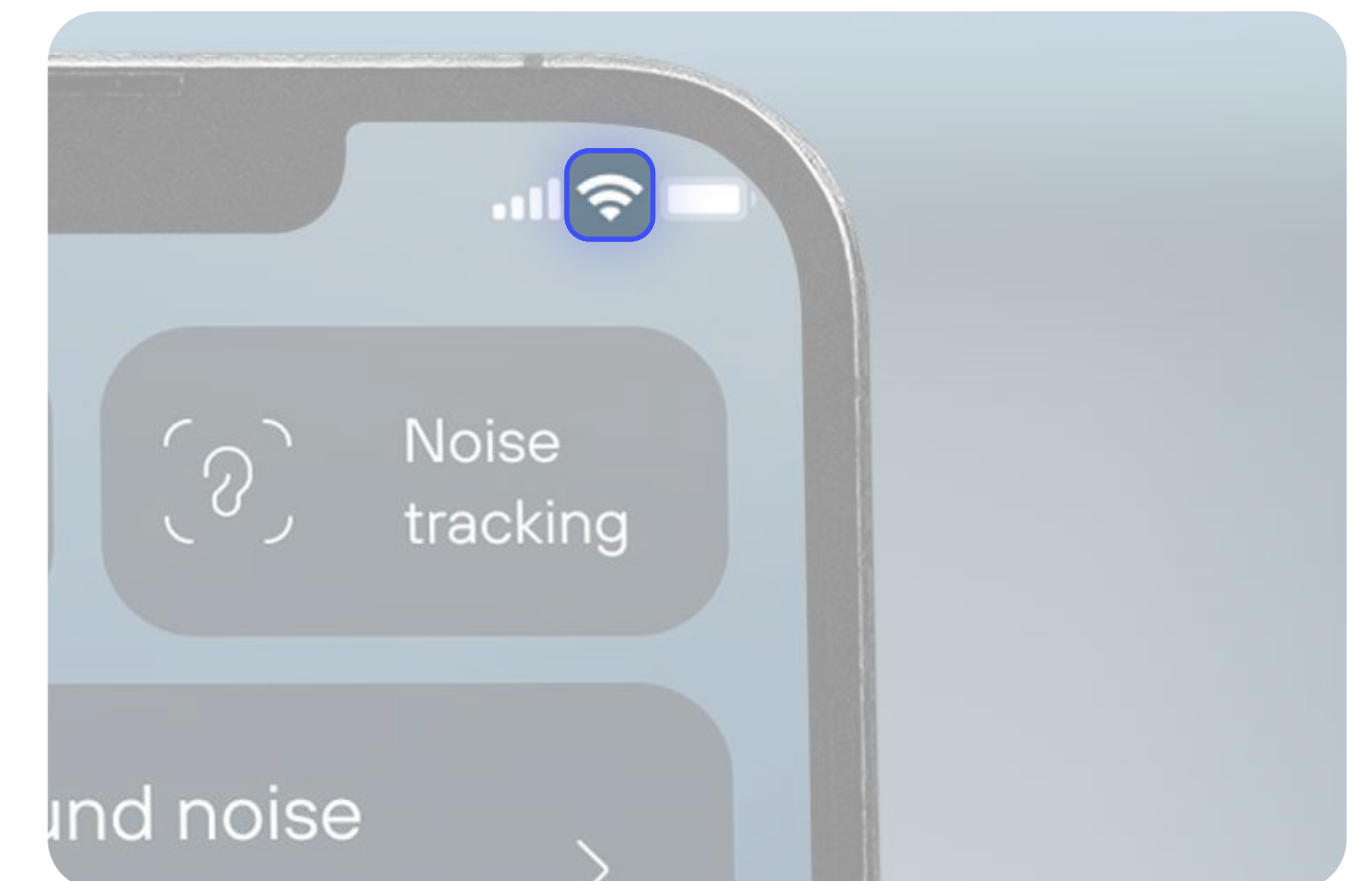




Come fare per aggiornare il firmware

Dopo aver controllato i livelli della batteria e il collegamento del dispositivo, puoi aggiornare il firmware seguendo questi passaggi:

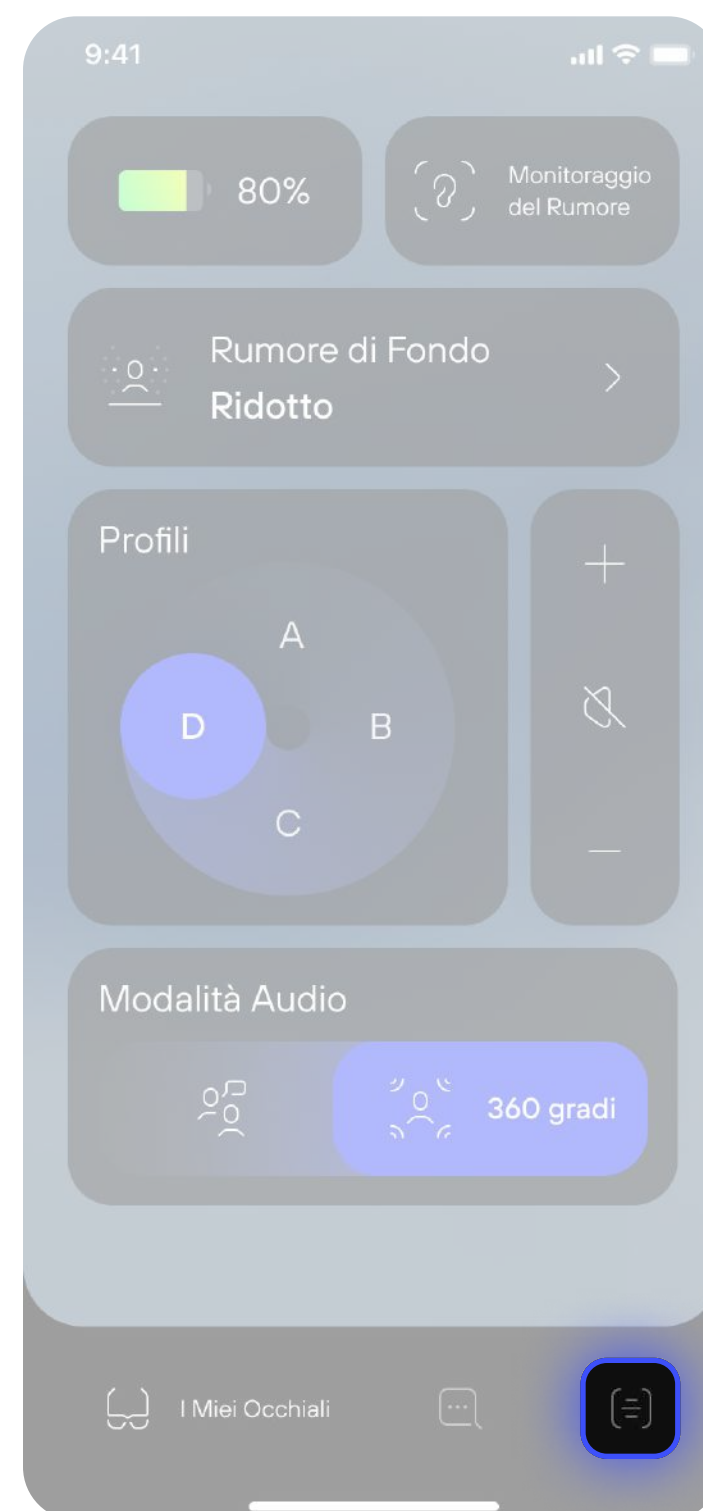

Step 1
Apri la Nuance Audio™ App sul tuo dispositivo mobile, poi seleziona l'icona del **Menu** in basso a destra nella barra di navigazione della pagina iniziale.

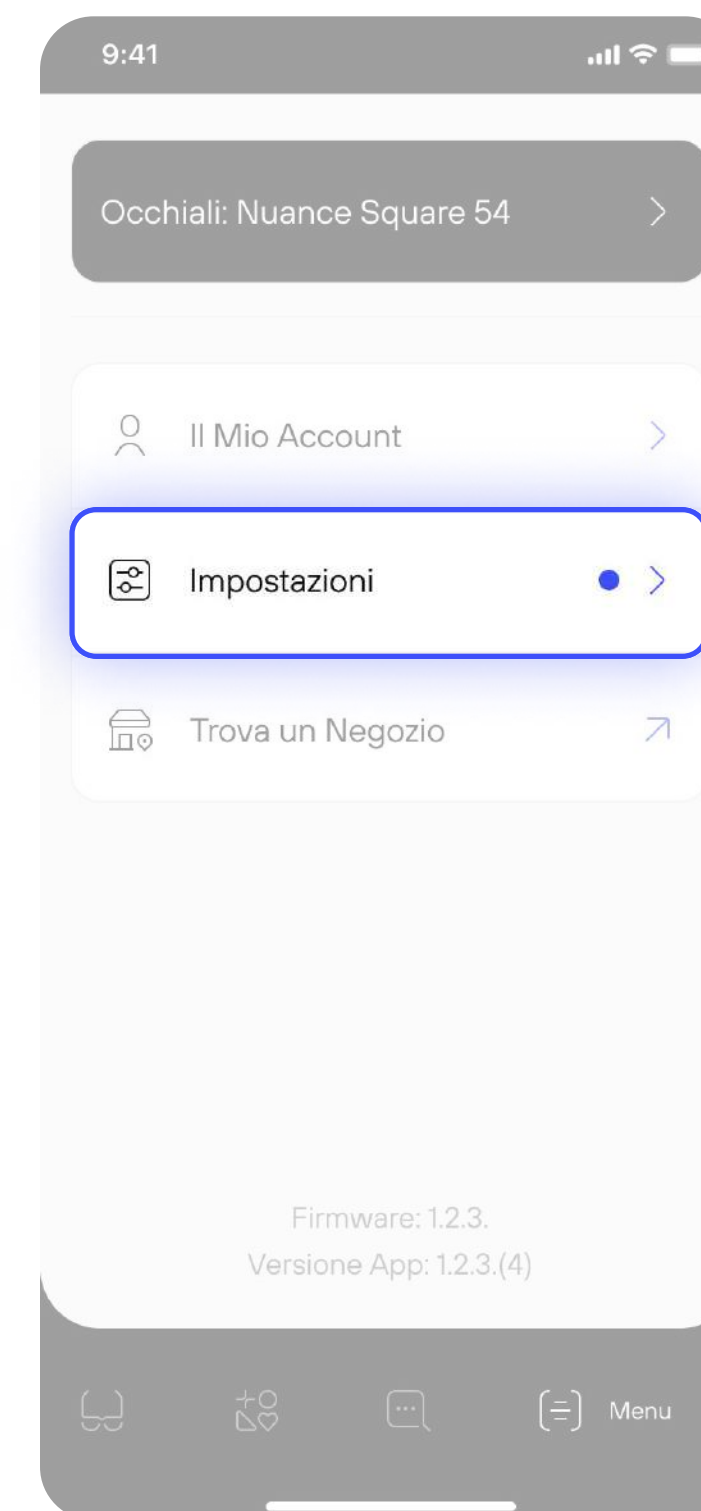

Step 2
Seleziona **Impostazioni**.



Come fare per aggiornare il firmware



Step 3
Tocca il nome dei Nuance Audio™ Glasses visualizzato sotto alla sezione **I miei occhiali** e verifica la presenza di eventuali aggiornamenti del firmware.



Step 4
Nella sezione I miei occhiali potrai visualizzare lo stato attuale del firmware e gli eventuali aggiornamenti disponibili. Per avviare l'aggiornamento del firmware, **seleziona la scheda Versione del firmware**.

Note
L'app ti avviserà in homepage se è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware.



Step 5
Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni nella Nuance Audio™ App per eseguire in sicurezza l'aggiornamento del firmware.




Come fare per aggiornare il firmware

Step 6

L'aggiornamento del firmware sarà **scaricato sull'app** e poi **caricato sui tuoi Nuance Audio™ Glasses**.

Al termine della procedura, gli occhiali si riavvieranno automaticamente riportandoti nella pagina iniziale dell'app.

In caso di difficoltà durante l'aggiornamento, contatta il [Centro supporto](#) per ricevere assistenza.

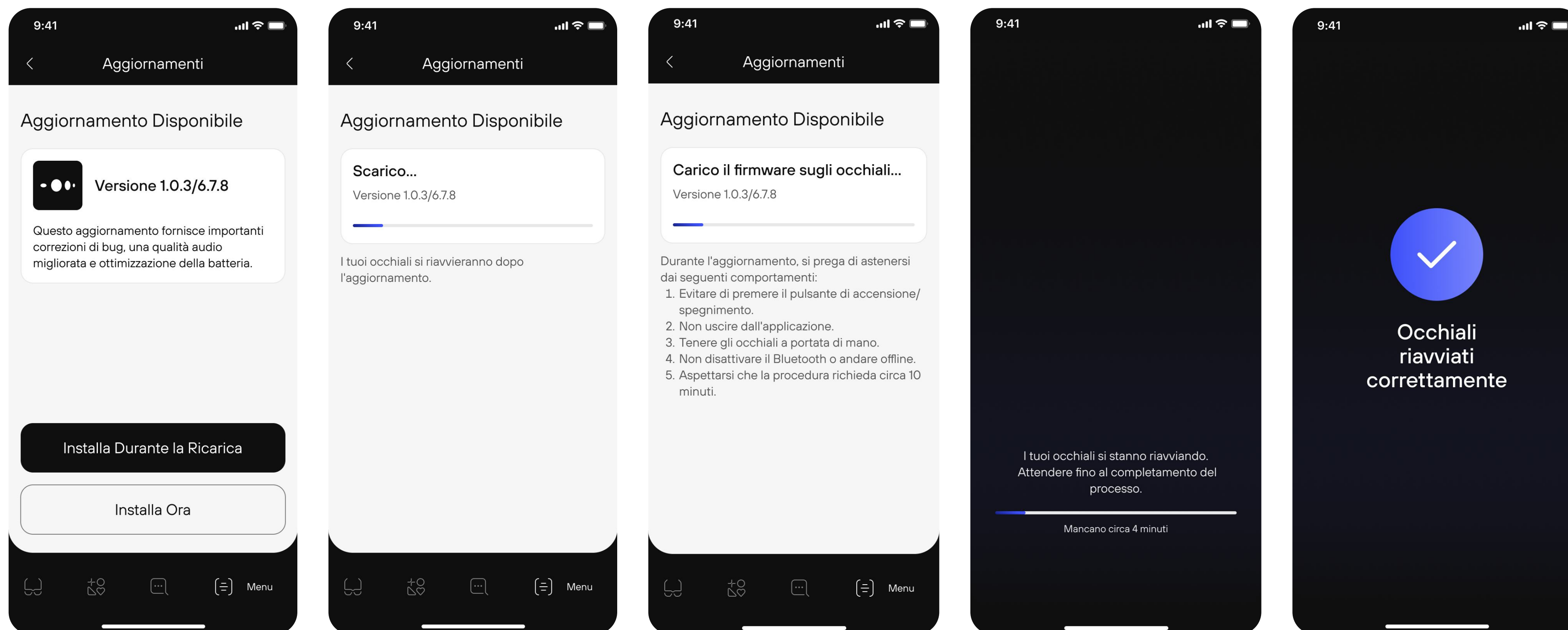



Per le Istruzioni più aggiornate
si prega di seguire questo link

[↗ Vedi Istruzioni per l'Uso](#)