


Come iniziare: Creazione dell'Account, Abbinamento, Calibrazione



Contenuto della confezione



Contenuto della confezione

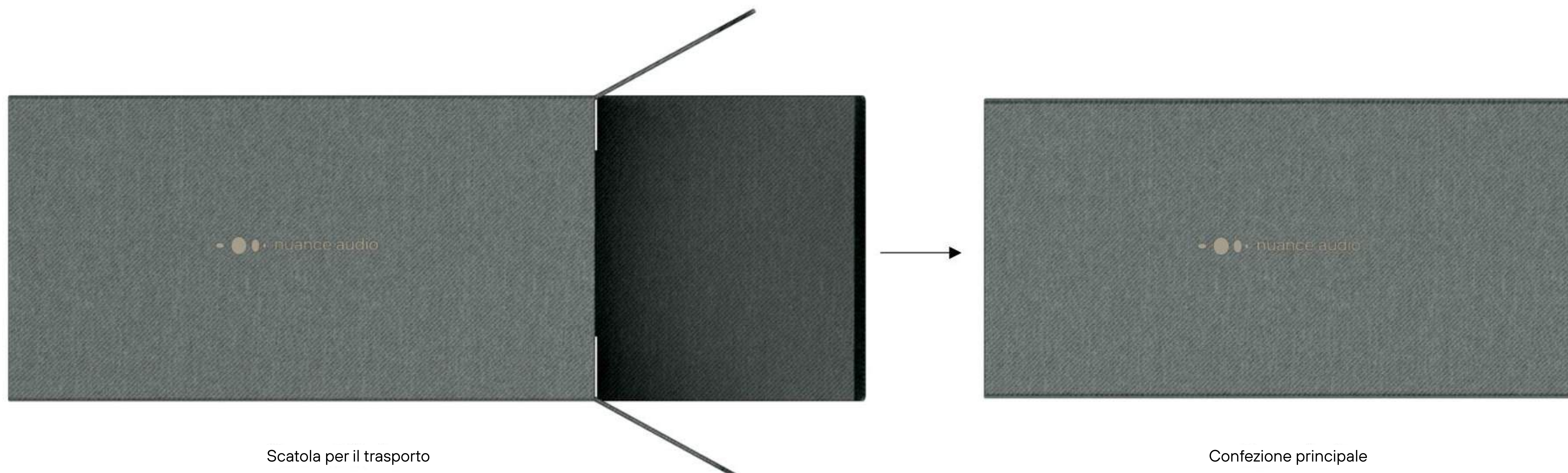




Contenuto della confezione



Occhiali




Charging pad

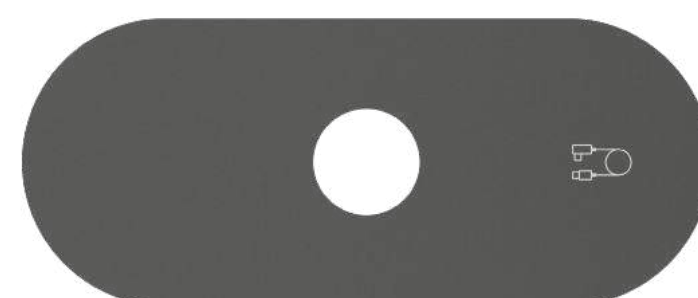

Confezione cavo



Custodia pieghevole

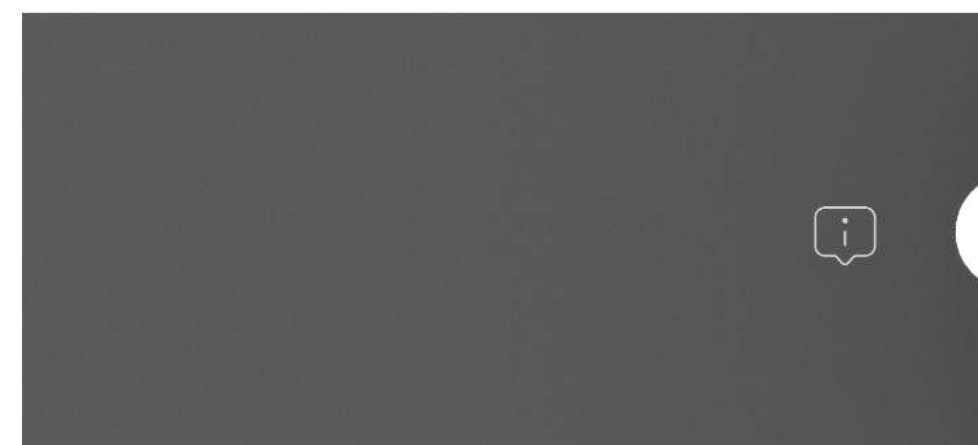


Bustina




Guida per l'utente



Sicurezza e garanzia

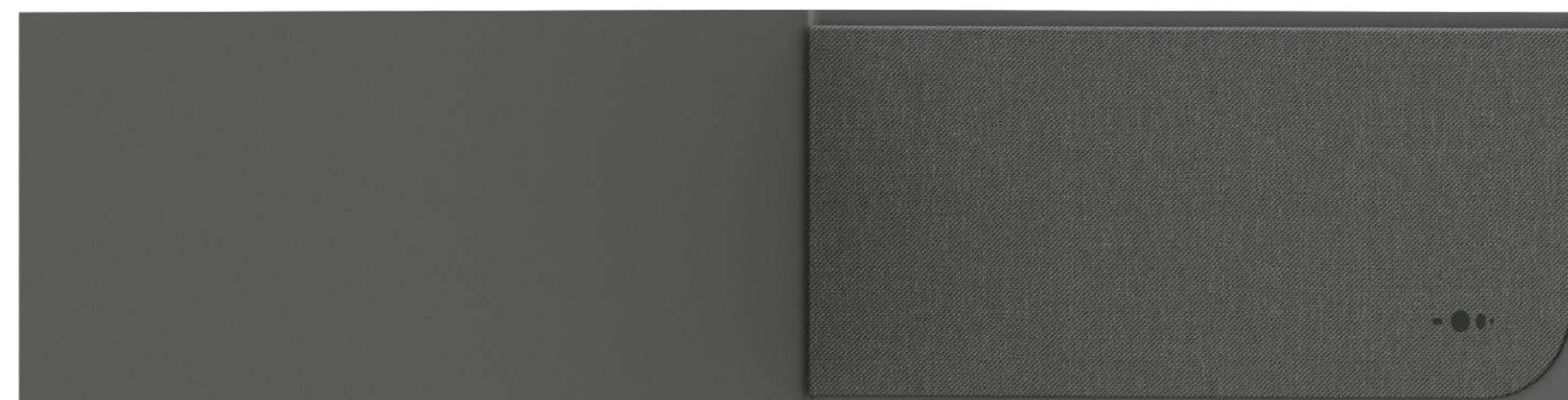

Bustina del panno di pulizia + panno di pulizia

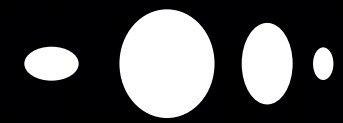

Attiva e configura i Nuance Audio™ Glasses



Scaricare l'app e registrarsi



Per attivare e personalizzare i Nuance Audio™ Glasses, **scarica la Nuance Audio™ App** dall'App Store iOS o dal Google Play Store, dove troverai le Istruzioni per l'uso.


Apri la Nuance Audio™ App e registrati o accedi.
Segui le istruzioni passo per passo indicate sullo schermo per iniziare.



Abbinamento occhiali-telefono



Avvia l'abbinamento.
Premi **Avvia**

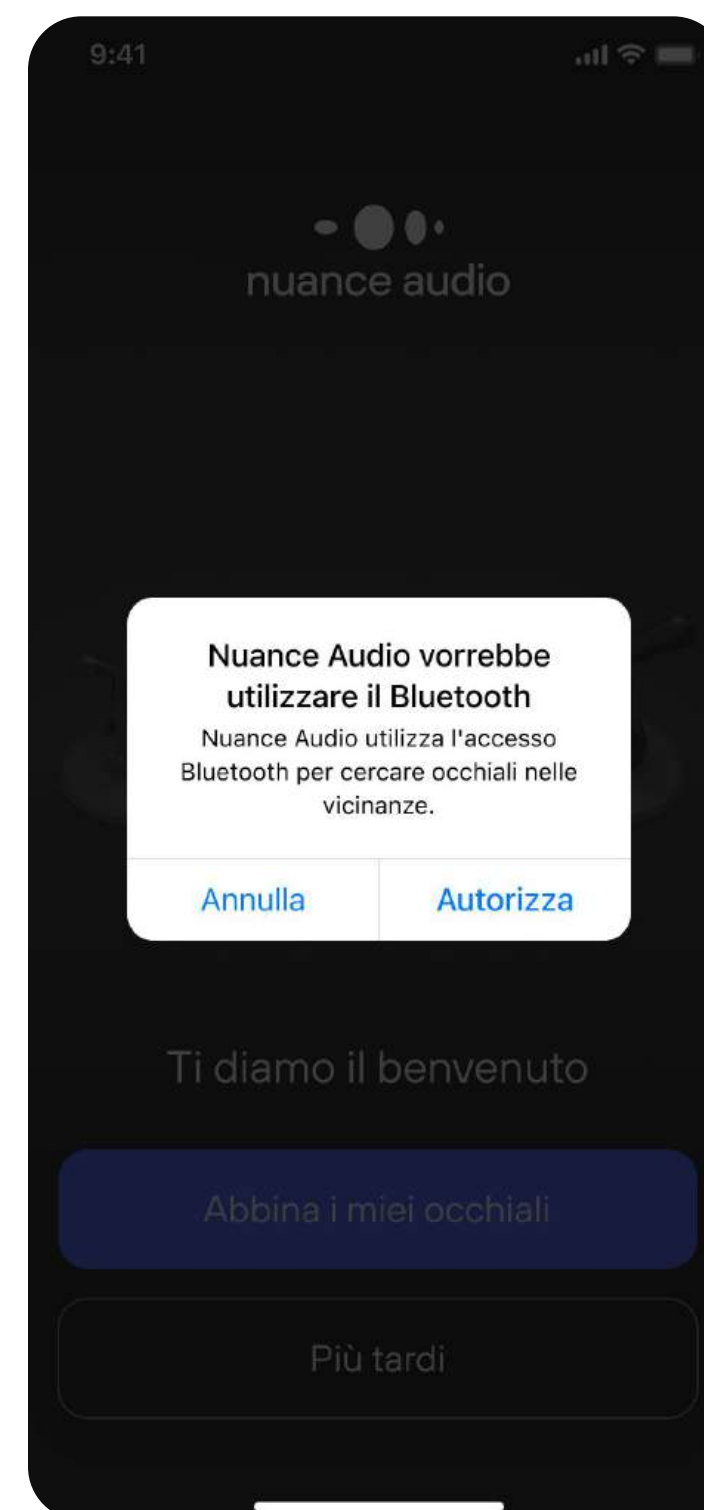

Abilita l'autorizzazione Bluetooth.
Seleziona **Autorizza**




Entra in modalità abbinamento **tenendo premuto il pulsante multifunzione** finché il LED blu non lampeggia.







Abbinamento occhiali-smartphone

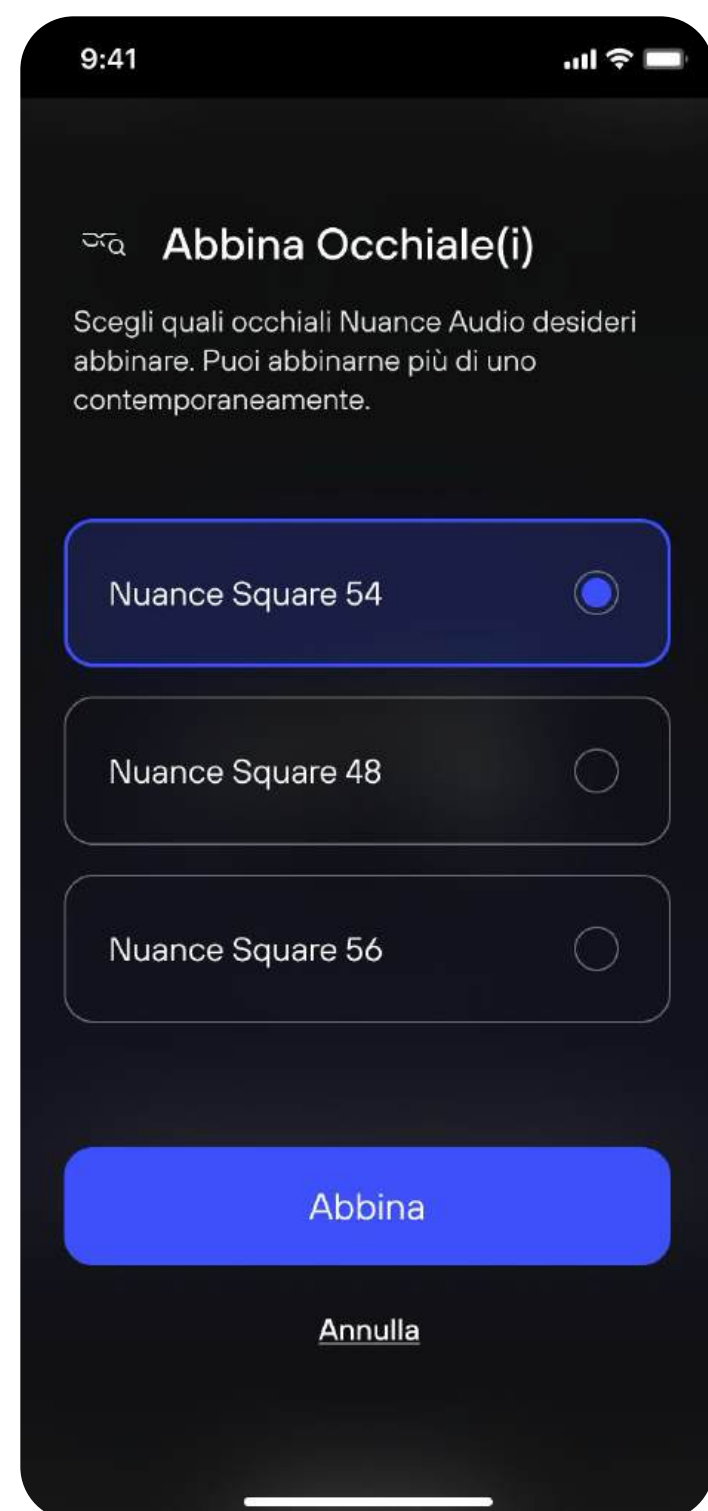

Seleziona Nuance Audio™ Glasses dall'elenco.
Seleziona **Abbina**

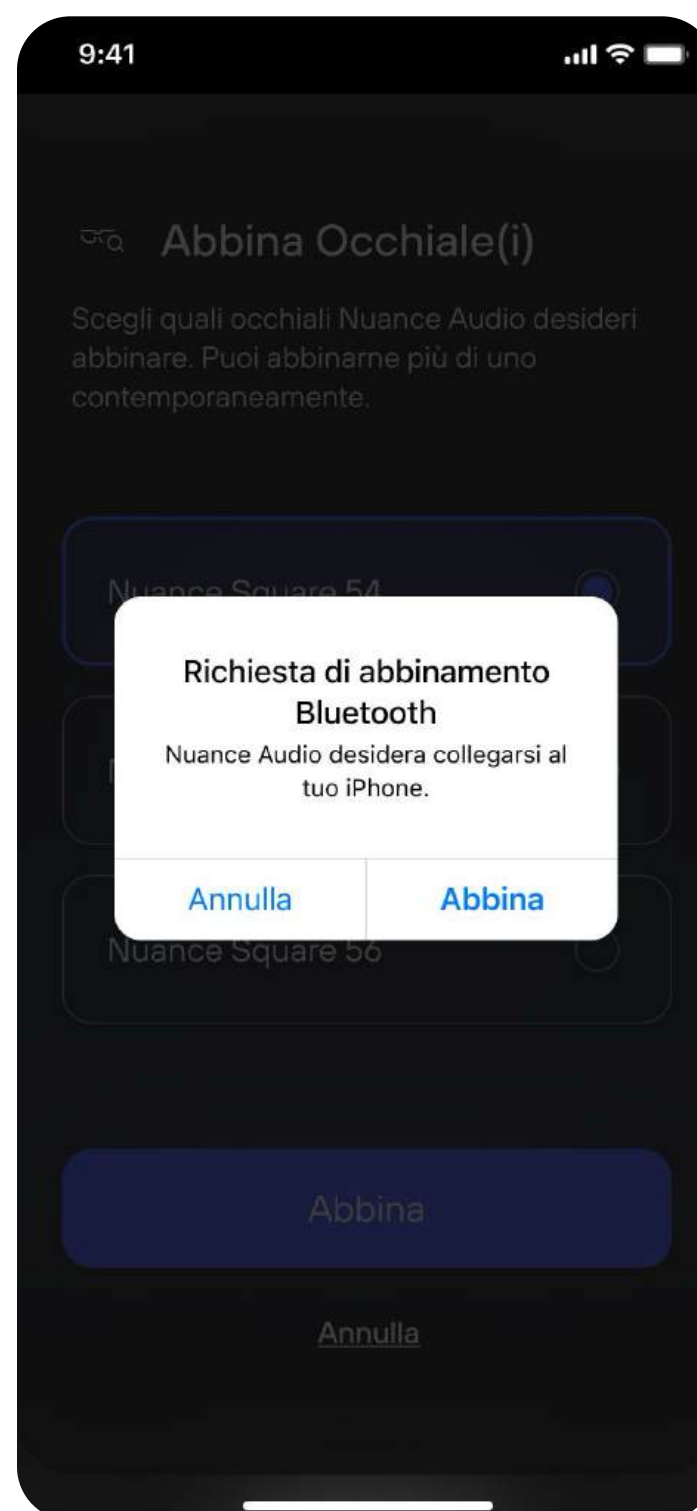

Accetta la richiesta di abbinamento con il tuo smartphone.
Seleziona **Abbina**

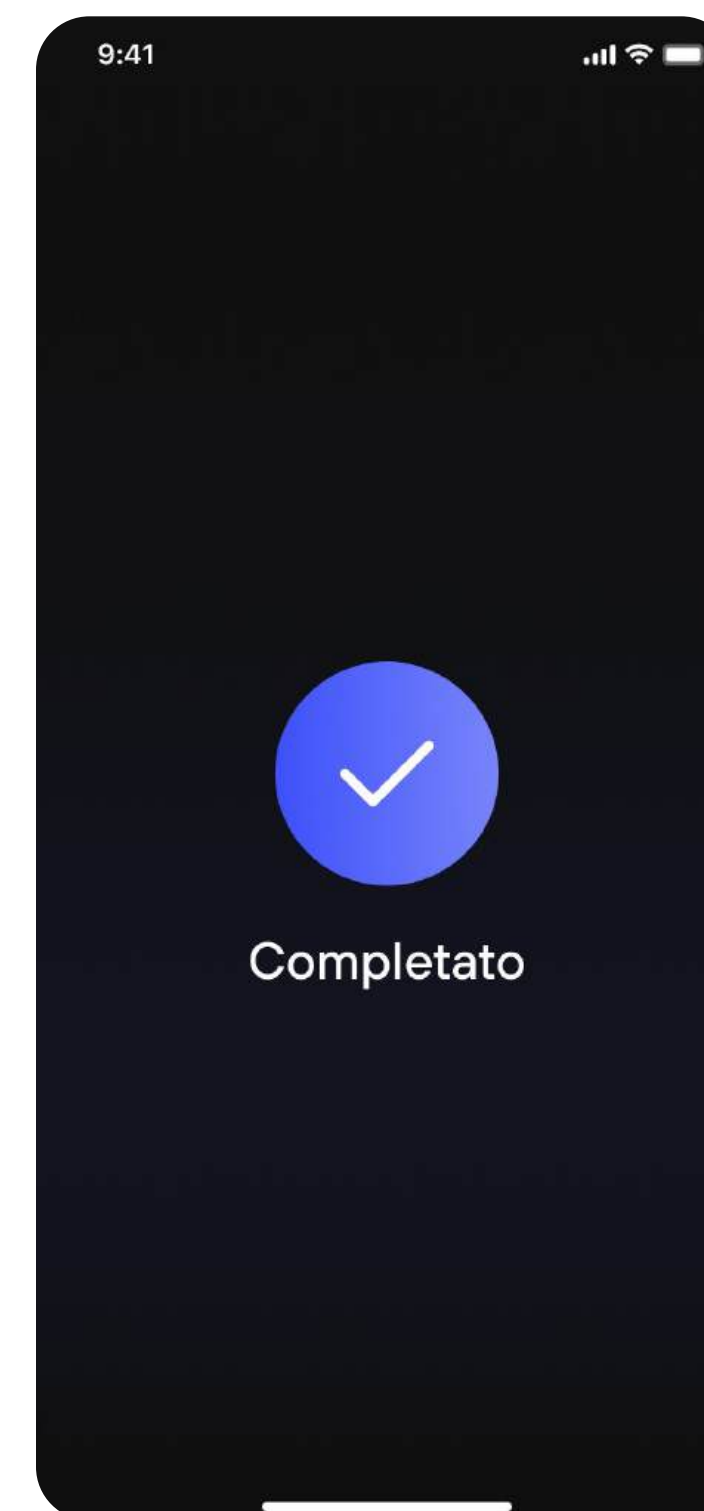

Abbinamento completato.



Come ottimizzare al meglio la calibrazione?

La calibrazione richiede solo un minuto, ma ti aiuta a ottenere il massimo dai tuoi occhiali Nuance Audio.

Se ne possiedi più paia, calibra ciascuno individualmente.

Alcuni suggerimenti per ottimizzare la calibrazione personale:

- Trova un posto tranquillo nella tua casa, evitando spazi ampi o aperti.
- Stai lontano da aree con molte o grandi finestre.
- Evita stanze con soffitti alti dove il rumore di fondo può essere imprevedibile.
- Posizionati lontano dagli angoli e evita di fronteggiare specchi.
- Idealmente, rimani il più vicino possibile al centro della stanza per una qualità del suono ottimale.
- Ultimo consiglio: la tua camera da letto è spesso la scelta migliore.

Alcuni suggerimenti per ottimizzare la calibrazione vocale:

- Parla forte ma senza urlare.
- Proietta la tua voce come se stessi parlando a qualcuno dall'altra parte della stanza.
- Minimizza le pause il più possibile.



Calibrazione personalizzata



La calibrazione ottimizzerà le prestazioni audio dei tuoi occhiali in base alla forma del capo, inclusi:


- Riduzione del ritorno acustico
- Riduzione della propria voce

Per avviare la calibrazione, vai in una stanza silenziosa.


Seleziona **Calibra ora**

Note

La funzione di calibrazione si trova all'interno delle impostazioni. Consigliamo di eseguire la calibrazione ogni 6 mesi.

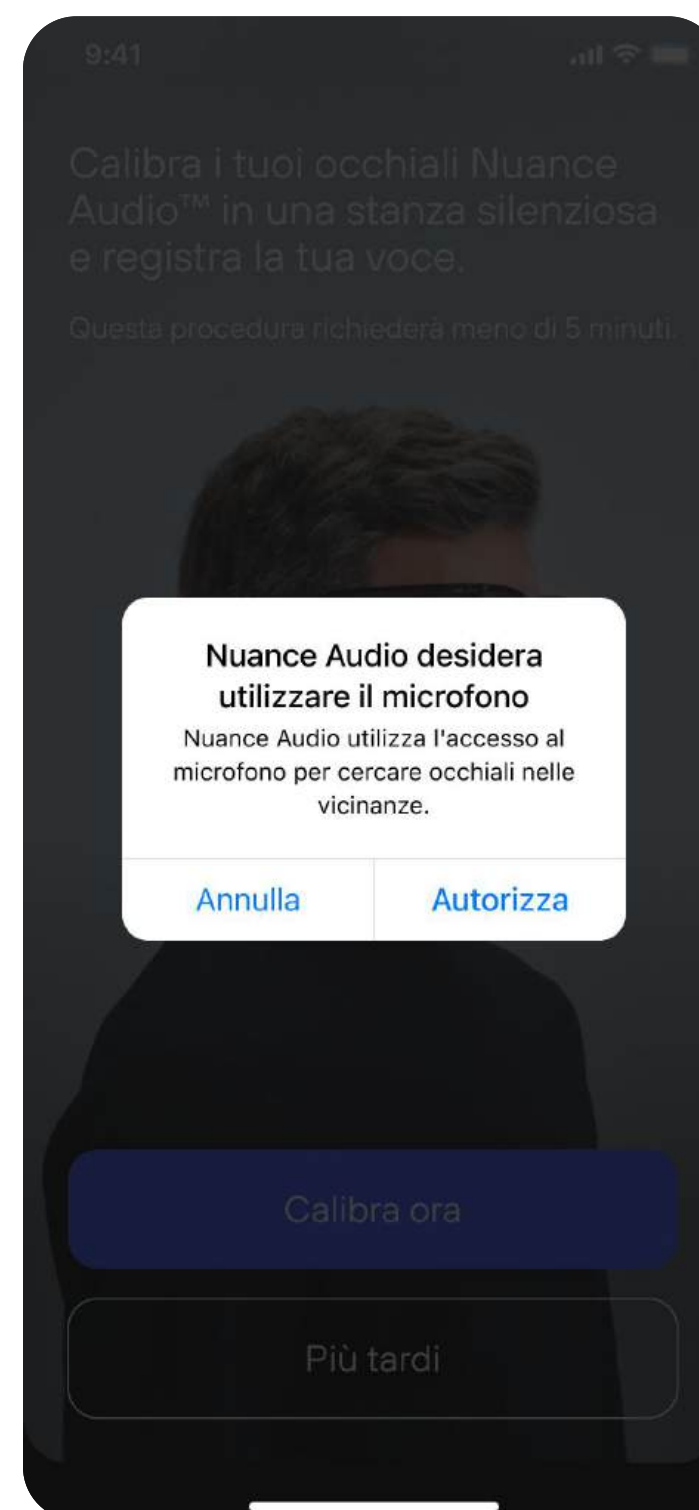

Autorizza il microfono del tuo telefono a misurare e convalidare i suoni. Seleziona **Autorizza**

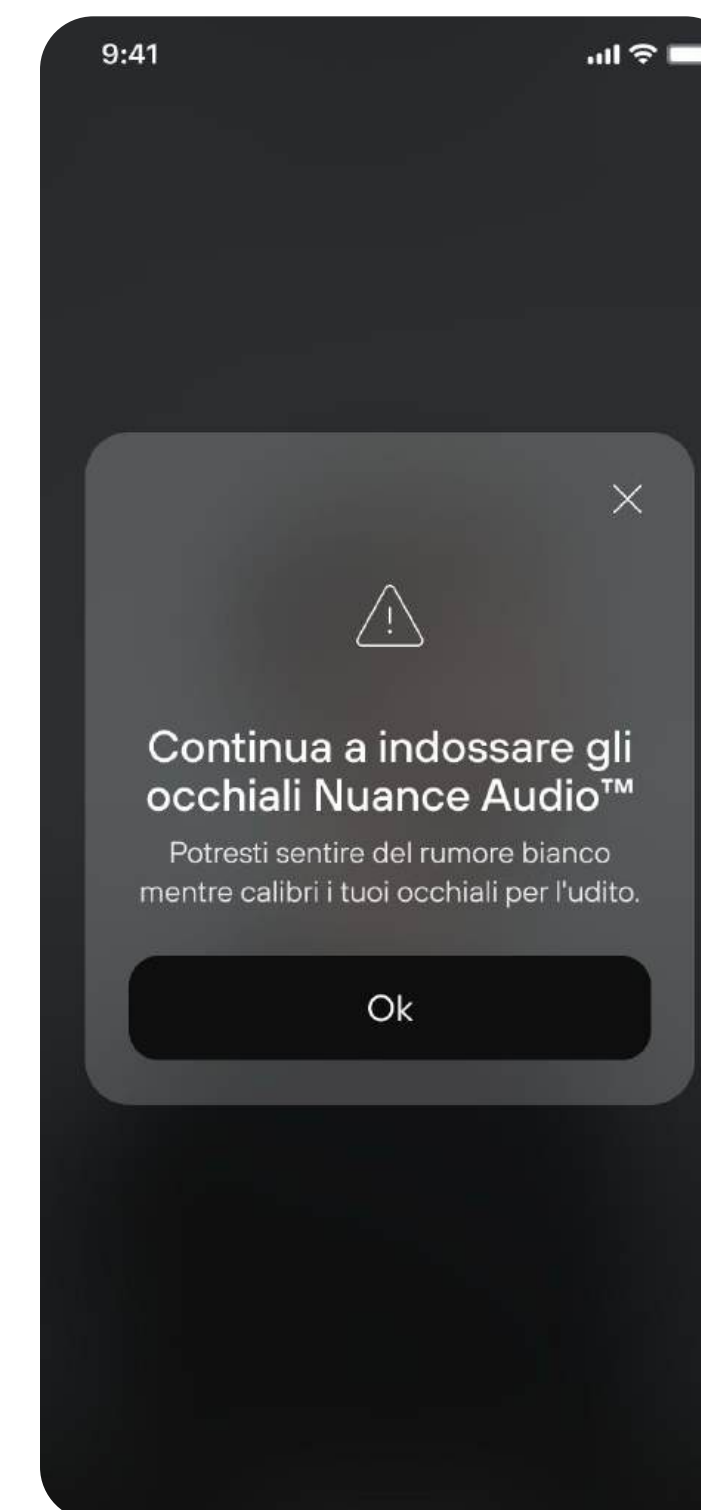


Una notifica pop-up ti ricorda di **mantenere accesi i Nuance Audio™ Glasses** per tutta la procedura.




Calibrazione personalizzata



Step 1.1
Misurazione del rumore
ambientale.
Mantieni gli occhiali
accesi e seleziona
**Riproduci il campione
audio**

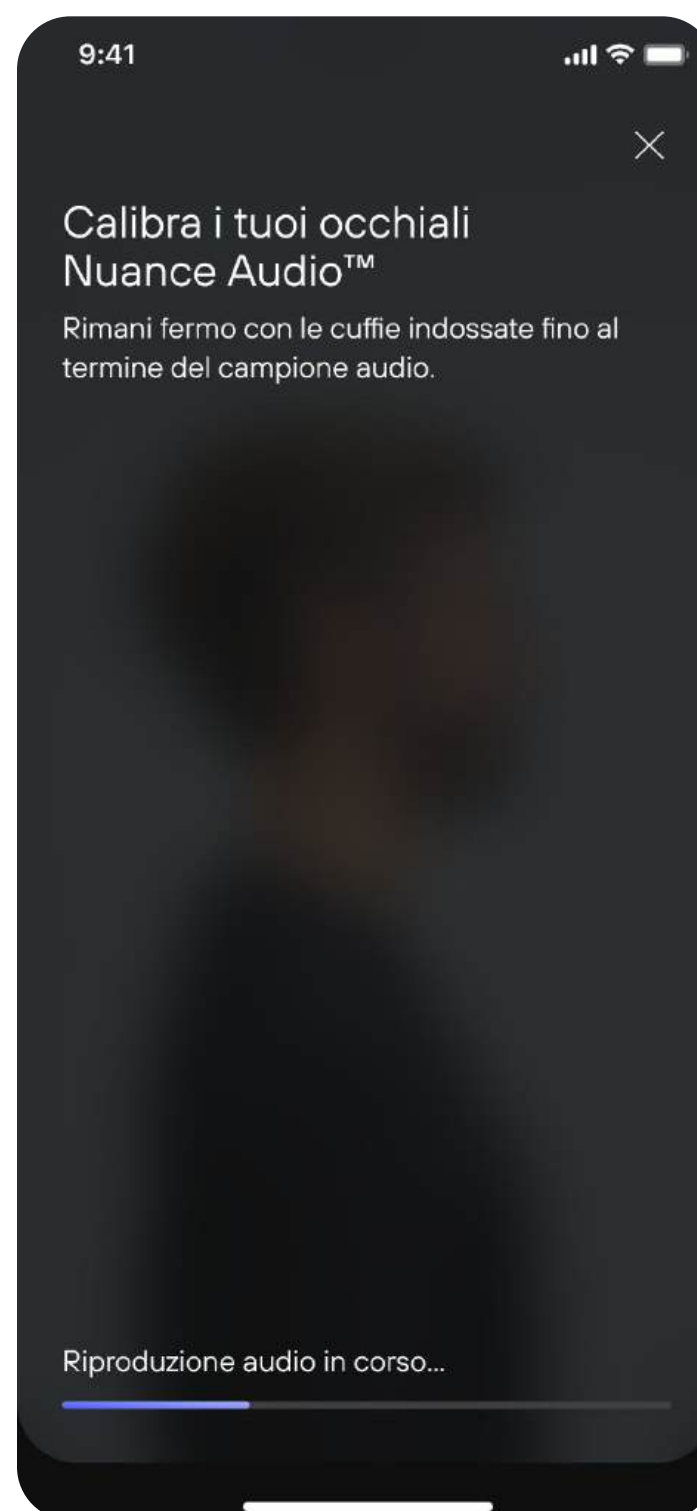


Step 1.2
Non muoverti e non
togliere gli occhiali,
**aspetta fino alla fine del
campione audio.**

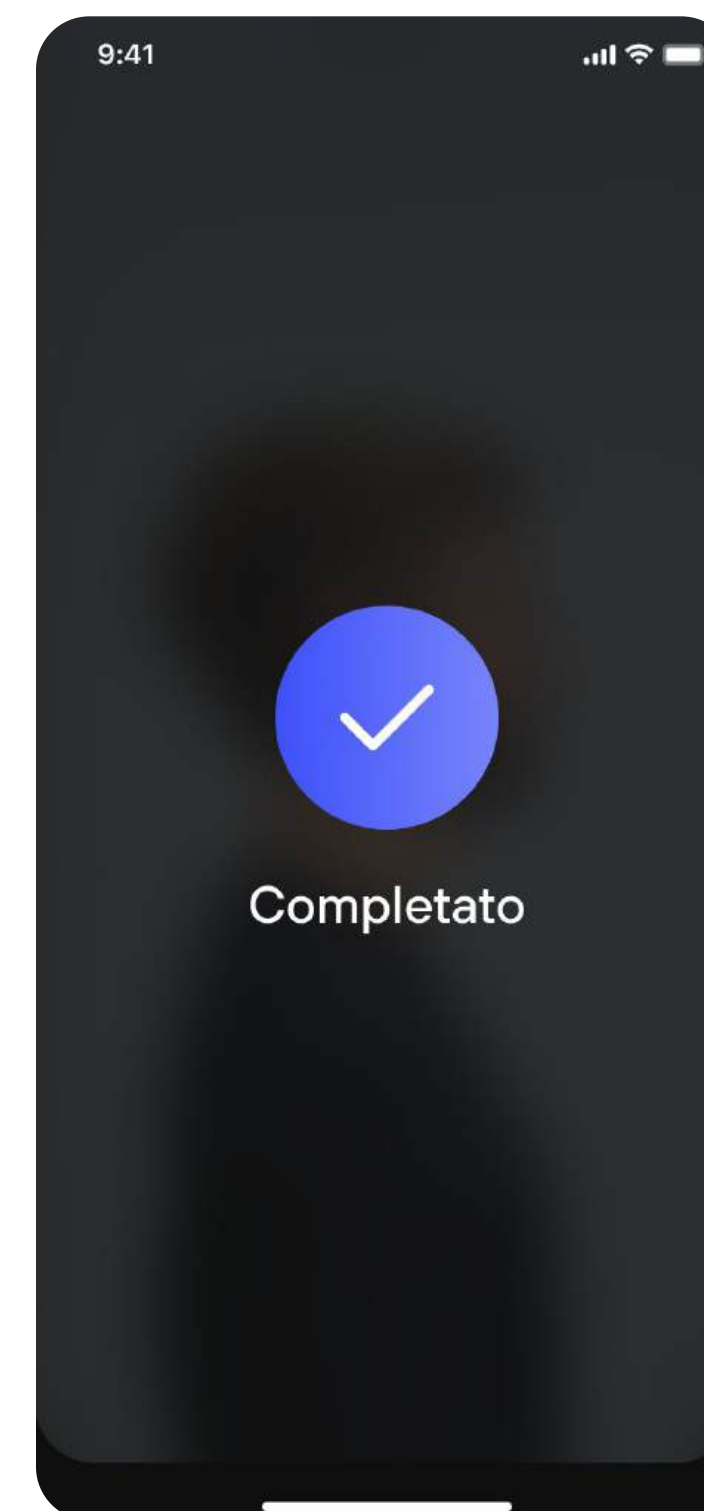


Step 1.3
Misurazione del rumore
ambientale completata.




Calibrazione della voce

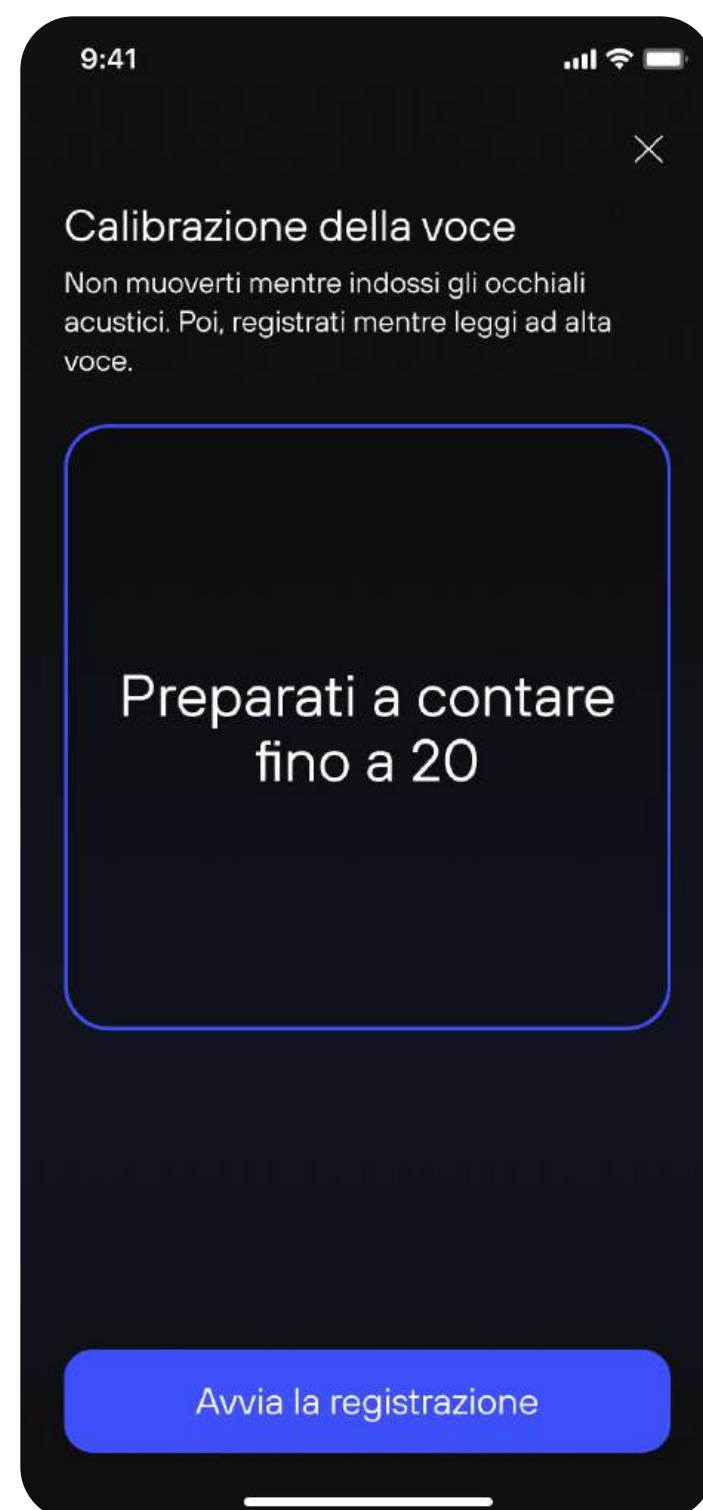

Step 2.1
Calibrazione della voce.
Non muoverti e non
togliere gli occhiali
Seleziona **Avvia la
registrazione**

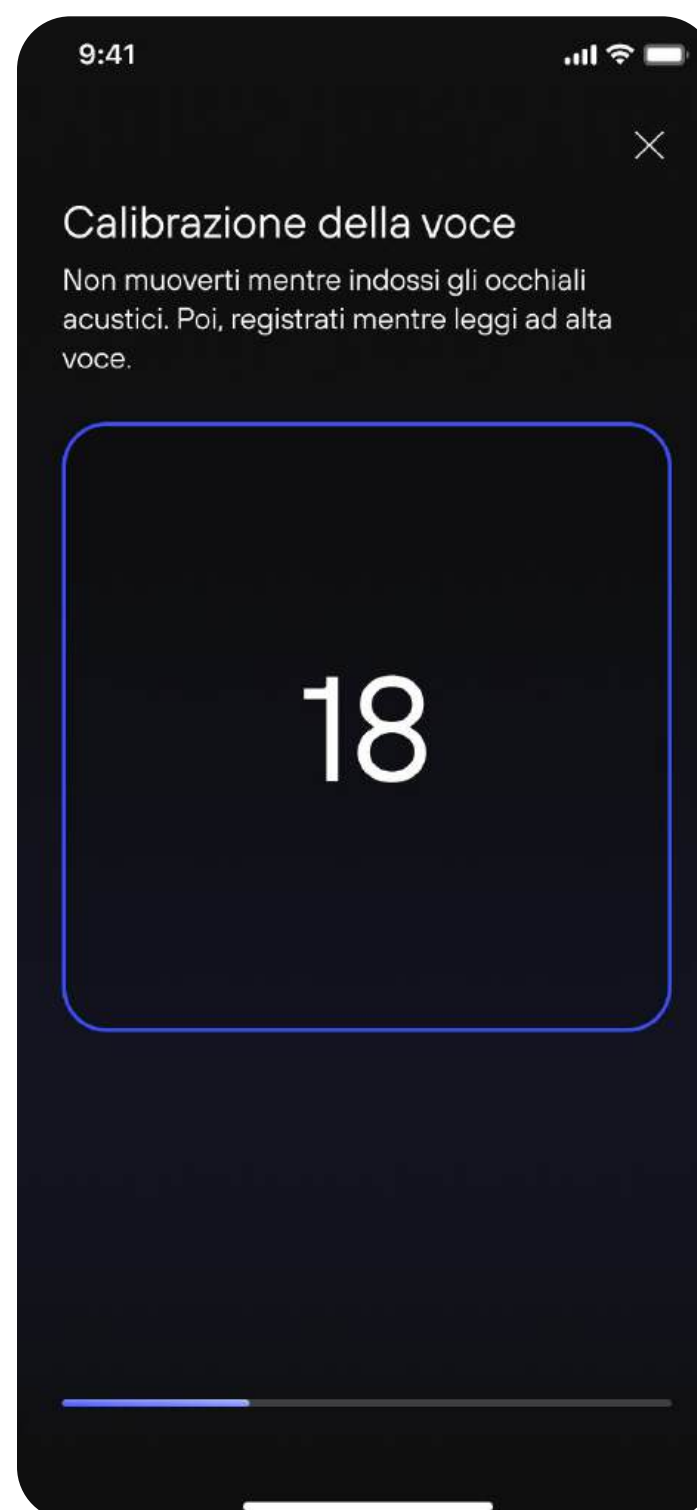

Step 2.2
**Conta ad alta voce fino a
quando la barra di
avanzamento non
raggiunge la fine.**

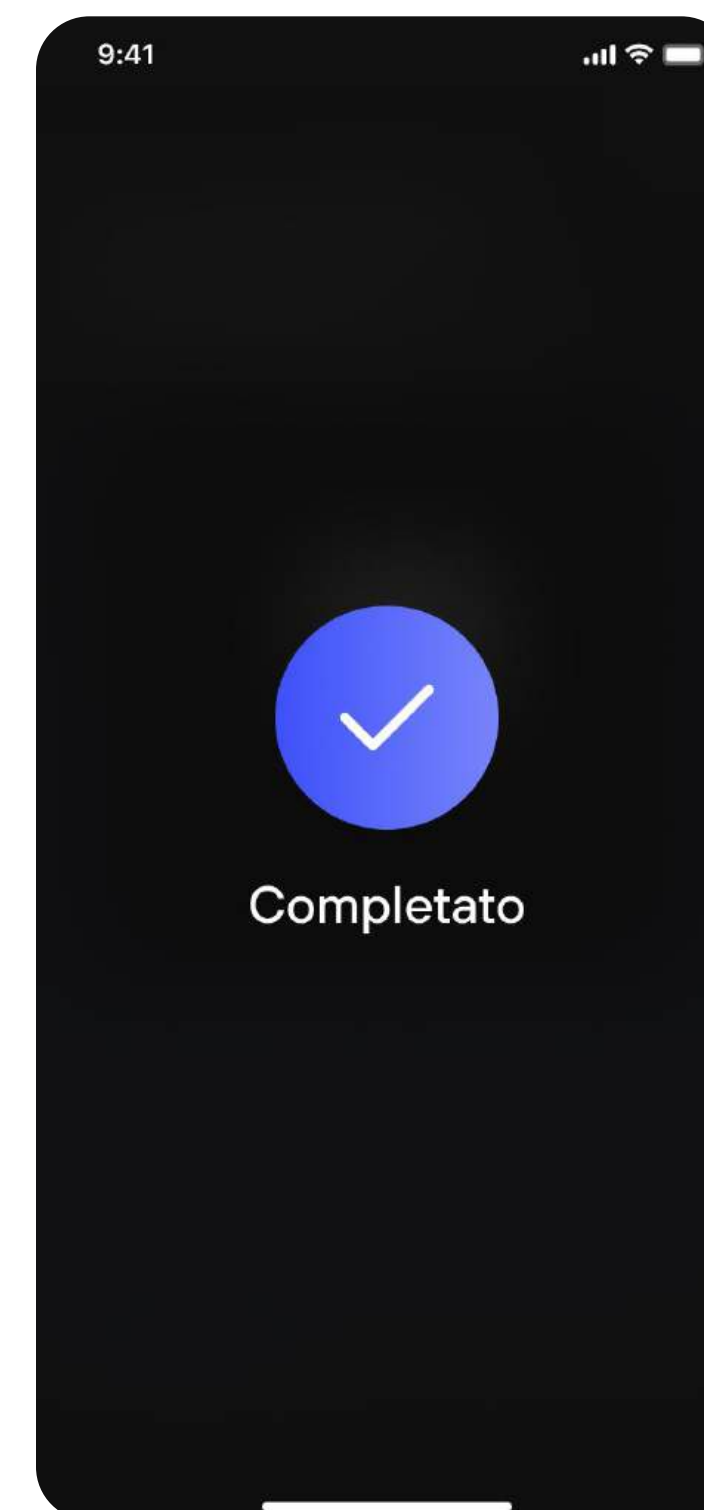

Step 2.2
Calibrazione personale
completata
correttamente.



Per le Istruzioni più aggiornate
si prega di seguire questo link

[↗ Vedi Istruzioni per l'Uso](#)