

# Configurazioni uditive: Volume degli Occhiali




## Come fare per impostare il volume degli occhiali?

Puoi impostare i livelli di volume dei tuoi Nuance Audio™ Glasses in diversi modi.

### Con i Nuance Audio™ Glasses

Premi brevemente il pulsante sull'asta destra per cambiare i livelli di volume. Il segnale acustico ti segnalerà ogni cambio avvenuto.

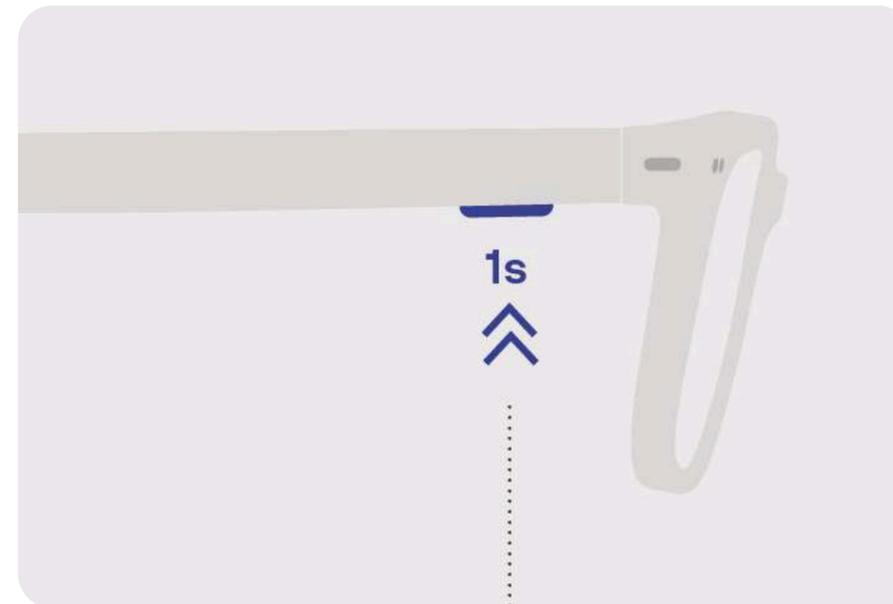

### Con il Nuance Audio™ Remote Control

Puoi utilizzare i livelli di volume predefiniti premendo i tasti + e - per aumentare o diminuire il volume.






## Come fare per impostare il volume degli occhiali?

### Con la Nuance Audio™ App

Un altro modo è utilizzare il cursore del volume nella schermata principale della Nuance Audio™ App per regolare il volume secondo le tue preferenze.

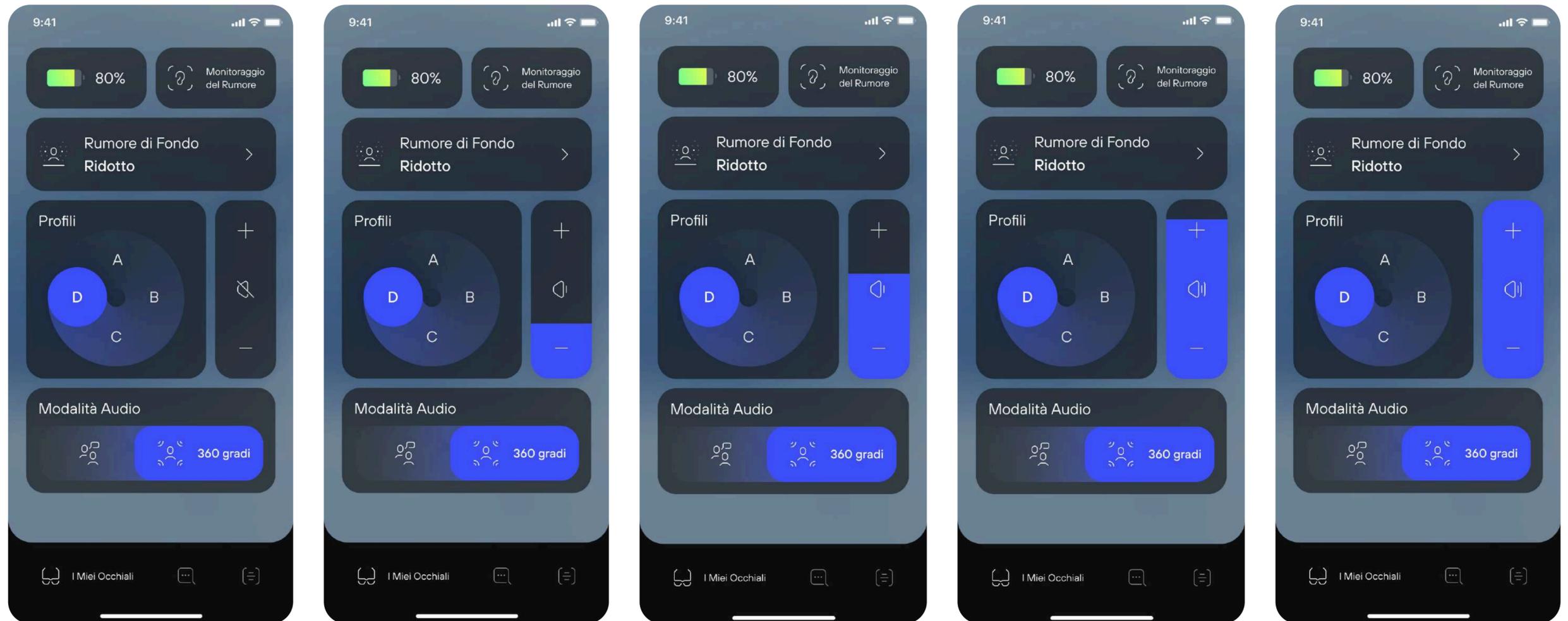




## Come fare per impostare il volume degli occhiali?

### Con la Nuance Audio™ App

Inoltre, nella sezione Impostazioni dell'app, puoi selezionare e impostare comodamente i tuoi tre intervalli di volume preferiti a cui accedere facilmente.

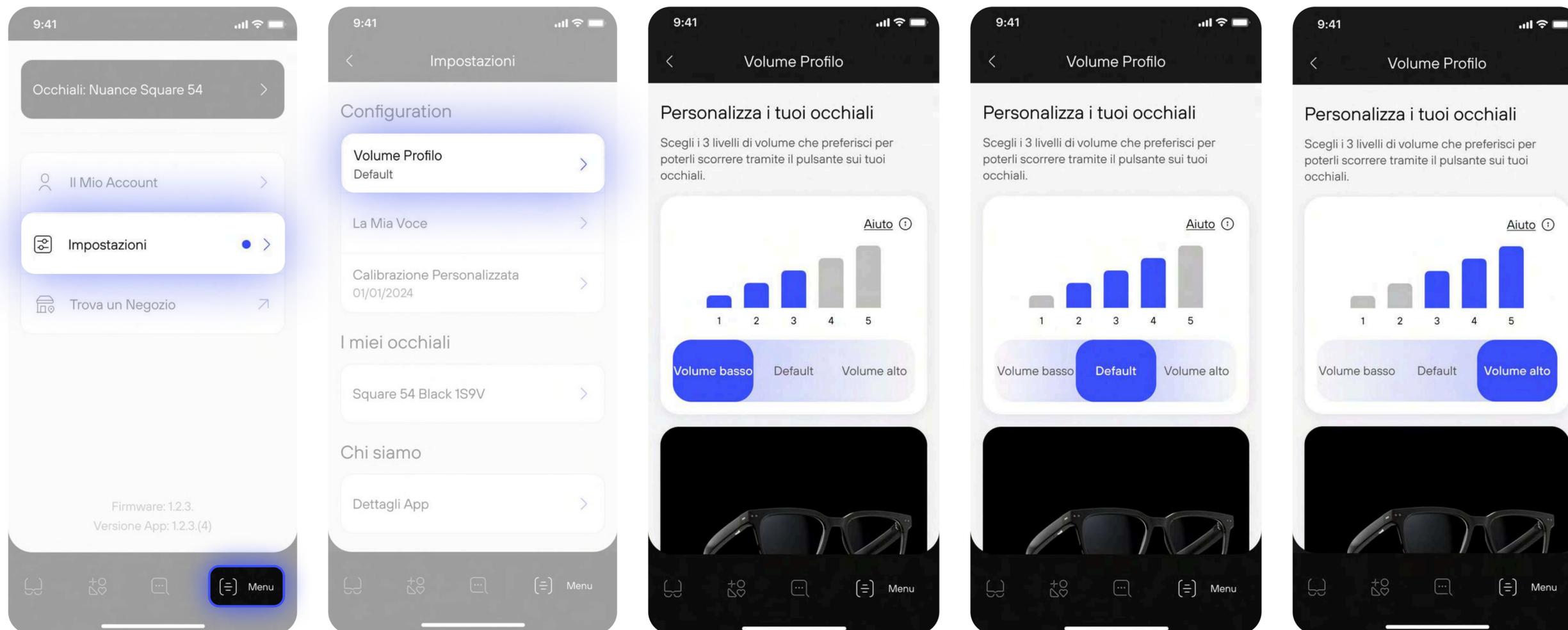



Per le Istruzioni più aggiornate  
si prega di seguire questo link

[↗ Vedi Istruzioni per l'Uso](#)