


Configurazioni uditive: La Mia Voce



Come fare per calibrare la propria voce?


Nuance Audio ti consente di calibrare la tua voce, così potrai decidere il livello di nitidezza con cui ascoltarla, per il massimo comfort uditivo.

Come fare per calibrare la propria voce?

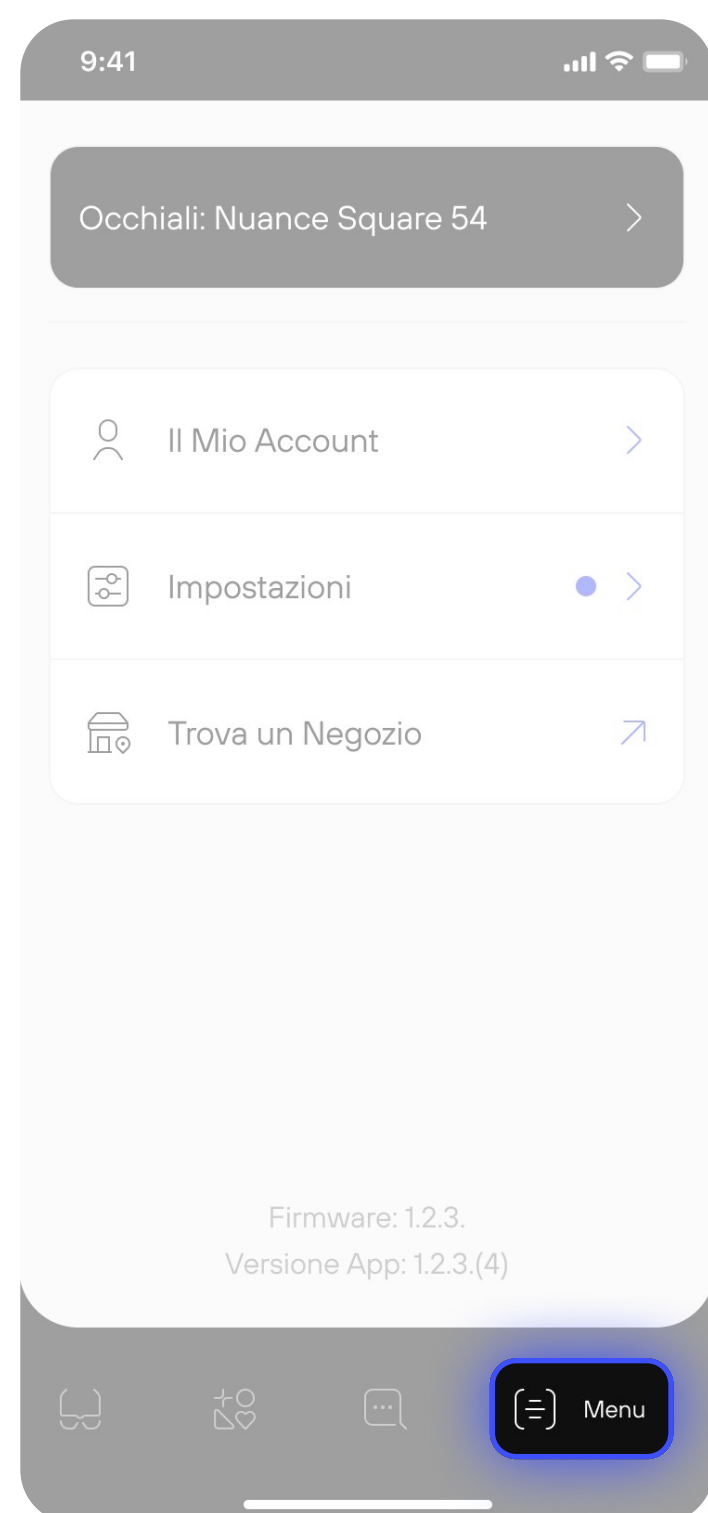


All'interno della dashboard della Nuance Audio™ App, seleziona Menu (nell'angolo in basso a destra della barra di navigazione).

Dal Menu, seleziona **Impostazioni**

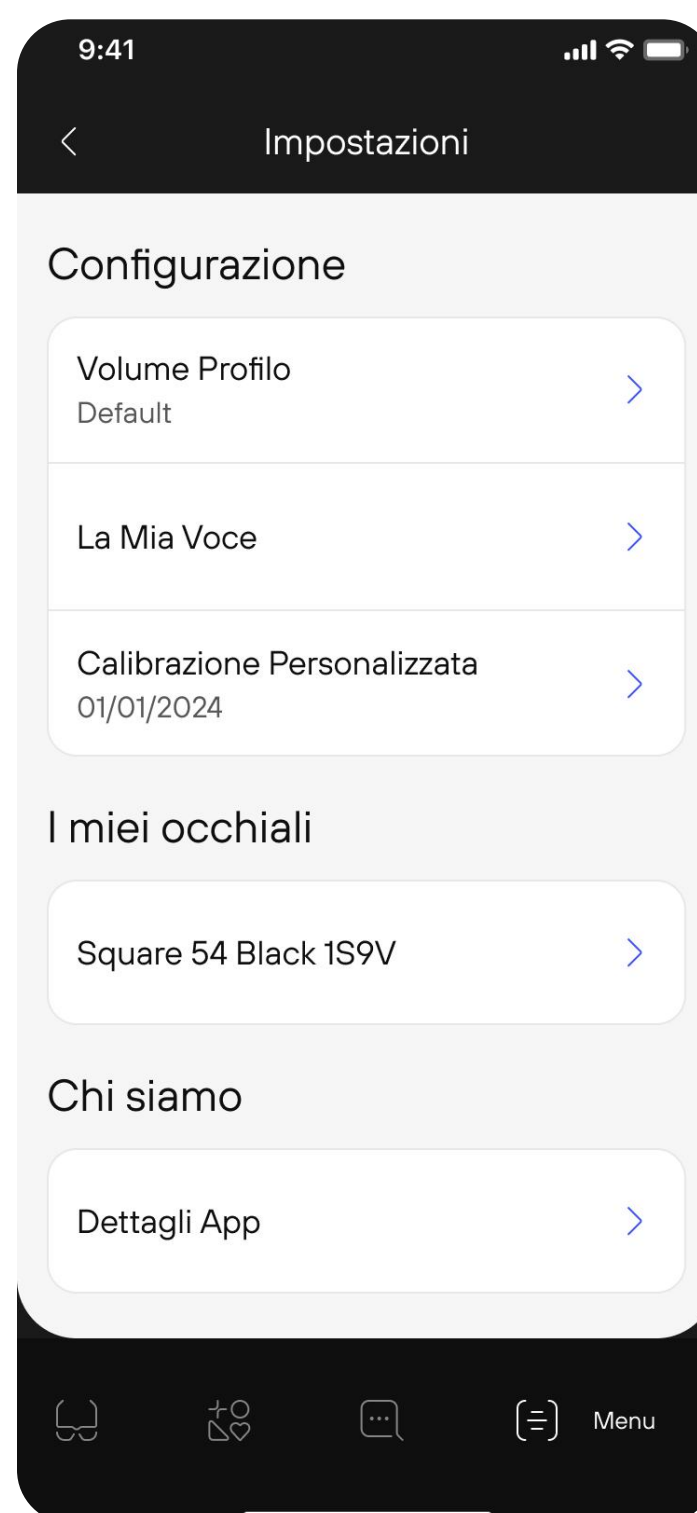

Nelle Impostazioni, seleziona **La mia voce**

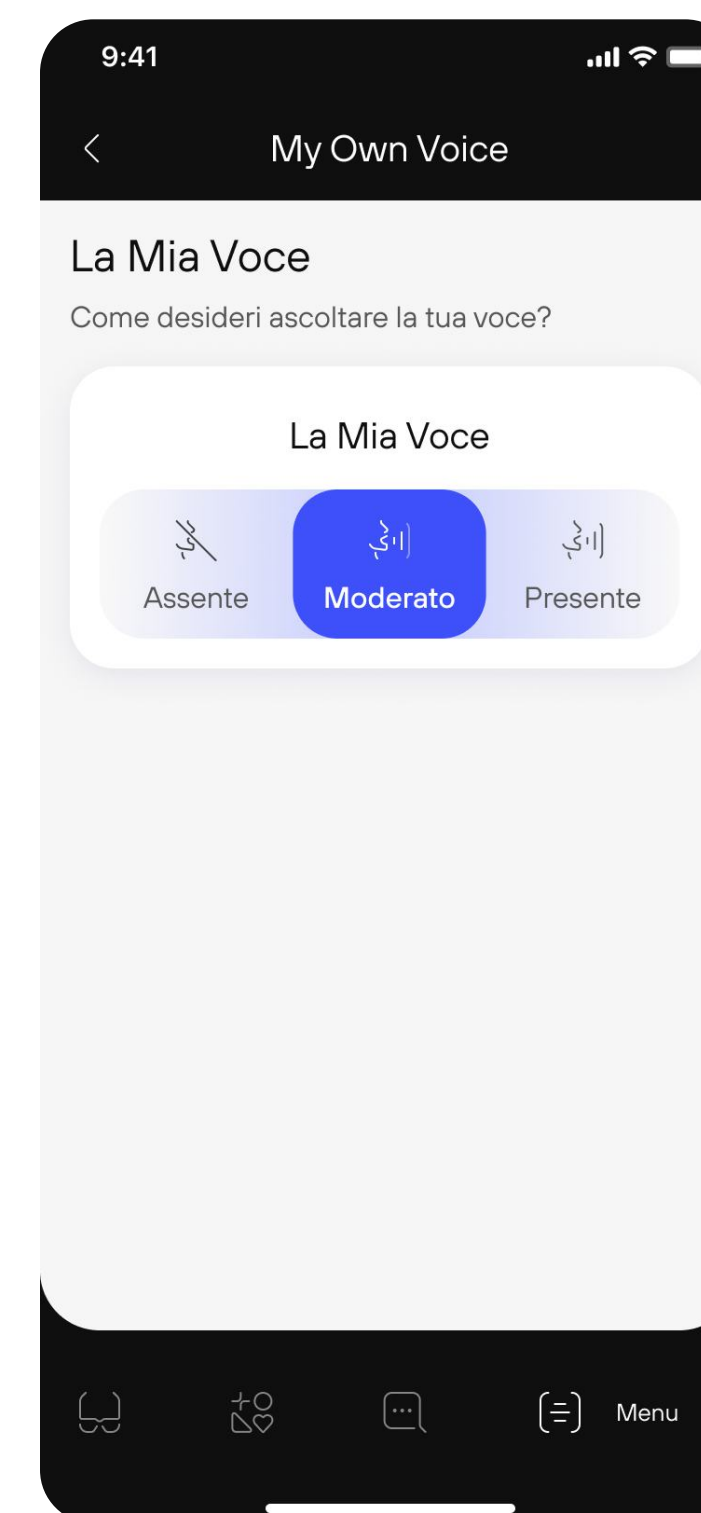

Ora puoi regolare liberamente i **livelli di amplificazione** in base alle tue esigenze e all'ambiente circostante.

Note

Ricorda che impostare la **Calibrazione Personale** è anche importante per ottimizzare la tua esperienza complessiva, garantendo chiarezza e suono naturale alla tua voce e alle altre impostazioni audio.



Per le Istruzioni più aggiornate
si prega di seguire questo link

[↗ Vedi Istruzioni per l'Uso](#)