

Suggerimenti per la Manutenzione



I Nuance Audio™ Glasses sono impermeabili?

Il design dei Nuance Audio™ Glasses è conforme allo standard IPX4, inclusa l'area dei microfoni. Grazie a questo standard, che offre protezione contro gli schizzi d'acqua, gli occhiali sono ideali per l'allenamento o la pioggia lieve. Ricordiamo che la protezione è garantita contro piccoli schizzi e che il prodotto potrebbe non essere adatto all'immersione.





Il sudore, il trucco o altre sostanze chimiche comuni rischiano di danneggiare i miei Nuance Audio™ Glasses?

I Nuance Audio™ Glasses sono resistenti a sostanze chimiche comuni come disinfettanti per le mani, detergenti, sapone per le mani, gel per capelli e crema solare.





Come faccio a pulire le lenti e le montature?

Pulizia giornaliera:

Utilizzare un panno umido e del sapone neutro (spruzzare sul panno, non direttamente sulle lenti). Evitare tutti i tipi di spray, solventi, sostanze chimiche o soluzioni per la pulizia contenenti alcol o ammoniaca. Non tenere gli occhiali sotto l'acqua corrente né utilizzare altri strumenti di pulizia (come un pennello per apparecchi acustici, uno stuzzicadenti o aria compressa).

Pulizia profonda:

Per pulire le lenti, utilizza uno spray per lenti e assicurati di erogare il prodotto sul panno e non direttamente sulle lenti. Pulisci delicatamente le parti esterne degli occhiali, compresi i 6 microfoni e i 4 altoparlanti.

Proteggi:

Assicurati di tenere i tuoi Nuance Audio™ Glasses nella custodia apposita quando non sono in uso.

In caso di contatto con acqua salata, acqua di piscine o altri prodotti chimici come cosmetici, spray per capelli, crema solare e repellenti per insetti, ti consigliamo di pulire immediatamente gli occhiali con un panno umido non abrasivo.



Per le Istruzioni più aggiornate
si prega di seguire questo link

[↗ Vedi Istruzioni per l'Uso](#)