

Configurações de audição: Modo de áudio



O que é o modo de áudio?

O Modo de Áudio permite-lhe escolher onde focar a sua audição, seja tudo diretamente à sua frente ou à sua volta.

Escolha entre estas duas opções:

Modo Frontal

Aumenta os sons à sua frente, facilitando a concentração em conversas com alguém diretamente, especialmente em ambientes ruidosos.



Modo Envolvente

Amplifica sons e fala provenientes de todas as direções, o que é ideal para situações como caminhar ou conduzir, em que tem de estar ciente do que o rodeia.






Como ajustar o modo de áudio?

Pode alternar entre os modos de várias formas: nos seus óculos, com o controlo remoto ou na app Nuance Audio.


Em Óculos Nuance Audio

Toque duas vezes na área na haste direita. Um aviso sonoro confirmará a sua introdução.

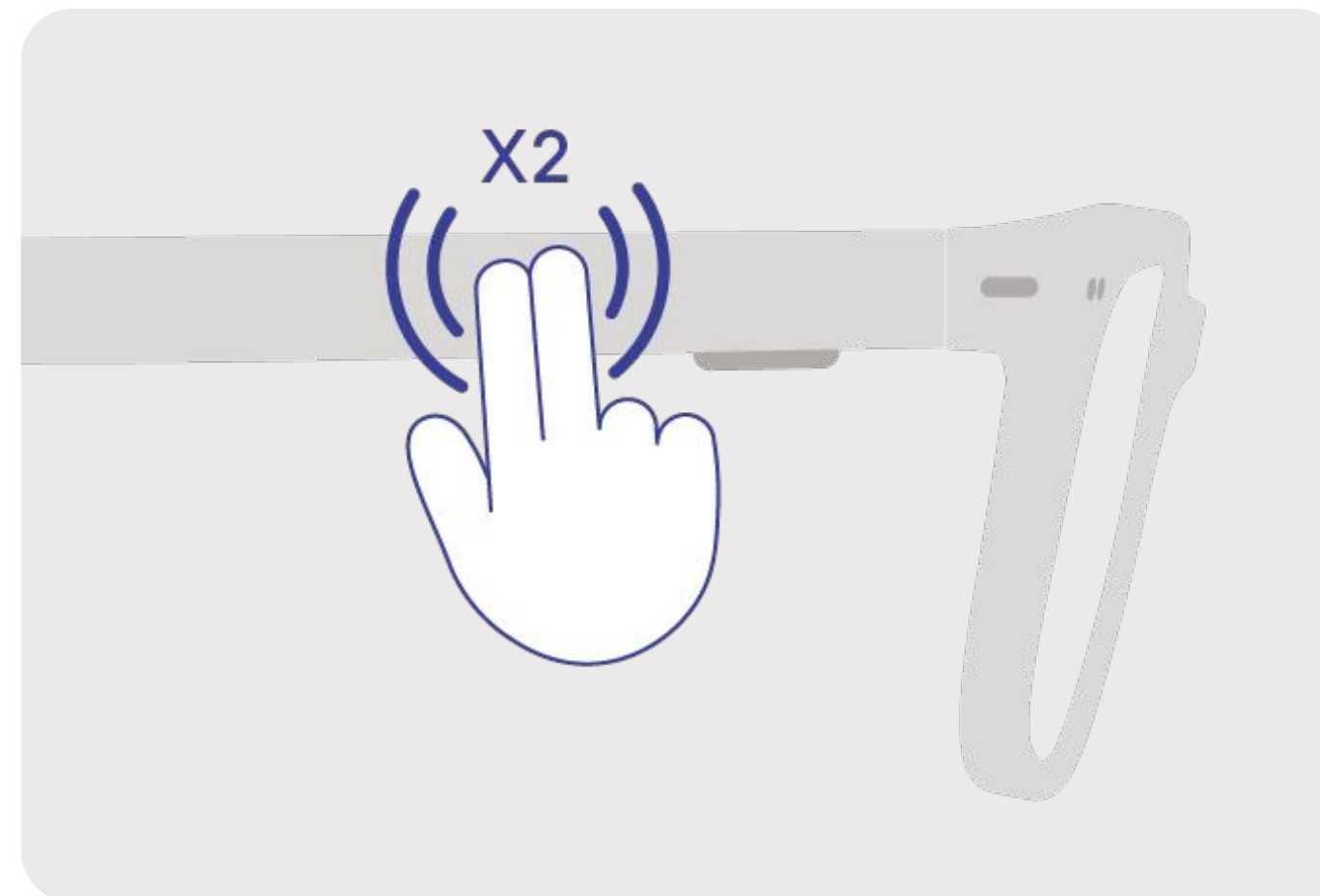

Com Controlo remoto

Pressione o **botão de Modos de Áudio**.

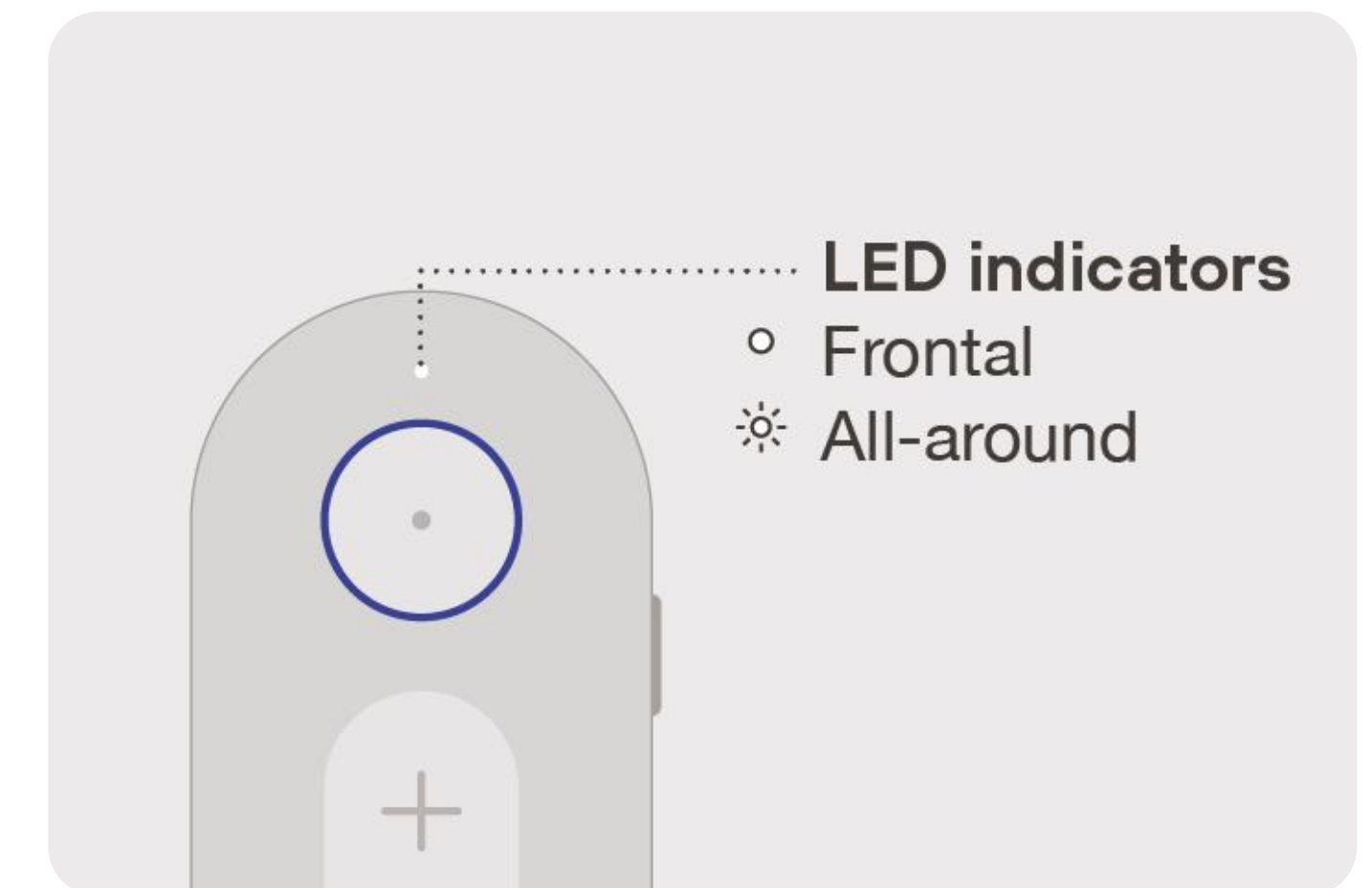




Como ajustar o modo de áudio?

Com a App Nuance Audio

Deslize ou toque no **interruptor de modos** de áudio disponível na página inicial da aplicação.

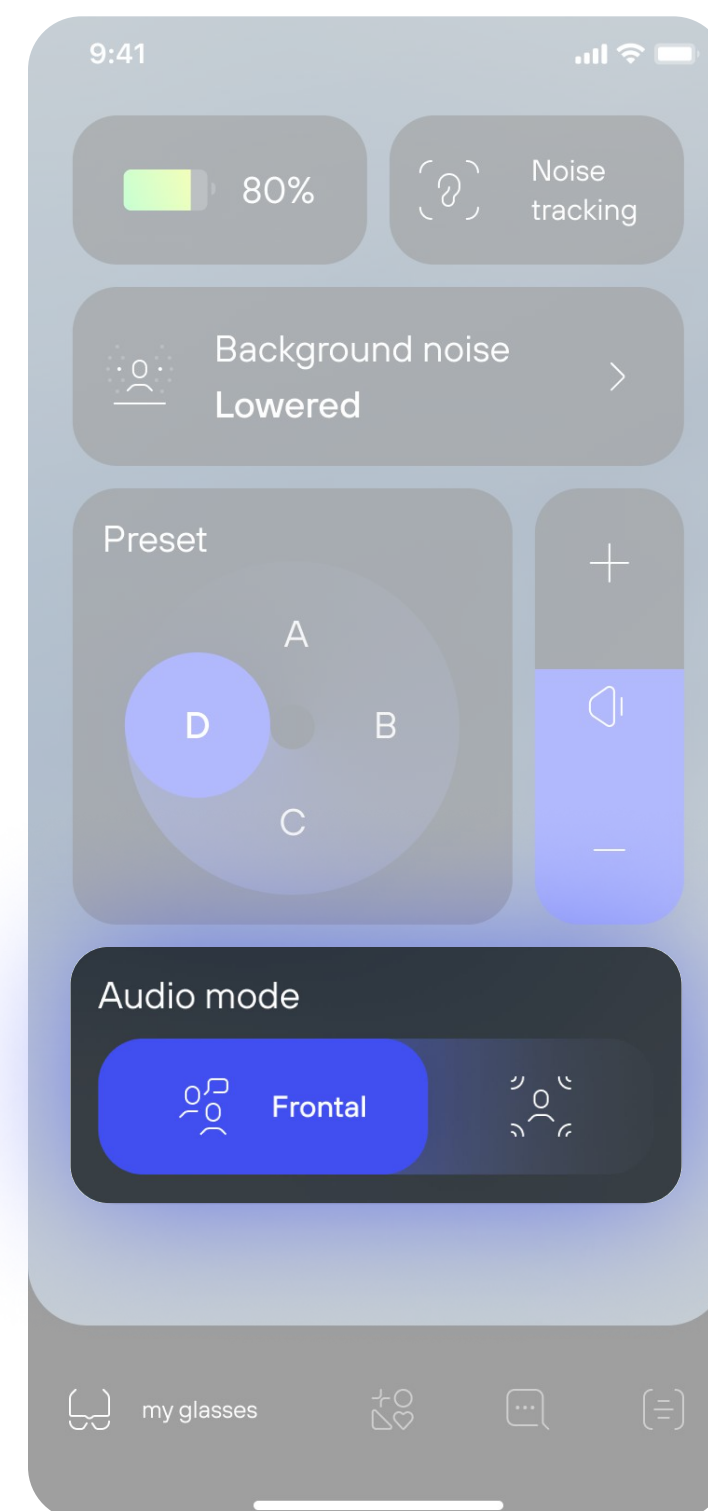

Modo Frontal

Este modo realça os sons à sua frente, facilitando a concentração em conversas com alguém diretamente.






Como ajustar o modo de áudio?

Com a App Nuance Audio

Deslize ou toque no **interruptor de modos** de áudio disponível na página inicial da aplicação.

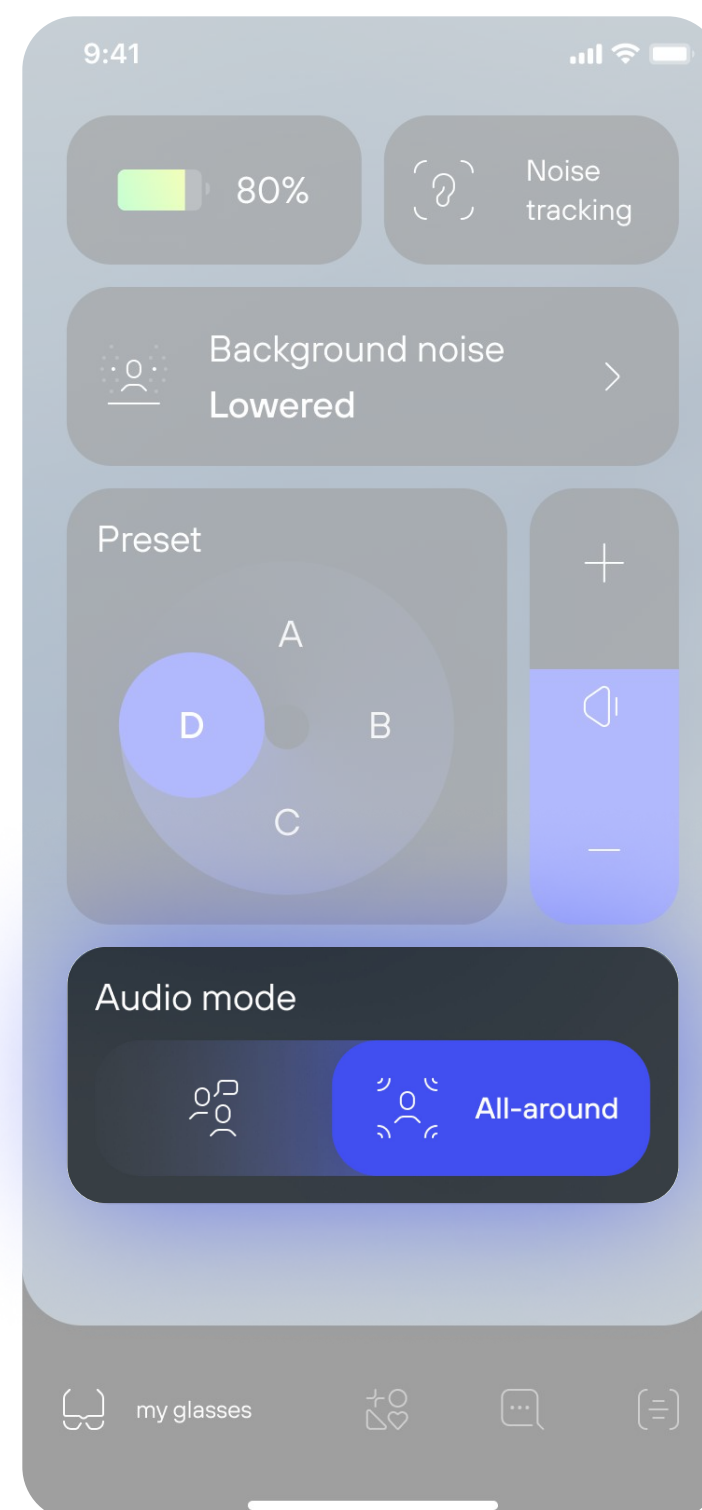

Modo Envolvente

Este modo amplifica sons e fala provenientes de todas as direções, o que é ideal para situações como caminhar ou conduzir, em que tem de estar ciente do que o rodeia.





Para as Instruções de Utilização mais atualizadas, por favor, siga este link.

[↗ Veja as instruções para utilização](#)