


Configurações de audição: Ruído de fundo




Como ajustar o ruído de fundo?

O Nuance Audio permite-lhe **personalizar a intensidade dos ruídos de fundo no seu ambiente** enquanto utiliza os seus Óculos Nuance Audio.

Por exemplo, sons como trânsito, ar condicionado, ventoinhas a girar, chuva, aspirador, e outros podem ser ajustados.

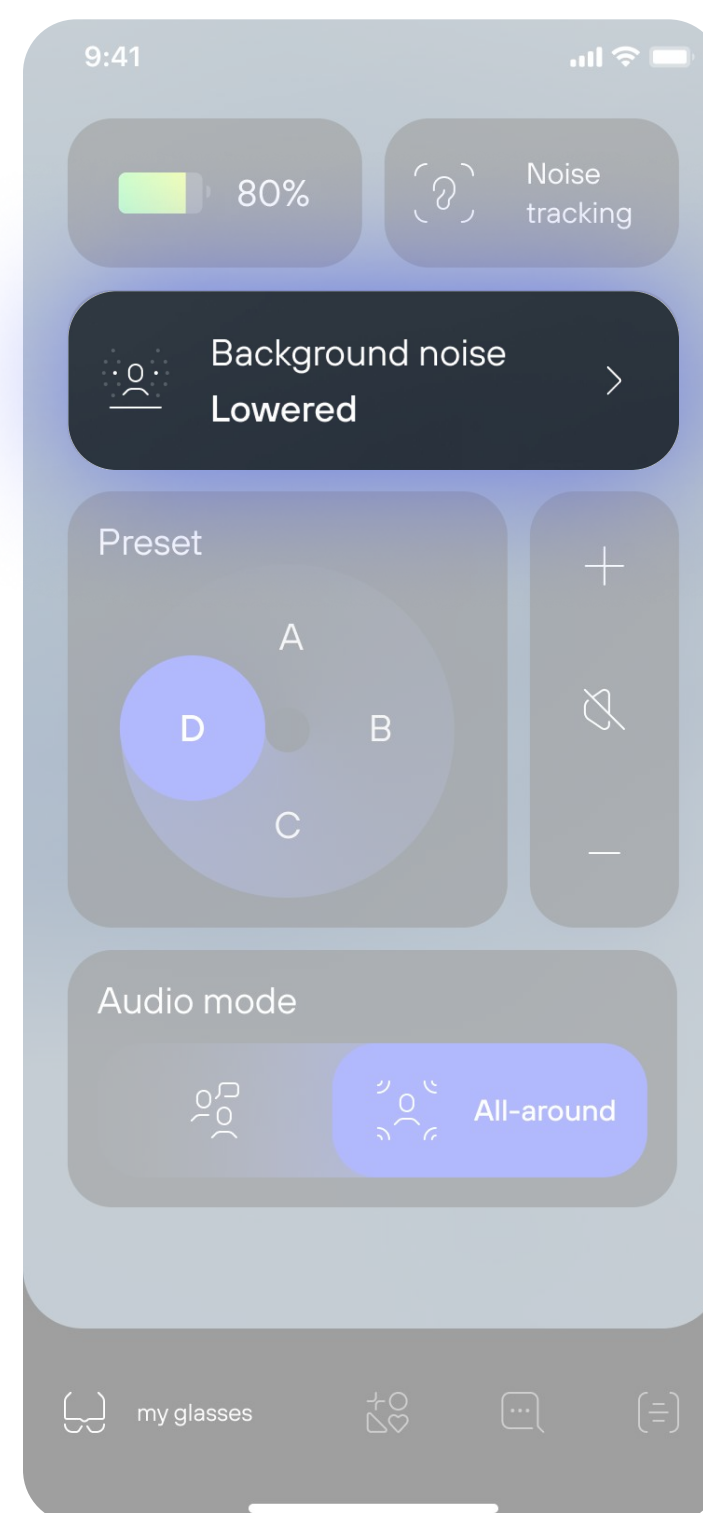


Para ajustar os níveis, toque na aba Ruído de Fundo em Página Inicial.

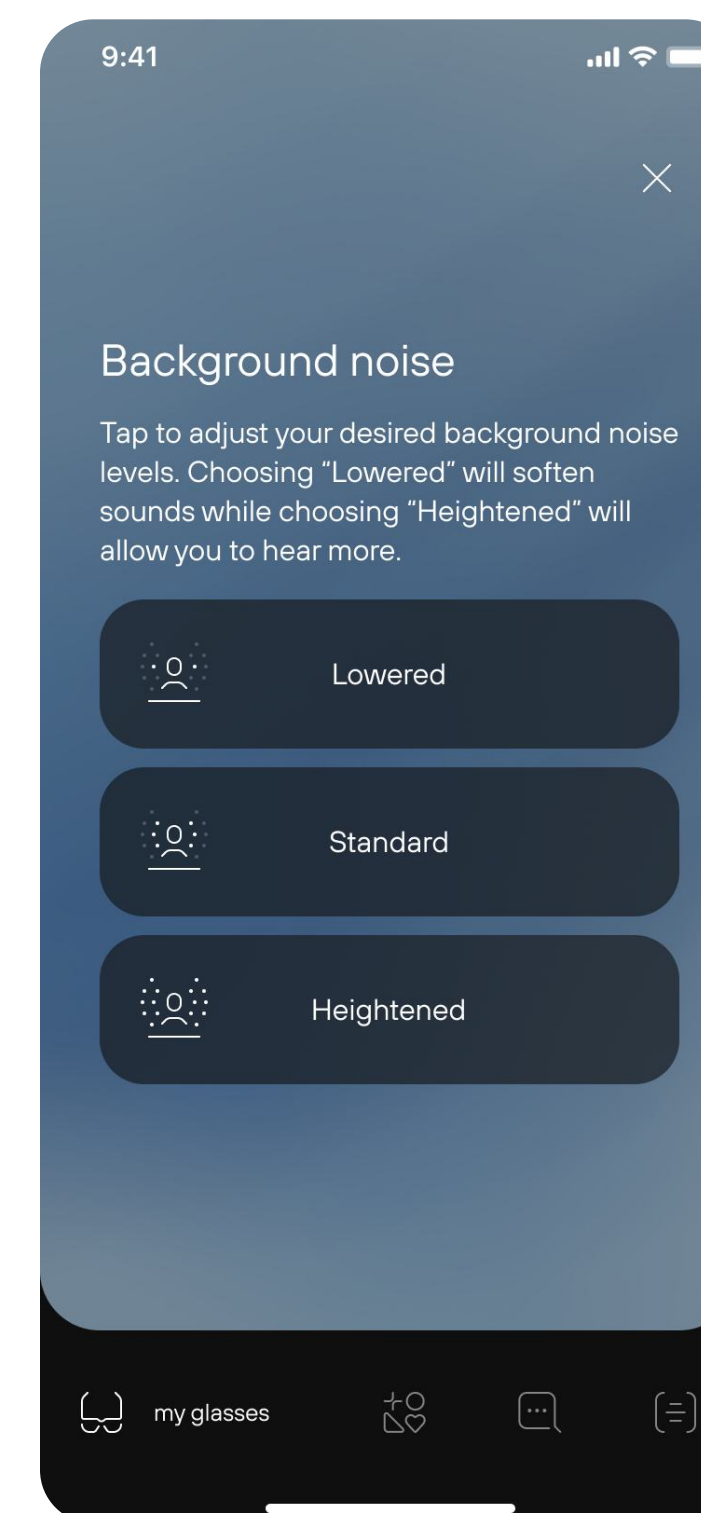

Pode escolher ajustá-los de três maneiras (reduzido, padrão e aumentado).




Como ajustar o ruído de fundo?

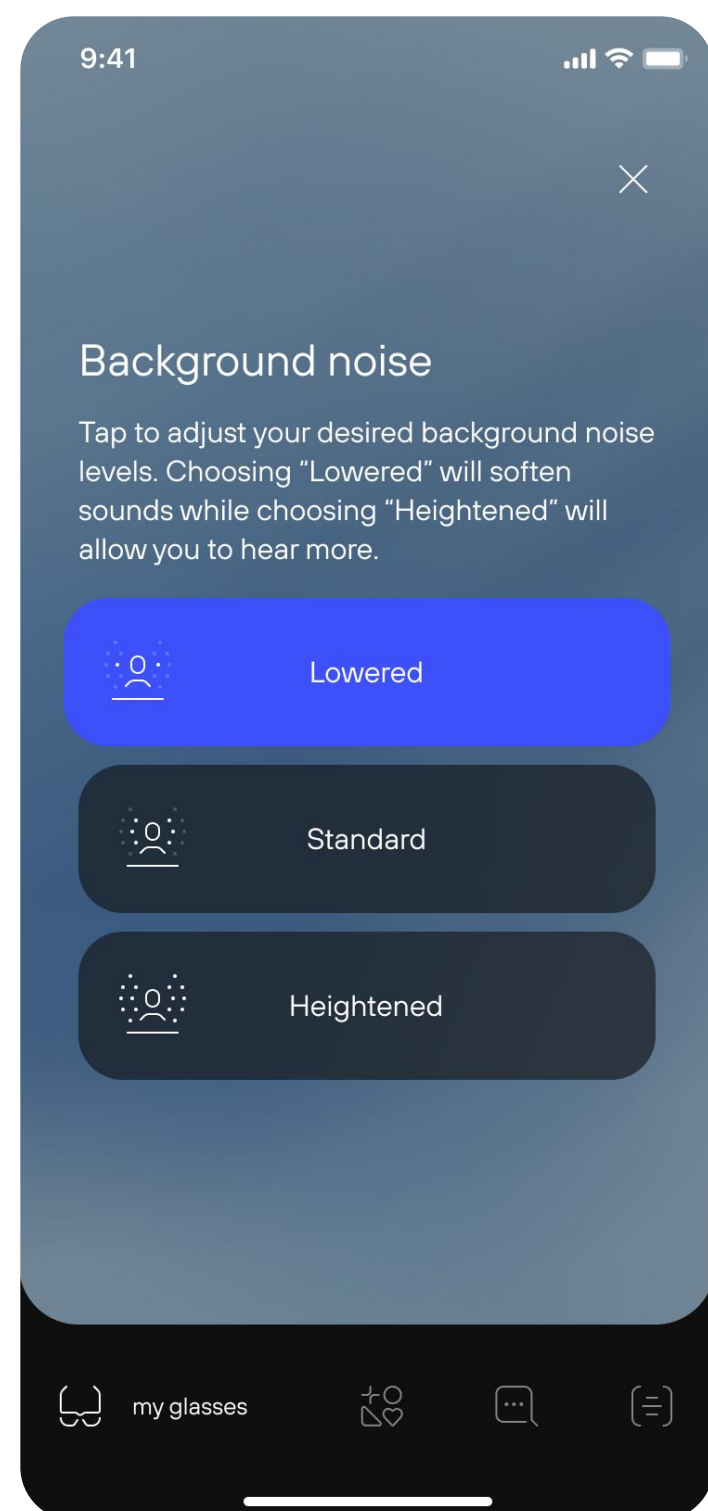


Ruído de fundo: Reduzido

Minimizará o ruído de fundo, tornando-o menos perceptível.

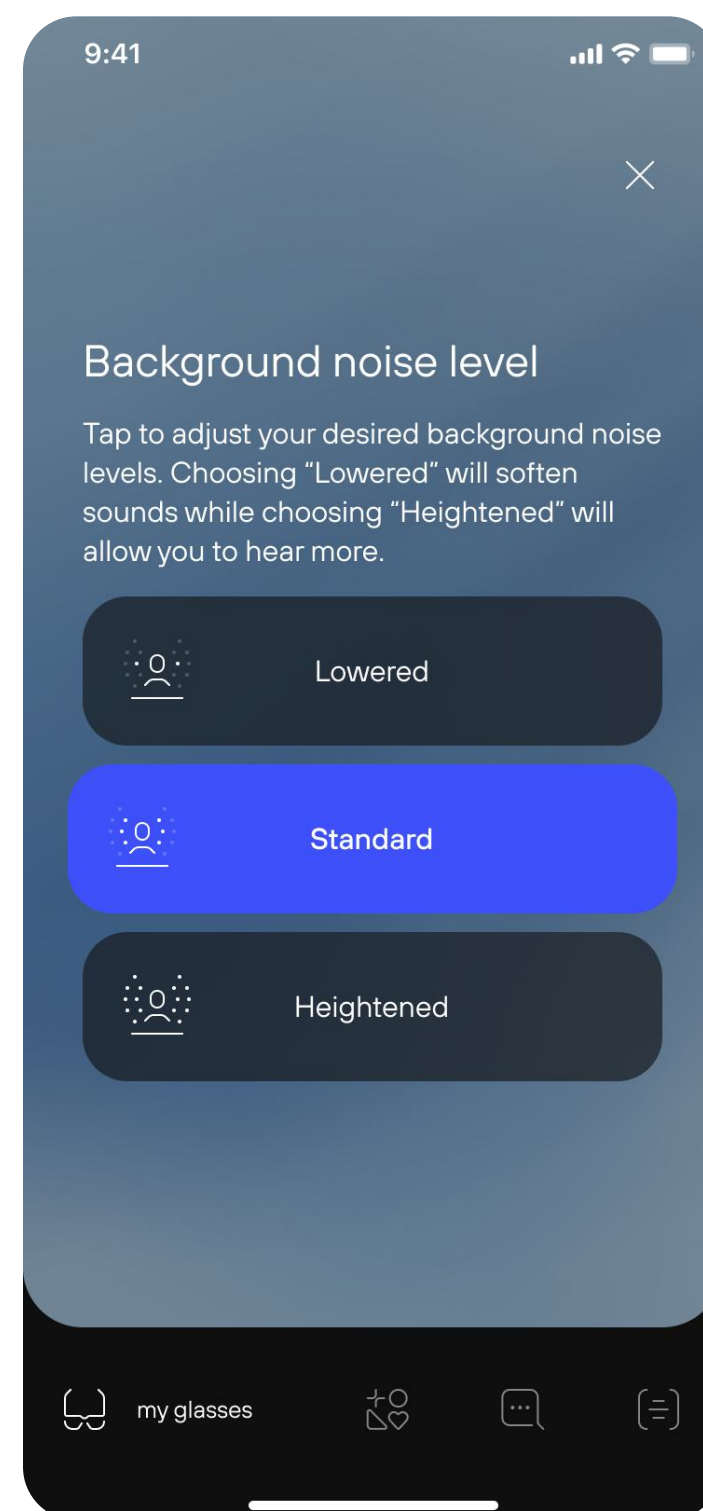

Ruído de fundo: Padrão

Ouvirá o fundo ao nível de som original.

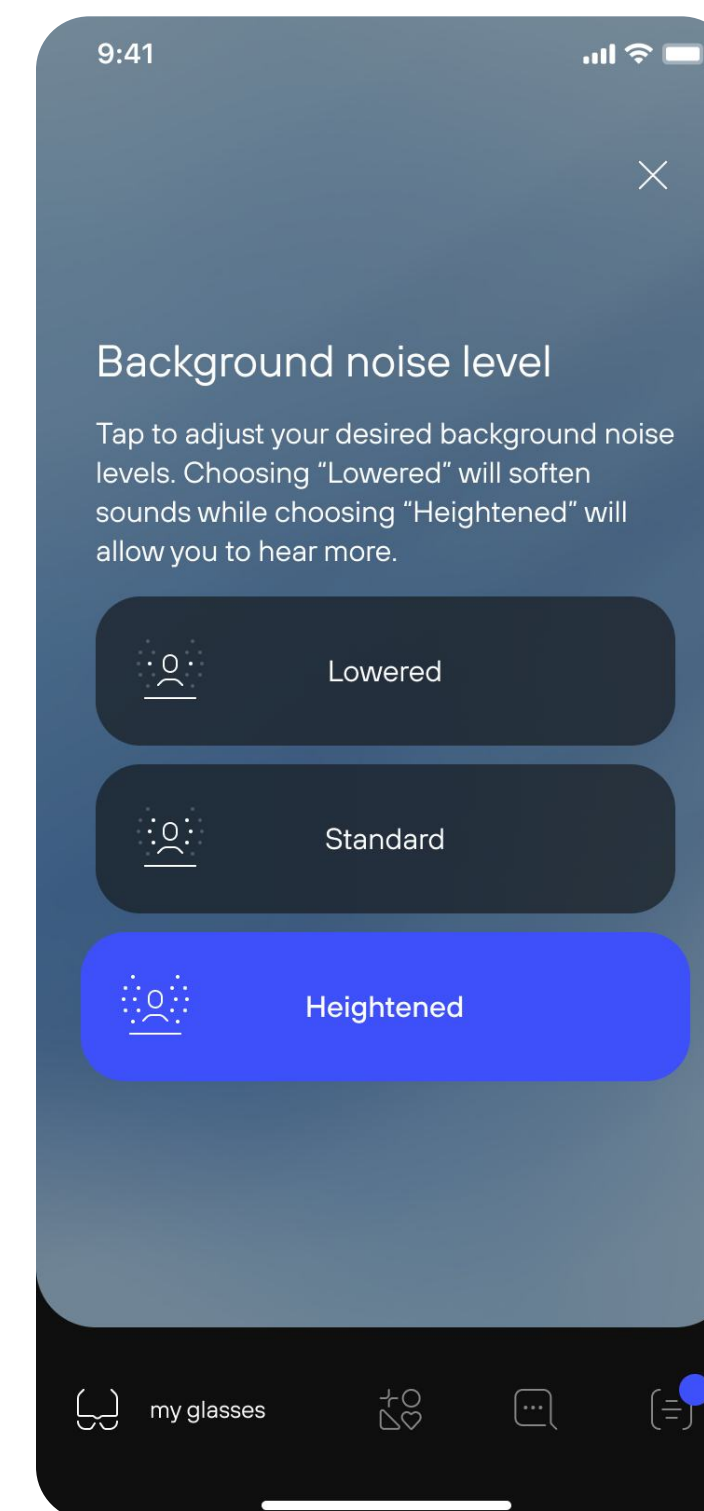

Ruído de fundo: Aumentado

Ouvirá o ruído de fundo mais alto e mais claramente.



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas, por favor, siga este link.

[↗ Veja as instruções para utilização](#)