

Configurações de audição: Volume dos óculos




Como ajustar o volume dos óculos?

Quando se trata dos seus Óculos Nuance Audio, pode sempre ajustar os níveis de volume de várias maneiras.

Com os Óculos Nuance Audio

Pode pressionar brevemente o botão na haste direita para alternar entre os níveis de volume. Um aviso áudio confirmará cada alteração.

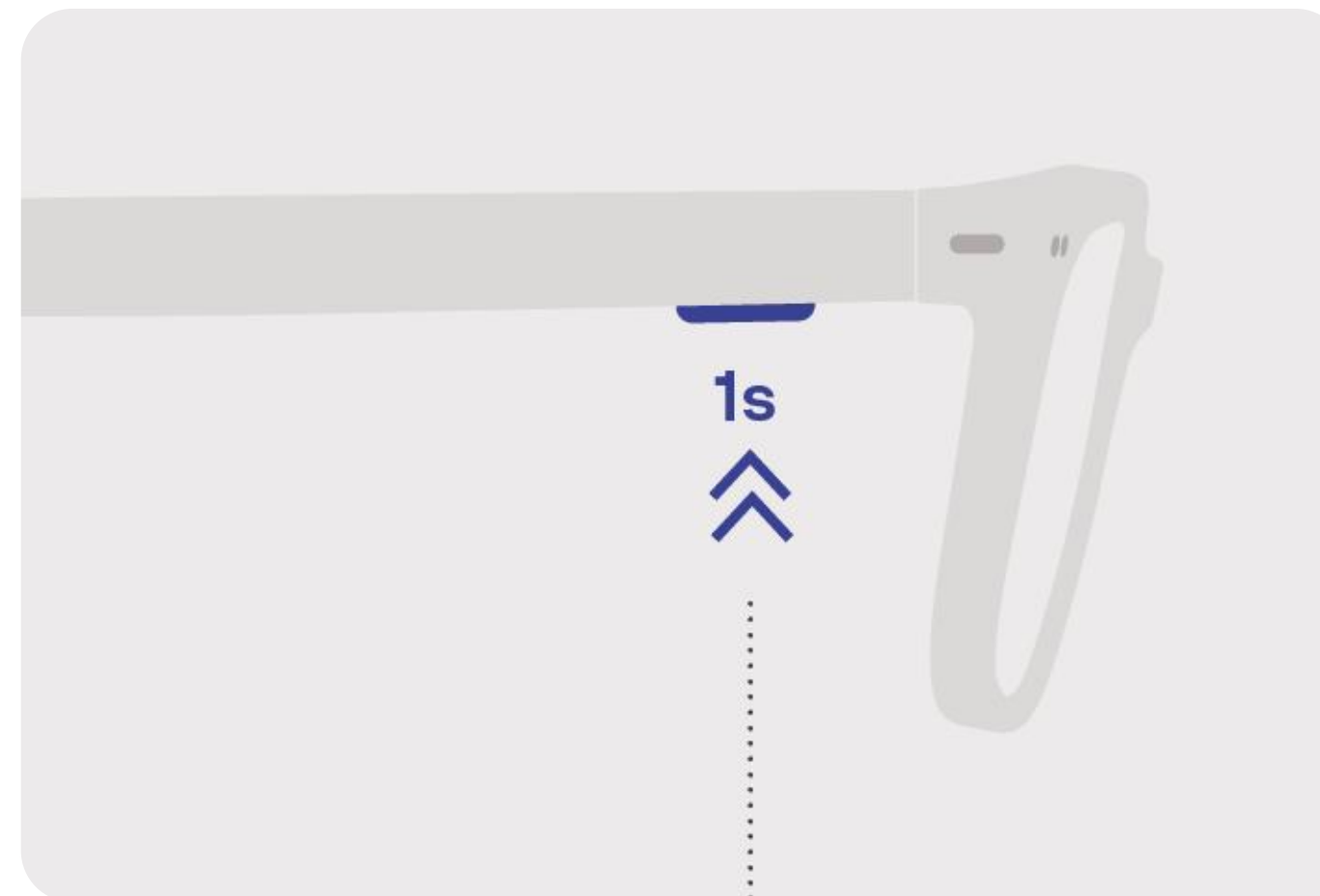

Com Controle remoto

Pode utilizar os níveis de volume designados pressionando os botões + e - para aumentar ou diminuir o volume.






Como ajustar o volume dos óculos?

Com a App Nuance Audio


Outra forma é usar o Controle de Volume no ecrã inicial da sua aplicação Nuance Audio para ajustar o volume de acordo com a sua preferência.

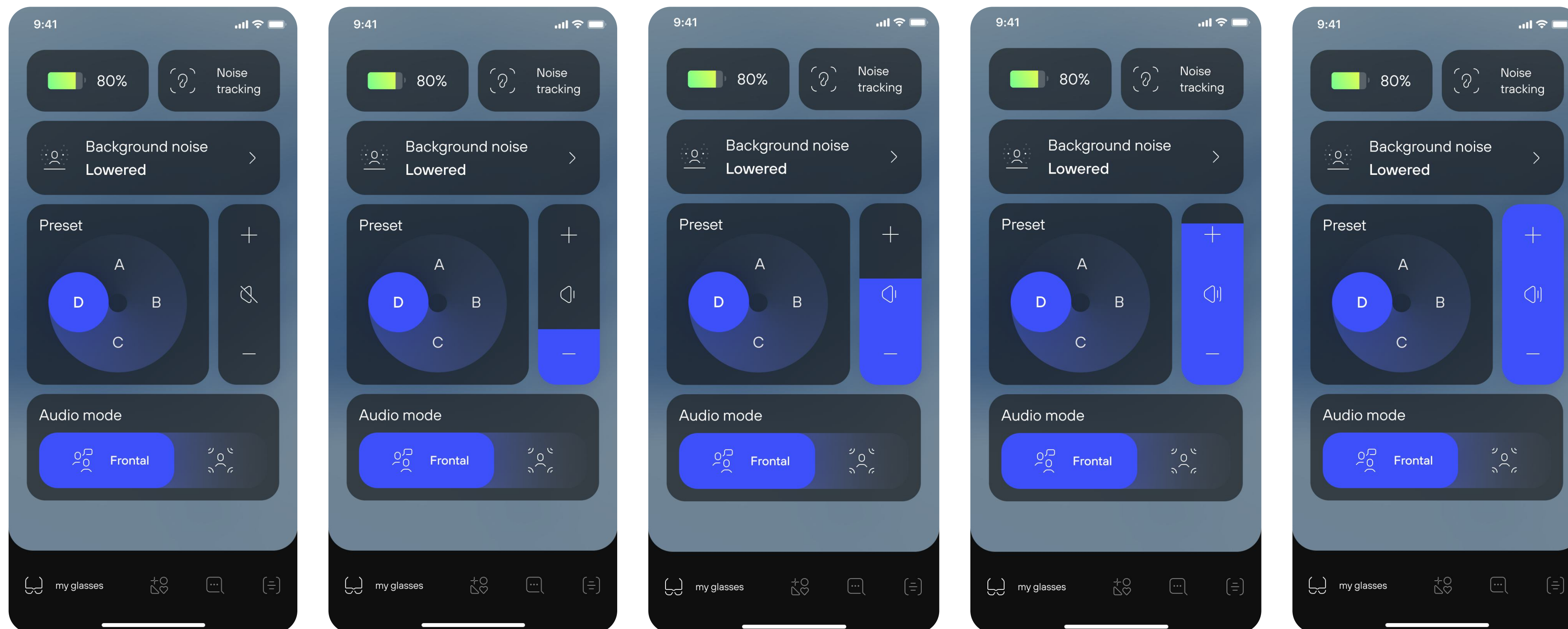



Como ajustar o volume dos óculos?

Com a App Nuance Audio
Além disso, na secção de Definições da aplicação, pode convenientemente seleccionar e definir os seus três níveis de volume preferidos para fácil acesso.

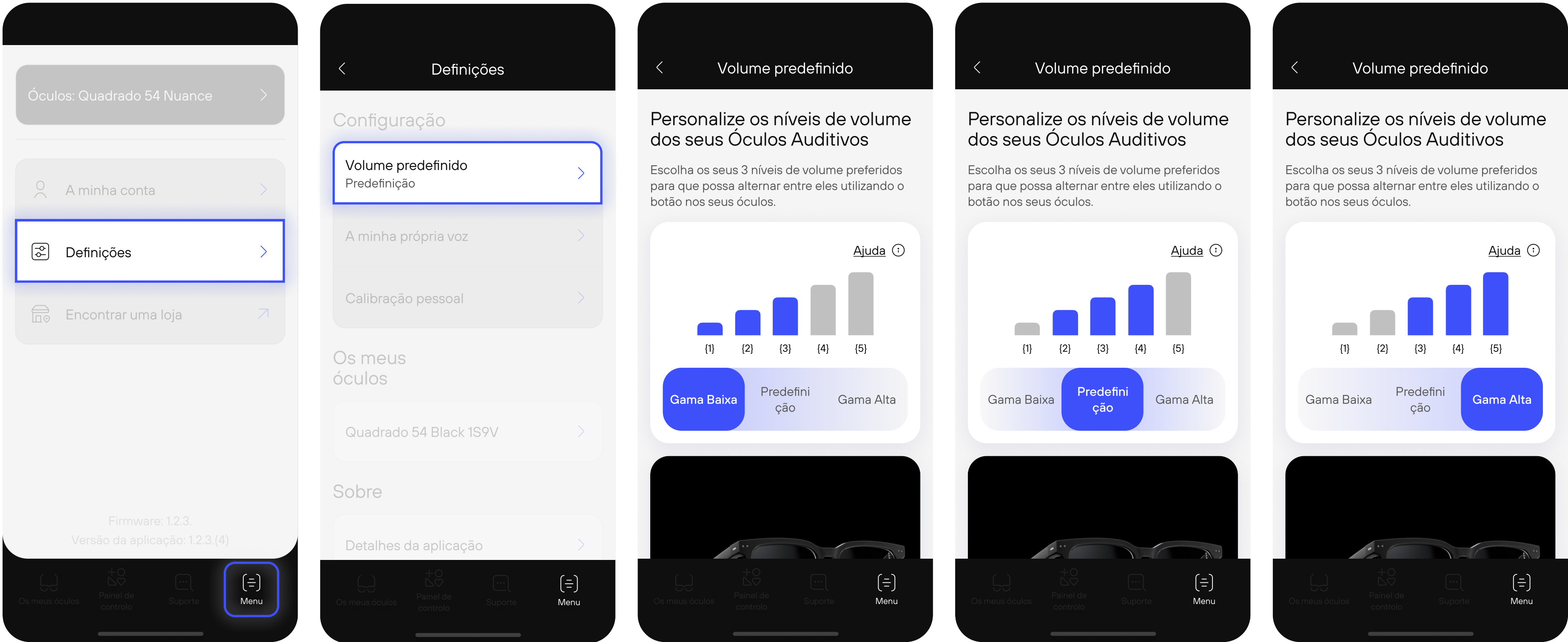



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas, por favor, siga este link.

[↗ Veja as instruções para utilização](#)