

Configurações de audição: Voz própria




Como é que calibra a sua própria voz?

O Nuance Audio permite-lhe calibrar a sua própria voz para que possa decidir quão claramente gostaria de a ouvir para o seu próprio conforto.




Como é que calibra a sua própria voz?

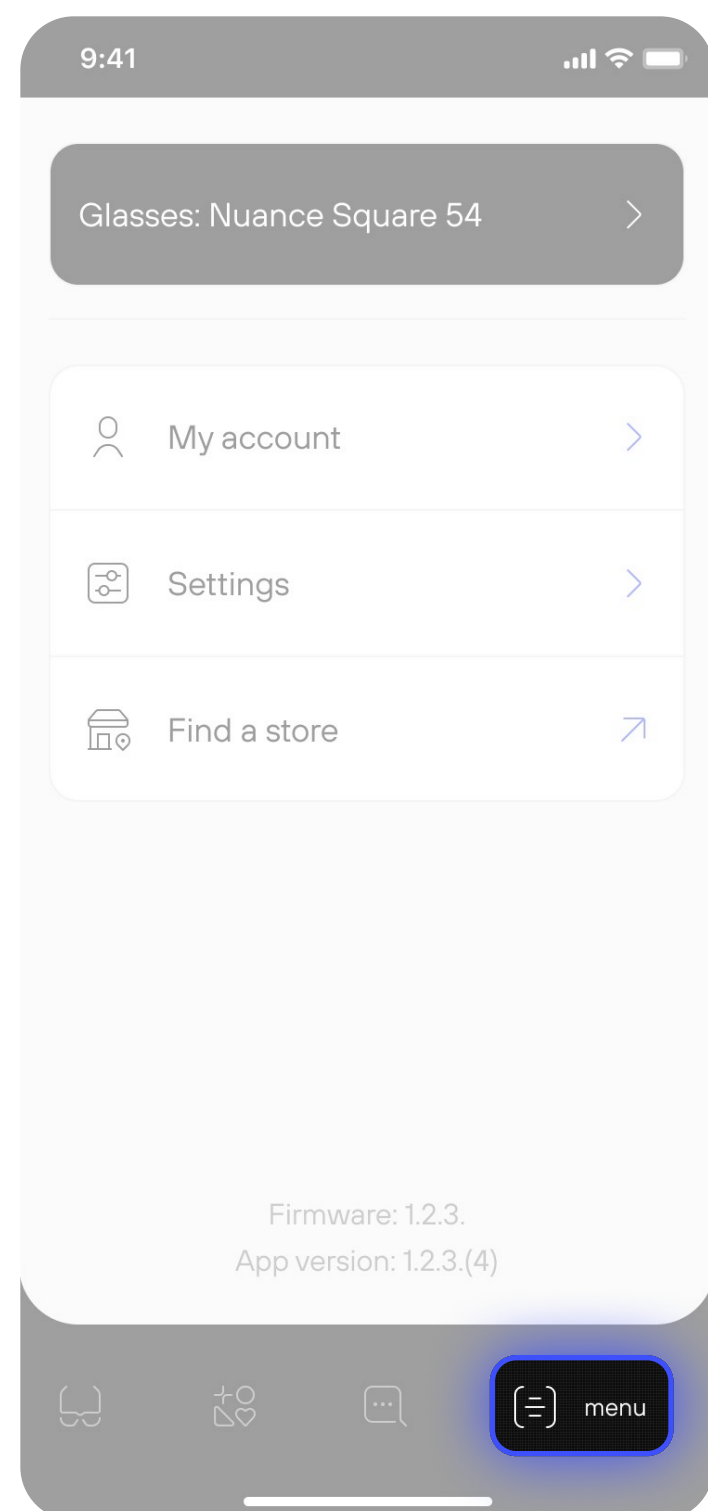


Dentro do painel da aplicação Nuance Audio, toque em Menu (canto inferior direito na barra de navegação).

No Menu, toque em **Definições**

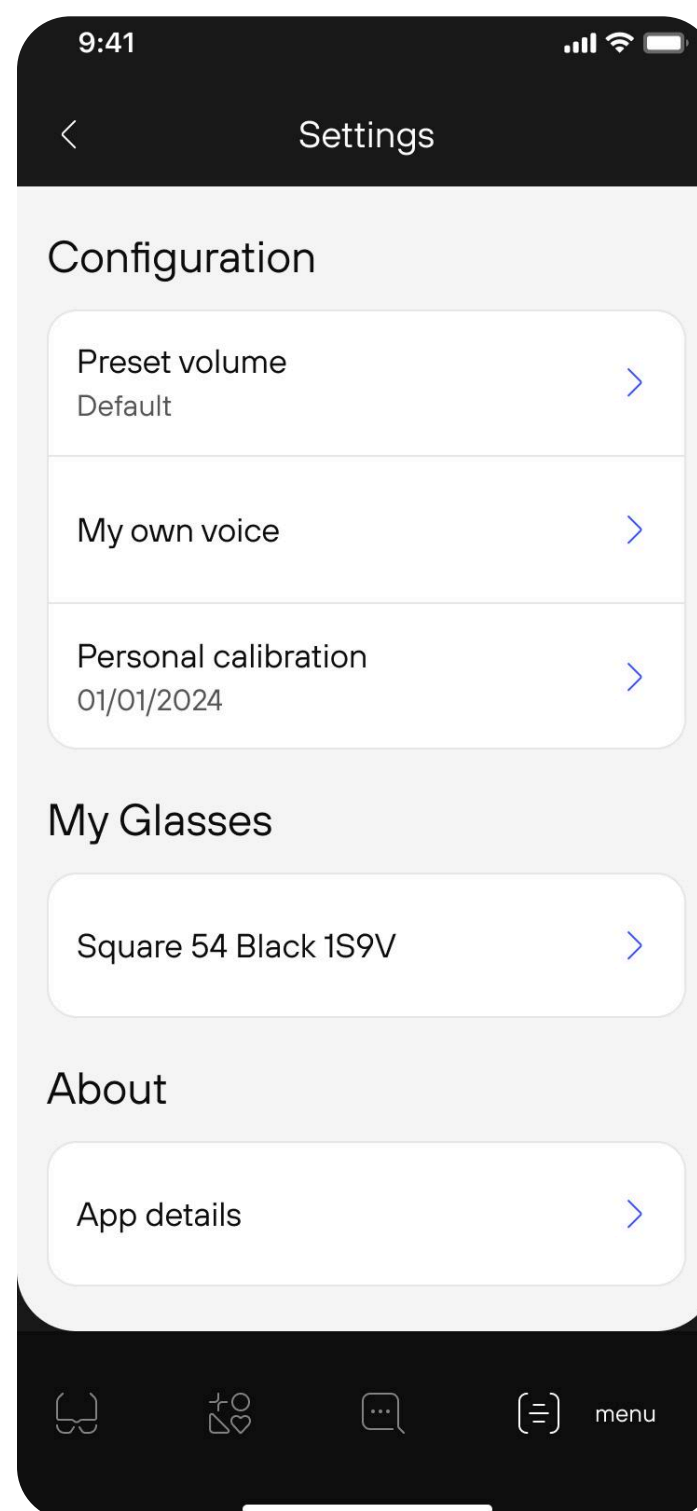

Nas Definições, selecione **A minha própria voz**

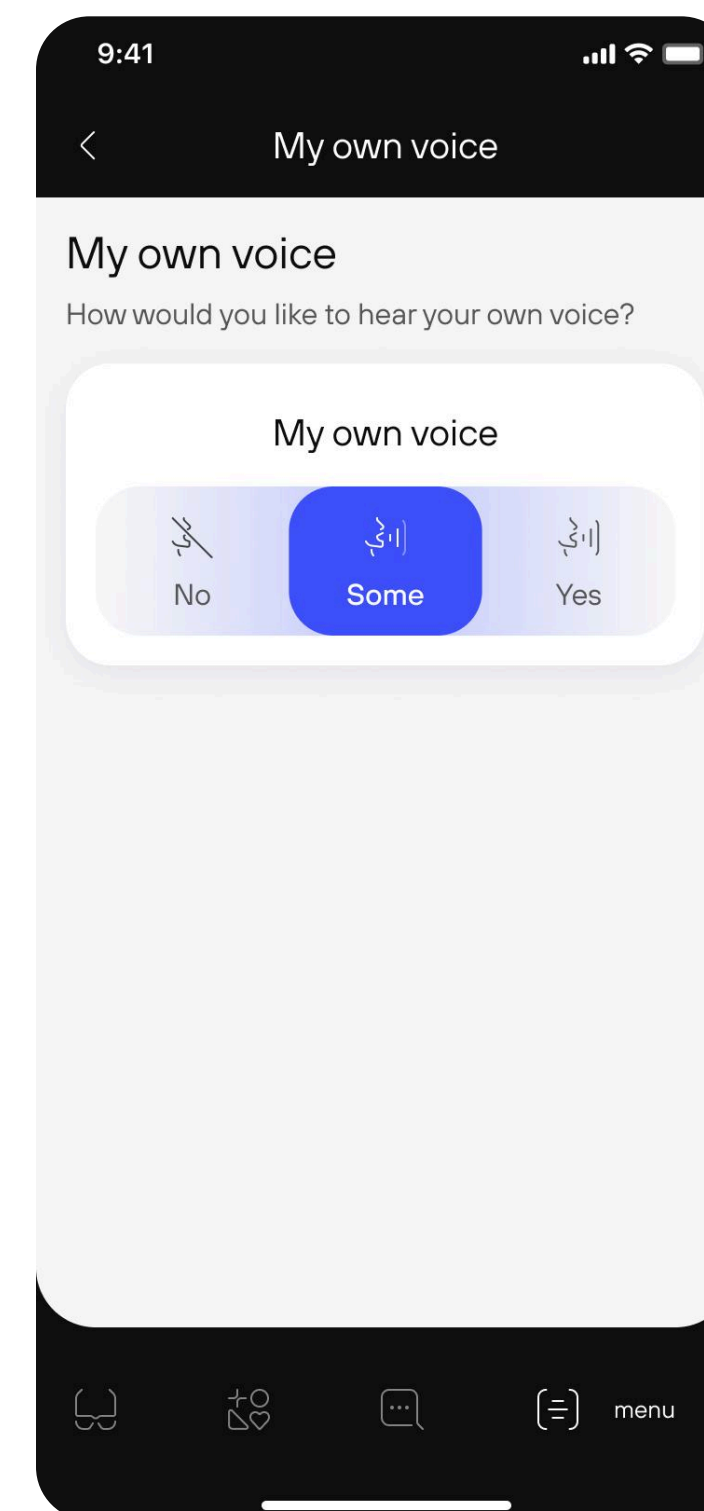

Agora, pode **ajustar livremente os seus níveis de amplificação** para o que melhor se adequa a si e ao seu ambiente.

Notas

Por favor, considere que definir a **Calibração Pessoal também é relevante** para otimizar a sua experiência geral, garantindo o som mais natural e a clareza da sua própria voz, assim como para outras configurações de áudio.



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas, por favor, siga este link.

[↗ Veja as instruções para utilização](#)