


Como cargar



Pronto para carregar os seus Óculos Nuance Audio?


Passo 1

Primeiro, ligue a sua Base de Carregamento utilizando um carregador USB-C padrão ou uma fonte de alimentação USB-C (mínimo 5V) para ligar o carregador fornecido e o cabo USB-C.

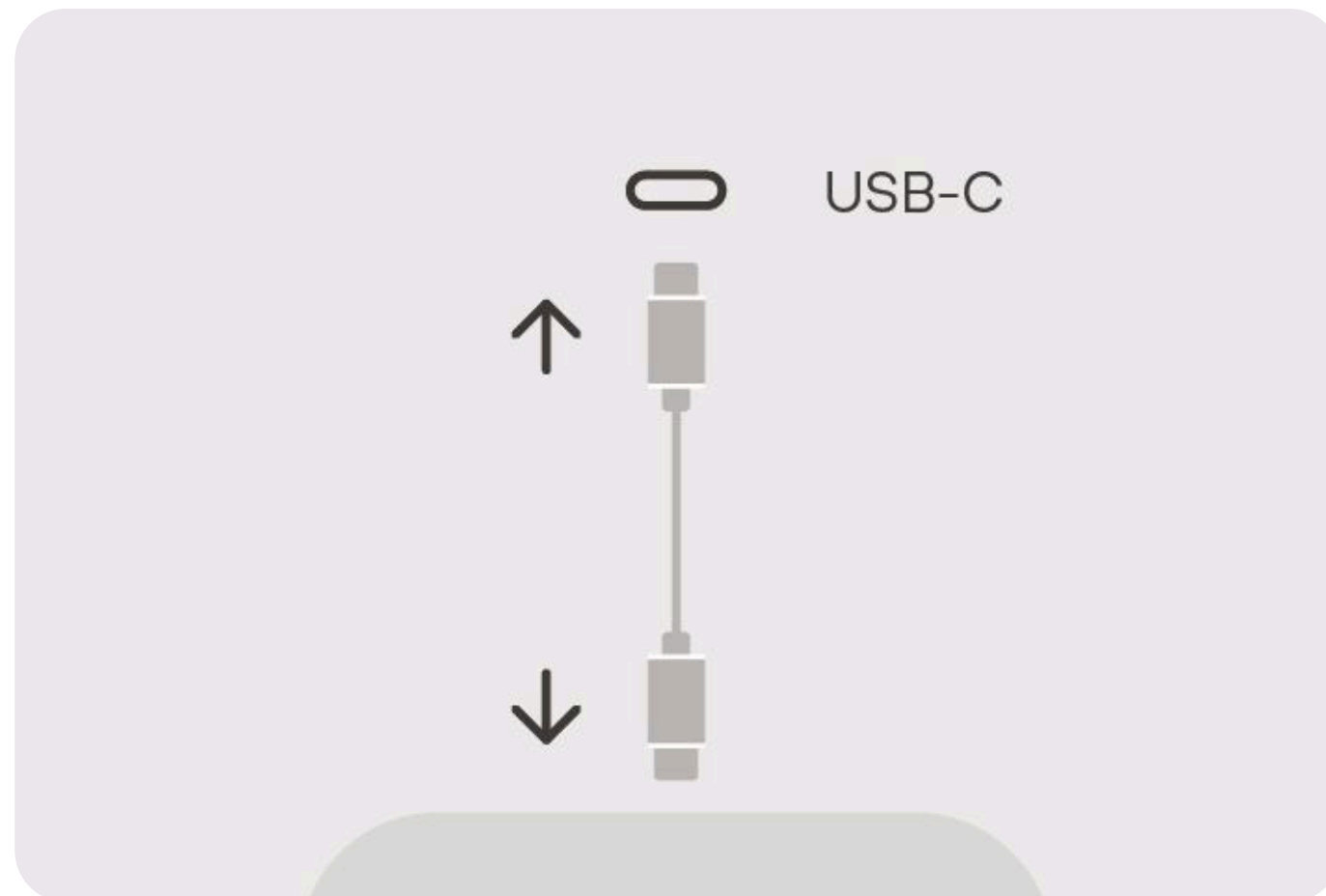

Passo 2

Em seguida, dobre os seus Óculos Nuance Audio e coloque-os diretamente na Base de Carregamento exatamente como mostrado. Os ímanes dentro do Base de Carregamento ajudarão a posicionar os óculos

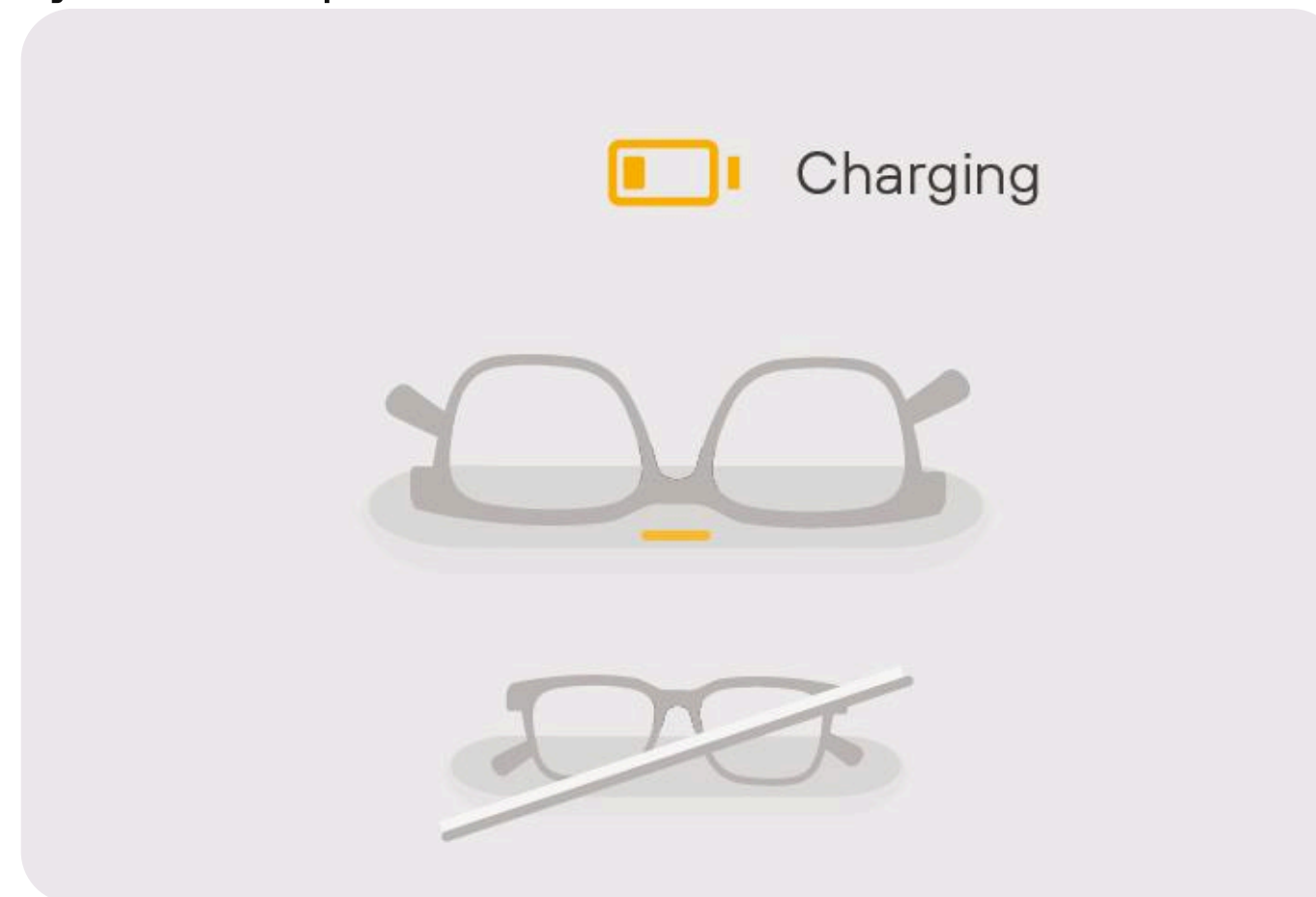




Como saber quando os seus óculos estão carregados?


LED laranja

O carregamento está em progresso.

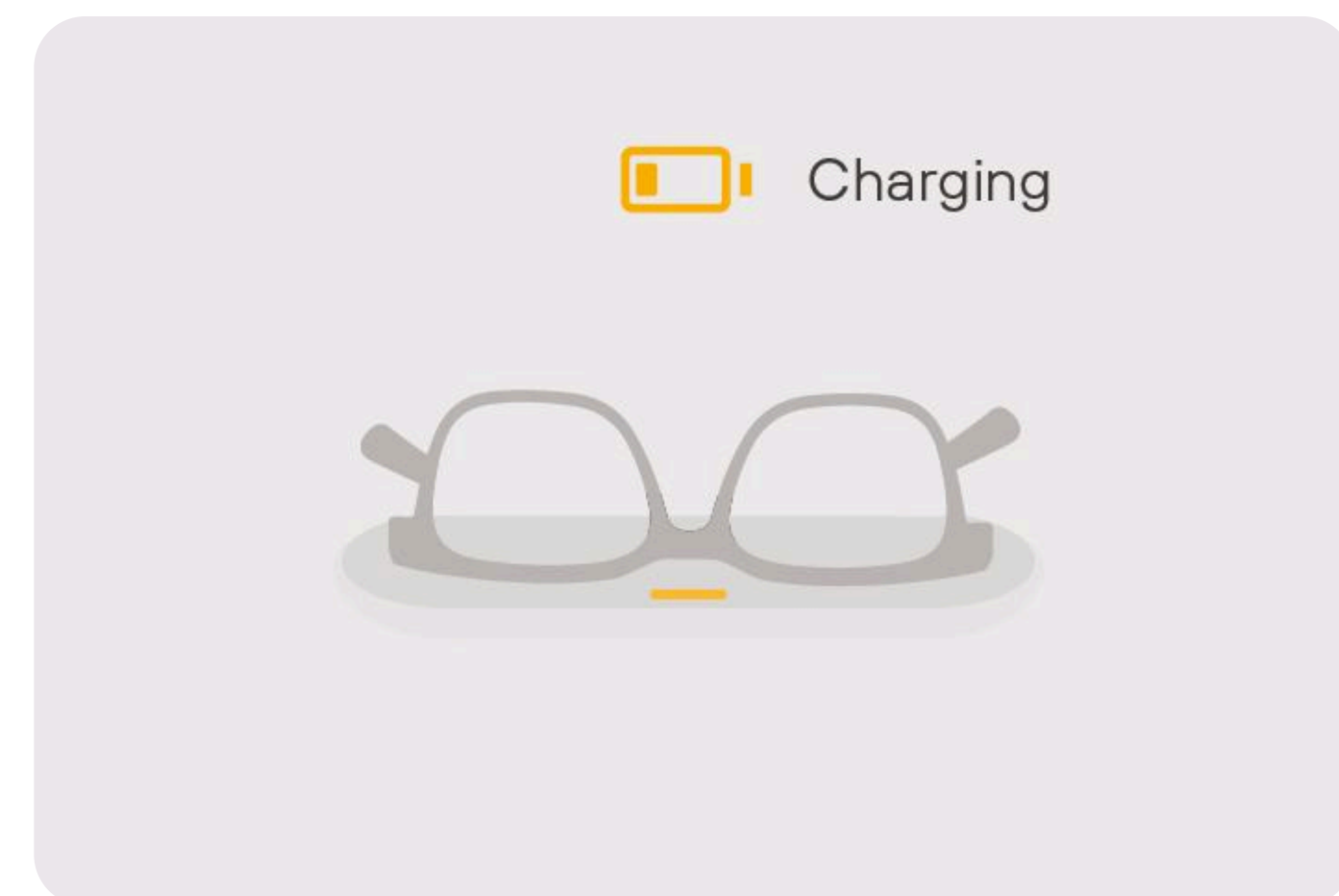

LED verde

Os óculos estão totalmente carregados (pelo menos, 96%).

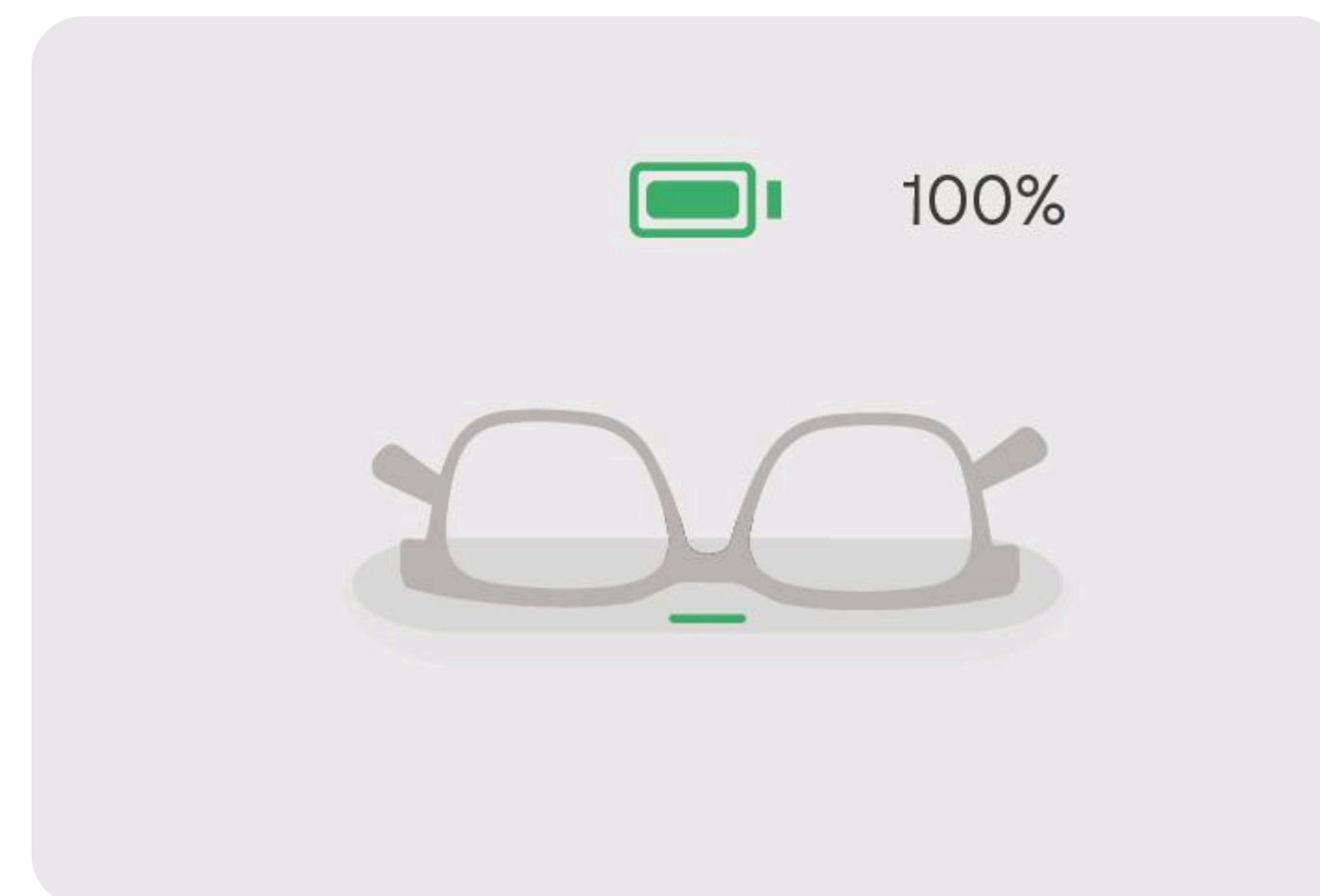




Indicações do nível de bateria

Quando retira os seus óculos, tanto o LED da base de carregamento como o LED da armação indicarão o nível de bateria durante alguns segundos.


LED vermelho

O nível da bateria está abaixo de 20%.

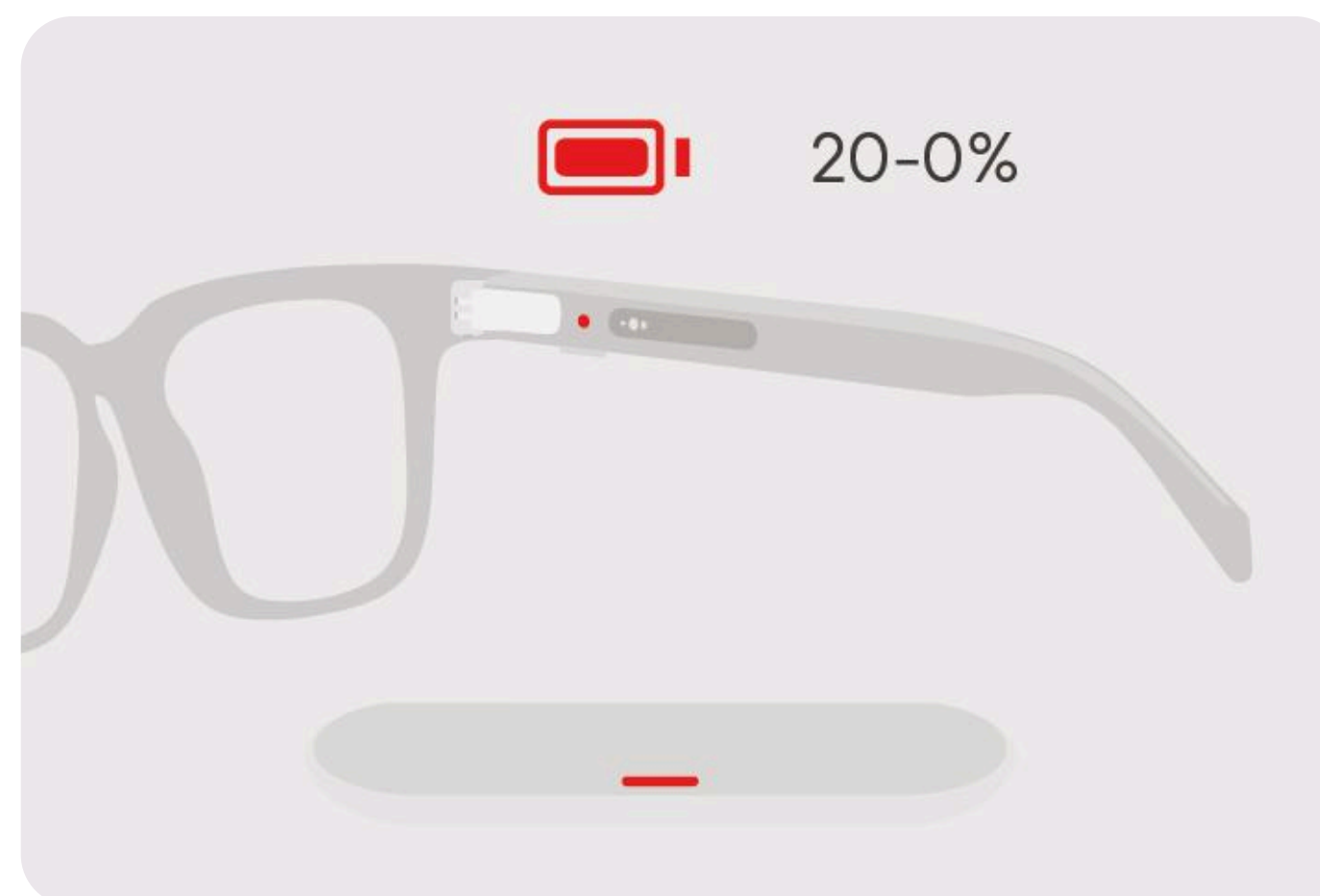

LED verde

O nível da bateria é superior a 20%.

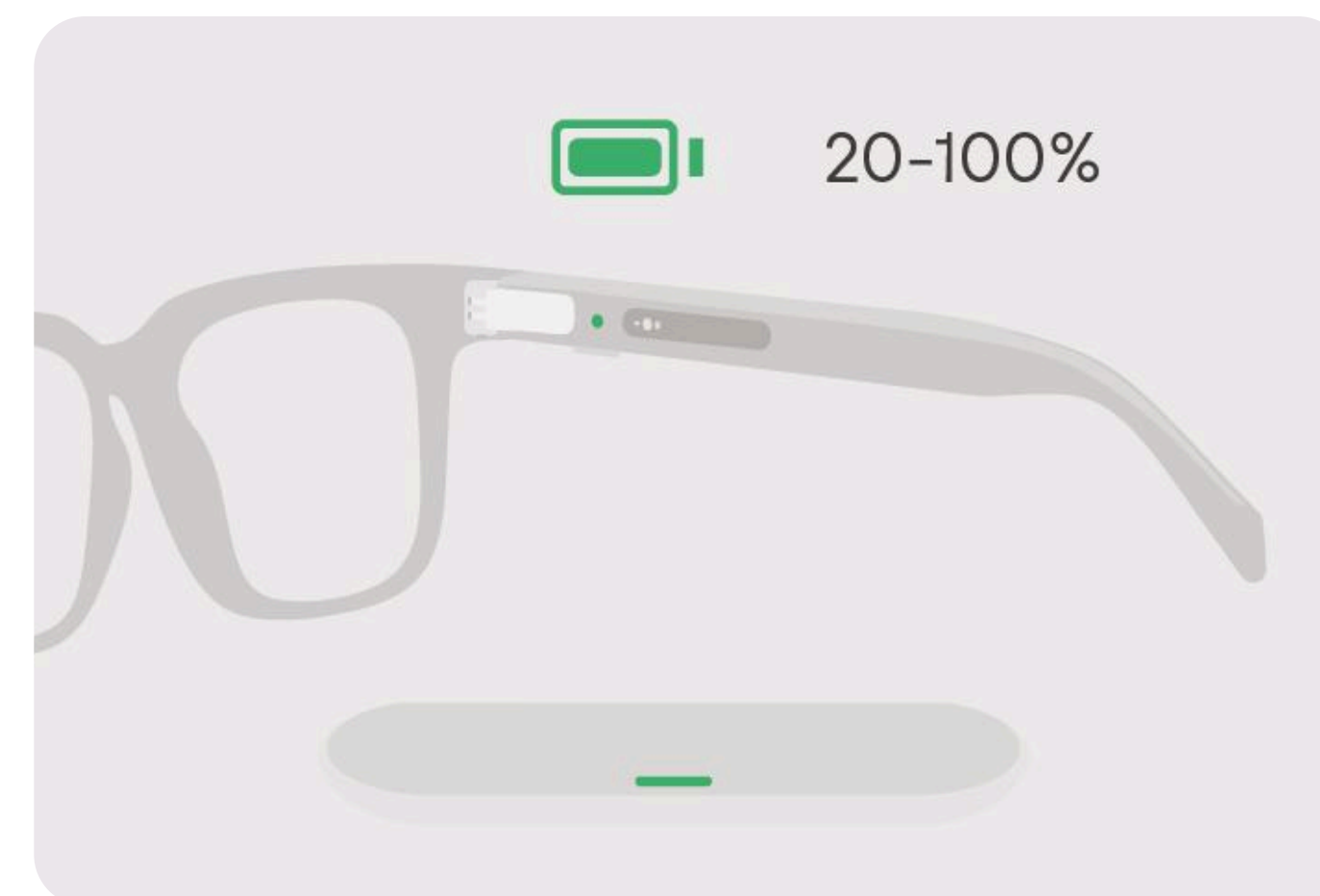



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas, por favor, siga este link.

[↗ Veja as instruções para utilização](#)