

NUANCE AUDIO™ GLASSES & NUANCE AUDIO™ CHARGING PAD

Warnung: Das Produkt ist für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, vorzugsweise einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO), falls Ihr Zustand eine fachärztliche Behandlung erfordert. Freiverkäufliche **medizinische Geräte sind nur für Benutzer ab 18 Jahren vorgesehen.**

Dieses medizinische Gerät ist für Erwachsene mit leichter oder mittlerer Schwerhörigkeit geeignet. Wie können Sie feststellen, ob Sie davon betroffen sind?

- Mögliche Anzeichen sind Schwierigkeiten,
- Sprache an lauten Orten zu hören,
- Gesprächen in Gruppen zu folgen oder am Telefon zu verstehen.
- Auch beim Zuhören ermüden Sie möglicherweise schnell.
- Sie müssen die Lautstärke des Fernsehers oder Radios erhöhen und andere Leute beschweren sich darüber, dass es zu laut ist.

Einige Personen mit Hörverlust benötigen die Hilfe eines Hörgeräteakustikers. Woher wissen Sie, ob Sie einen Spezialisten aufsuchen sollten?

- Sie können Sprache nicht hören, auch wenn es im Raum ruhig ist.
- Sie hören laute Geräusche nicht gut, z. B. laute Musik, Elektrowerkzeuge, Motoren oder andere sehr laute Dinge.

Wenn Ihr Hörverlust es Ihnen erschwert, laute Geräusche zu hören, ist dieses medizinische Gerät ohne die Hilfe eines Fachmannes möglicherweise nicht geeignet. Wenn Ihnen dieses medizinische Gerät nicht ausreichend hilft, wenden Sie sich an einen Hörgeräteakustiker.

WARNUNG: Wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten.

Wenn Sie eines der folgenden Probleme haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, vorzugsweise einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO-Arzt).

- Ihr Ohr hat einen Geburtsfehler oder eine ungewöhnliche Form oder
- ihr Ohr wurde bei einem Unfall verletzt oder deformiert
- Sie haben in den letzten 6 Monaten Blut, Eiter oder Flüssigkeit aus Ihrem Ohr verloren.
- Ihr Ohr fühlt sich schmerzhaft oder unangenehm an.
- Sie haben viel Ohrenschmalz in Ihrem Ohr oder Sie haben den Eindruck, dass etwas reingeraten sein könnte.
- Ihnen wird sehr schwindelig, Sie fühlen sich benommen, oder haben das Gefühl, die Welt um Sie herum dreht sich und schwankt (Vertigo).
- Ihr Gehör hat sich in den letzten 6 Monaten plötzlich verändert oder es wird schlechter und dann wieder besser.
- Sie haben auf einem Ohr schlechteres Gehör.

- Sie hören nur auf einem Ohr ein Klingeln oder Summen.

Hinweis zu den Kontaktdaten. Kontaktinformationen und weitere Kennzeichnungen, einschließlich der Gebrauchsanweisungen, finden Sie im Internet unter:
www.nuanceaudio.com.

Systemvoraussetzungen: Ein iPhone mit iOS-Betriebssystem (iOS 16.6.1+) oder ein Mobiltelefon mit Android-Betriebssystem (Android 12+). Detaillierte Systemvoraussetzungen, Software-Lizenzbedingungen und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.nuanceaudio.com. Garantieinformationen beiliegend und auf www.nuanceaudio.com.

Die Nuance Audio™ Glasses verwendet Bluetooth®-Technologie, um Steuerdaten mit einem gekoppelten Mobilgerät auszutauschen.

Android® ist eine eingetragene Marke von Google LLC.

iPhone® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. Die Marke iPhone® wird unter Lizenz von Apple verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Nuance Audio™ unter Lizenz verwendet.

Nuance Audio™ ist eine Marke der Essilor International SAS.

FCC-Konformitätserklärung.

Das medizinische Gerät und das Charging Pad entsprechen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses medizinische Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses medizinische Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Relevante Daten für alle nach ANSI S3.22-2014 / CTA 2051:2017 gemessenen Parameter sind in der IFU enthalten. Zu den technischen Spezifikationen der Nuance Audio™ Glasses gehören:

- Standard-Tonbandgerät.
- Bandbreite des Frequenzgangs 200 Hz - 5000 Hz.
- Maximale Ausgangsbegrenzung OSPL90 110,5 dB.
- Betriebsbedingungen: -10°C bis +45°C; 101,3 kPa bis 61,9 kPa; Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 60% bei +35°C für 1.000 Stunden; maximale Höhe von 3.900 m für 1 Stunde bei 0°C und +35°C.
- Transport- und Lagerbedingungen: Die Produkte bleiben funktionsfähig, auch nach einer minimalen Lagertemperatur von -30°C oder einer maximalen Lagertemperatur von +75°C, einer hohen Luftfeuchtigkeit von 90% und einer Temperatur von +45°C für 288 Stunden (befreit wurden); Exposition in einer Höhe von 12.000 m für 12 Stunden bei -10°C und +45°C.

Schutz gegen Staub und Eindringen von Wasser: IP54

Diese Box enthält:

- 1 Nuance Audio™ Glasses.
- 1 Nuance Audio™ Charging Pad.
- 1 USB-C Ladekabel.
- 1 Nuance Audio™ Folded Case.
- 1 Reinigungstuch.
- 1 Schnellstart-Anleitung.
- 1 Gebrauchsanweisung und Garantie.

WICHTIG! Die Nuance Audio™ Glasses ist ein medizinisches Gerät. Das Charging Pad ist als Zubehör für die Nuance Audio™ Glasses zu verwenden. Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Das Nuance Audio™ Charging Pad Zubehör ist dazu bestimmt, die Luftleitungsfunktion des Hörgeräts in Bezug auf sein Aufladen zu ermöglichen. Das Charging Pad wird nur zum drahtlosen Aufladen von Nuance Audio™ Glasses verwendet. Die Nuance Audio™ Glasses und das Nuance Audio™ Charging Pad können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder andere implantierbare Geräte stören. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Um die Nuance Audio™ Glasses einzurichten, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Mobiltelefon, auf dem die Nuance Audio™ App ausgeführt werden kann (kostenloser Download, QR-Code zum Herunterladen auf der Innenseite der Verpackung aufgedruckt). Möglicherweise müssen von Zeit zu Zeit Updates installiert werden, auch vor der ersten Verwendung. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der letzten Seite der Schnellstartanleitung ein.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung & Garantie, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die Nuance Audio™ Glasses ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Laden Sie die Nuance Audio™ Glasses mindestens alle 6 Monate auf. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel oder andere USB-C-Kabel (Typ C zu C) mit kompatiblen Steckern/Adaptern gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung. Es ist verboten, das Nuance Audio™ Charging Pad an einen Wandstecker/Adapter anzuschließen, der nicht für den Markt zertifiziert ist, auf dem die Ladestation vertrieben wird, und der nicht gemäß nationalen und lokalen Standards getestet und zugelassen wurde. Der Wandstecker/Adapter muss eine Mindestausgangsleistung von DC5V/1A haben.

Importeur für die USA: Luxottica of America Inc. - 4000 Luxottica Place, Mason OH, USA.
Nuance Audio™ Glasses FCC ID: 2AYOA-4004; Nuance Audio™ Charging Pad FCC ID: 2AYOA-4005



Luxottica Group S.p.A.

Piazzale Cadorna 3, 20123 Mailand, Italien



Hergestellt in China



Gebrauchsanweisungen



NICHT verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



Energy
Verified



0123

