

NUANCE AUDIO ™ GLASSES ET NUANCE AUDIO ™ CHARGING PAD

Avertissement : Si vous avez moins de 18 ans, n'utilisez pas ce produit. Il est recommandé de consulter un médecin, de préférence un oto-rhino-laryngologiste (ORL), car votre état nécessite des soins spécialisés. Les Nuance Audio ™ Glasses sont exclusivement destinés aux utilisateurs âgés de 18 ans ou plus.

Cet assistant d'écoute est conçu pour les adultes présentant une perte auditive légère à modérée. Comment savoir si vous êtes concerné ?

- Vous avez des difficultés à entendre une conversation dans des environnements bruyants.
- Vous trouvez difficile de suivre une discussion en groupe.
- Vous éprouvez des difficultés à entendre au téléphone.
- Vous ressentez une fatigue auditive après une longue période d'écoute active.
- Vous devez augmenter le volume de la télévision ou de la radio, au point que d'autres personnes trouvent cela trop fort.

Certaines personnes atteintes de perte auditive peuvent avoir besoin d'une évaluation approfondie par un spécialiste. Quand consulter un professionnel de la santé auditive ?

- Vous devriez consulter un professionnel si vous n'entendez pas bien le langage parlé, même dans une pièce calme.
- Si vous ne percevez pas clairement les sons forts, comme la musique, les outils électriques, les moteurs, ou d'autres bruits intenses.

Si votre perte auditive rend difficile l'écoute de bruits forts, cet assistant d'écoute pourrait ne pas être adapté à vos besoins sans l'aide d'un professionnel. Enfin, si cet assistant d'écoute ne vous apporte pas une aide suffisante, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la santé auditive.

AVERTISSEMENT : Quand consulter un médecin.

Si vous présentez l'un des problèmes énumérés ci-dessous, il est important de consulter un médecin, de préférence un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

- Votre oreille présente une malformation congénitale ou une forme inhabituelle.
- Vous avez subi une blessure ou une déformation de l'oreille à la suite d'un accident.
- Du sang, du pus ou un autre liquide s'est écoulé de votre oreille au cours des six derniers mois.
- Vous ressentez une douleur ou une gêne au niveau de l'oreille.
- Vous pensez avoir un bouchon de cérumen ou qu'un objet étranger se trouve dans votre oreille.

- Vous éprouvez des étourdissements, des sensations de vertige ou une impression de balancement.
- Votre audition a changé soudainement au cours des six derniers mois.
- Vous constatez des variations de votre ouïe, qui se détériore puis s'améliore par intermittence.
- Vous entendez moins bien d'une seule oreille.
- Vous percevez un sifflement ou un bourdonnement dans l'une de vos oreilles.

Avis de coordonnées

Les coordonnées et autres informations, y compris la brochure d'instructions pour l'utilisateur, sont disponibles sur Internet à l'adresse : www.nuanceaudio.com.

Exigences du système : un iPhone avec un système d'exploitation iOS (iOS 16.6.1+) ou un téléphone mobile avec un système d'exploitation Android (Android 12+). Les exigences détaillées du système, les conditions de licence logicielle, les conditions de service sont disponibles sur www.nuanceaudio.com

Informations sur la garantie à l'intérieur et disponibles sur www.nuanceaudio.com

Les Nuance Audio™ Glasses utilisent la technologie Bluetooth® pour échanger des données de contrôle avec un appareil mobile jumelé.

Android® est une marque déposée de Google LLC. iPhone® est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque iPhone® est utilisée sous licence d'Apple. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Nuance Audio™ est sous licence. Nuance Audio™ est une marque d'Essilor International SAS.

Déclaration de conformité FCC

L'assistant d'écoute et le Nuance Audio™ Charging Pad sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet assistant ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet assistant doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Les données pertinentes pour tous les paramètres mesurés selon ANSI S3.22-2014 / CTA-2051:2017 se trouvent dans la notice d'utilisation.

Les spécifications techniques des Nuance Audio™ Glasses incluent :

- un dispositif à bande standard.
 - Bande passante de réponse en fréquence de 200 Hz à 5000 Hz.
 - Limite de sortie maximale OSPL90 110,5 dB.
-
- Conditions de fonctionnement : -10°C à +45°C ; 101,3 kPa à 61,9 kPa ; humidité entre 20 % et 60 % sous +35°C pendant 1000 heures ; altitude maximale de 3.900 mètres pendant 1 heure à 0°C et +35°C.

- Conditions de transport et de stockage : les produits doivent rester fonctionnels après récupération des températures de stockage minimales de -30°C ou maximales de +75°C ; forte humidité 90 % et température +45°C pendant 288 heures ; exposition à une altitude de 12 000 mètres (18,8 kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C.

Protection contre la poussière et l'infiltration d'eau : IP54.

Cette boîte contient :

- 1 paire de Nuance Audio™ Glasses.
- 1 Nuance Audio™ Charging Pad.
- 1 câble de charge USB-C.
- 1 étui plié.
- 1 chiffon de nettoyage.
- 1 guide de démarrage rapide.
- 1 notice d'utilisation - Sécurité et garantie.

IMPORTANT ! Les Nuance Audio™ Glasses sont un assistant d'écoute. Le Nuance Audio™ Charging Pad doit être utilisé comme accessoire des Nuance Audio™ Glasses. Gardez le produit hors de portée des enfants. L'accessoire Nuance Audio™ Charging Pad est destiné à activer la fonctionnalité de l'assistant d'écoute par conduction aérienne en termes de chargement de l'assistant d'écoute. Le Nuance Audio™ Charging Pad est utilisé pour recharger sans fil uniquement les Nuance Audio™ Glasses. Les Nuance Audio™ Glasses et le Nuance Audio™ Charging Pad peuvent interférer avec des dispositifs médicaux tels que, mais pas seulement, les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs implantables, consultez votre médecin.

Pour configurer les Nuance Audio™ Glasses, une adresse e-mail et un téléphone mobile sont nécessaires pour utiliser la Nuance Audio™ App (téléchargement gratuit, le QR code de téléchargement est imprimé à l'intérieur de la boîte). Peut nécessiter l'installation de mises à jour occasionnellement, y compris avant la première utilisation. Pour plus d'informations, scannez le QR code sur la dernière page du guide de démarrage rapide.

Lisez la notice d'utilisation avant d'utiliser les Nuance Audio™ Glasses

Les Nuance Audio™ Glasses intègrent une batterie Li-ion rechargeable. Chargez les Nuance Audio™ Glasses au moins tous les 6 mois. Utilisez le câble de charge USB-C fourni ou d'autres câbles de type USB-C, C à C, avec des prises murales/adaptateurs compatibles en suivant la notice d'utilisation.

Il est interdit de connecter le Nuance Audio™ Charging Pad à une prise murale/adaptateur qui n'est pas certifié pour le marché où le Nuance Audio™ Charging Pad est commercialisé, et qui n'a pas été testé et approuvé selon les normes nationales et

locales. La prise murale/l'adaptateur doit avoir un niveau de sortie minimum de DC5V/1A.

Importateur pour les États-Unis : Luxottica of America Inc. - 4000 Luxottica Place, Mason OH, USA. Nuance Audio™ Glasses FCC ID : 2AYOA-4004 ; Nuance Audio™ Charging Pad FCC ID : 2AYOA-4005.



Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, 20123 Milan, Italie



Fabriqué en Chine



Notice d'utilisation



NE PAS utiliser si l'emballage est endommagé



Energy
Verified



0123

