



How to set up your Glasses with Nuance Audio Remote Plus


- IT Come impostare i tuoi occhiali con il Nuance Audio Remote Plus
FR Comment configurer vos lunettes avec la Nuance Audio Remote Plus
ES Cómo configurar tus gafas con Nuance Audio Remote Plus
DE Wie Sie Ihre Brille mit der Nuance Audio Remote Plus einrichten



www.nuanceaudio.com/RCvideo


1 A. Turn on your glasses
B. Wear them in a quiet room

- IT A. Accendi i tuoi occhiali
B. Indossali in una stanza tranquilla
FR A. Allumez vos lunettes
B. Portez-les dans une pièce calme
ES A. Enciende tus gafas
B. Póntelas en una habitación tranquila
DE A. Schalten Sie Ihre Brille ein
B. Tragen Sie sie in einem ruhigen Raum

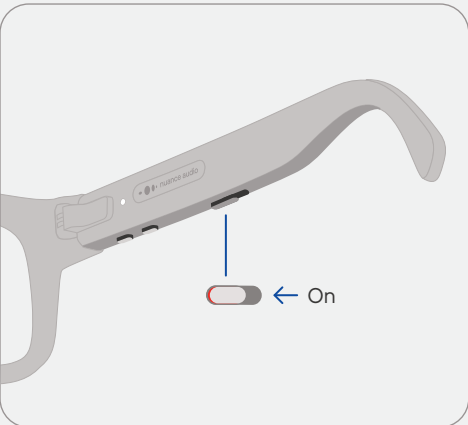

2 Press and hold both buttons

- IT Tieni premuti entrambi i pulsanti
FR Appuyez longuement sur les deux boutons
ES Mantén pulsados ambos botones
DE Halten Sie beide Tasten gedrückt

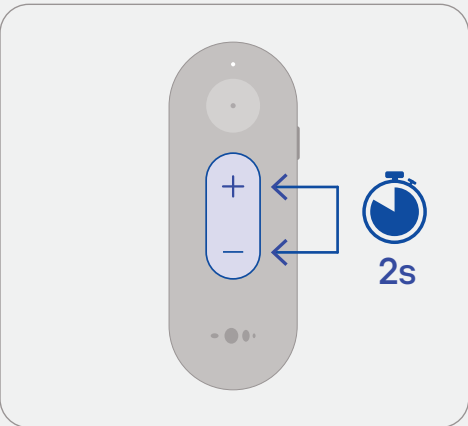


Stay quiet during the countdown

- IT Rimani in silenzio durante il conto alla rovescia
FR Restez silencieux pendant le compte à rebours
ES Permanece en silencio durante la cuenta atrás
DE Bleiben Sie während des Countdowns ruhig




Too noisy, start over

- IT Troppo rumoroso, ricomincia da capo
FR Trop bruyant, recommencez
ES Demasiado ruidoso, volver a empezar.
DE Zu laut, fangen Sie von vorne an

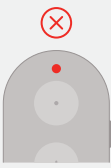

3 Press (A) to select language
Press (B) to confirm

- IT Premi (A) per selezionare la lingua
Premi (B) per confermare
FR Appuyez sur « A » pour choisir la langue
Appuyez sur « B » pour confirmer
ES Pulsa (A) para seleccionar el idioma
Pulsa (B) para confirmar
DE Drücken Sie (A) für Sprachauswahl
Drücken Sie (B) zur Bestätigung


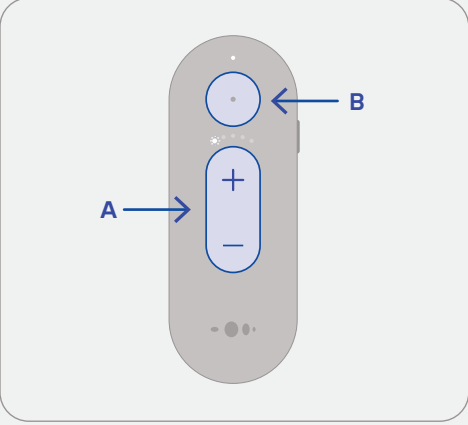


4 Listen and repeat after the beep

- IT Ascolta e ripeti dopo il segnale
FR Écoutez et répétez après le bip
ES Escucha y repite después del pitido
DE Hören Sie und wiederholen Sie nach dem Piepton

Setup complete

- IT Configurazione completata
FR Configuration terminée
ES Configuración completada
DE Einrichtung abgeschlossen

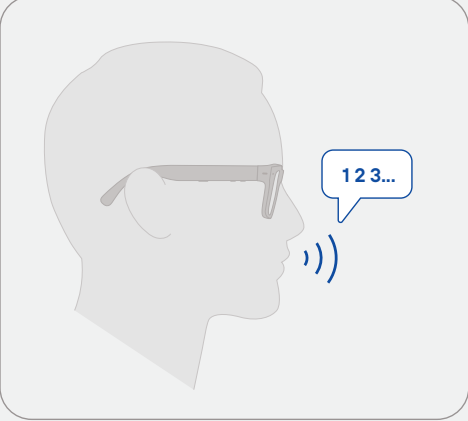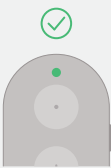


Press to switch audio modes

Frontal - Amplifies sounds in front of you
All-Around - Amplifies sounds all around you

Volume control


IT Controllo del volume
FR Contrôle du volume
ES Control de volumen
DE Lautstärkeregelung

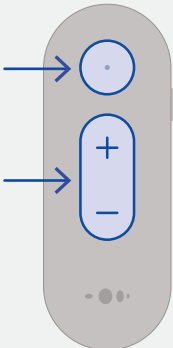

IT Premi per cambiare modalità audio
Frontale - Amplifica i suoni davanti a te.
360° - Amplifica i suoni provenienti da tutte le direzioni.
FR Appuyez pour changer de mode audio
Frontal - Amplifie les sons en face de vous.
360° - Amplifie les sons tout autour de vous
ES Pulsa para cambiar de modalidad de audio.
Frontal: amplifica los sonidos frente a ti.
360°: amplifica los sonidos a tu alrededor
DE Drücken Sie, um die Audiomodi zu wechseln.
Frontal - Verstärkt Klänge vor Ihnen.
360° - Verstärkt Klänge um Sie herum

Press and hold to select the preset that helps you hear best

IT Tieni premuto per selezionare il profilo più adatto a te
FR Appuyez longuement pour sélectionner le préréglage qui vous permet d'entendre le mieux
ES Mantén pulsado para seleccionar el preajuste que te ayude a oír mejor
DE Gedrückt halten, um die Voreinstellung auszuwählen, die Ihnen am besten beim Hören hilft

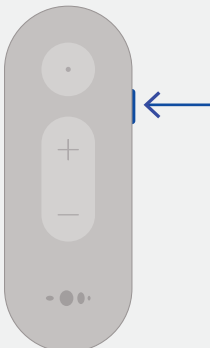

LED indications IT Indicazioni LED FR Voyants LED ES Indicaciones LED DE LED-Anzeigen



Reconnecting

IT Riconnessione
FR Reconnexion
ES Reconexión
DE Erneute Herstellung einer Verbindung



Low battery

IT Batteria scarica
FR Batterie faible
ES Bateria baja
DE Niedriger Batteriestand



Glasses not found

IT Glasses non trovati
FR Glasses introuvables
ES Glasses no encontradas
DE Glasses nicht gefunden


Pair

IT Abbinamento FR Appairage ES Emparejamiento DE Koppeln

1

A. Turn the glasses on, and then B. Press & hold the Plus button

IT A. Accendi gli occhiali e poi B. Tieni premuto il pulsante Più
FR A. Allumez les lunettes, puis B. Appuyez et maintenez le bouton Plus
ES A. Enciende las gafas y, a continuación B. Mantén pulsado el botón Más.
DE A. Schalten Sie die Brille ein und B. Halten Sie die Plus-Taste gedrückt

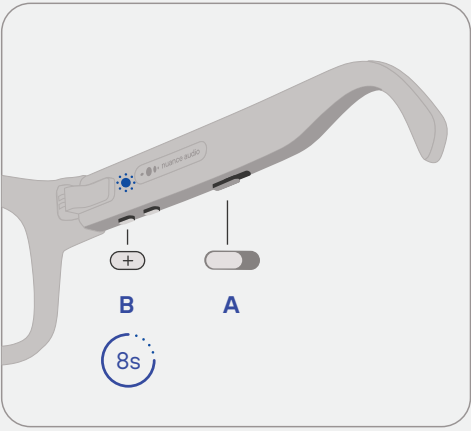

2

Pull the tab, or press & hold the side button


IT Tira la linguetta oppure tieni premuto il pulsante laterale
FR Tirez sur la tirette, ou maintenez appuyé le bouton latéral
ES Tira de la lengüeta o mantén pulsado el botón lateral
DE Ziehen Sie die Zuglasche oder halten Sie die Seitentaste gedrückt



Bluetooth pairing indicators IT Indicatori di abbinamento Bluetooth FR Indicateurs d'appairage avec le Bluetooth ES Indicadores de emparejamiento Bluetooth DE Bluetooth-Kopplungsanzeigen

Blinking blue LED – Pairing in progress
Solid blue LED – Pairing successful

IT LED blu lampeggiante - Abbinamento in corso
LED blu fisso - Abbinamento riuscito
FR LED bleue clignotante : Appairage en cours
LED bleue fixe : Appairage réussi
ES LED azul parpadeante - Emparejamiento en curso
LED azul sólido - Emparejamiento correcto
DE Blinkende blaue LED – Kopplung läuft
Konstant blaue LED – Kopplung erfolgreich abgeschlossen

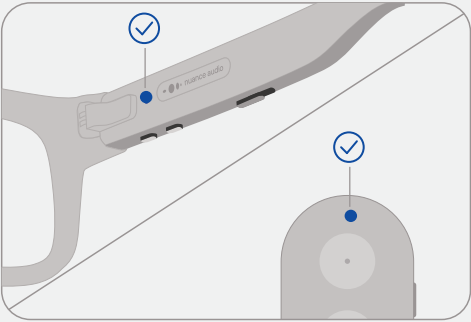

Support nuanceaudio.com/contact-us

IT Supporto FR Assistance ES Soporte DE Hilfe

This quick start guide is applicable to AAW0003EL & REB250054A0 Nuance Audio™ Remote Plus
IT Questa guida rapida è applicabile ai modelli Nuance Audio™ Remote Plus AAW0003EL e REB250054A0
FR Ce guide de démarrage rapide s'applique aux modèles de Nuance Audio™ Remote Plus AAW0003EL et REB250054A0
ES Esta guía de inicio rápido es aplicable a los modelos de Nuance Audio™ Remote Plus AAW0003EL y REB250054A0
DE Diese Schnellstart-Anleitung ist für die Modelle AAW0003EL und REB250054A0 der Nuance Audio™ Remote Plus gültig

Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy

