

Configurazioni uditive: Modalità audio



Che cos'è la Modalità audio?

La modalità audio ti permette di scegliere dove focalizzare l'ascolto: sui suoni provenienti direttamente davanti a te oppure su quelli dell'ambiente circostante.

Scegli tra queste due opzioni:

Modalità Frontale

Amplifica i suoni davanti a te, permettendoti di concentrarti sul parlato della persona che sta di fronte a te, specialmente in ambienti rumorosi.



Modalità 360°

Amplifica i suoni e il parlato da tutte le direzioni ed è ideale per situazioni in cui è necessario essere consapevoli di ciò che succede intorno a te, come camminare o guidare.






Come fare per regolare la Modalità audio?

Passa da una modalità all'altra in vari modi: direttamente dagli occhiali, con il Remote PPlus o dalla Nuance Audio App.


Su Nuance Audio Plus

Tocca due volte l'area sull'asta destra. Un segnale audio confermerà la selezione. Questa funzione è disponibile solo se le scorciatoie sono attive.

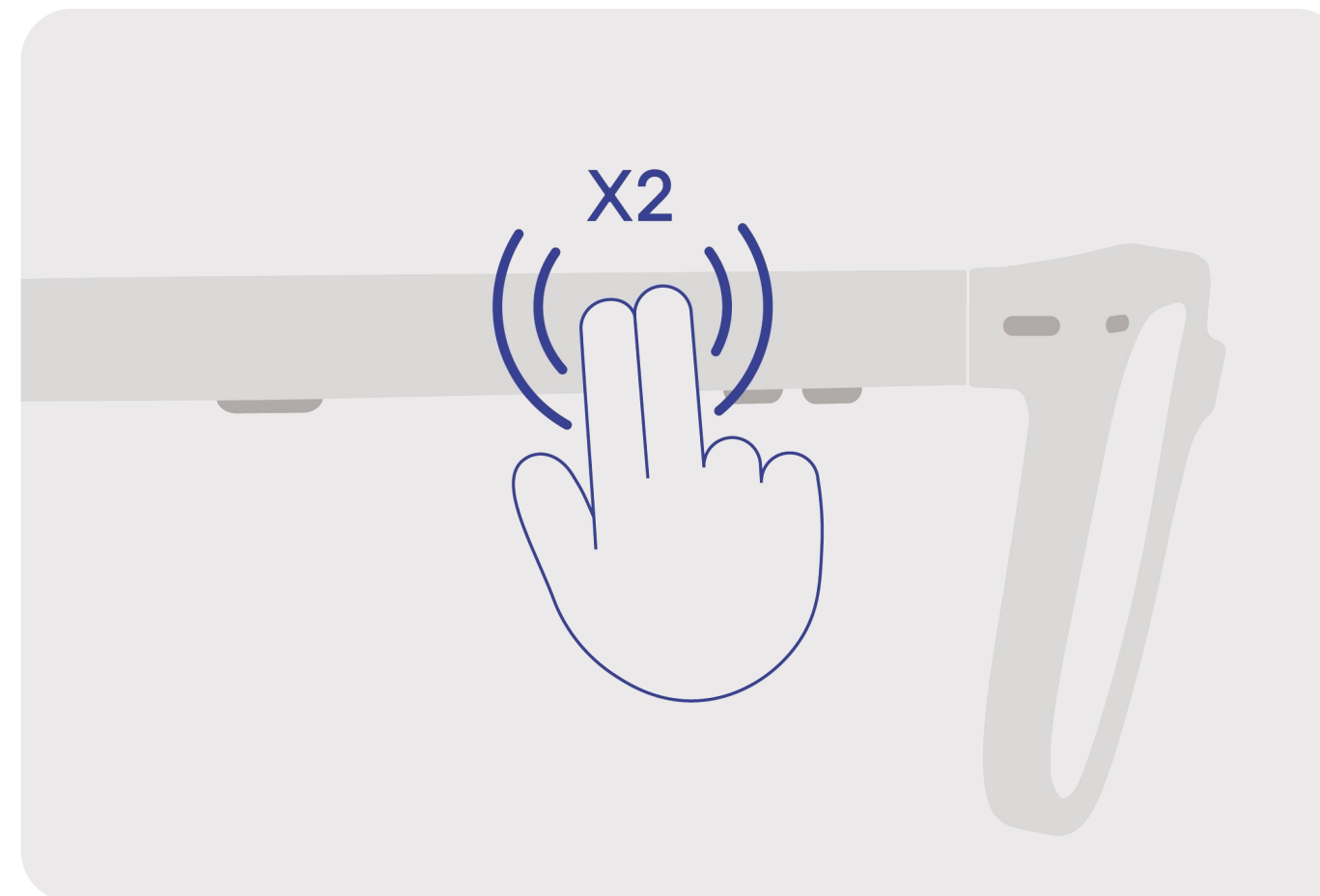

Con il Nuance Audio™ Remote Control


Premi il **pulsante Modalità audio**.

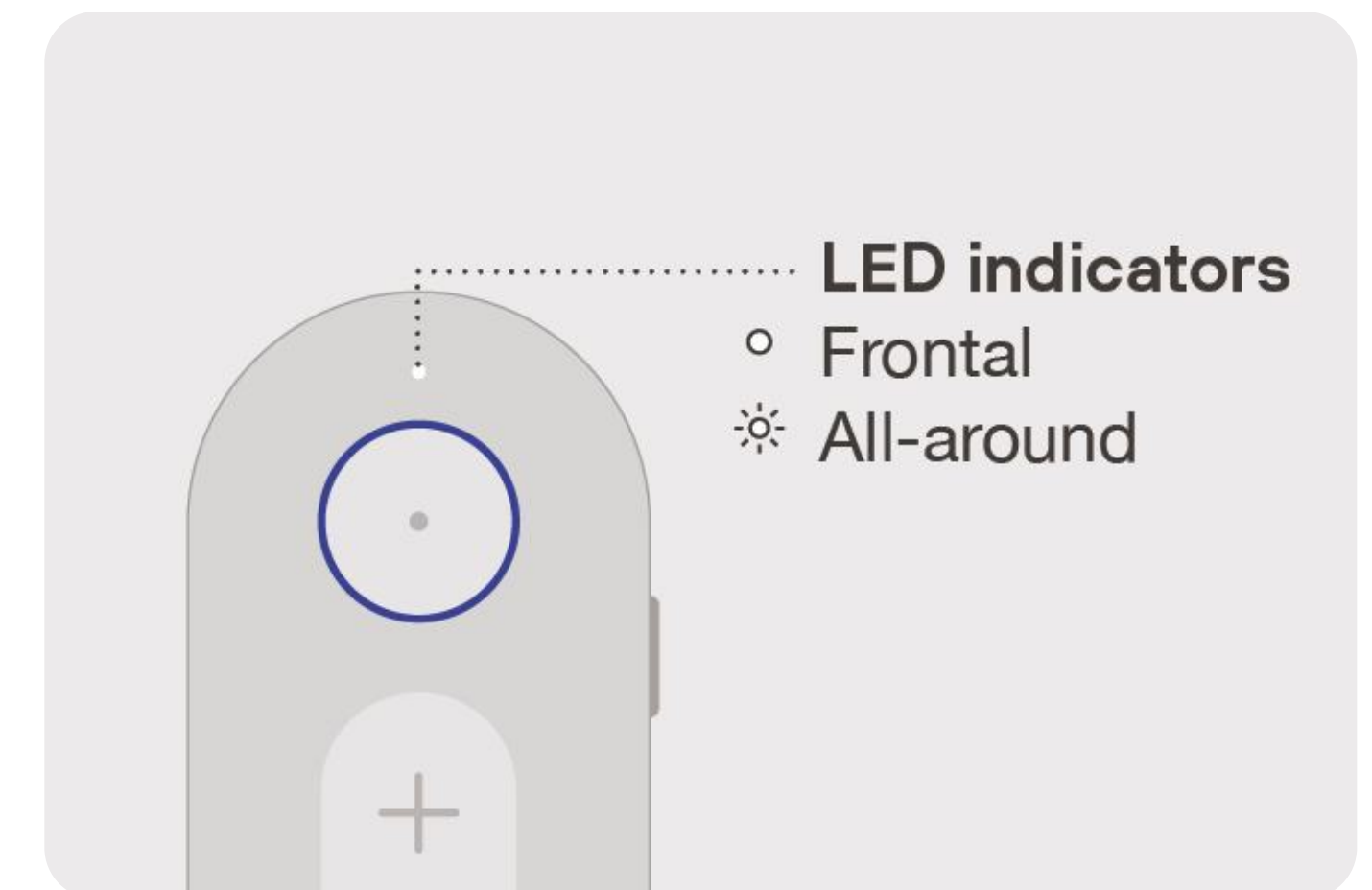



Come fare per regolare la Modalità audio?

Con la Nuance Audio™ App
Scorri o tocca il **Pulsante della modalità audio**
disponibile nella schermata
Home dell'app.

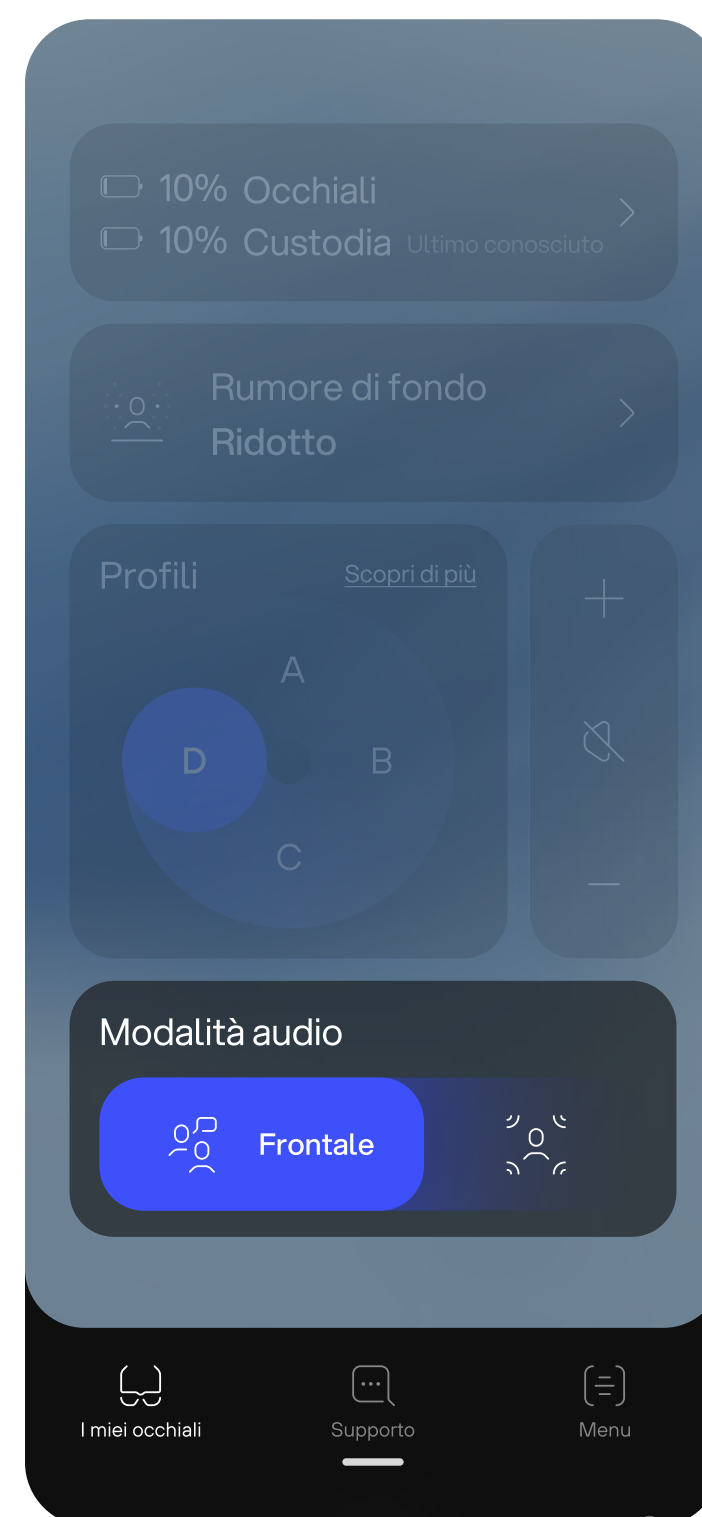

Modalità Frontale


Questa modalità amplifica i suoni davanti a te, permettendoti di concentrarti sul parlato della persona che sta di fronte a te.





Come fare per regolare la Modalità audio?

Con la Nuance Audio™ App
Scorri o tocca il **Pulsante della modalità audio**
disponibile nella schermata
Home dell'app.

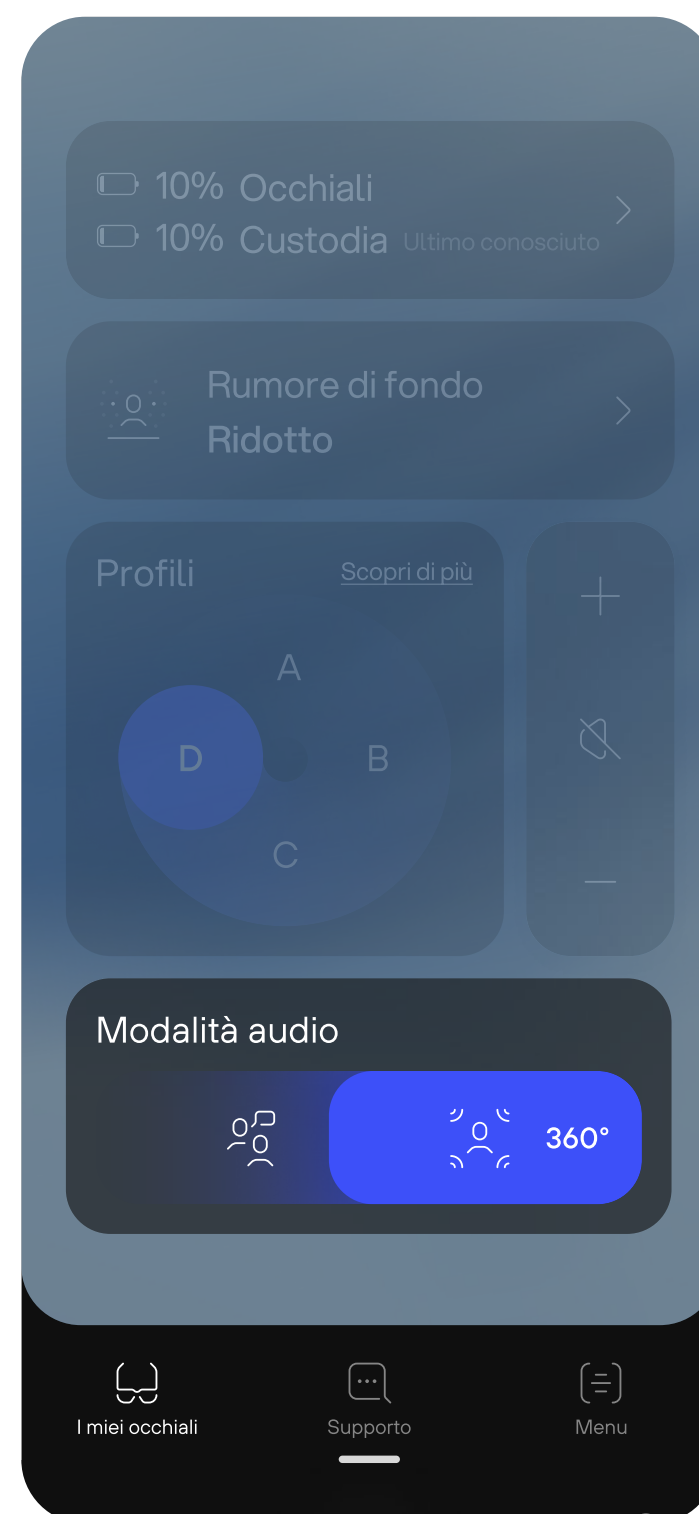

Modalità 360°

Questa modalità amplifica i suoni e il parlato da tutte le direzioni ed è ideale per situazioni in cui è necessario essere consapevoli di ciò che succede intorno a te, come camminare o guidare.





Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
seguì questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)