

# Hörkonfigurationen: Audio-Modus



## Was ist der Audio-Modus?

Im Audio-Modus können Sie wählen, worauf Sie Ihr Gehör fokussieren möchten: auf Töne direkt vor Ihnen oder um Sie herum.

Wählen Sie zwischen diesen beiden Optionen:

### Frontal-Modus

Verstärkt die Töne vor Ihnen, sodass Sie sich auf ein Gespräch konzentrieren können, insbesondere in lauten Umgebungen.



### 360°-Modus

Dieser Modus verstärkt Töne und Sprache aus allen Richtungen, was ideal für Situationen wie Gehen oder Fahren ist, in denen Sie Ihre Umgebung im Auge behalten müssen.







## Wie wird der Audio-Modus eingestellt?

Sie können auf verschiedene Arten zwischen den Modi wechseln: direkt über die Brille, mit der Remote Plus oder über die Nuance Audio App.

**Auf Nuance Audio Plus**  
**Doppeltippen**  
**Sie auf den Bereich** am rechten Bügel.  
Ein akustisches Signal bestätigt Ihre Eingabe. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Shortcuts aktiviert sind.

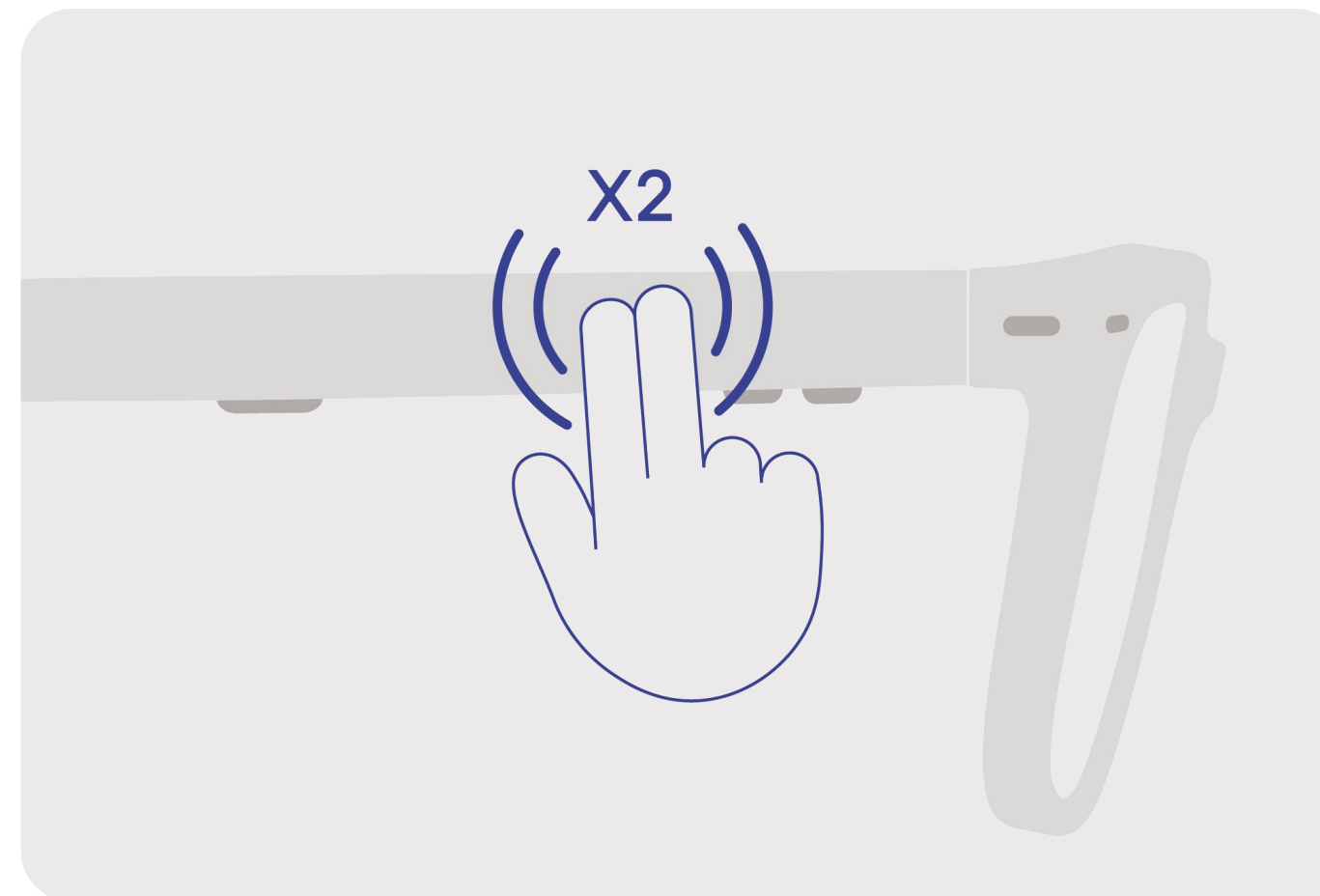

**Mit Nuance Audio™ Remote Control**  
Drücken Sie die **Taste für den** Audiomodus.

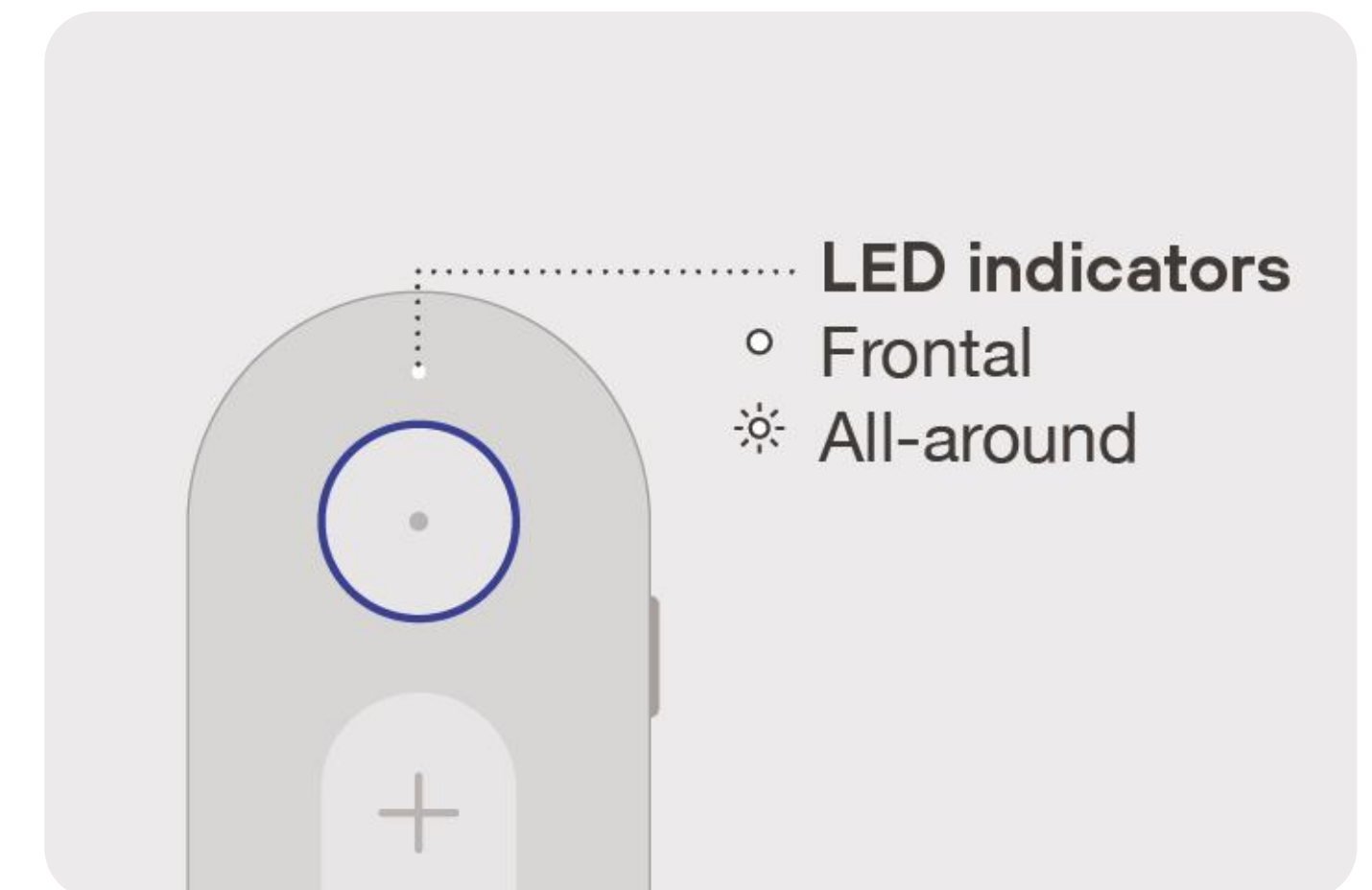




## Wie wird der Audio-Modus eingestellt?

### Mit der Nuance Audio™ App

Wischen oder tippen Sie auf den **Audio-Modus-Schalter**, der auf der Startseite der App verfügbar ist.

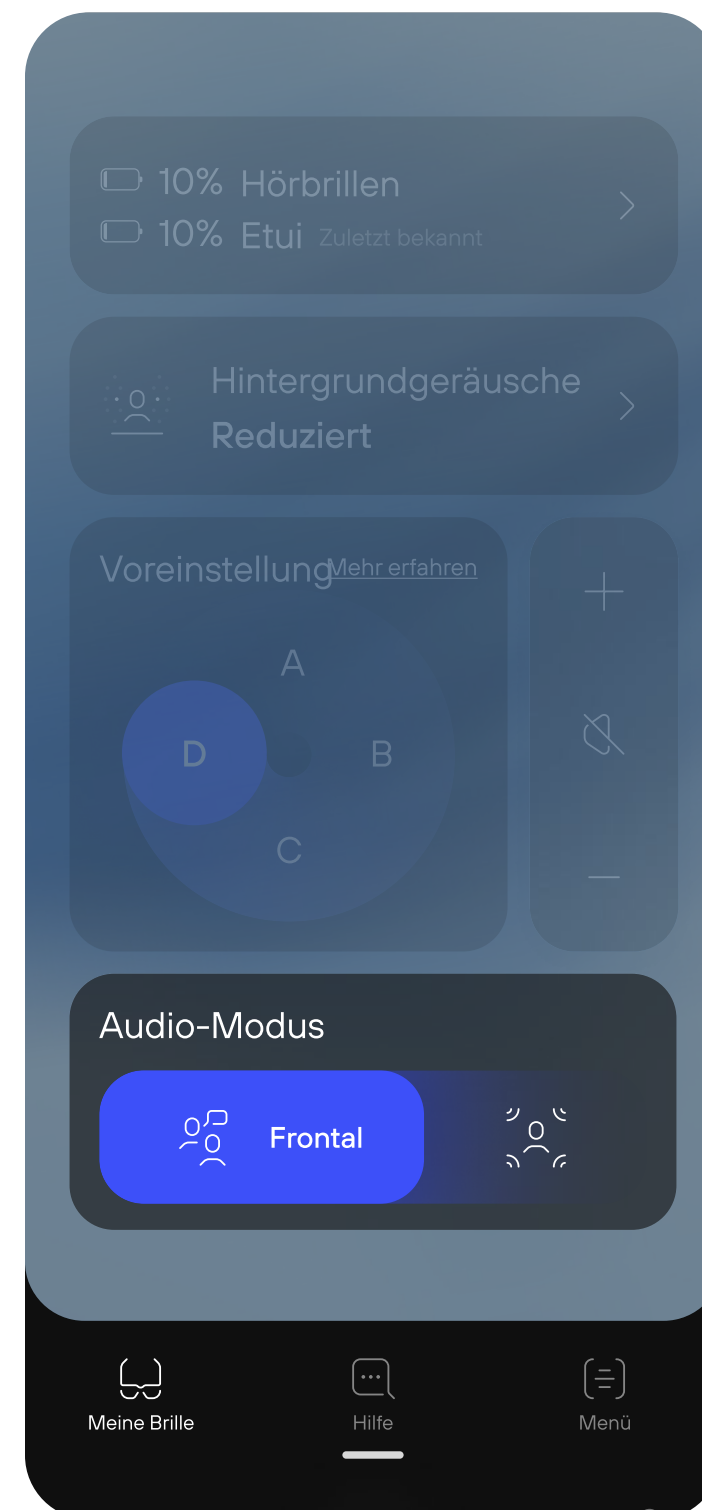

### Frontal-Modus

Dieser Modus verstärkt die Geräusche vor Ihnen, wodurch es einfacher wird, sich auf Gespräche mit jemandem direkt zu konzentrieren.






## Wie wird der Audio-Modus eingestellt?

### Mit der Nuance Audio™ App

Wischen oder tippen Sie auf den **Audio-Modus-Schalter**, der auf der Startseite der App verfügbar ist.

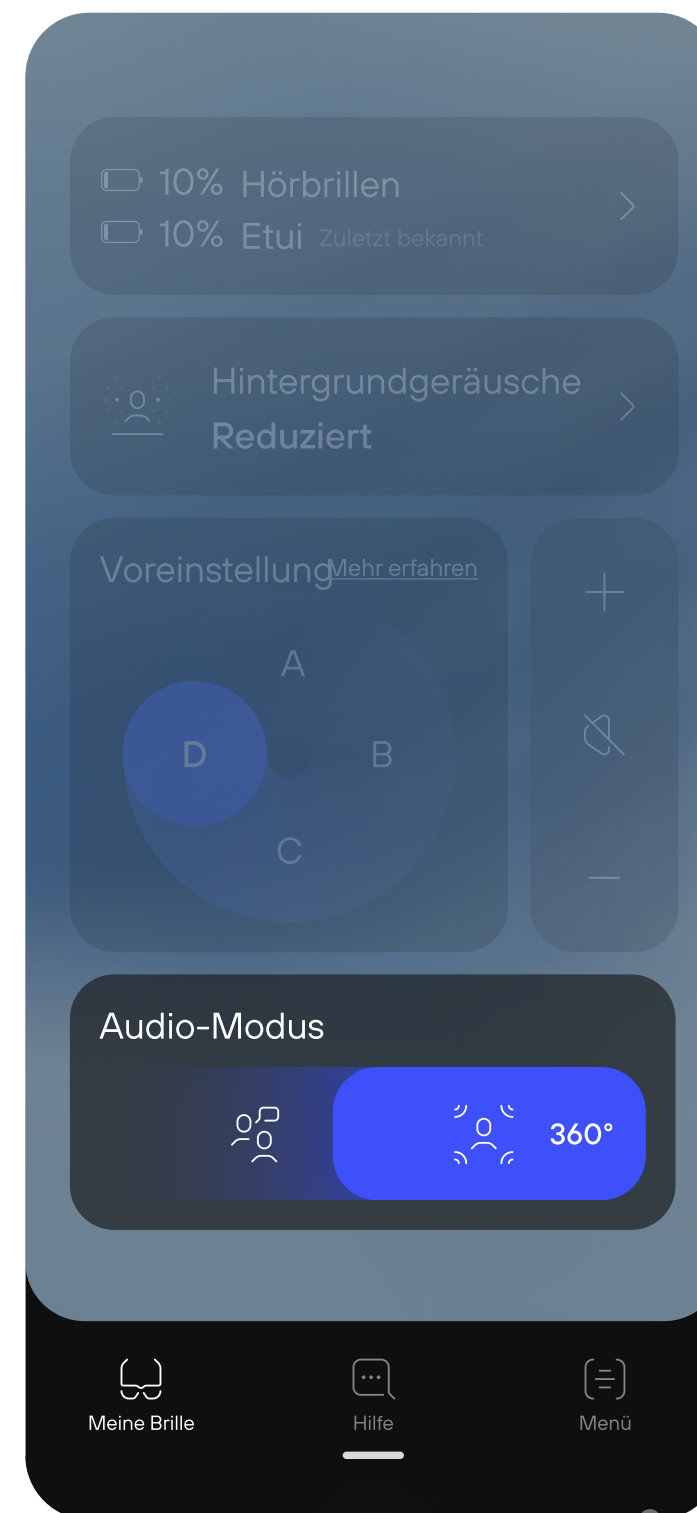

### 360°-Modus

Dieser Modus verstärkt Töne und Sprache aus allen Richtungen, was ideal für Situationen wie Gehen oder Fahren ist, in denen Sie sich Ihrer Umgebung bewusst sein müssen.





Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen  
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)