

Configurations auditives : mode audio



Qu'est-ce que le mode audio ?

Le mode audio vous permet de choisir où concentrer votre écoute, que ce soit tout droit devant vous ou autour de vous.

Choisissez entre ces deux options :

Mode frontal

Améliore les sons devant vous, facilitant ainsi votre concentration sur les conversations directes avec une personne, en particulier dans des environnements bruyants.



Mode 360°

Amplifie les sons et le langage parlé provenant de toutes les directions, ce qui est idéal pour des situations comme la marche ou la conduite où vous devez avoir conscience de votre environnement.







Comment régler le mode audio ?

Vous pouvez basculer entre les modes de plusieurs façons : sur vos lunettes, avec la Remote Plus ou sur l'app Nuance Audio.

Sur Nuance Audio Plus Appuyez deux fois sur la zone de la branche droite. Une invite audio confirmera votre action. Cela n'est possible que si les raccourcis sont activés.

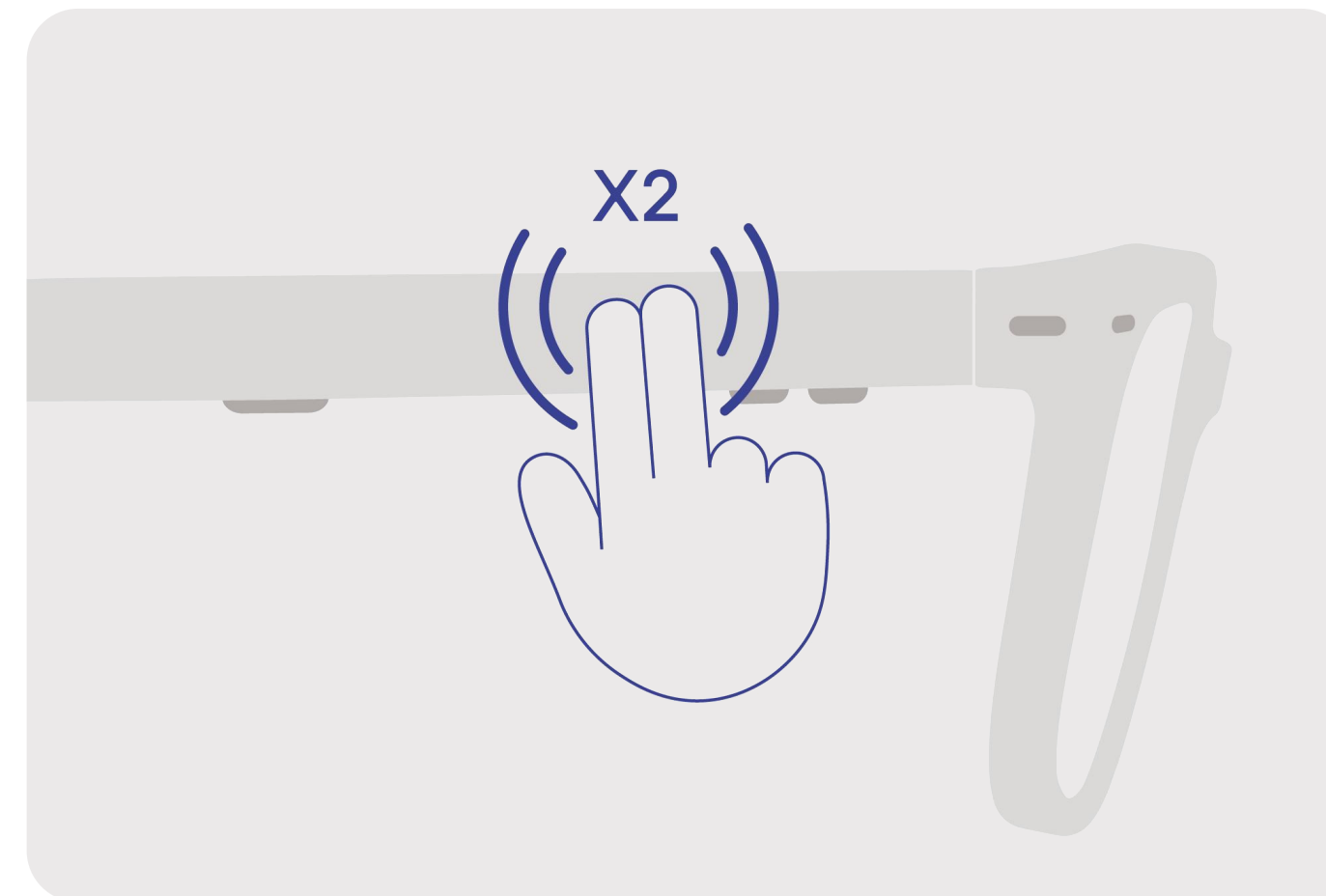

Avec la télécommande
Appuyez sur le bouton **Mode audio**.

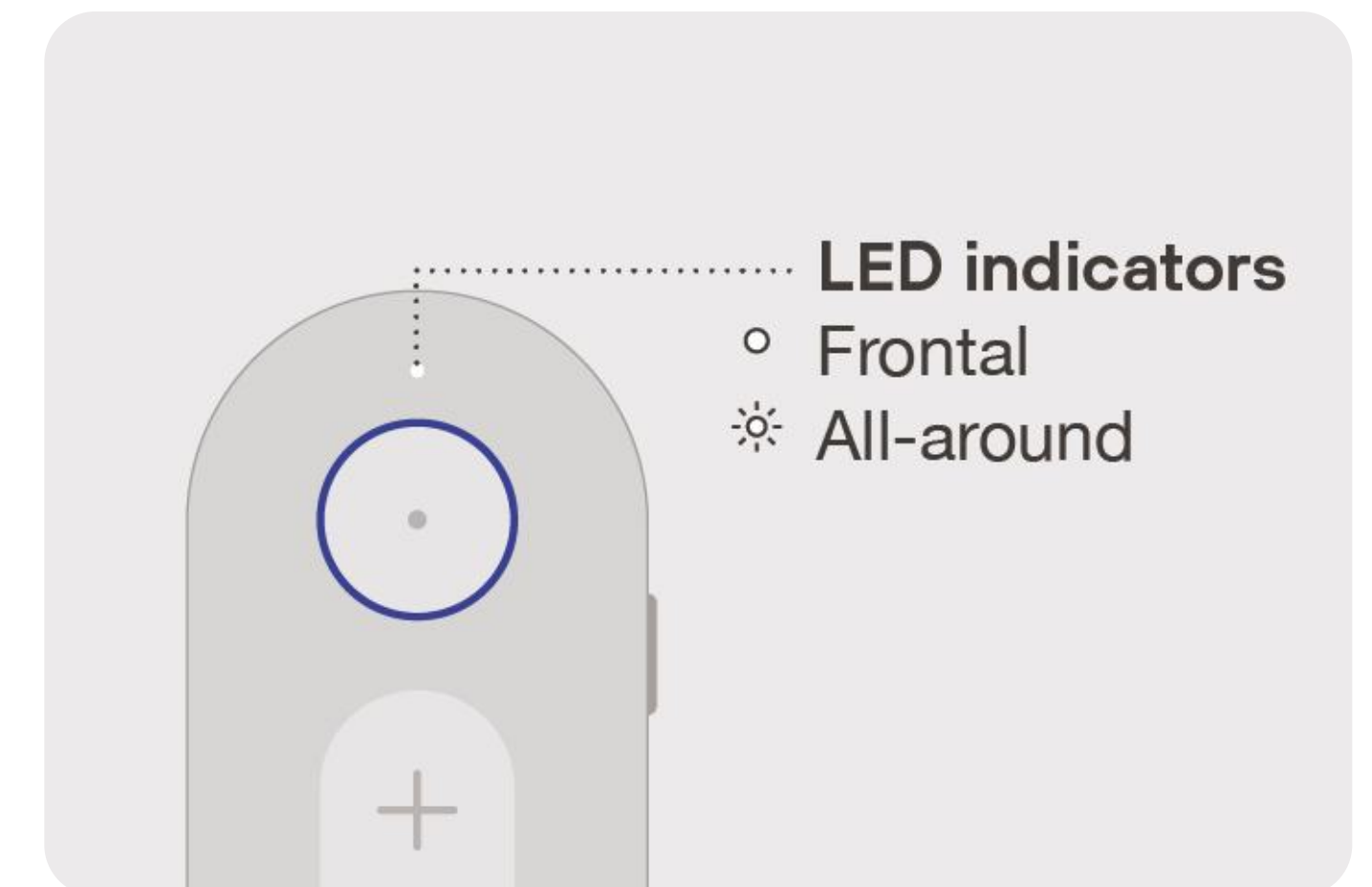




Comment régler le mode audio ?

Avec l'app Nuance Audio™

Faites glisser ou appuyez sur le **commutateur de mode audio** disponible sur la page d'accueil de l'application.

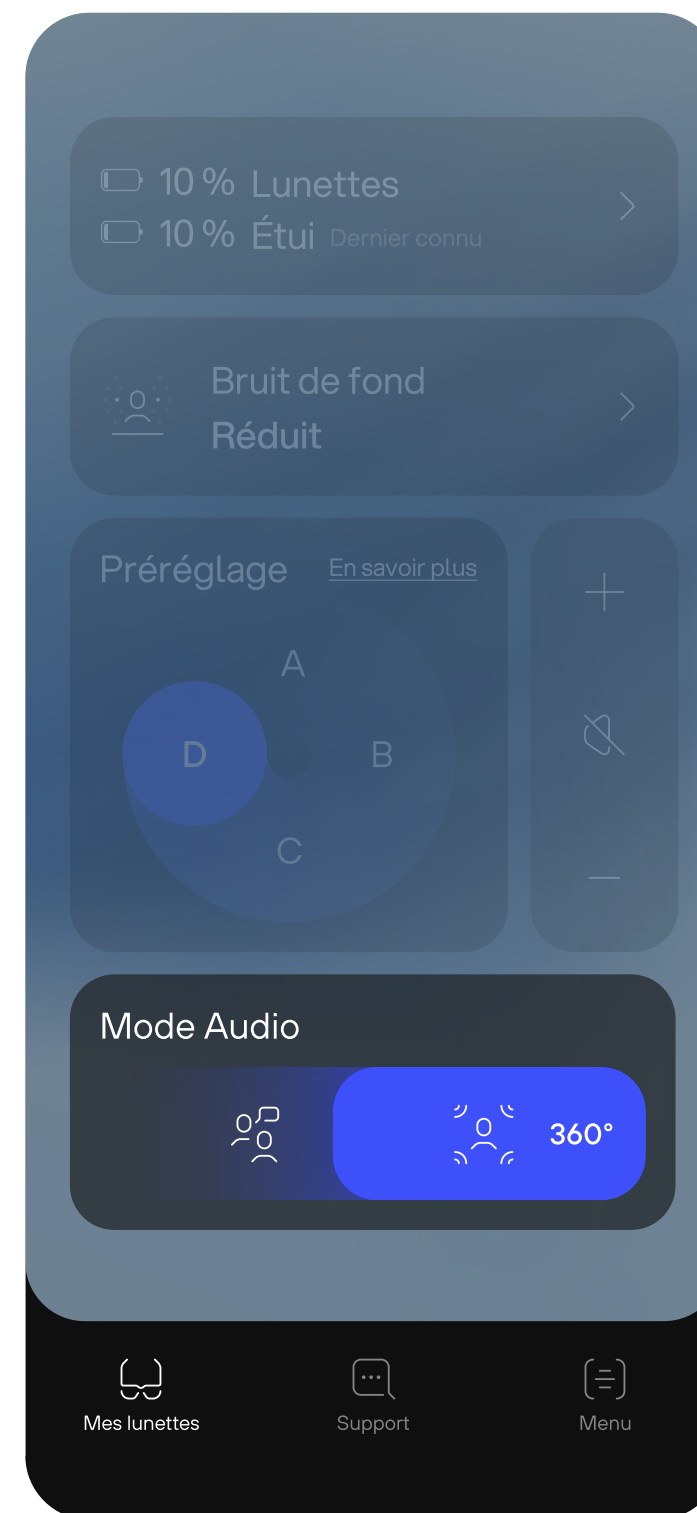

Mode 360°

Ce mode amplifie les sons et le langage parlé provenant de toutes les directions, ce qui est idéal pour des situations comme la marche ou la conduite où vous devez avoir conscience de votre environnement.






Comment régler le mode audio ?

Avec l'app Nuance Audio™

Faites glisser ou appuyez sur le **commutateur de mode audio** disponible sur la page d'accueil de l'application.

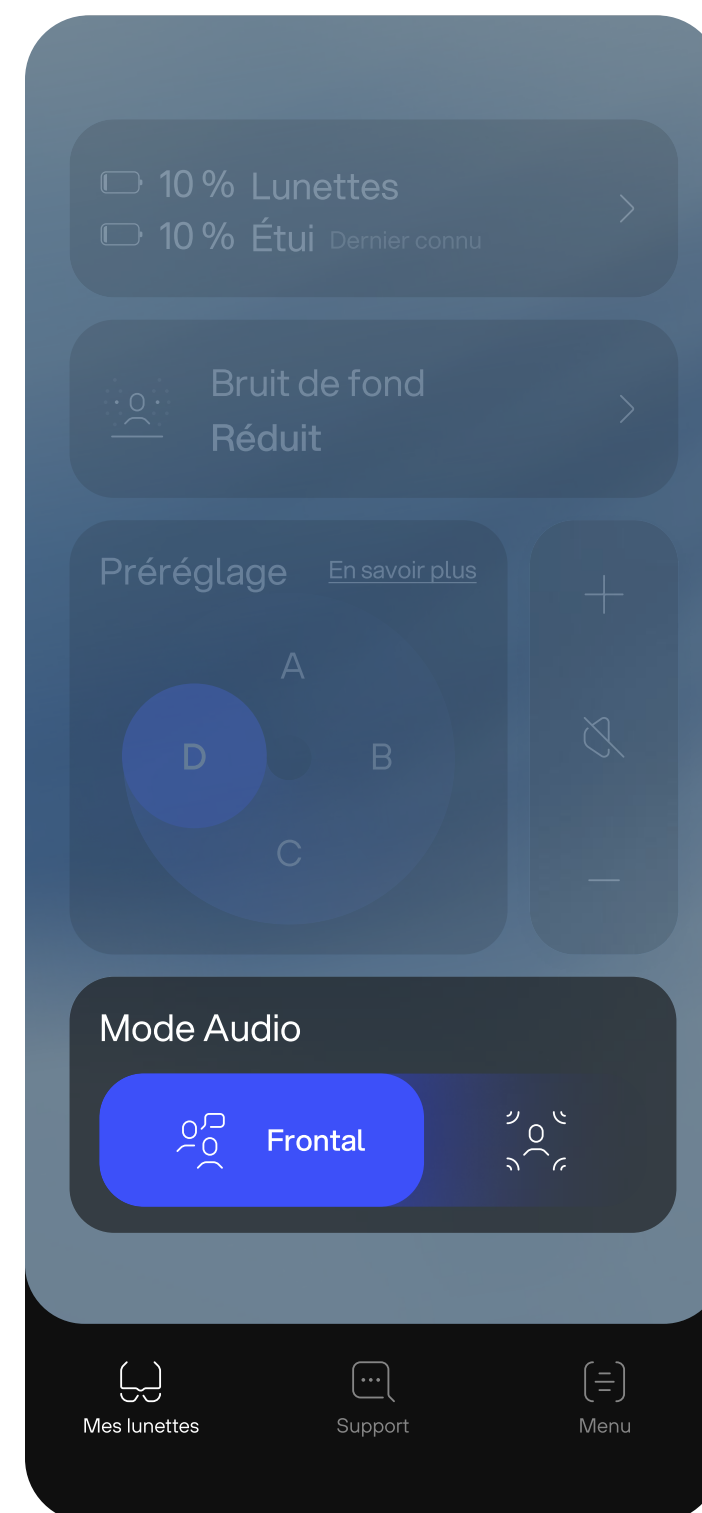

Mode frontal

Ce mode améliore les sons devant vous, facilitant ainsi votre concentration sur les conversations directes avec une personne.





Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

↗ [Voir les instructions d'utilisation](#)