

Configurazioni uditive: Volume degli occhiali




Come fare per impostare il volume degli occhiali?

Puoi impostare i livelli di volume dei tuoi Nuance Audio Plus in diversi modi.


Con Nuance Audio Plus

Per regolare il volume, usa i due pulsanti presenti sull'asta destra: premi "+" per **alzarlo** e "-" per **abbassarlo**.

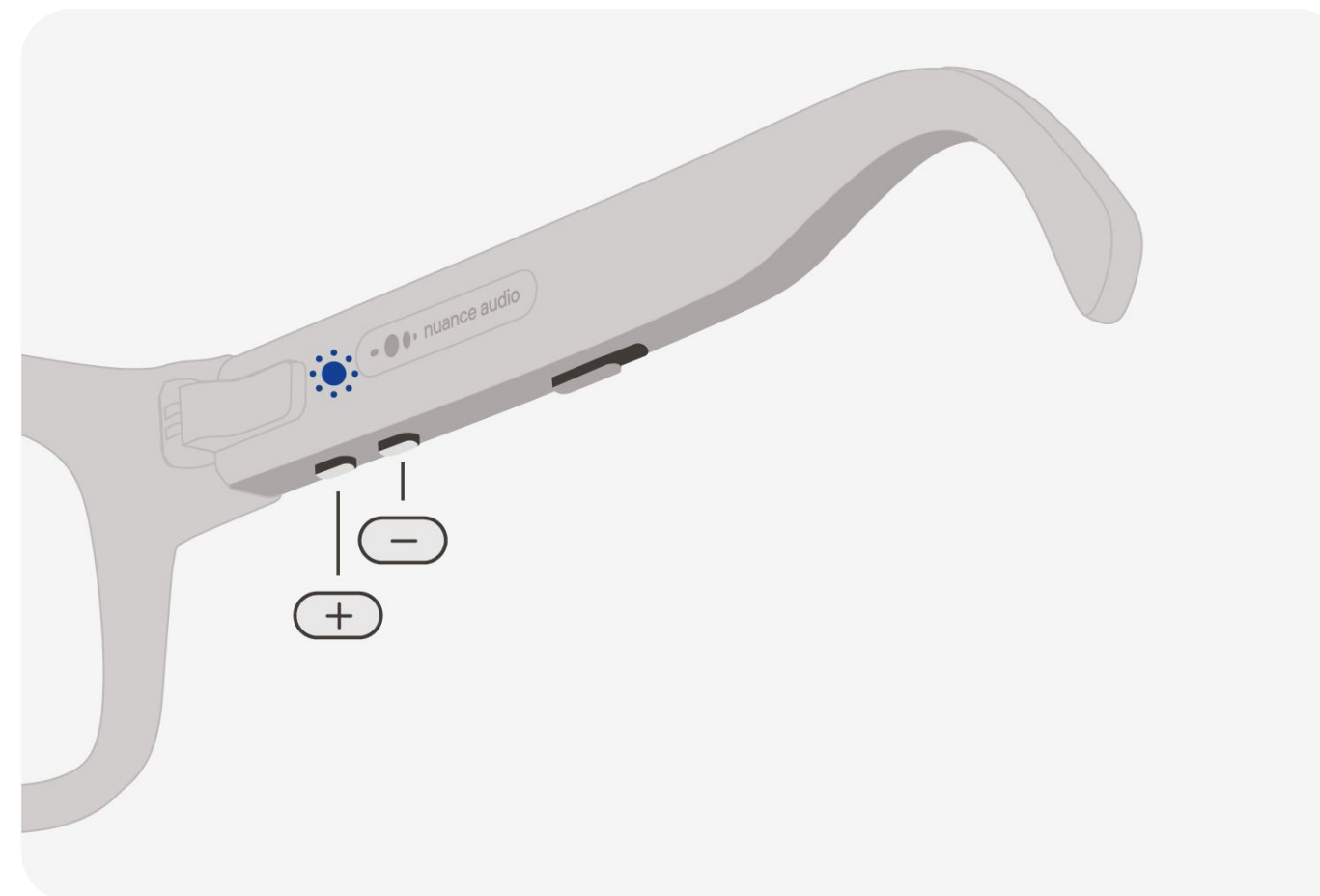

Con Remote Plus

Usa i pulsanti "+" e "-" per regolare il volume.

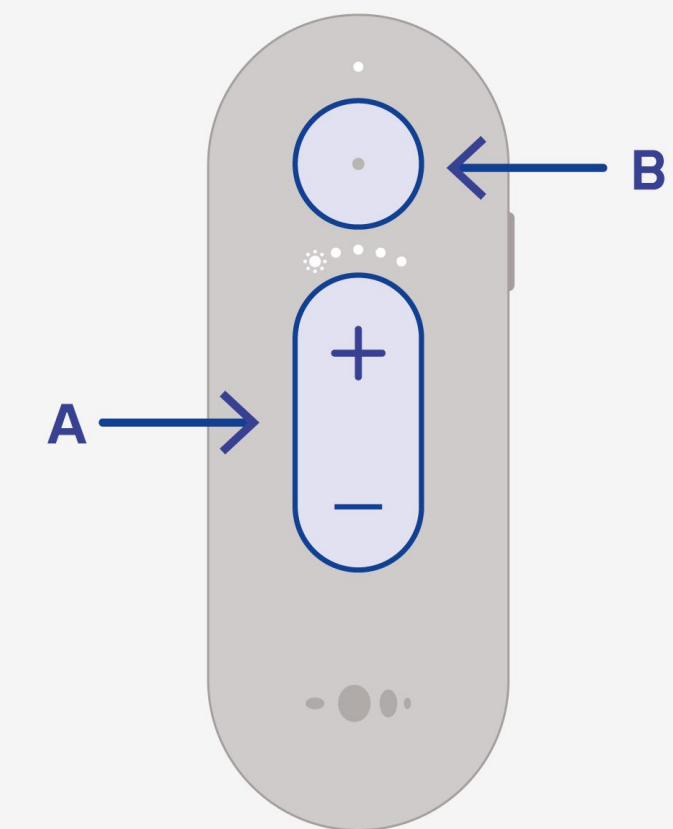




Come fare per impostare il volume degli occhiali?

Con la Nuance Audio™ App


Un altro modo è utilizzare il cursore del volume nella schermata principale della Nuance Audio App per regolare il volume secondo le tue preferenze.

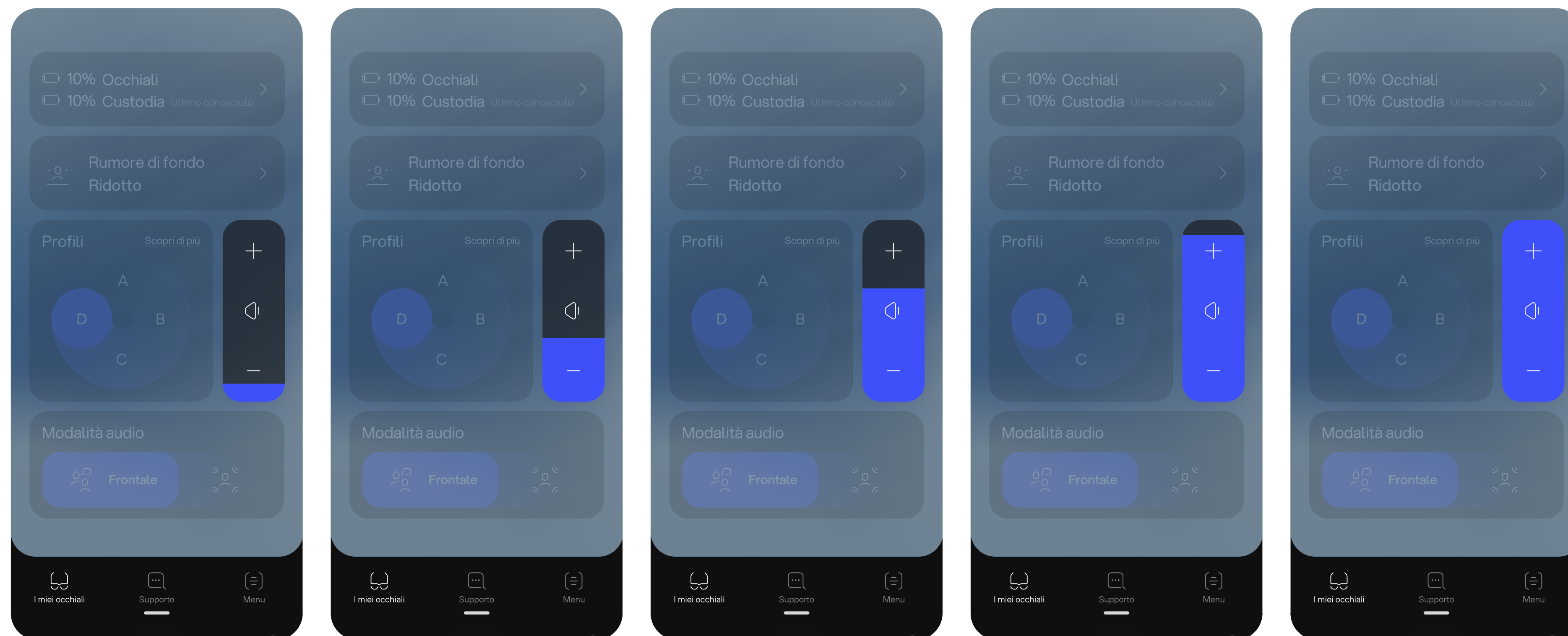



Come fare per impostare il volume degli occhiali?

Con la Nuance Audio™ App
Inoltre, nella sezione
Impostazioni dell'app, puoi
selezionare e impostare
comodamente i tuoi tre
intervalli di volume preferiti
a cui accedere facilmente.

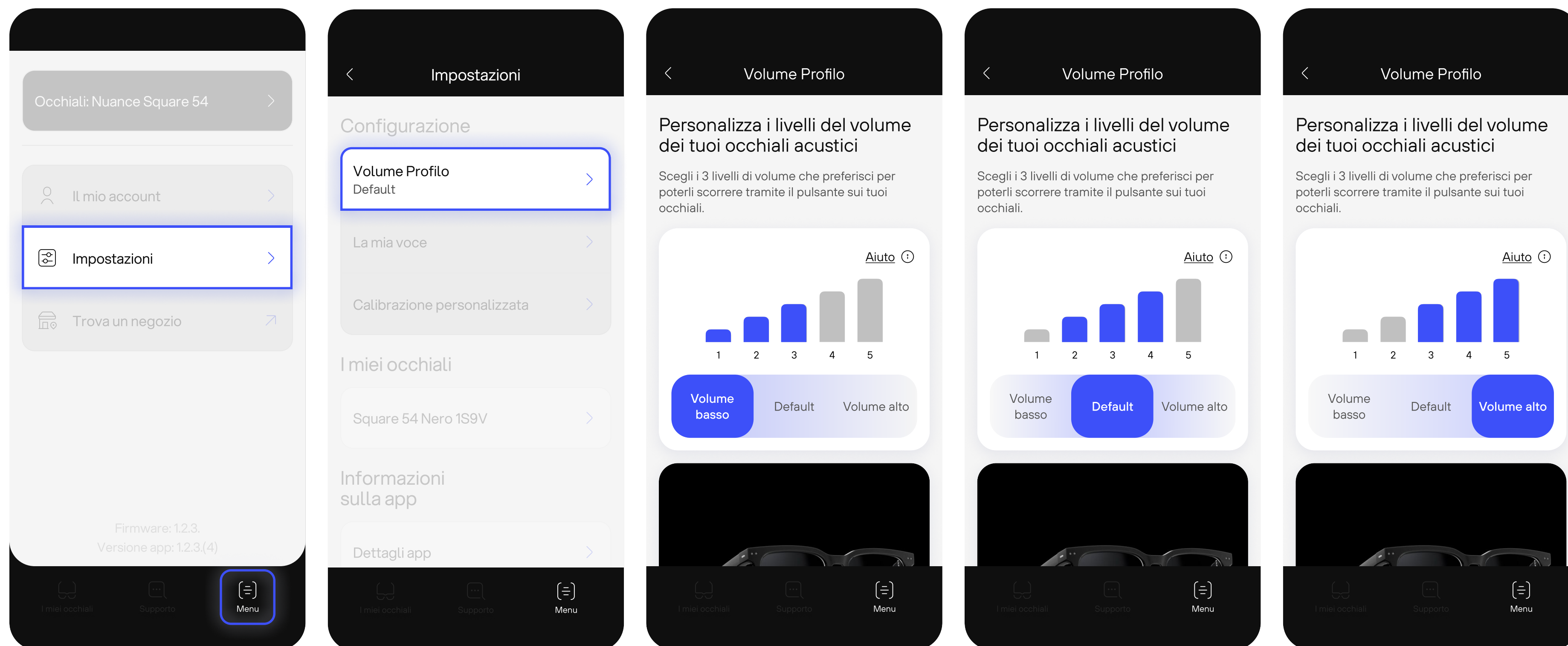



Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
segui questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)