

Hörkonfigurationen: Lautstärke der Brille




Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

Sie können die Lautstärke Ihrer Nuance Audio Plus auf verschiedene Arten einstellen.


Mit Nuance Audio Plus

Zum Einstellen der Lautstärke befinden sich zwei Tasten am rechten Bügel: Taste "+" für **Lautstärke erhöhen** und Taste "-" für **Lautstärke reduzieren**.

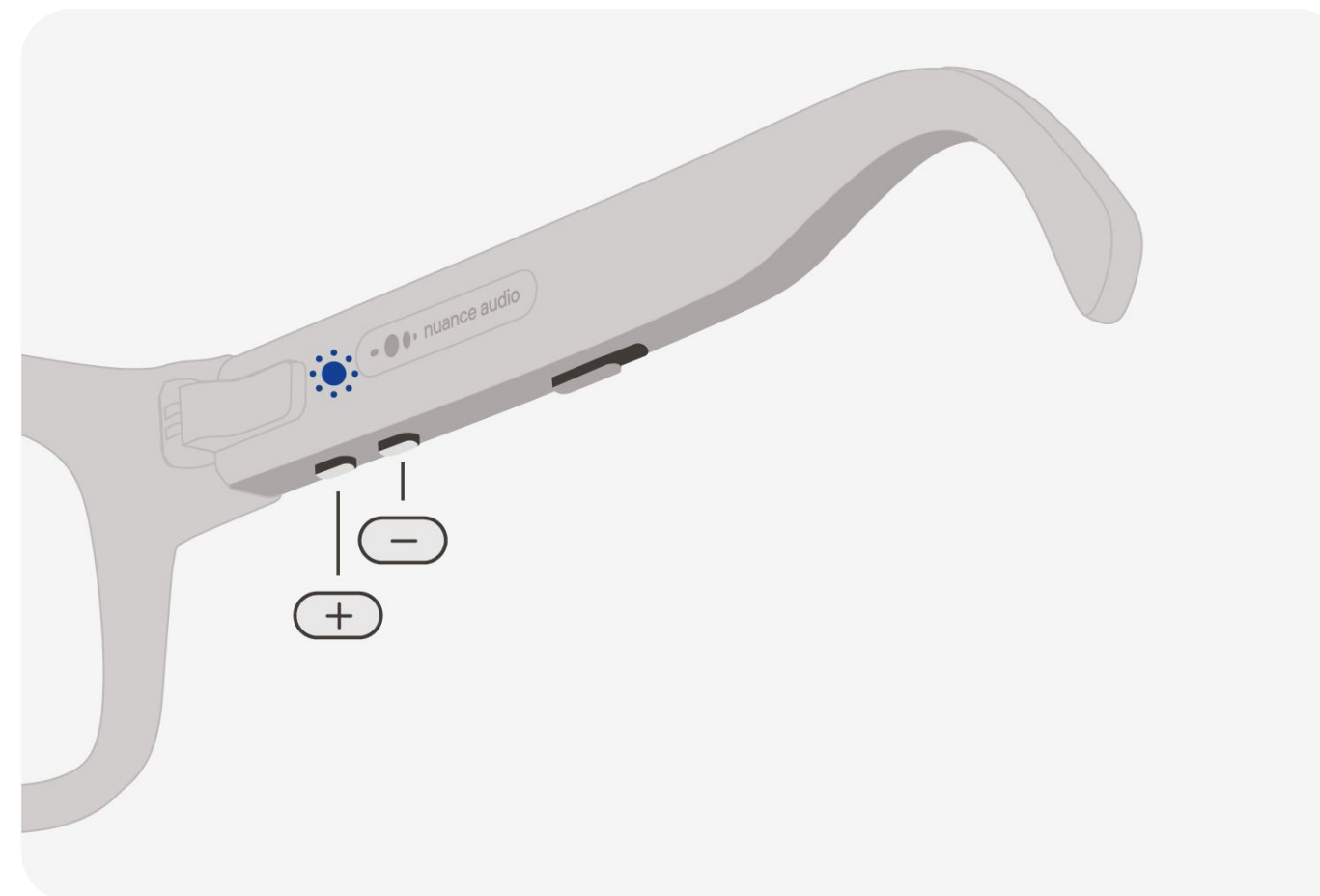

Mit Remote Plus

Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um die Lautstärke anzupassen.

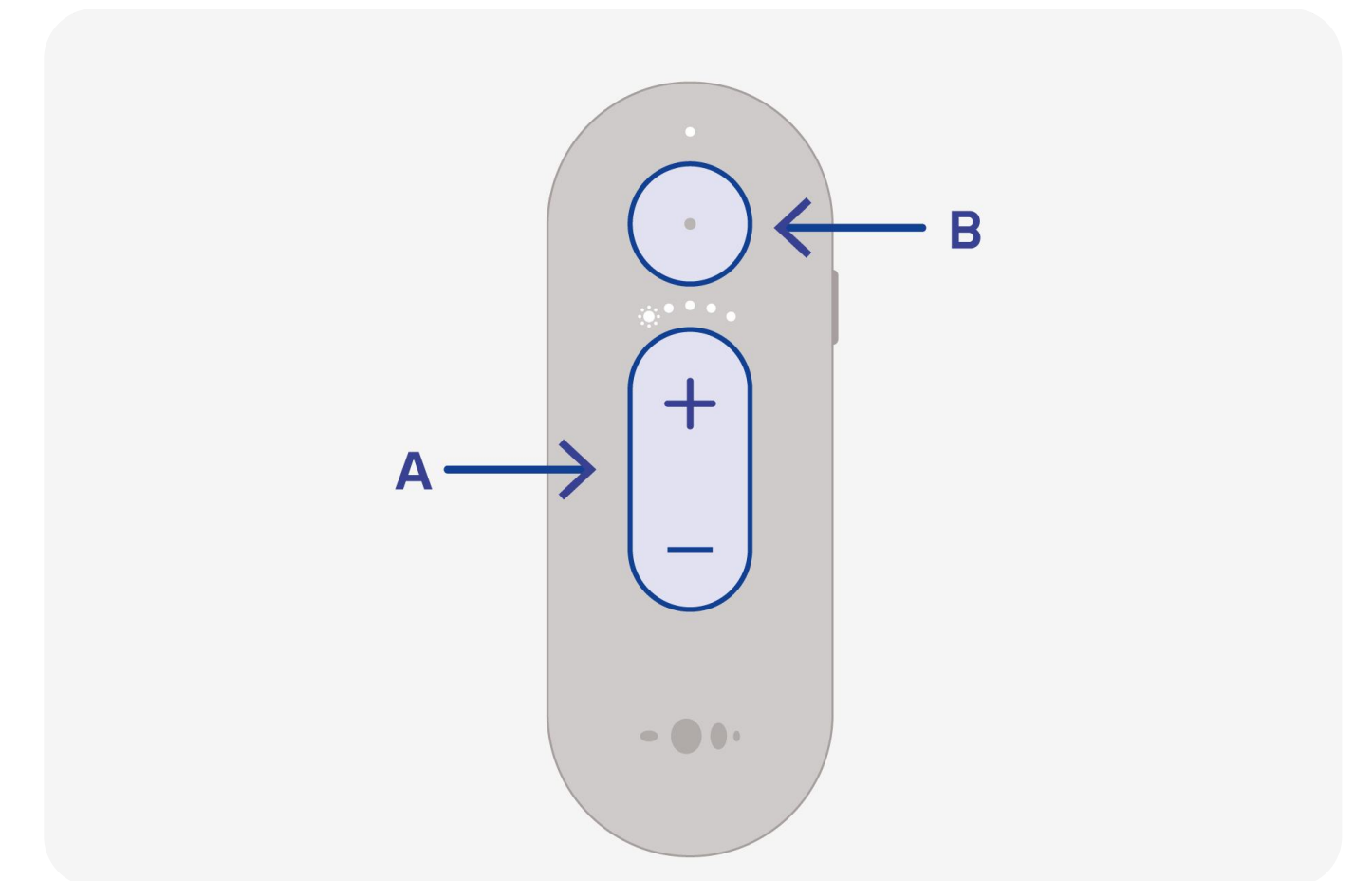




Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

Mit der Nuance Audio™ App


Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Lautstärkeregler auf dem Startbildschirm Ihrer Nuance Audio App zu verwenden, um die Lautstärke nach Ihren Wünschen anzupassen.

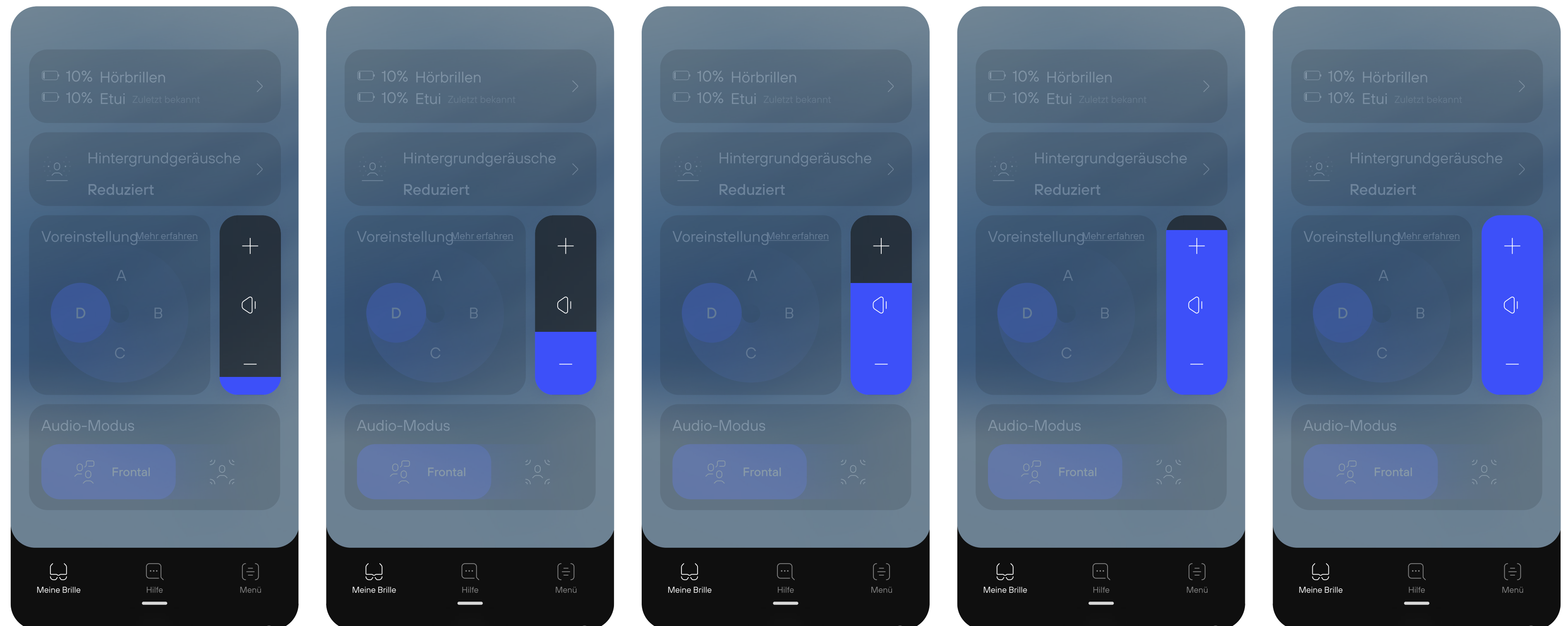



Wie wird die Lautstärke der Brille angepasst?

Mit der Nuance Audio™ App
Zusätzlich können Sie im Einstellungsbereich der App bequem Ihre drei bevorzugten Lautstärkebereiche für einen einfachen Zugriff auswählen und einstellen.

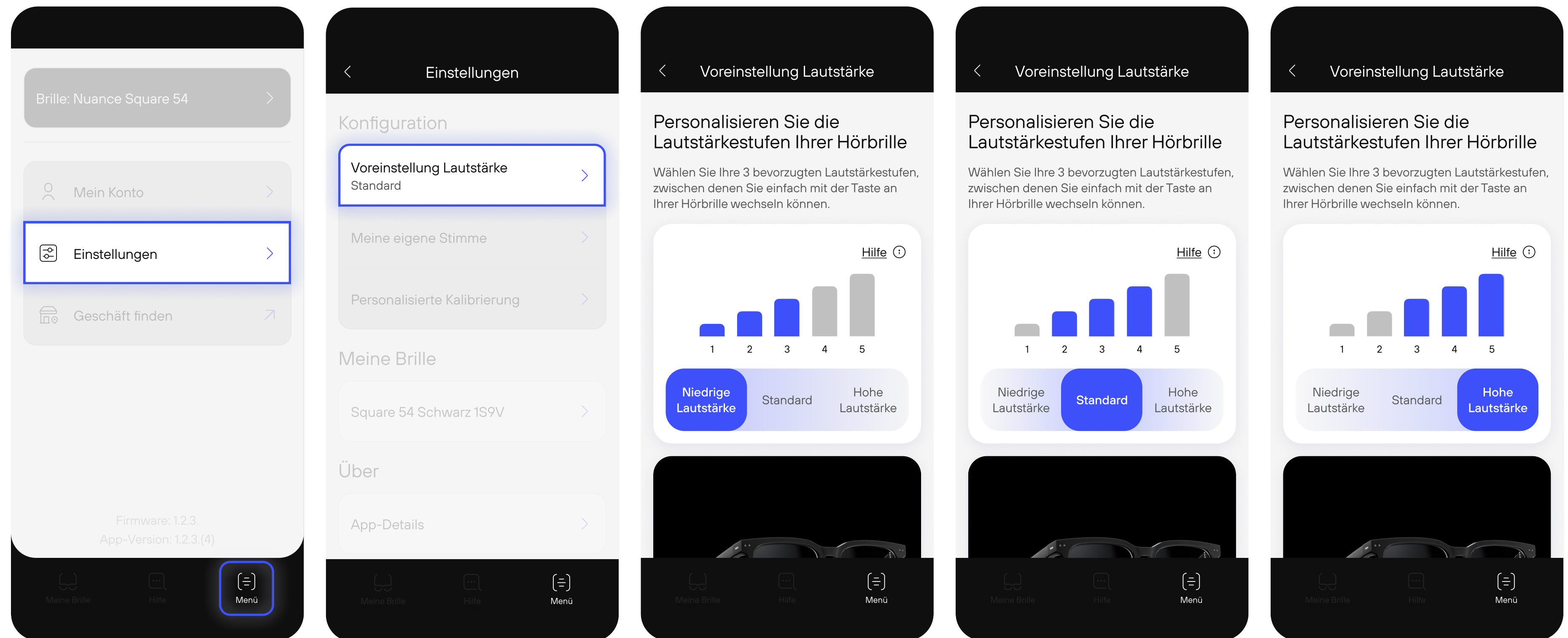



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link

➤ [Anleitung anzeigen](#)