

Configurations auditives : volume des lunettes




Comment ajuster le volume des lunettes ?

En ce qui concerne vos Nuance Audio Plus, vous pouvez toujours ajuster les niveaux de volume de plusieurs manières.


Avec Nuance Audio Plus

Pour régler le volume, deux boutons sont situés sur la branche droite : le bouton «+» pour **augmenter** le **volume** et le bouton «-» pour **baissé** le volume.

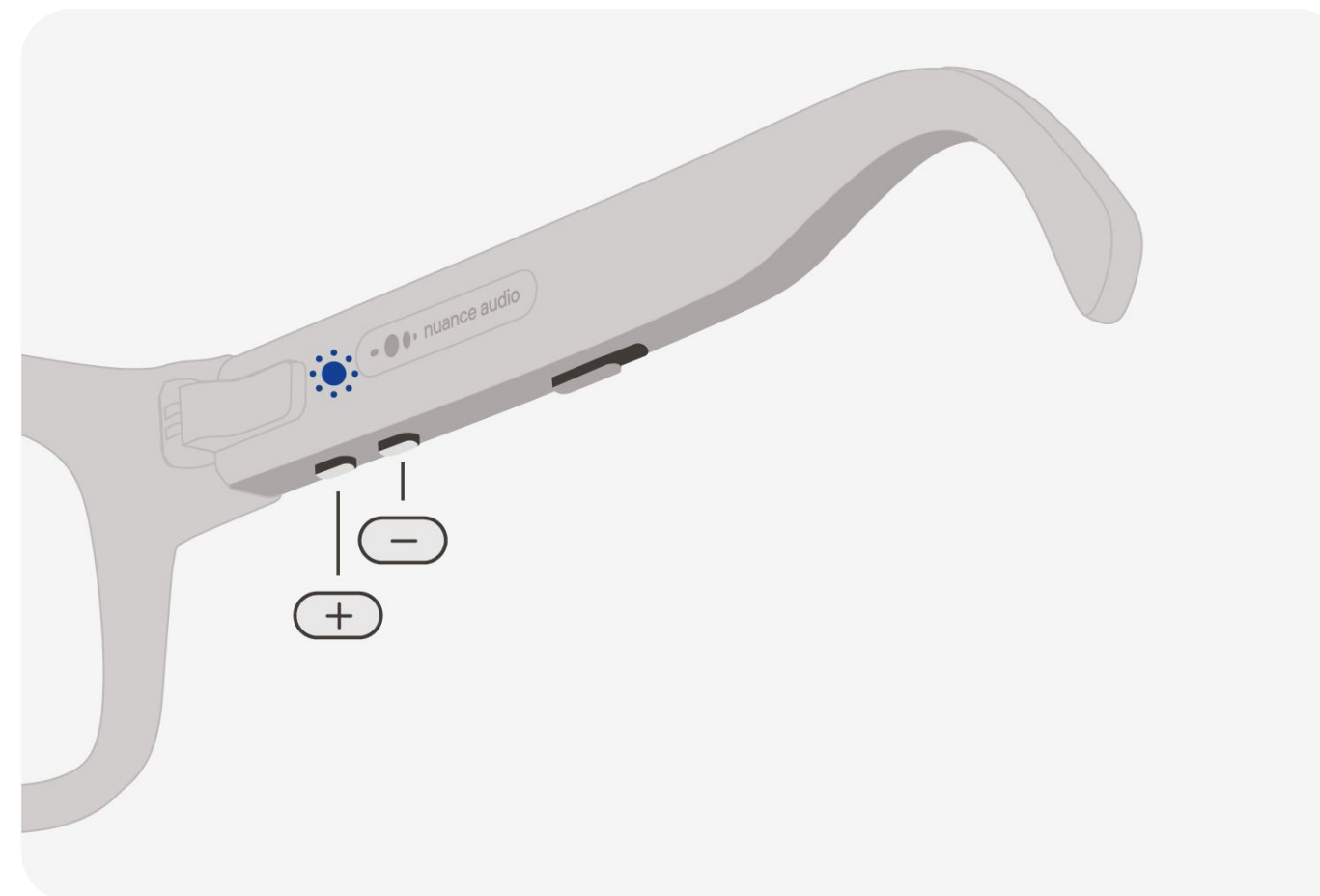

Avec Remote Plus

Utilisez les boutons «+» et «-» pour régler le volume.

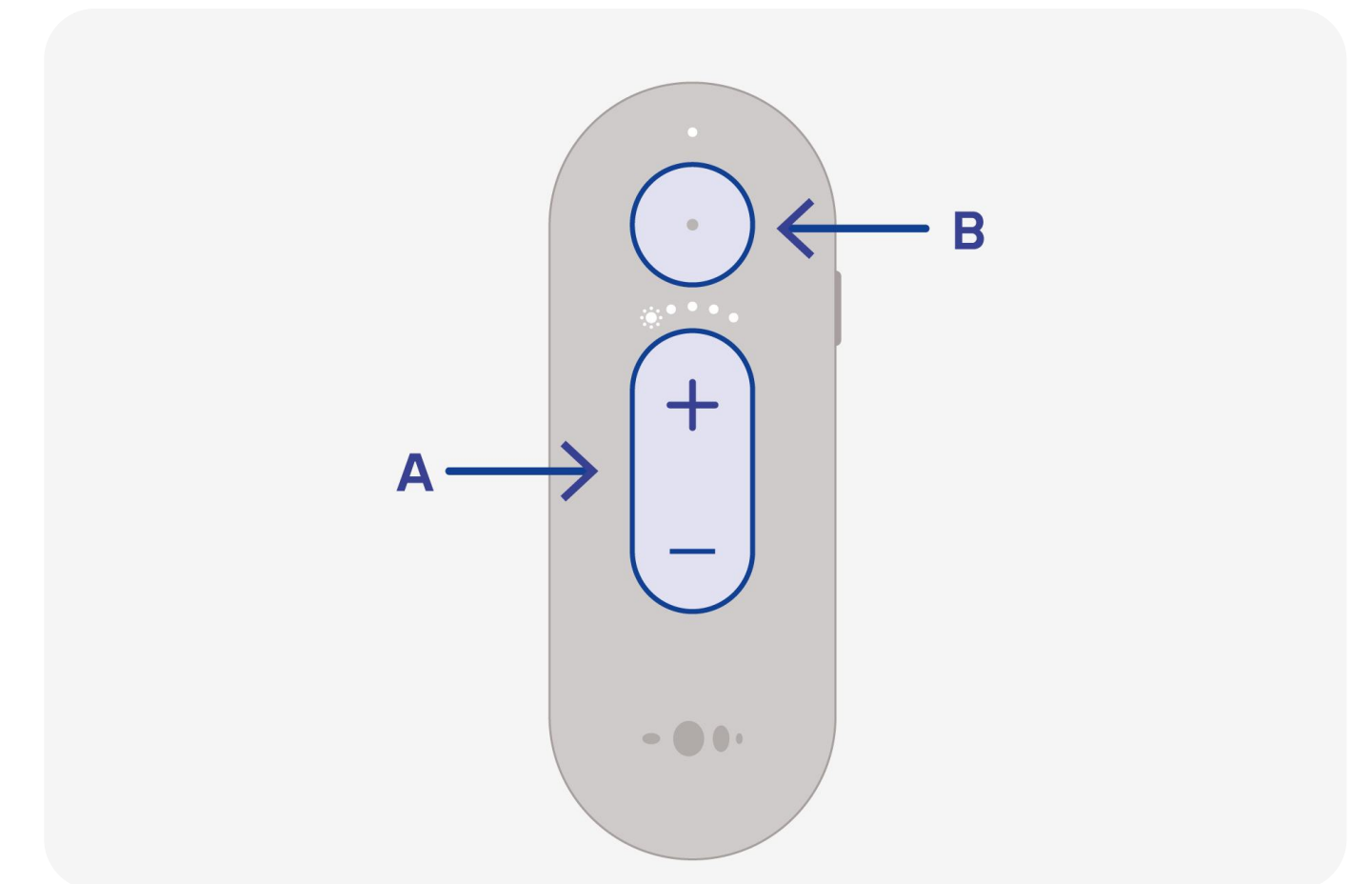




Comment ajuster le volume des lunettes ?

Avec l'app Nuance Audio™


Une autre façon est d'utiliser le curseur de volume sur l'écran d'accueil de votre app Nuance Audio pour ajuster le volume selon vos préférences.

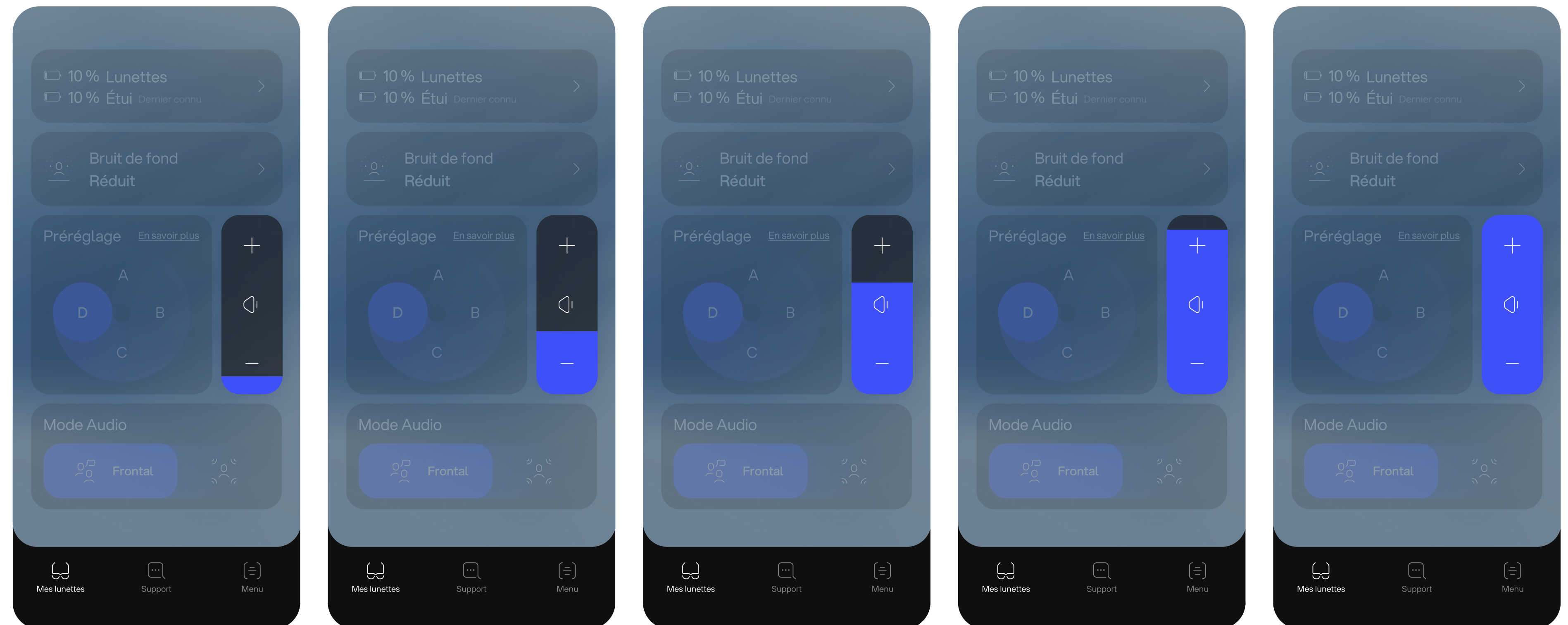



Comment ajuster le volume des lunettes ?

Avec l'app Nuance Audio™
De plus, dans la section Réglages de l'application, vous pouvez sélectionner et définir facilement vos trois plages de volume préférées pour un accès rapide.

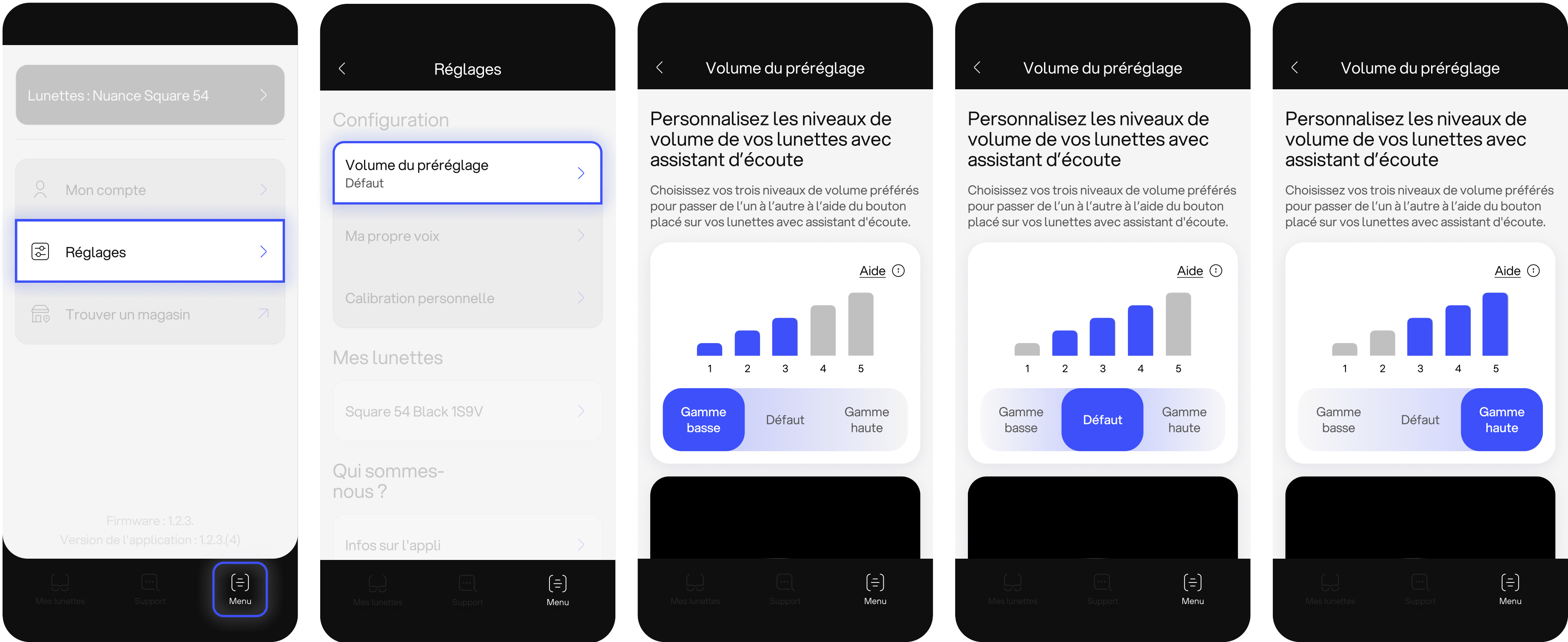



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)