

Configurações de audição: Volume dos óculos




Como ajustar o volume dos óculos?

Quando se trata dos seus Nuance Audio Plus, pode sempre ajustar os níveis de volume de várias maneiras.


Com os Nuance Audio Plus

Para ajustar o volume, haverá dois botões na haste direita: botão "+" para aumentar o volume, botão "-" para diminuir o volume.

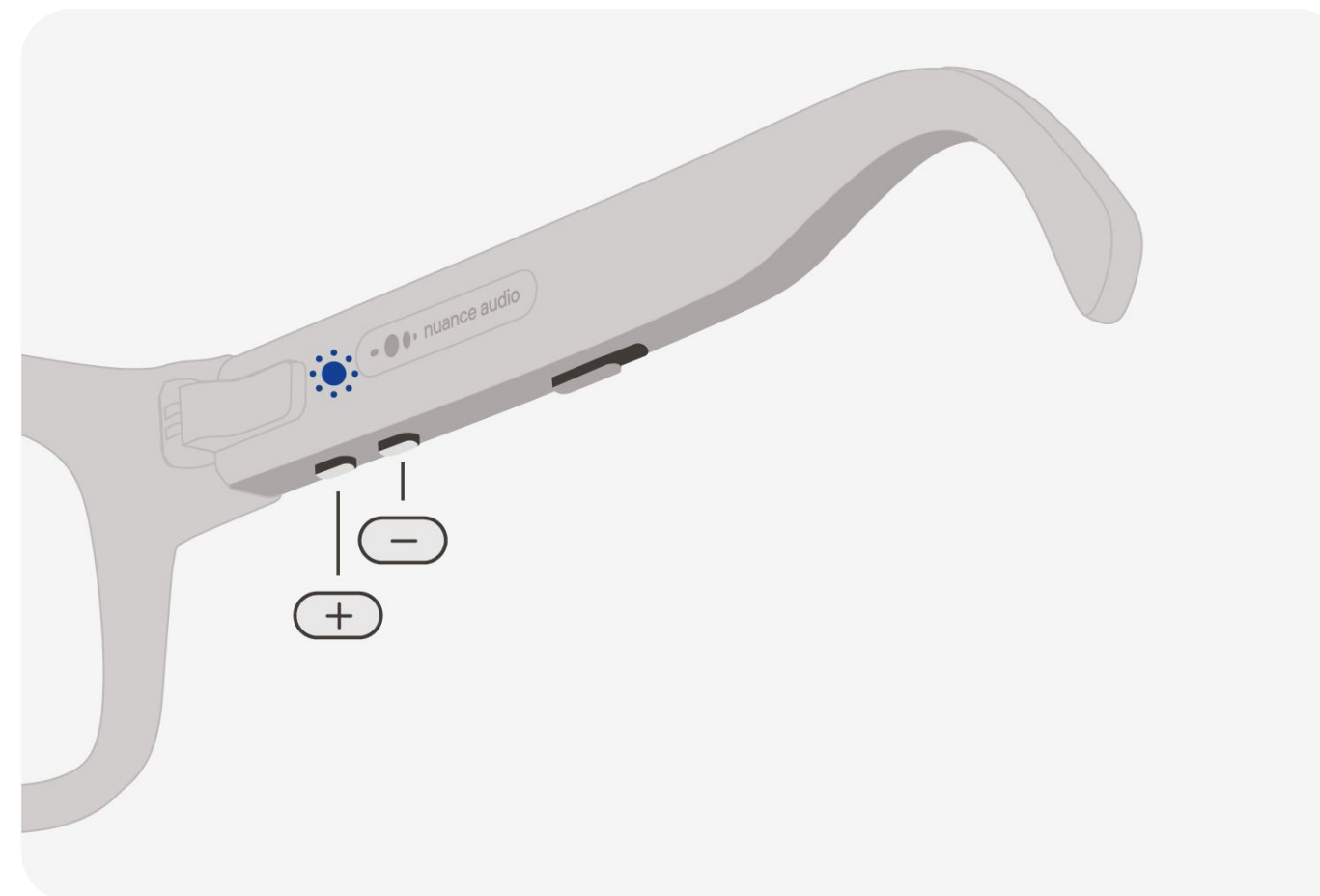

Com o Remote Plus

Utilize os botões "+" e "-" para ajustar o volume.

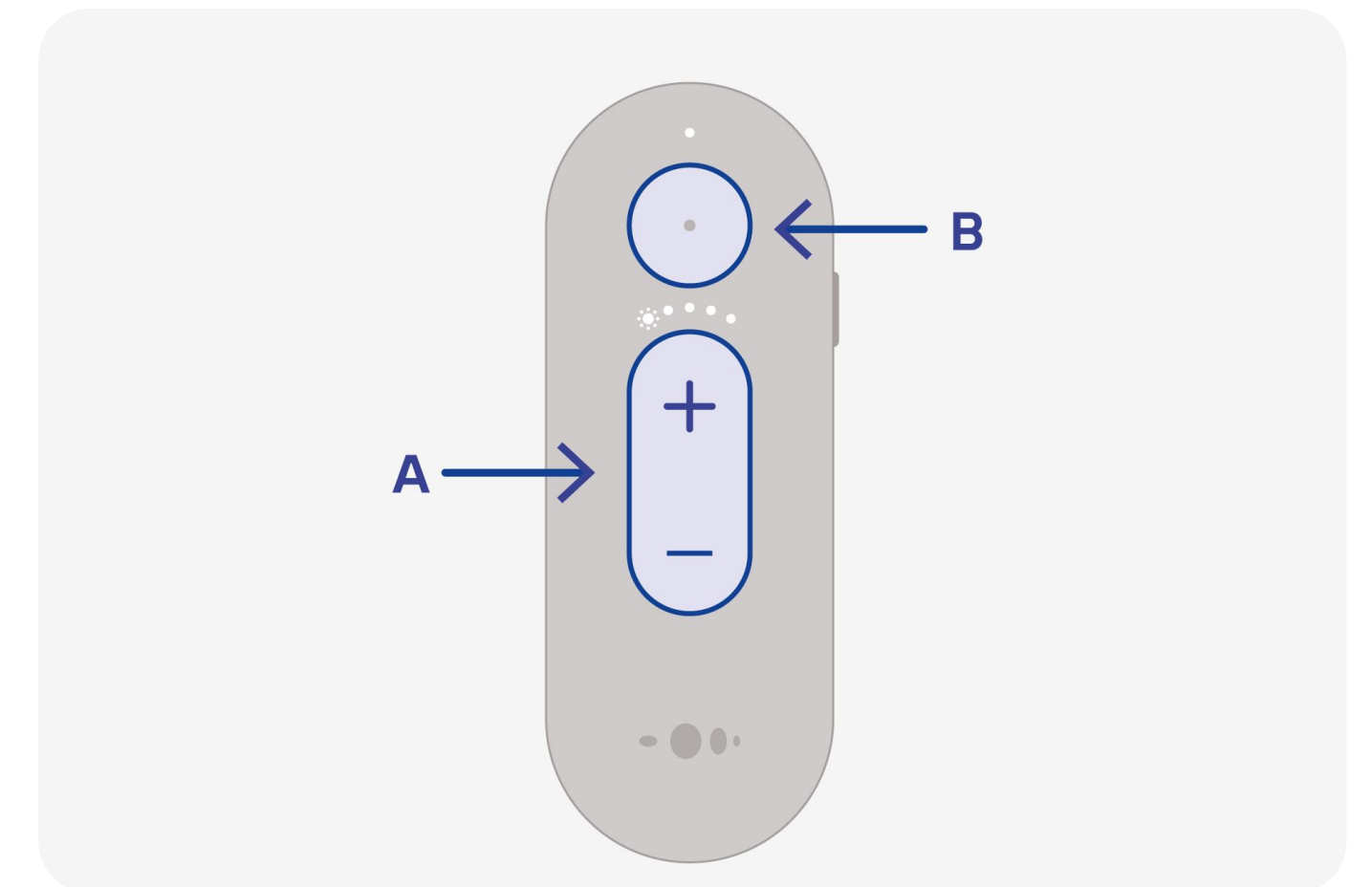



Como ajustar o volume dos óculos?


Com a App Nuance Audio
Outra forma é usar o Controlo de Volume no ecrã inicial da sua App Nuance Audio para ajustar o volume de acordo com a sua preferência.





Como ajustar o volume dos óculos?

Com a App Nuance Audio
Além disso, na secção de Definições da aplicação, pode convenientemente seleccionar e definir os seus três níveis de volume preferidos para fácil acesso.

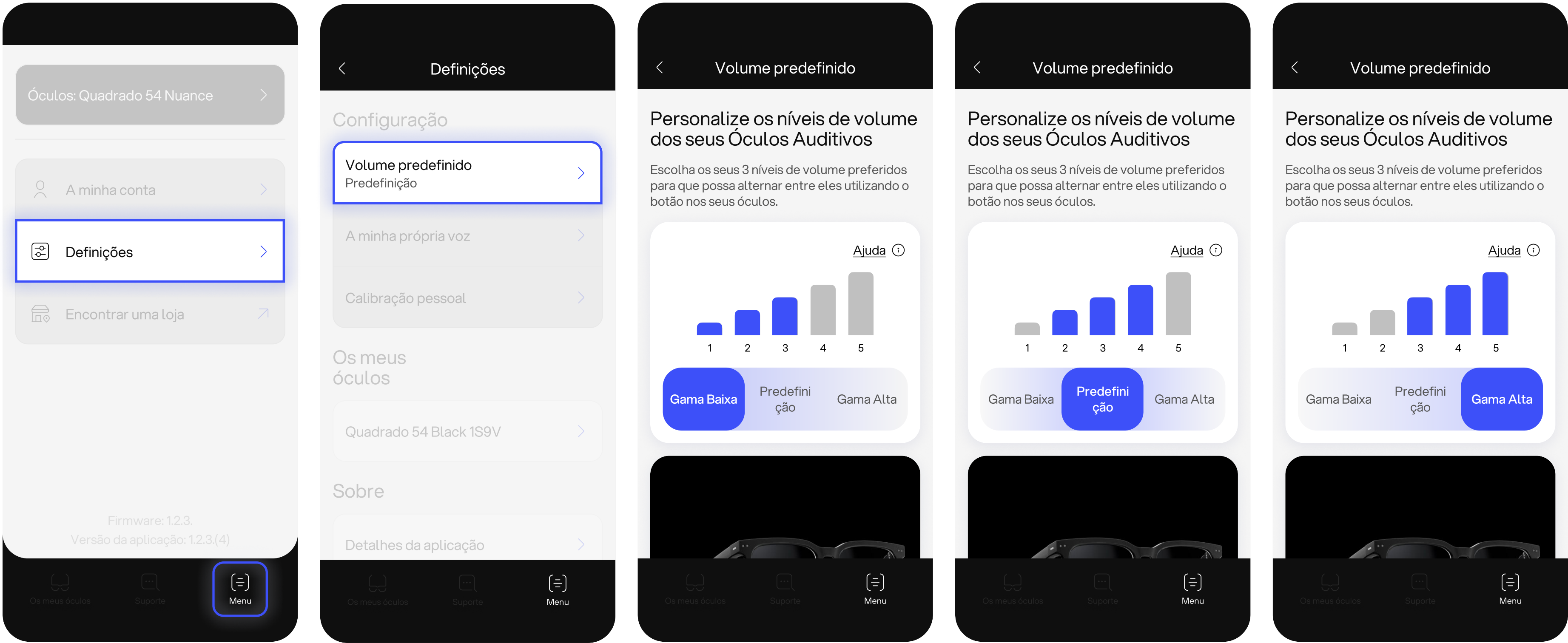



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)