



Commencer : création de compte, appairage, calibration

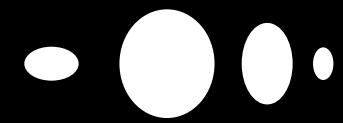

Déballage



Déballage

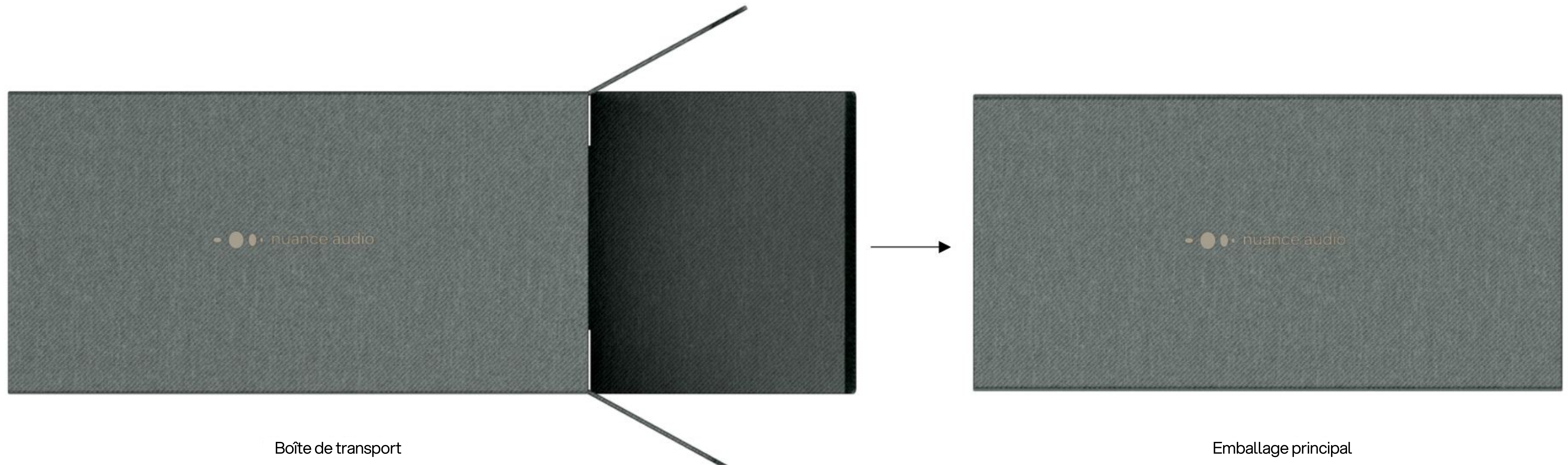




Déballage



Package




Socle de charge et tiroir à documentation

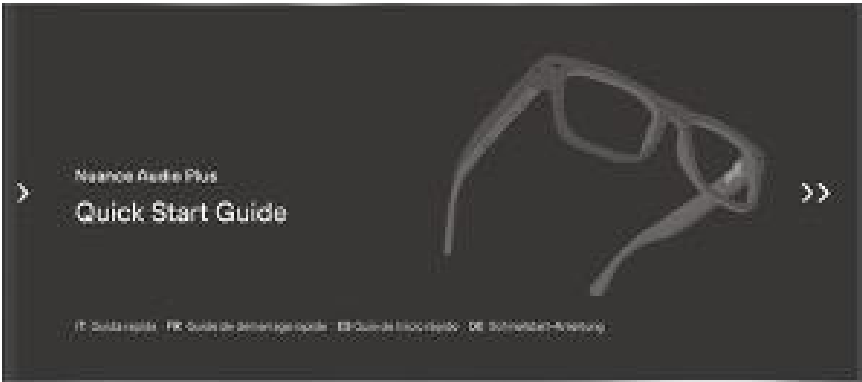

QSG




Guide d'utilisation

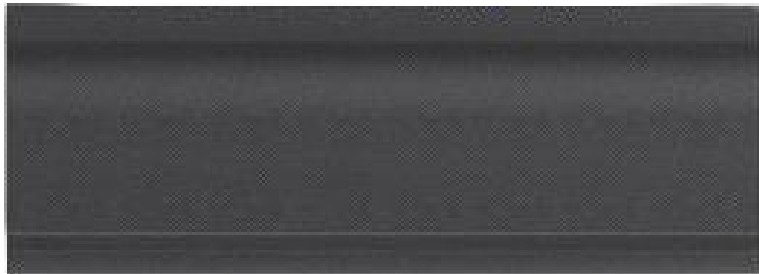


Étui à lunettes pliant




Socle de charge

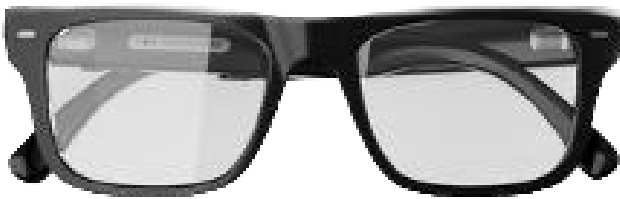

Nuance Audio Plus

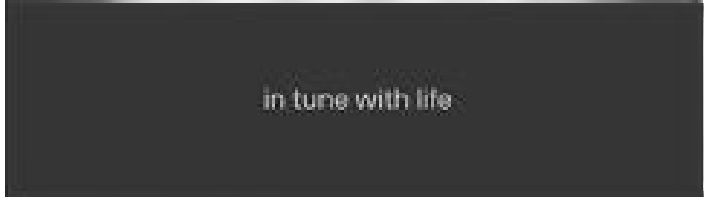

Chiffon de nettoyage

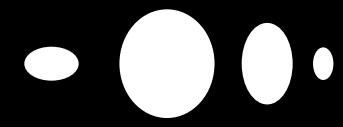

Activez et configurez Nuance Audio Plus




Cherchez l'app Nuance Audio™

Pour faciliter l'utilisation de vos Nuance Audio Plus, notre application mobile intuitive vous permet de changer les préréglages, de contrôler le volume et de réduire le bruit de fond – le tout depuis votre téléphone.




Option A.

Scannez le code QR avec votre téléphone et **Téléchargez.**

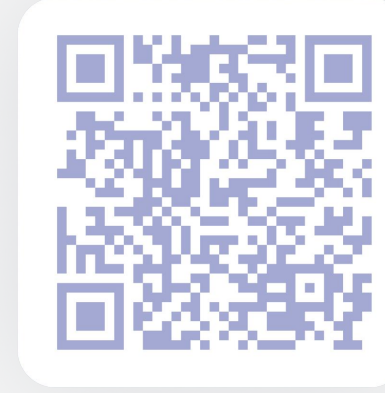

Remarques

Vous pouvez également trouver le code QR sur la boîte principale

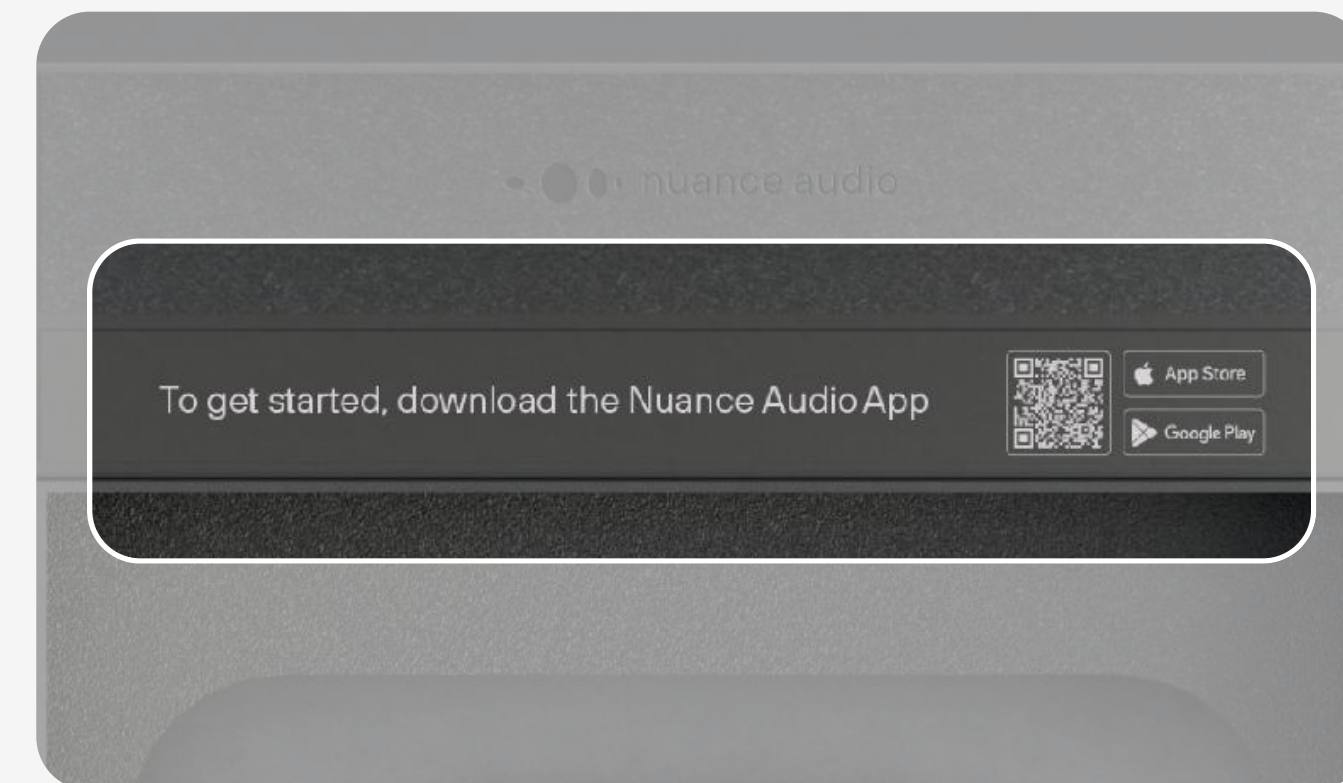

Option B.

Recherchez « Nuance Audio » dans l'App Store ou le Google Play Store et **Téléchargez.**




Nuance Audio






Téléchargez depuis l'App Store de votre dispositif

Pour activer et personnaliser vos Nuance Audio Plus, **téléchargez l'app Nuance Audio** depuis l'App Store iOS ou le Google Play Store.

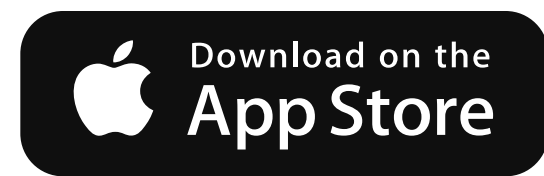


Apple App Store

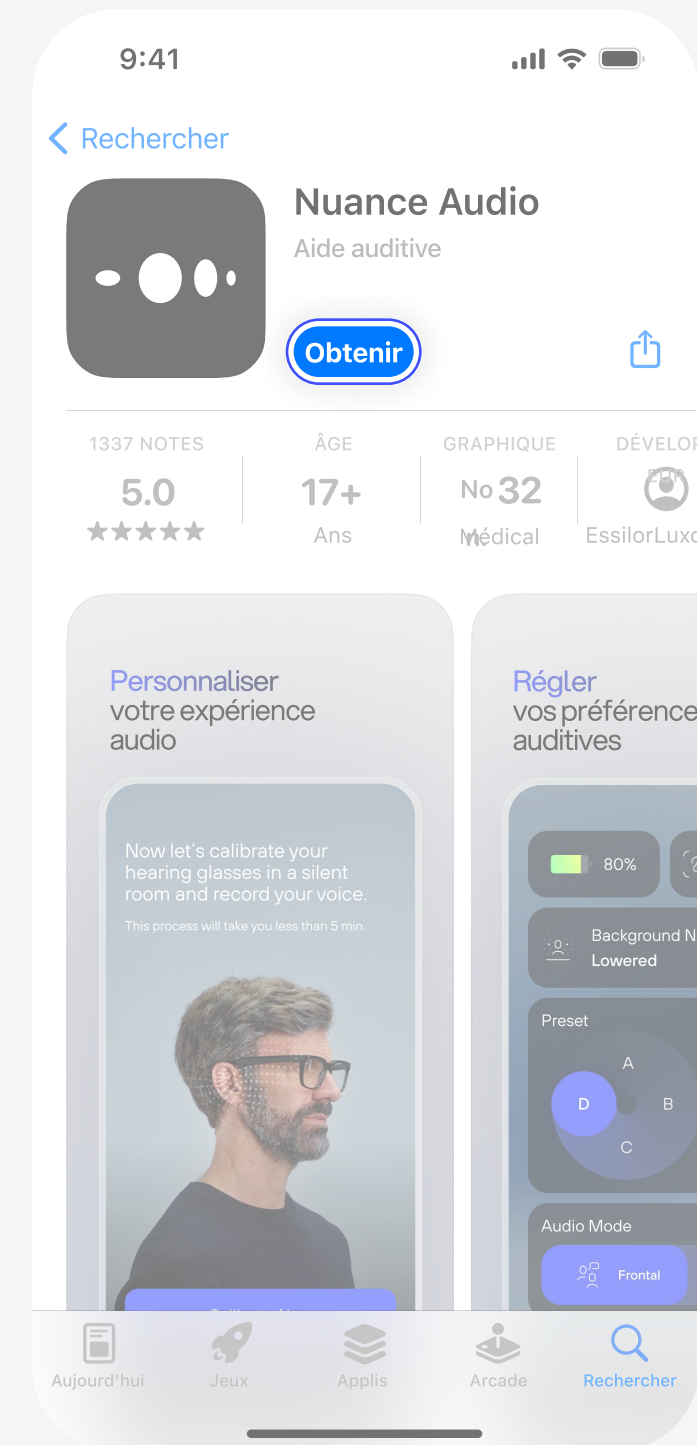

Recherchez « Nuance Audio » dans l'App Store iOS et appuyez sur **Obtenir**.

Le bouton Obtenir changera en Ouvrir. Vous pouvez lancer l'application depuis l'App Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.

Google Play Store

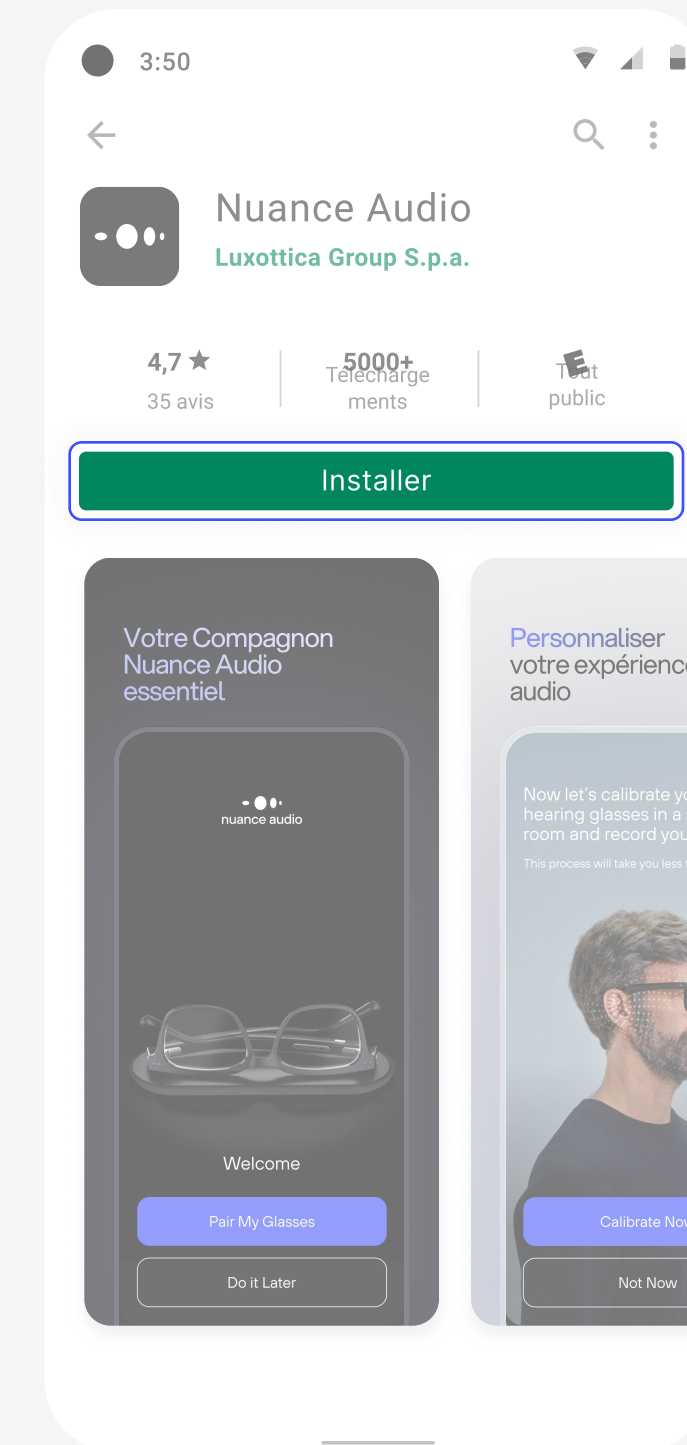

Recherchez « Nuance Audio » dans le Google Play Store et appuyez sur **Installer**.

Le bouton Obtenir changera en Ouvrir. Vous pouvez lancer l'application depuis le Play Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.



Inscrivez-vous

Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez procéder à l'inscription.

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail

Mot de passe

Mot de passe ?

S'identifier

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous

<Créez votre compte

Prénom*

Nom*

E-mail

Confirmer l'e-mail*

Mot de passe

Date de naissance

Sexe

La date de naissance et le genre sont

Nuance Audio

Utilisez le code 123456 pour accéder à votre app Nuance Audio™.

Il y a 34 minutes

Authentification OTP

Entrez le code d'authentification OTP reçu par e-mail

1

1

1

1

1

1

Vérifier

Renvoyer le code

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail

johnsmith78@gmail.com

Mot de passe

Mot de passe ?

S'identifier

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous



Inscrivez-vous avec votre numéro de téléphone en utilisant un OTP

Si vous choisissez de vous inscrire avec votre numéro de téléphone, vous recevrez un OTP (mot de passe à usage unique) par SMS.

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail Numéro de téléphone

(+1) Numéro de téléphone

S'identifier

☐ Rester connecté(e)

ou Se connecter avec

Apple Google

Vous n'avez pas de compte ? [Inscrivez-vous](#)

Créez votre compte

Prénom*

Nom*

(+1) Numéro de téléphone* 1234567890

E-mail

Date de naissance

Sexe

Fournir votre date de naissance et votre genre nous aide à affiner votre expérience avec les lunettes

Pays

Nuance Audio 9h41
Utilisez le code 123456 pour accéder à votre app Nuance Audio™.

Authentification OTP

Entrez le code de vérification envoyé par SMS à +1 1234567890

1 1 1 1 1 1

Vérifier

[Renvoyer le code](#)

nuance audio

Se connecter au compte

E-mail Numéro de téléphone

(+84) 463754829200

S'identifier

☐ Rester connecté(e)

ou Se connecter avec

Apple Google



Vous n'avez pas de compte ? [Inscrivez-vous](#)



Appairage téléphone : premier appareil



Passez en mode d'appairage en faisant coulisser le bouton **Activation vers l'avant** jusqu'à ce que la LED bleue

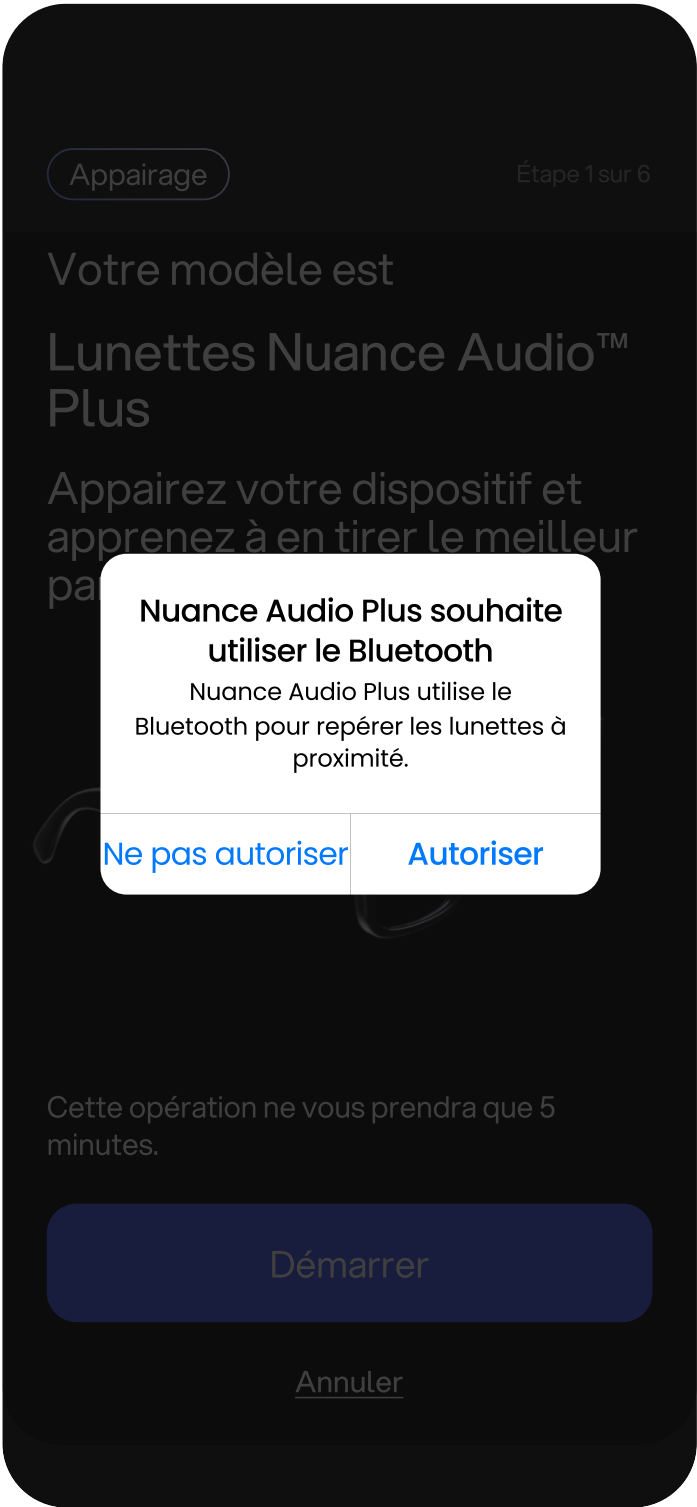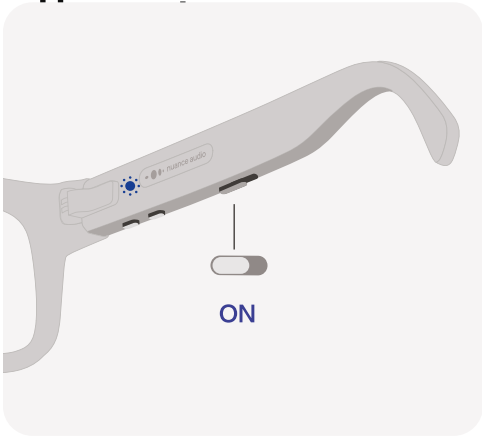

Autorisez l'accès Bluetooth.
Appuyez sur Autoriser.



Commencez l'appairage.
Appuyez sur Démarrer.




Appairage téléphone : premier appareil



Sélectionnez Nuance Audio Plus
Appuyez sur **Appairer**.




Autoriser la demande
d'appairage avec le
Bluetooth.
Appuyez sur **Appairer**.

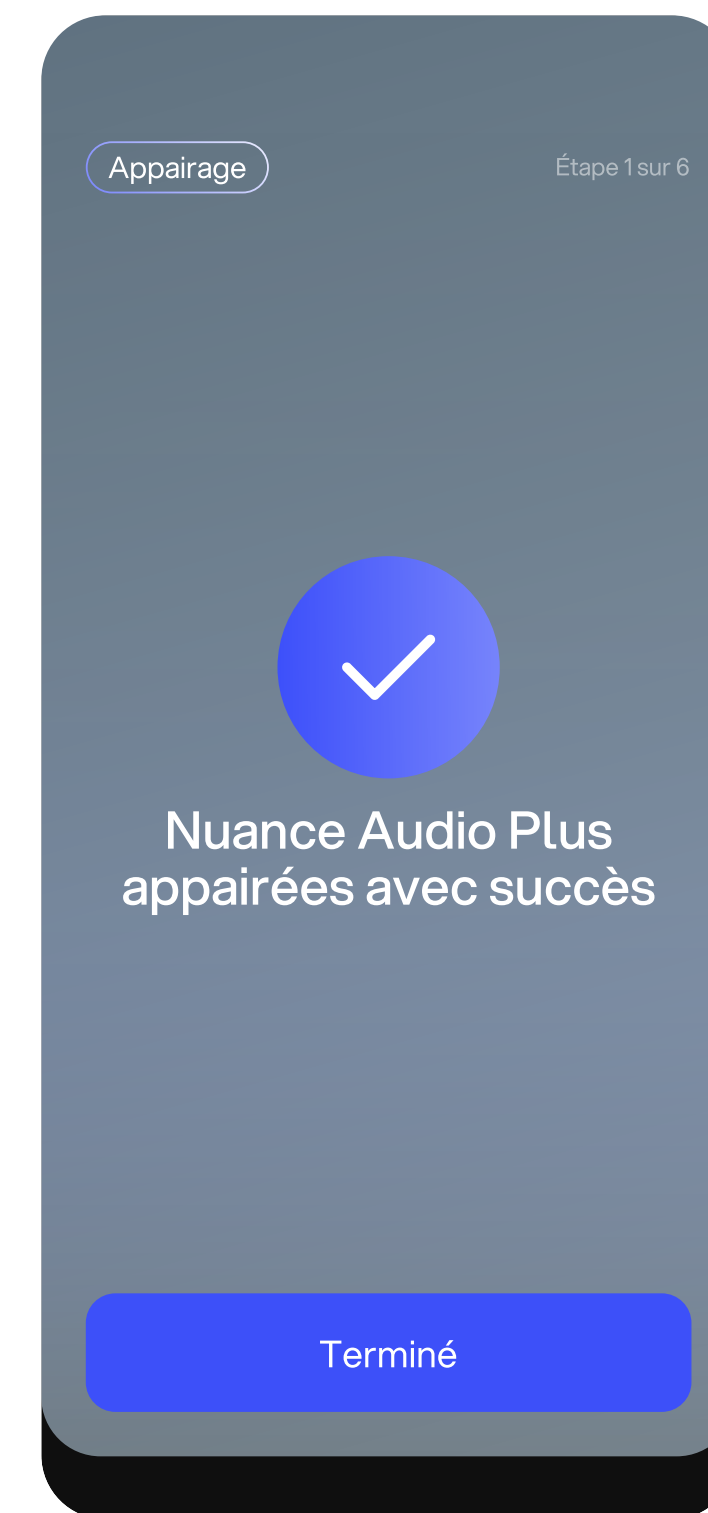

Appairage terminé.

Appairer un deuxième dispositif sur le même compte

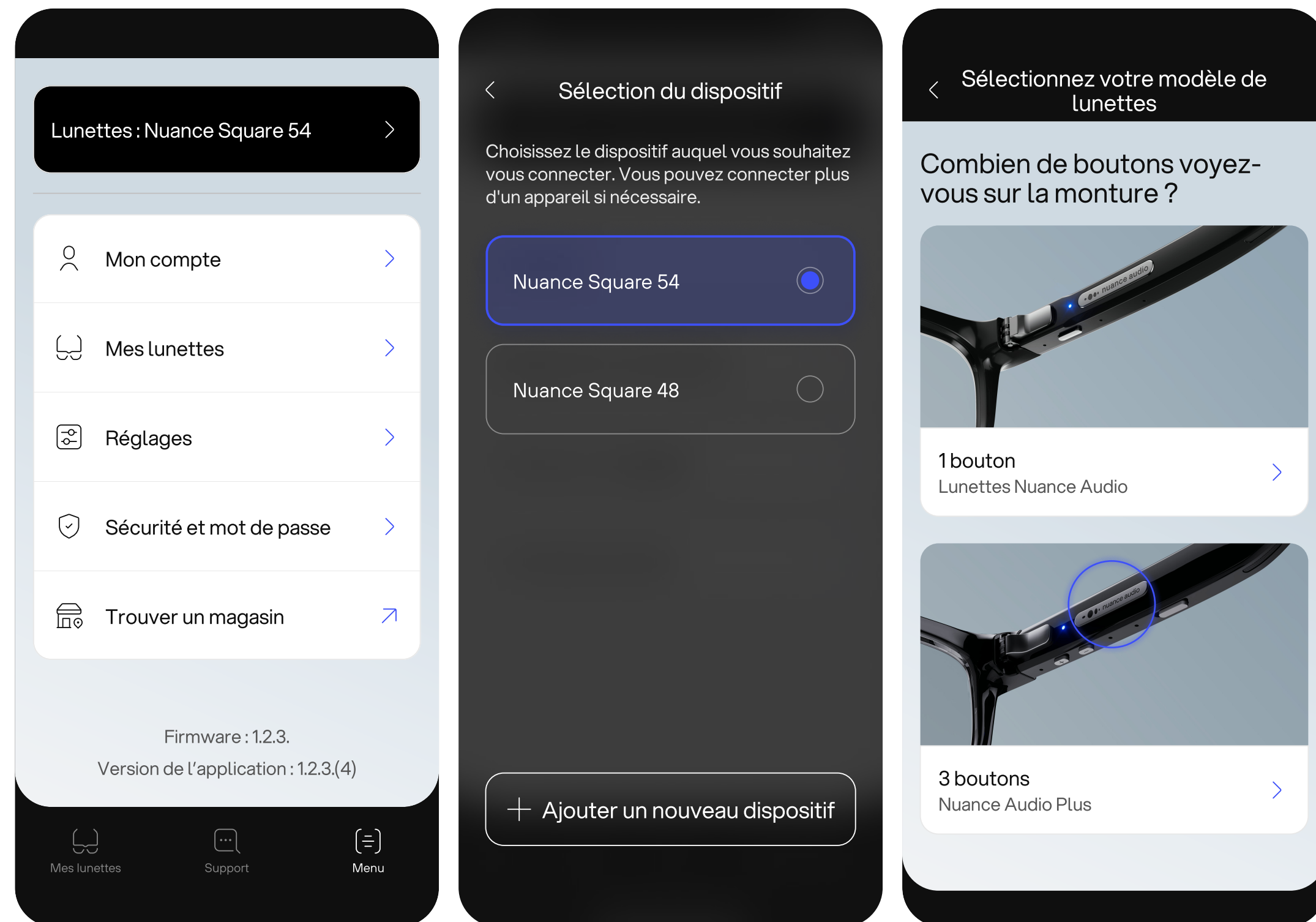


Étape 0.1
Allez dans **Menu**. Cliquez sur l'icône « Lunettes » dans la bannière supérieure pour ajouter une nouvelle paire.

Étape 0.2
Sélectionnez les lunettes auxquelles vous souhaitez vous connecter. Appuyez sur « Ajouter un nouvel appareil ».

Étape 0.3
Choisissez le modèle de vos lunettes.

Étape 0.4
Pour commencer l'appairage, faites glisser le bouton du curseur, appuyez sur «+» ou «-» et **maintenez pendant 8 secondes** jusqu'à ce que la LED bleue clignote.

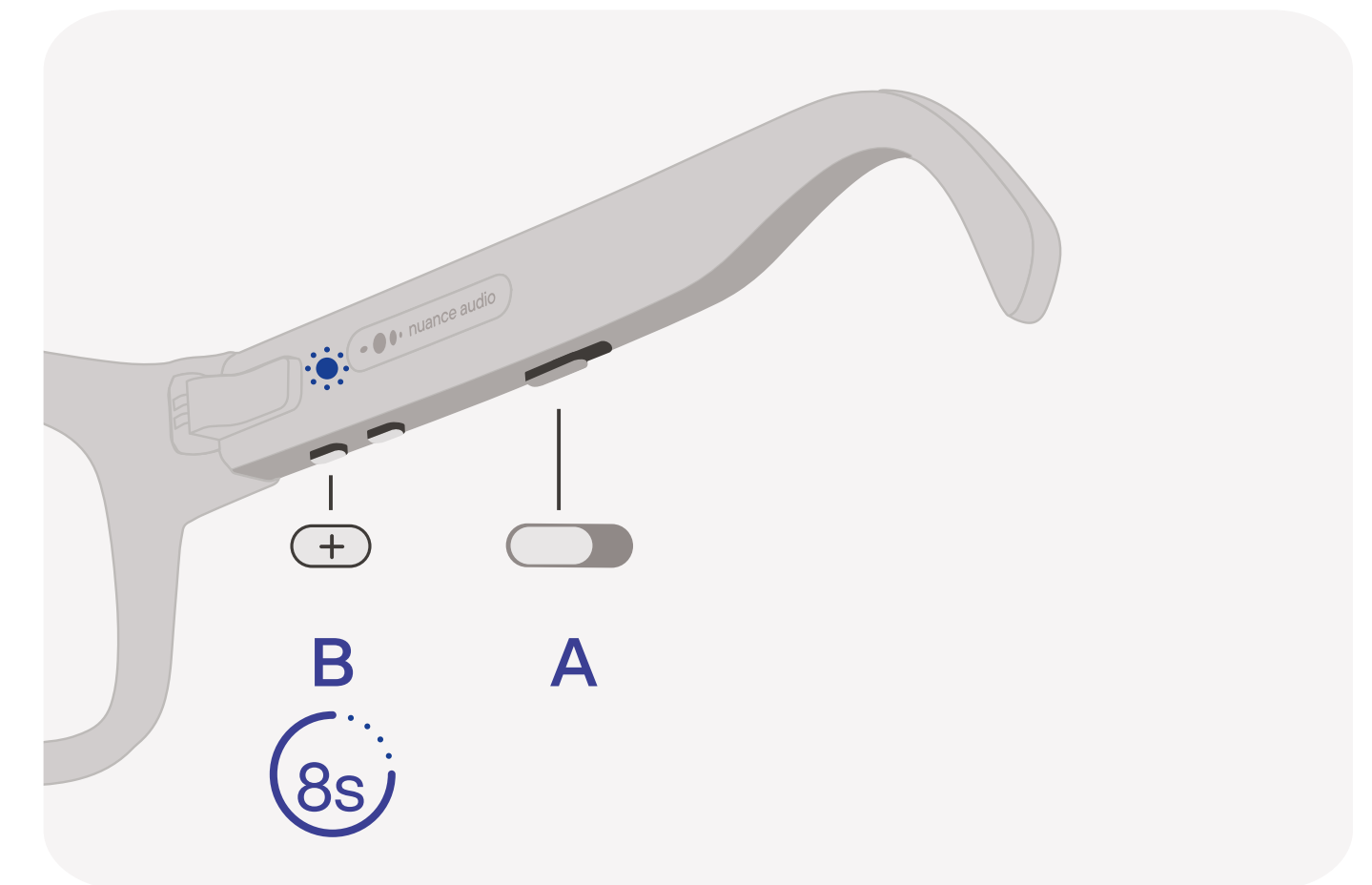




Appairer un deuxième dispositif sur le même compte



Sélectionnez Nuance Audio™ Plus dans la liste. Appuyez sur **Appairer**.



Autoriser la demande d'appairage avec le Bluetooth. Appuyez sur **Appairer**.

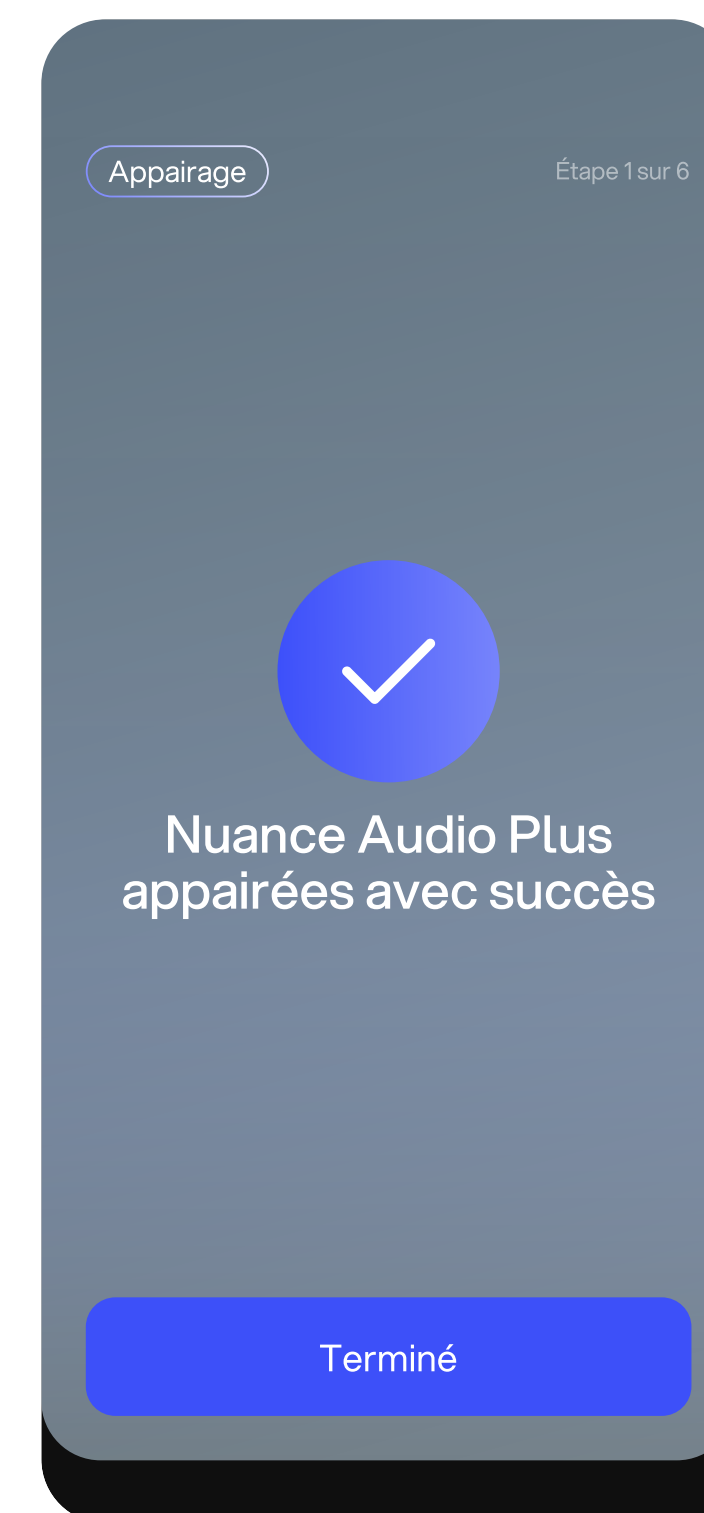

Appairage terminé.



Qu'est-ce que la calibration personnalisée ?

Calibrez vos Nuance Audio Plus afin qu'elles soient personnalisées et adaptées à vos besoins.

La calibration personnalisée optimise le son en fonction de la forme unique de votre tête et de votre voix.

Voici les deux principaux domaines concernés :

- **Son plus clair :** adapte les sons pour réduire les rétroactions et le bruit, afin que vous entendiez plus clairement.
- **Retour vocal naturel :** enregistre votre voix pour rendre vos conversations plus naturelles.





Comment tirer le meilleur parti de votre calibration ?

La calibration ne prend qu'une minute, mais elle vous aide à tirer le meilleur parti de vos Nuance Audio Plus.

Si vous possédez plusieurs paires, calibrez chacune individuellement.

Quelques conseils pour optimiser la Calibration personnelle :

- Trouvez un endroit silencieux chez vous, en évitant les grandes pièces ou les espaces ouverts.
- Éloignez-vous des zones avec de nombreuses ou grandes fenêtres.
- Évitez les pièces avec des plafonds élevés où le bruit de fond peut être imprévisible.
- Positionnez-vous loin des coins et évitez de faire face aux miroirs.
- Idéalement, restez aussi près que possible du centre de la pièce pour une qualité sonore optimale.
- Dernier conseil : votre chambre est souvent la meilleure option.

Quelques conseils pour optimiser la Calibration de la voix :

- Parlez fort mais sans crier.
- Projetez votre voix comme si vous parliez à quelqu'un de l'autre côté de la pièce.
- Minimisez les pauses autant que possible.
- Si vous possédez plusieurs paires, calibrez chacune individuellement.




Comment calibrer vos lunettes ?




Dans le tableau de bord de l'application Nuance, appuyez sur (coin inférieur droit dans la barre de navigation).

Remarques
Un signal bleu vous avertira et vous guidera vers l'écran de calibration

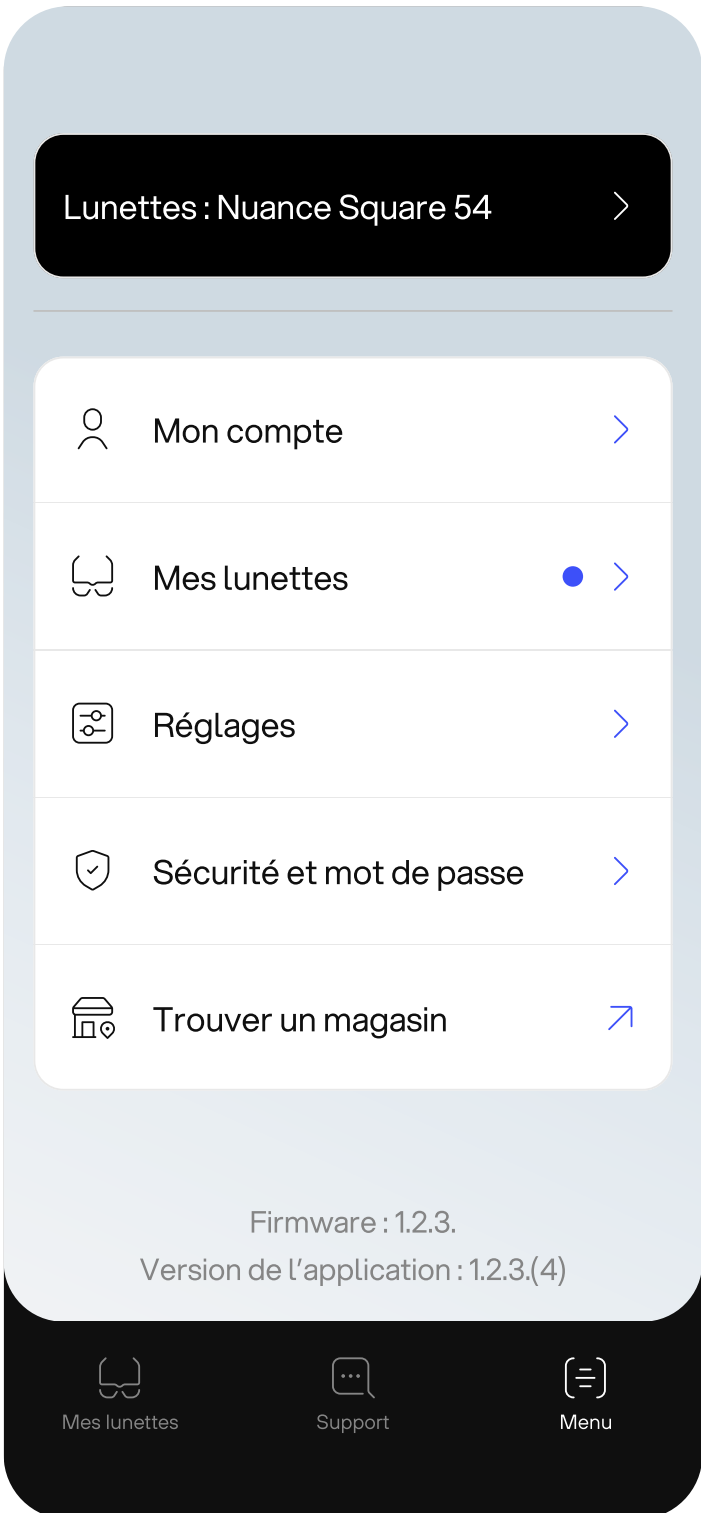

Appuyez sur **Réglages**.

Remarques
Un signal bleu vous avertira et vous guidera vers l'écran de calibration

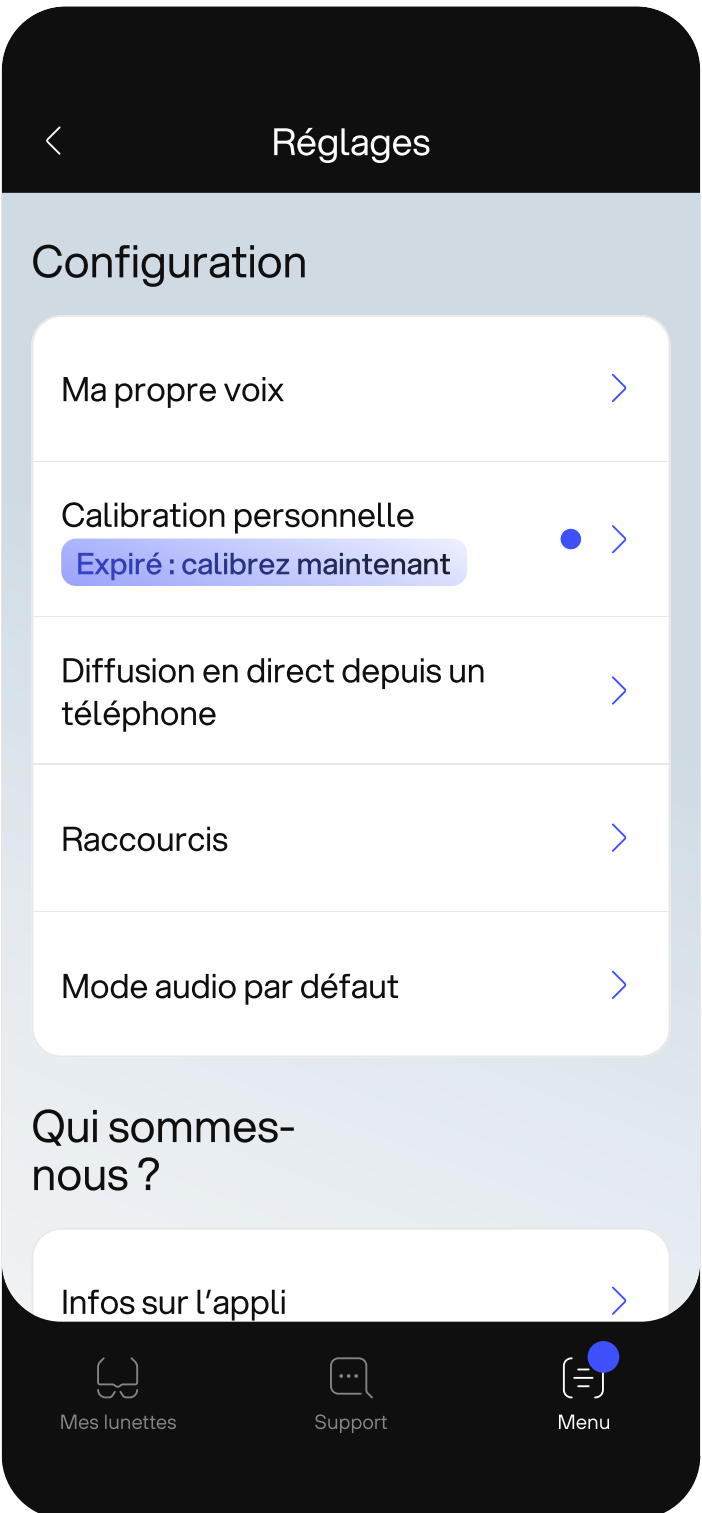

Pour commencer la calibration, appuyez sur **Calibration personnelle**.

Remarques
Un signal bleu et un libellé dédié vous indiqueront qu'une calibration est nécessaire pour mettre à jour vos préférences audio.



Comment calibrer vos lunettes ?

Calibrons à présent vos lunettes avec assistant d'écoute dans une pièce calme et enregistrons votre voix.

Cette opération ne vous prendra qu'1 minute.



Calibrer maintenant

Pas maintenant

Pour commencer la calibration, trouvez une pièce calme puis appuyez sur **Démarrer la calibration.**

Calibration Étape 2 sur 6

Personnalisons vos lunettes avec assistant d'écoute pour les adapter à votre tête et à votre voix uniques

À quoi s'attendre :

Étape 1: Vous allez entendre un court extrait audio.

Étape 2: Vous allez entendre un court extrait audio.

Nuance Audio™ souhaite utiliser le micro
Nuance Audio™ utilise le microphone pour repérer les lunettes à proximité.


Ne pas autoriser

Autoriser

Les lunettes sont allumées et le lieu est calme


Faire plus tard

Vous devrez autoriser le microphone de votre téléphone à mesurer et analyser les sons.
Appuyez sur Autoriser.

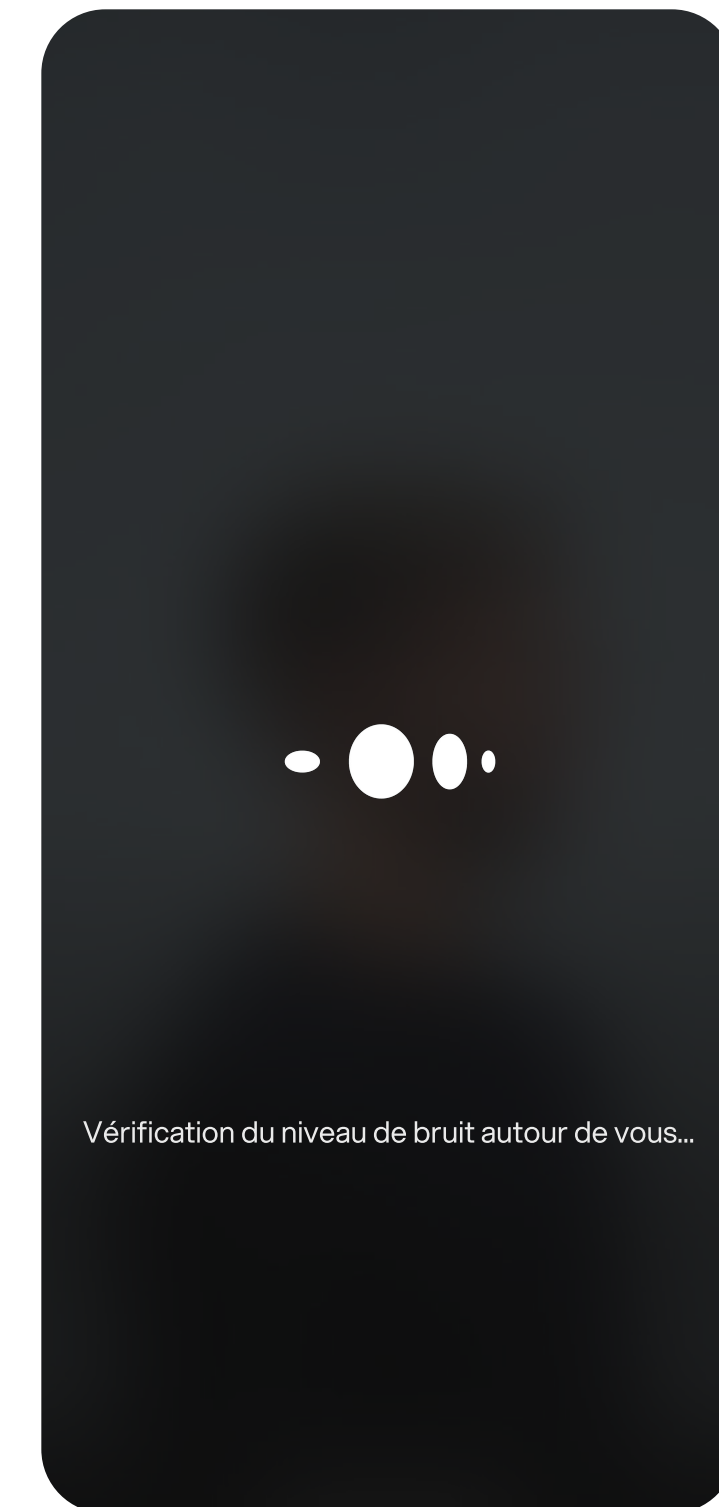

Vérification du niveau de bruit autour de vous...

Appairage terminé.
Une fenêtre contextuelle vous rappellera de garder vos Nuance Audio Plus pendant tout le processus.

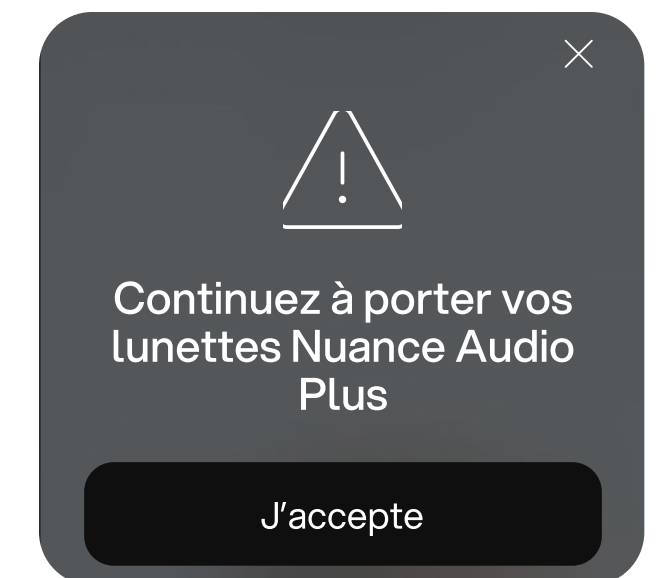


Continuez à porter vos lunettes Nuance Audio Plus


J'accepte




Comment calibrer vos lunettes ?

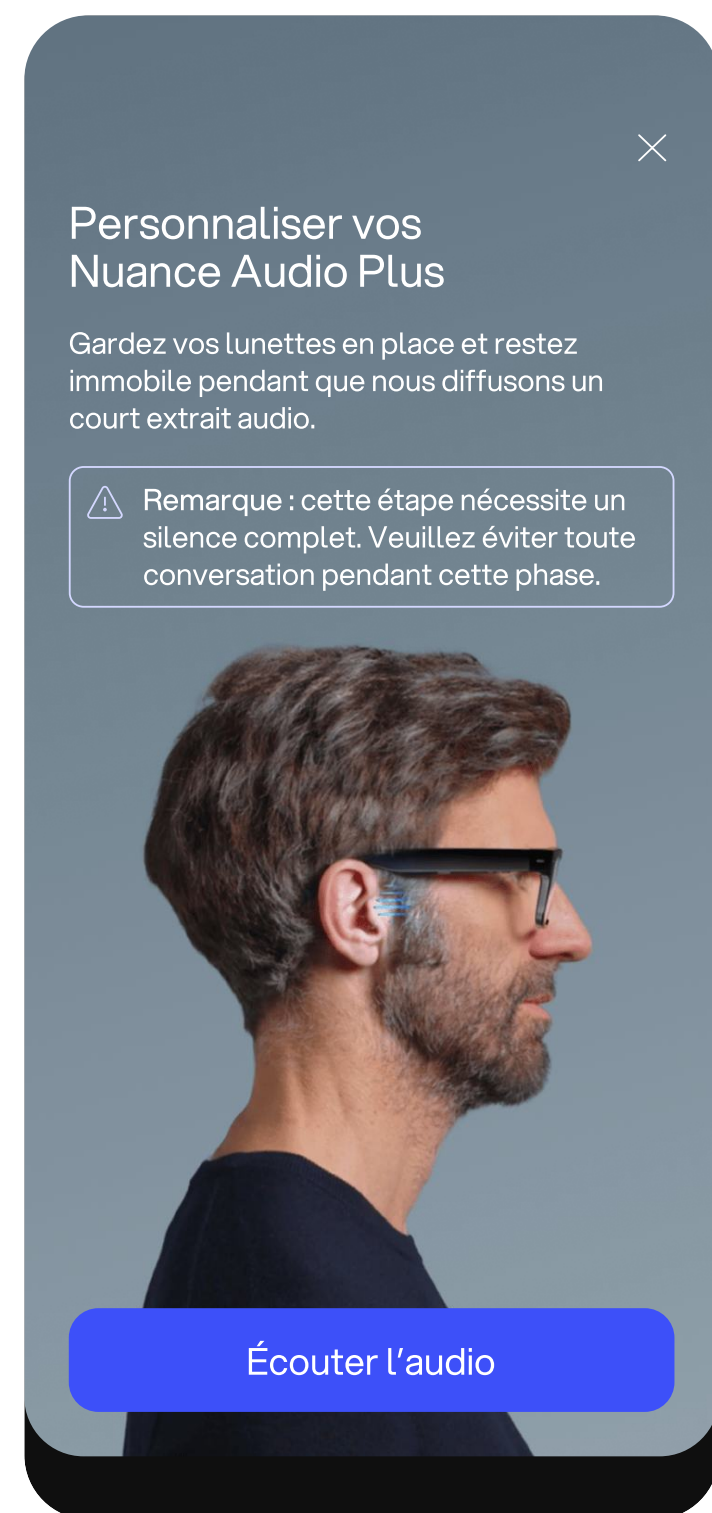

Étape 1.1
Mesure du bruit
environnemental.
Gardez vos lunettes et
appuyez sur **Écouter un
extrait audio.**

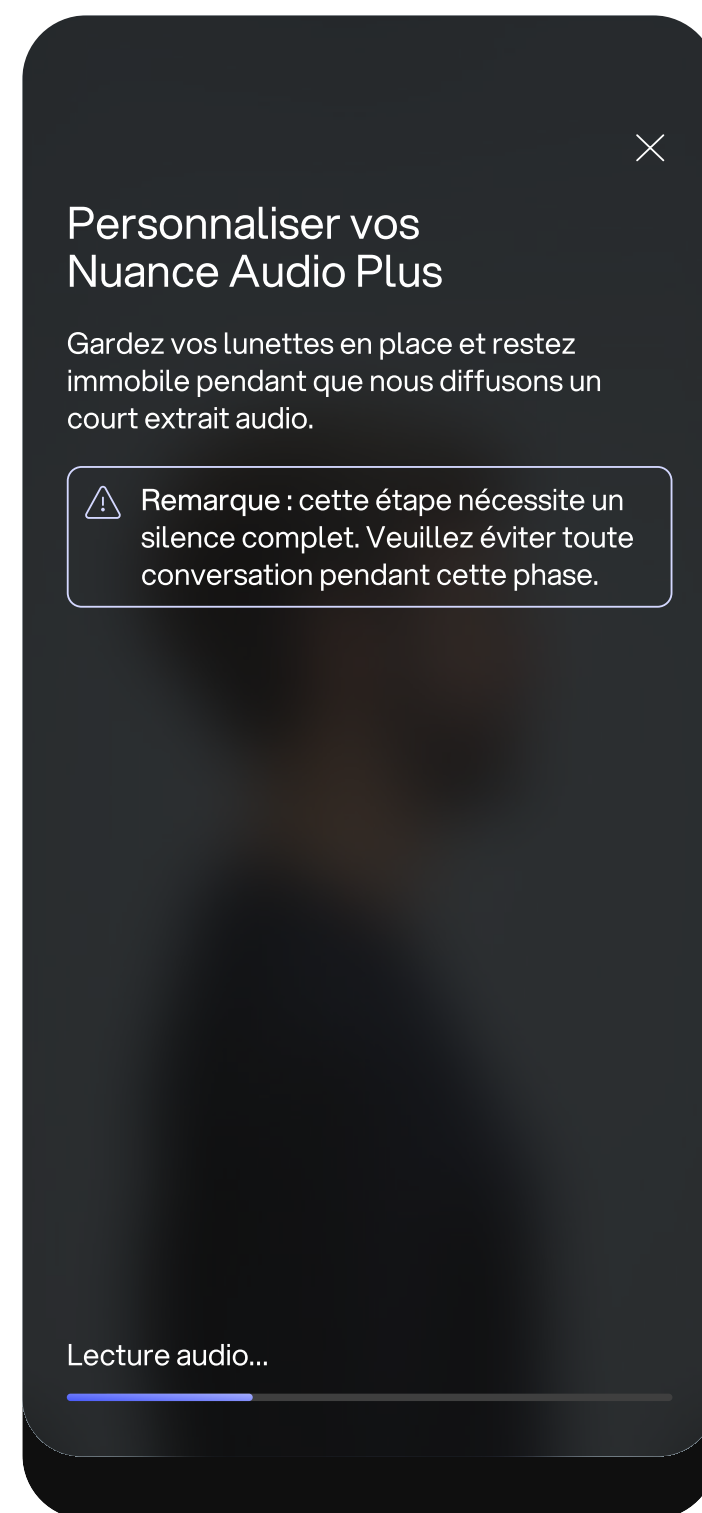


Étape 1.2
Restez immobile et ne
retirez pas vos lunettes,
**attendez la fin de l'extrait
audio.**

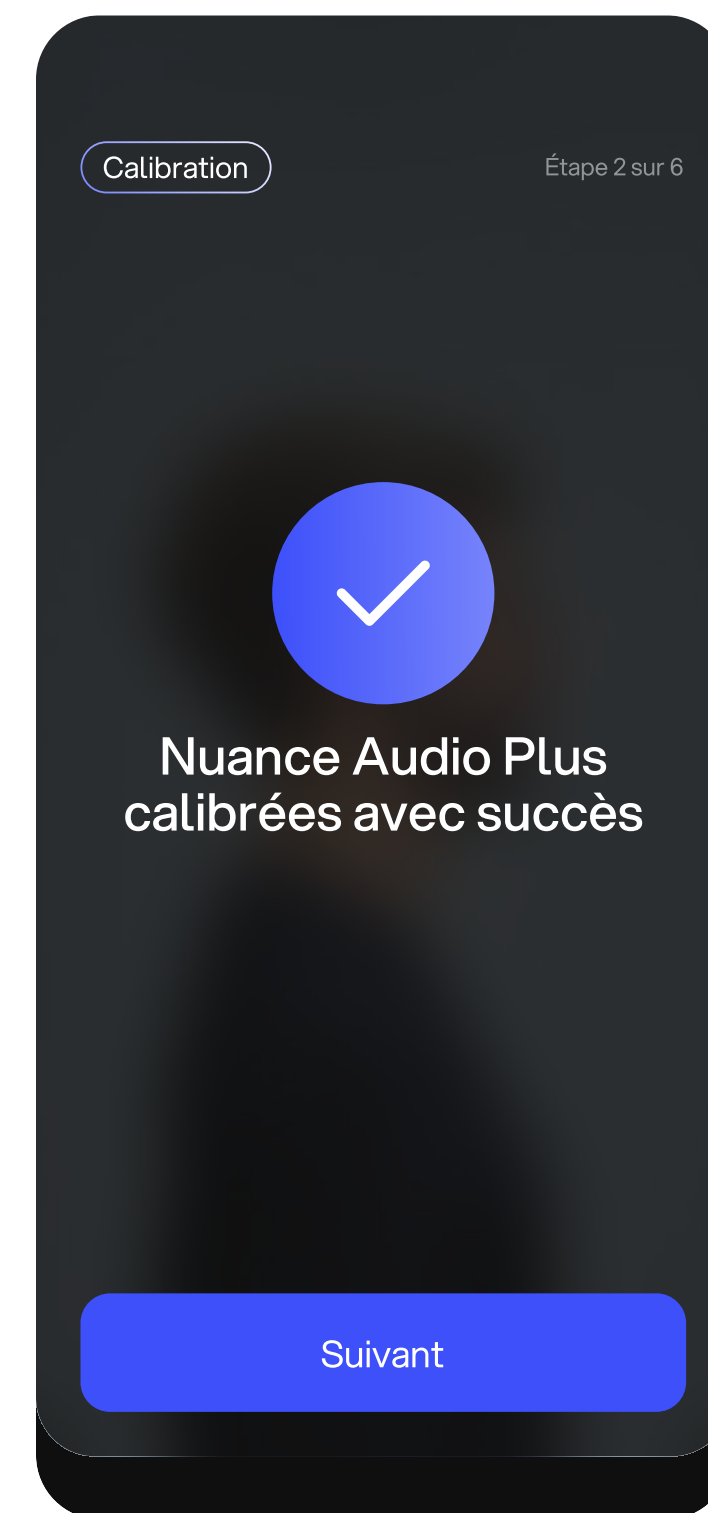


Étape 1.3
Mesure du bruit
environnemental terminée.




Comment calibrer vos lunettes ?

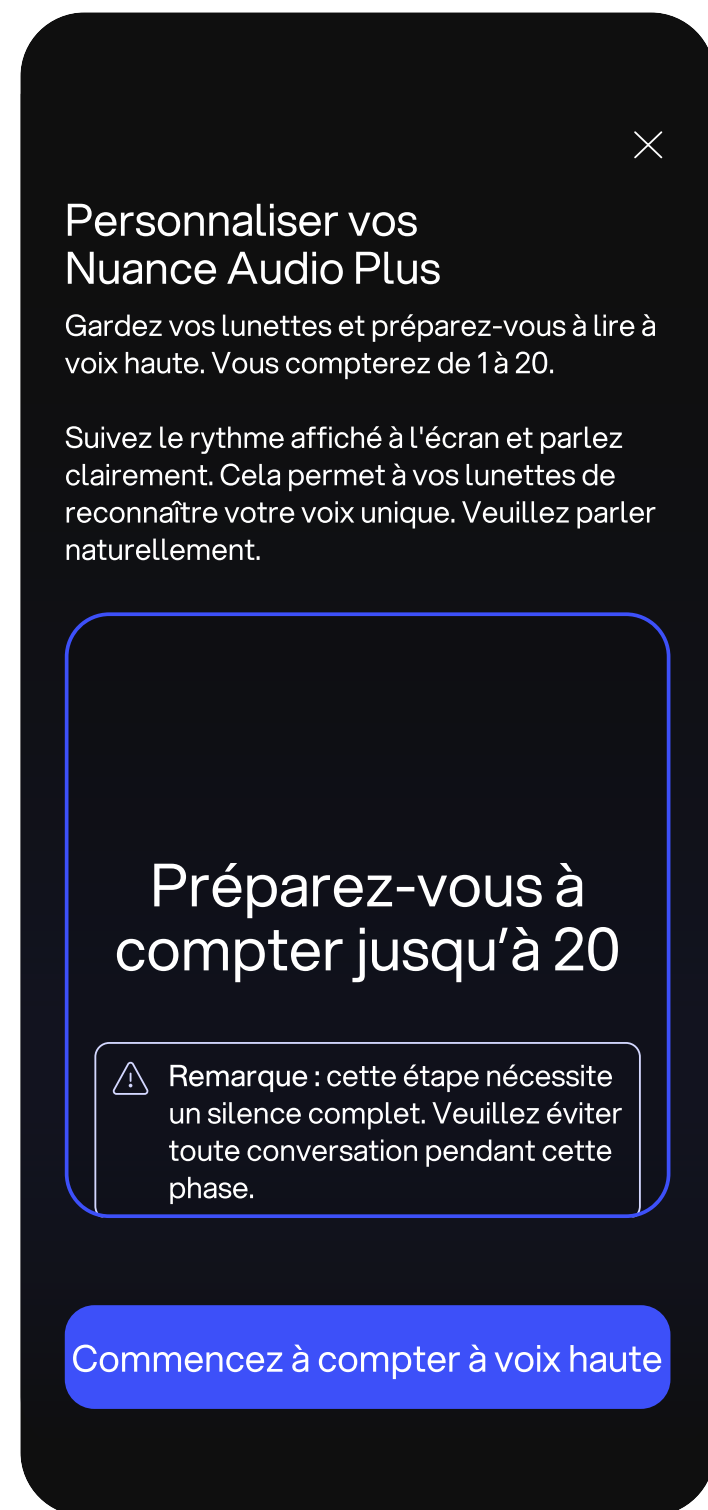

Étape 2.1
Calibration de votre voix.
Restez immobile et ne retirez pas vos lunettes.
Appuyez sur Lancer l'enregistrement.

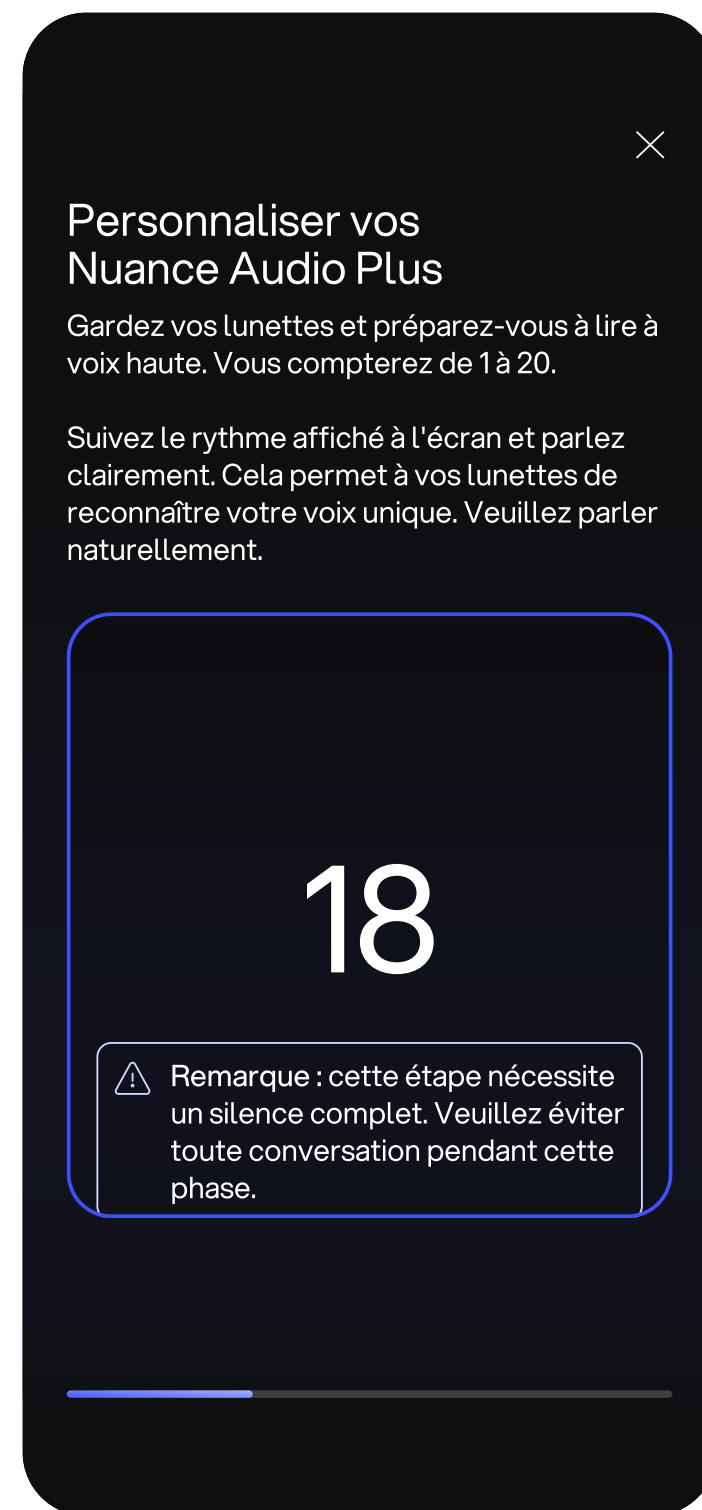

Étape 2.2
Comptez à voix haute jusqu'à ce que la barre de progression atteigne la fin.

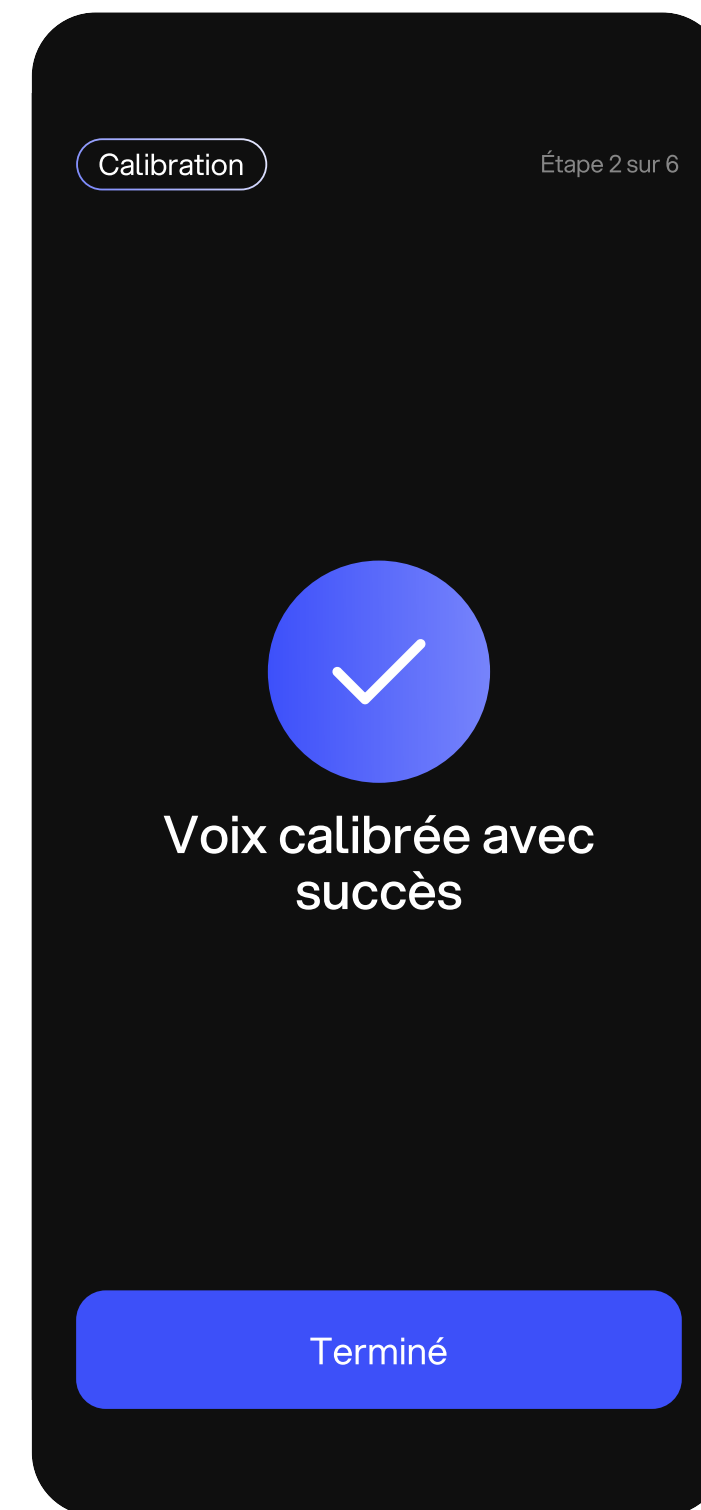

Étape 2.3
Calibration personnelle terminée avec succès.



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

↗ [Voir les instructions d'utilisation](#)