


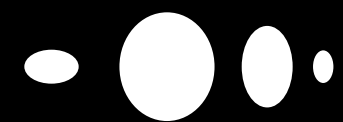


Começar: Criação de conta, emparelhamento, calibração



Desembalar



Desembalar

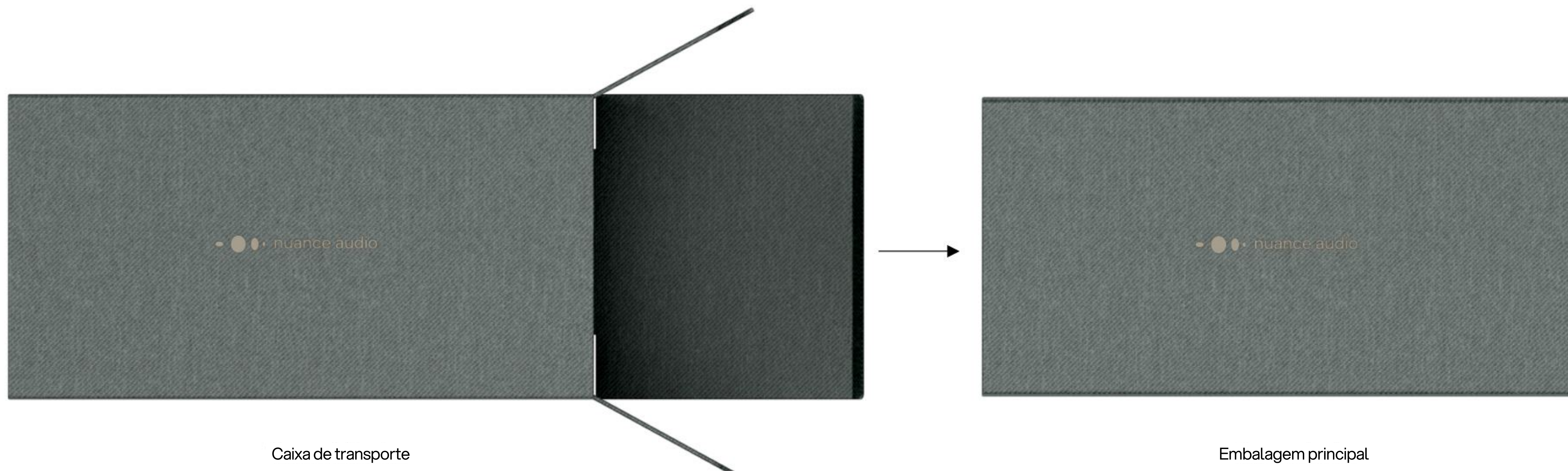




Desembalar



Pacote




Base de Carregamento e gaveta para literatura

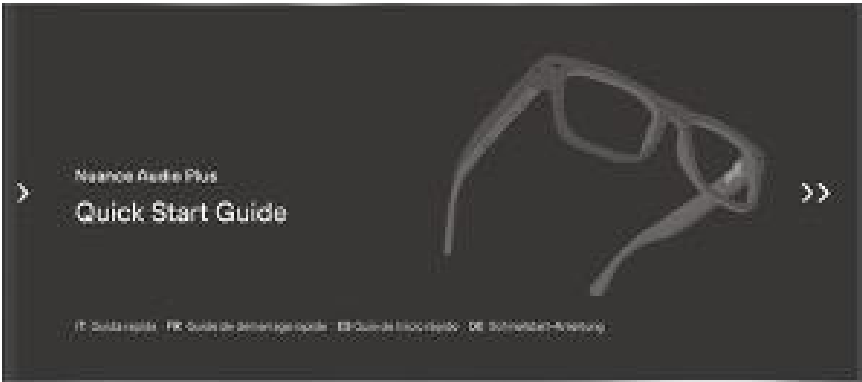

QSG




IFU

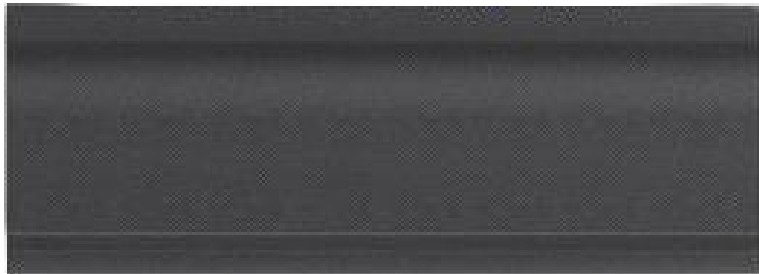


Estojo




Charging Pad

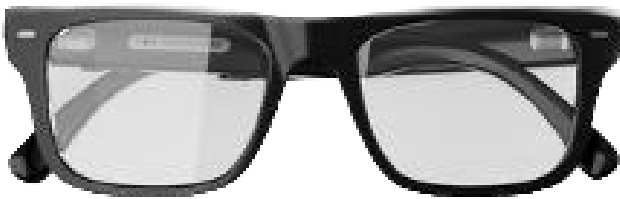

Nuance Audio Plus

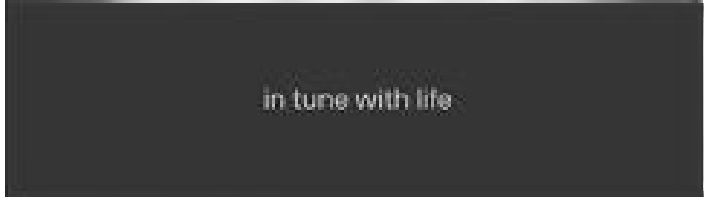

Pano de limpeza

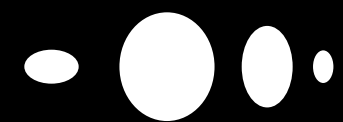

Ative e configure o seu Nuance Audio Plus




Procurar a App Nuance Audio

Para uma utilização fácil dos seus Nuance Audio Plus, a nossa App móvel intuitiva permite-lhe mudar os modos de áudio, controlar o volume e reduzir o ruído de fundo – tudo a partir do seu telemóvel.




Opção A.

Digitalize o código QR com o seu telefone e [Descarregue](#).

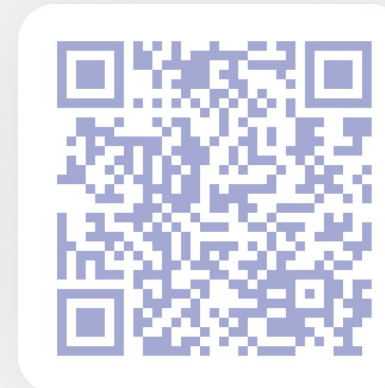


Notas

Também pode encontrar o código QR na caixa principal

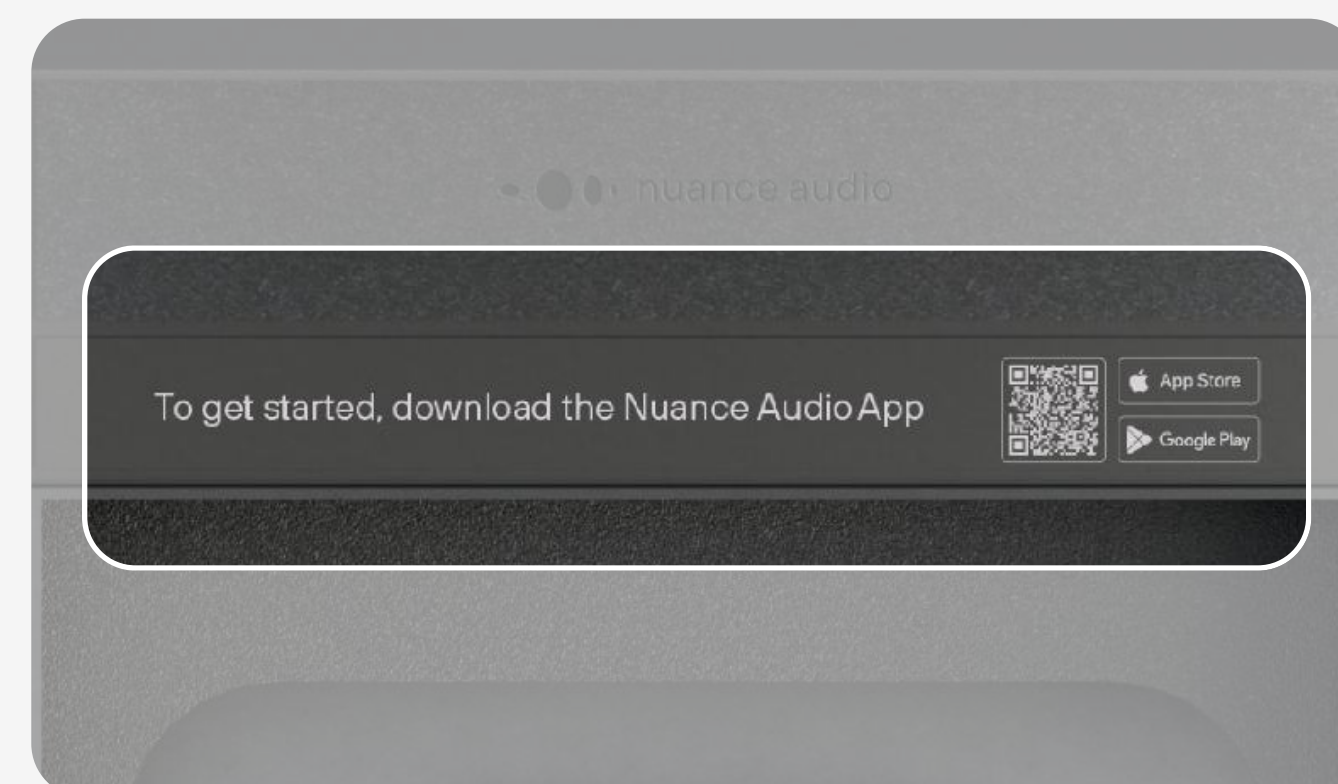

Opção B.

Pesquise por “Nuance Audio” na App Store ou na Google Play Store e [Descarregue](#)

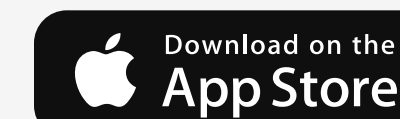


Nuance Audio






Descarregar da loja de aplicações do seu dispositivo

Para ativar e personalizar os seus Nuance Audio Plus, **descarregue a App Nuance Audio** na App Store da iOS ou na Google Play Store.

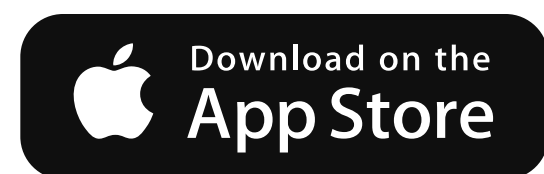


Apple App Store

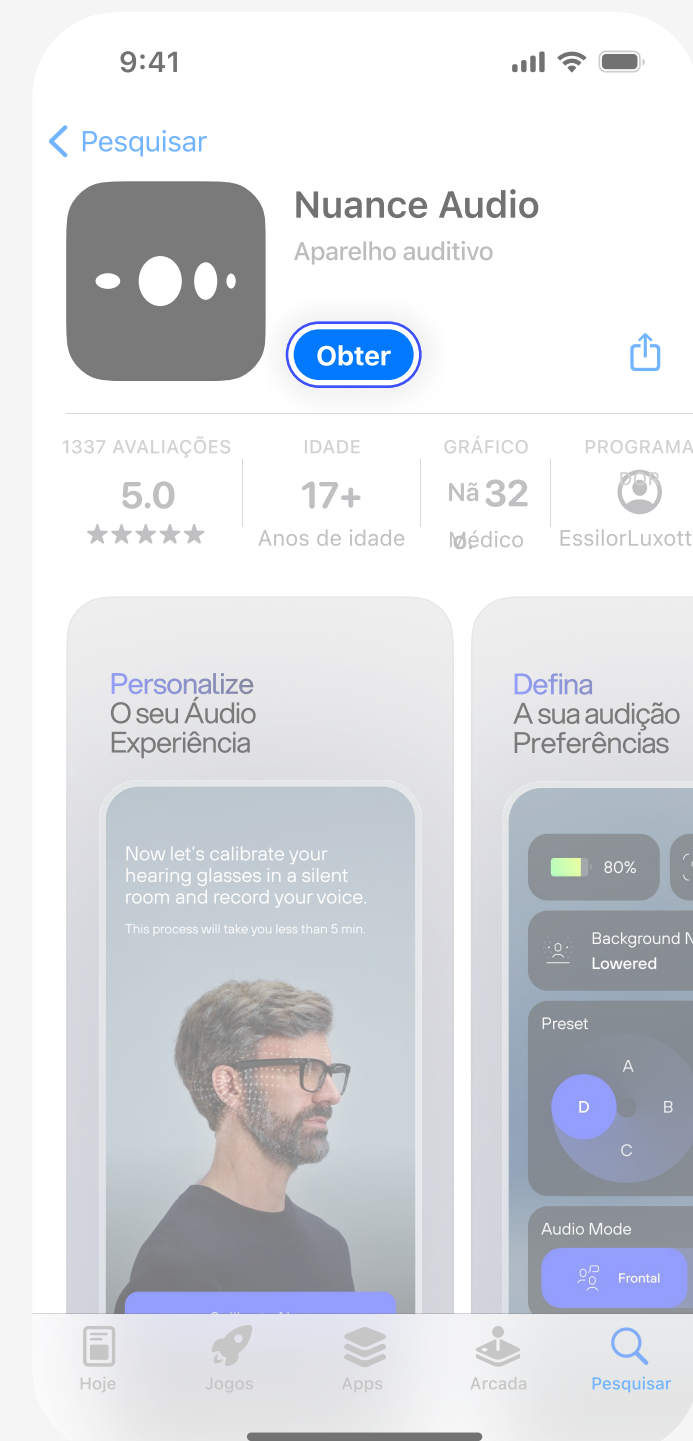

Pesquise por “Nuance Audio” na App Store do iOS e toque em **Obter**.

O botão Obter mudará para Abrir. Pode iniciar a aplicação a partir da App Store ou encontrá-la no seu ecrã inicial.

Google Play Store

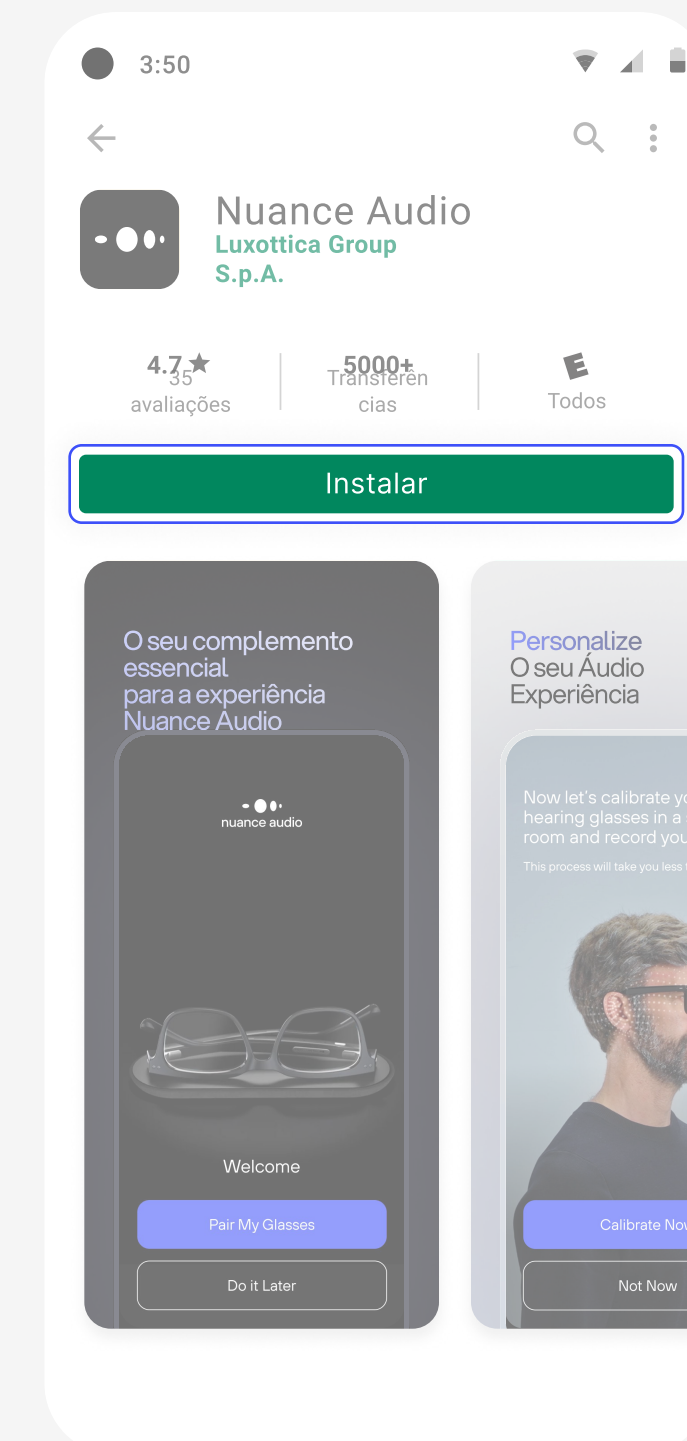

Pesquise por “Nuance Audio” na Google Play Store e prima **Instalar**.

O botão Obter mudará para Abrir. Pode iniciar a aplicação a partir da App Store ou encontrá-la no seu ecrã inicial.



Registe-se

Depois de descarregar a aplicação, pode prosseguir com o Registo.

nuance audio

Inicie sessão na sua conta

E-mail

Palavra-passe

Esqueceu-se da palavra-passe?

Iniciar sessão

Não tem uma conta?

Registe-se

<

Crie a sua conta

Nome*

Apelido*

E-mail

Confirmar e-mail*

Palavra-passe

Data de nascimento

Género

A data de nascimento e o género são

Nuance Audio

Utilize o código 123456 para aceder à sua Nuance Audio app.

34m atrás

Verificação OTP

Introduza o código de verificação OTP do seu email

1

1

1

1

1

1

Verificar

Reenviar código

nuance audio

Inicie sessão na sua conta

E-mail

johnsmith78@gmail.com

Palavra-passe

Esqueceu-se da palavra-passe?

Iniciar sessão

Não tem uma conta?

Inscрева-se



Registe-se com o número de telefone utilizando OTP

Se optar por registar-se com o seu número de telemóvel, receberá um OTP (palavra-passe única) via SMS.

nuance audio

Inicie sessão na sua conta

E-mail Número de telemóvel

(+1) Número de telemóvel

Iniciar sessão

☐ Lembre-se de mim

ou Iniciar sessão com

Apple Google

Não tem uma conta? [Registe-se](#)

< Crie a sua conta

Nome*

Apelido*

(+1) Número de telefone* 1234567890

E-mail

Data de nascimento

Género

Fornecer a sua data de nascimento e género ajuda-nos a otimizar a sua experiência com os óculos

País

Nuance Audio 9:41 AM
Utilize o código 123456 para aceder à sua Nuance Audio app.

Verificação OTP

Introduza o código de verificação enviado por SMS para +1234567890

1 1 1 1 1 1

Verificar

[Reenviar código](#)

nuance audio

Inicie sessão na sua conta

E-mail Número de telemóvel

(+84) 463754829200

Iniciar sessão

☐ Lembre-se de mim

ou Iniciar sessão com

Apple Google


Não tem uma conta? [Registe-se](#)



Emparelhamento de telemóvel: primeiro dispositivo



Entre no modo de emparelhamento movendo o botão “**Deslize para ligar**” para a frente até que o LED azul pisque.

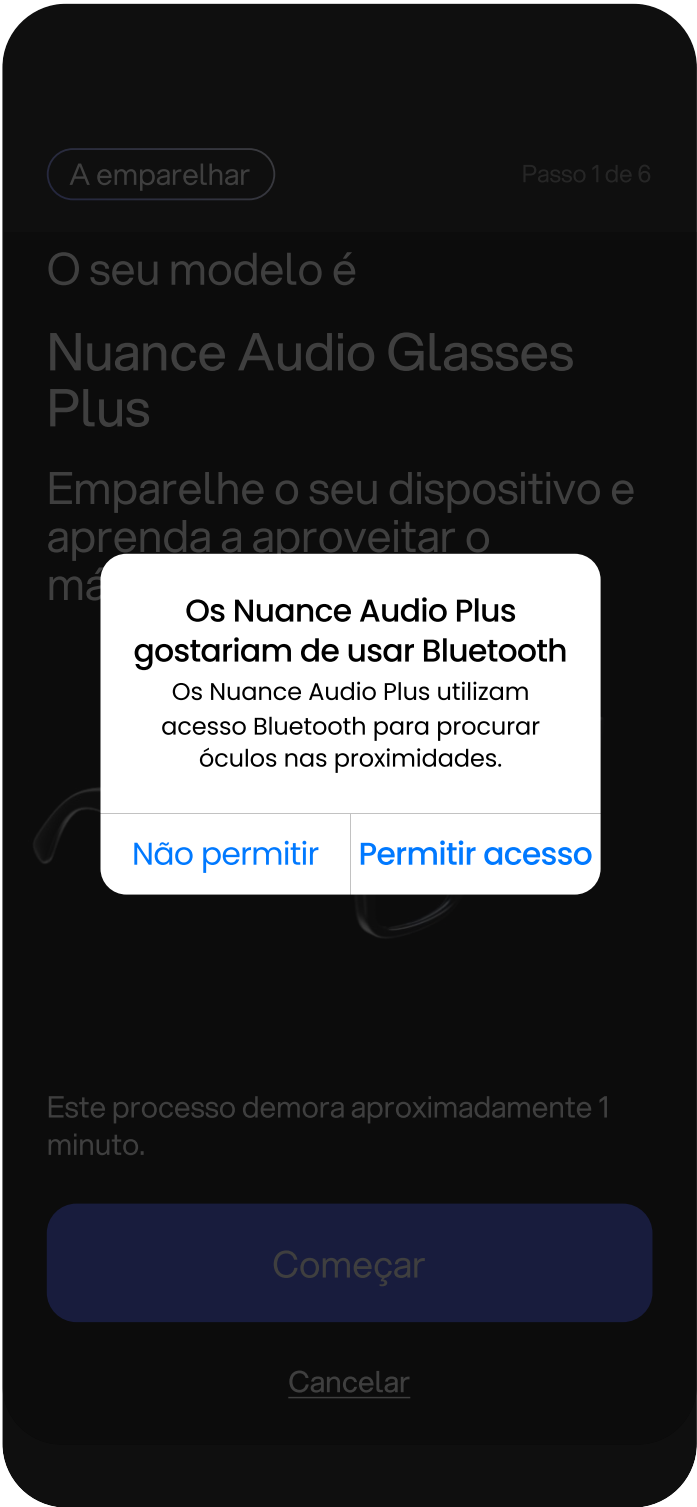


Ative a permissão de Bluetooth. Pressione **Permitir**.




Comece a emparelhar. Pressione **Iniciar**.




Emparelhamento de telemóvel: primeiro dispositivo

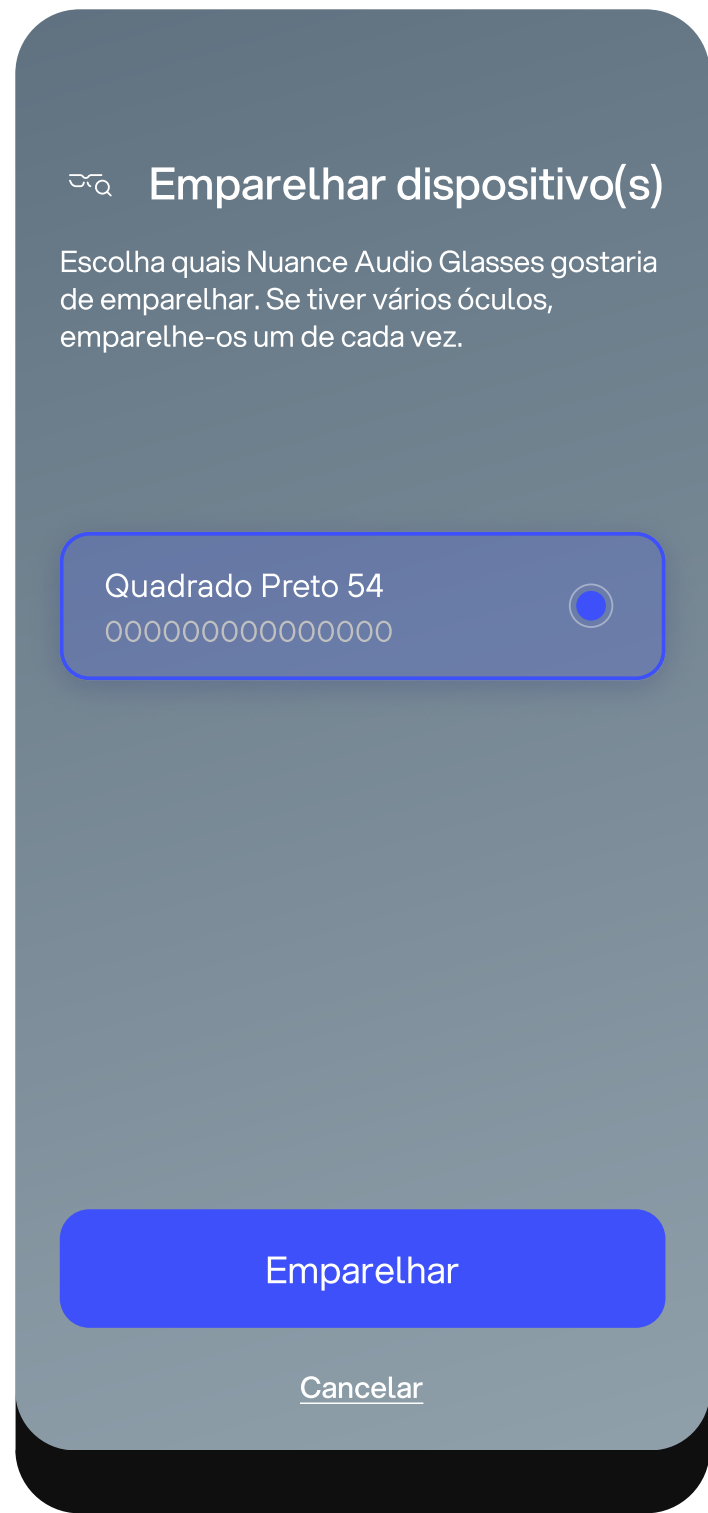

Selecione Nuance Audio Plus. Pressione **Emparelhar**.

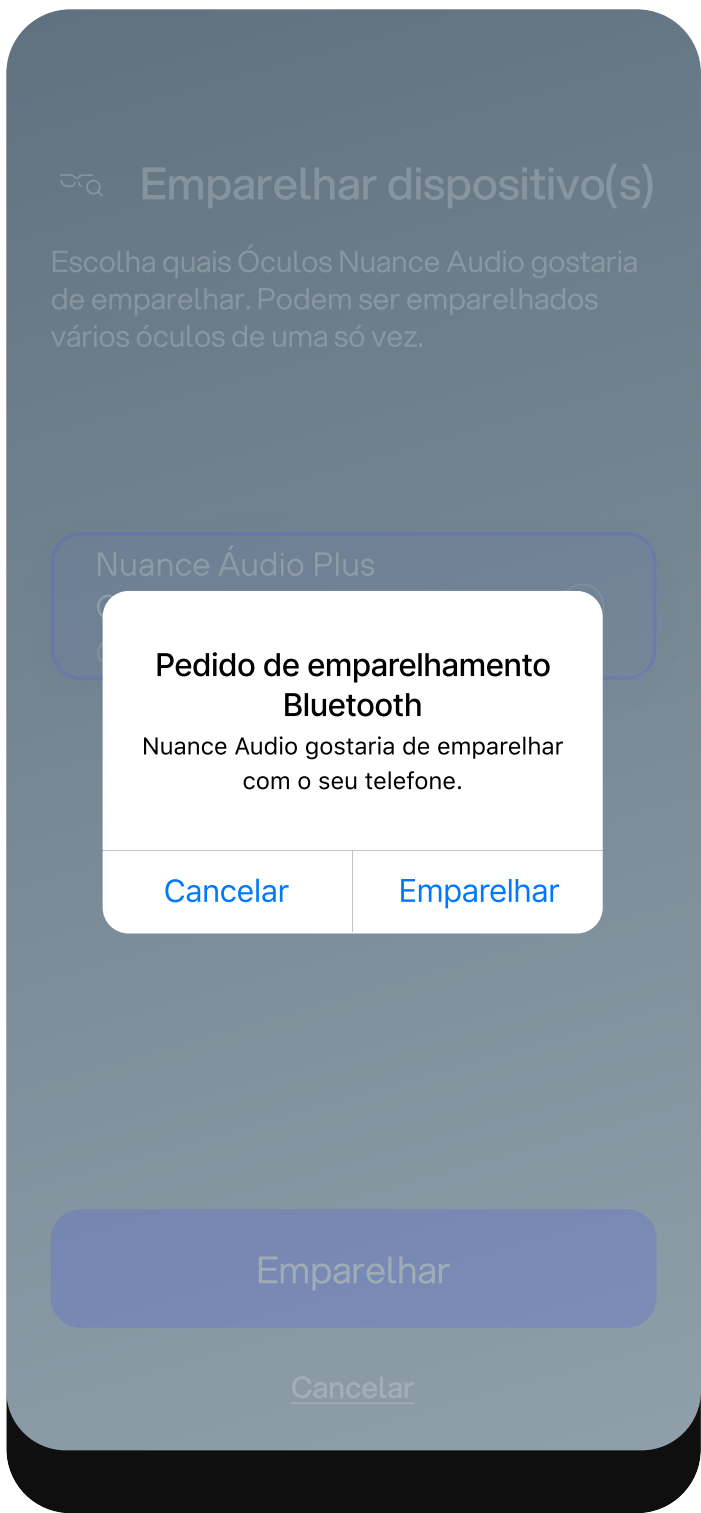


Permitir pedido de emparelhamento Bluetooth. Pressione **Emparelhar**.

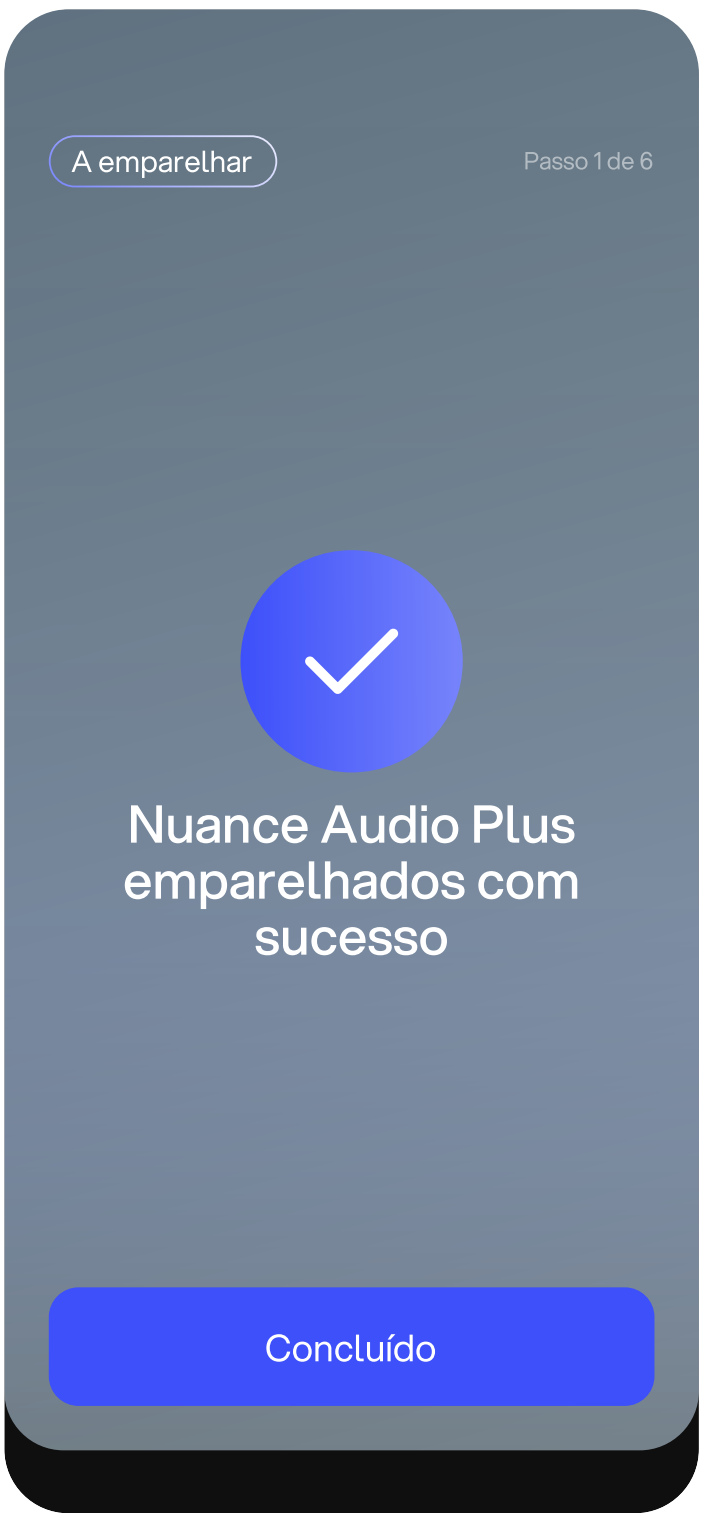

Emparelhamento concluído.



Emparelhamento de um segundo dispositivo na mesma conta

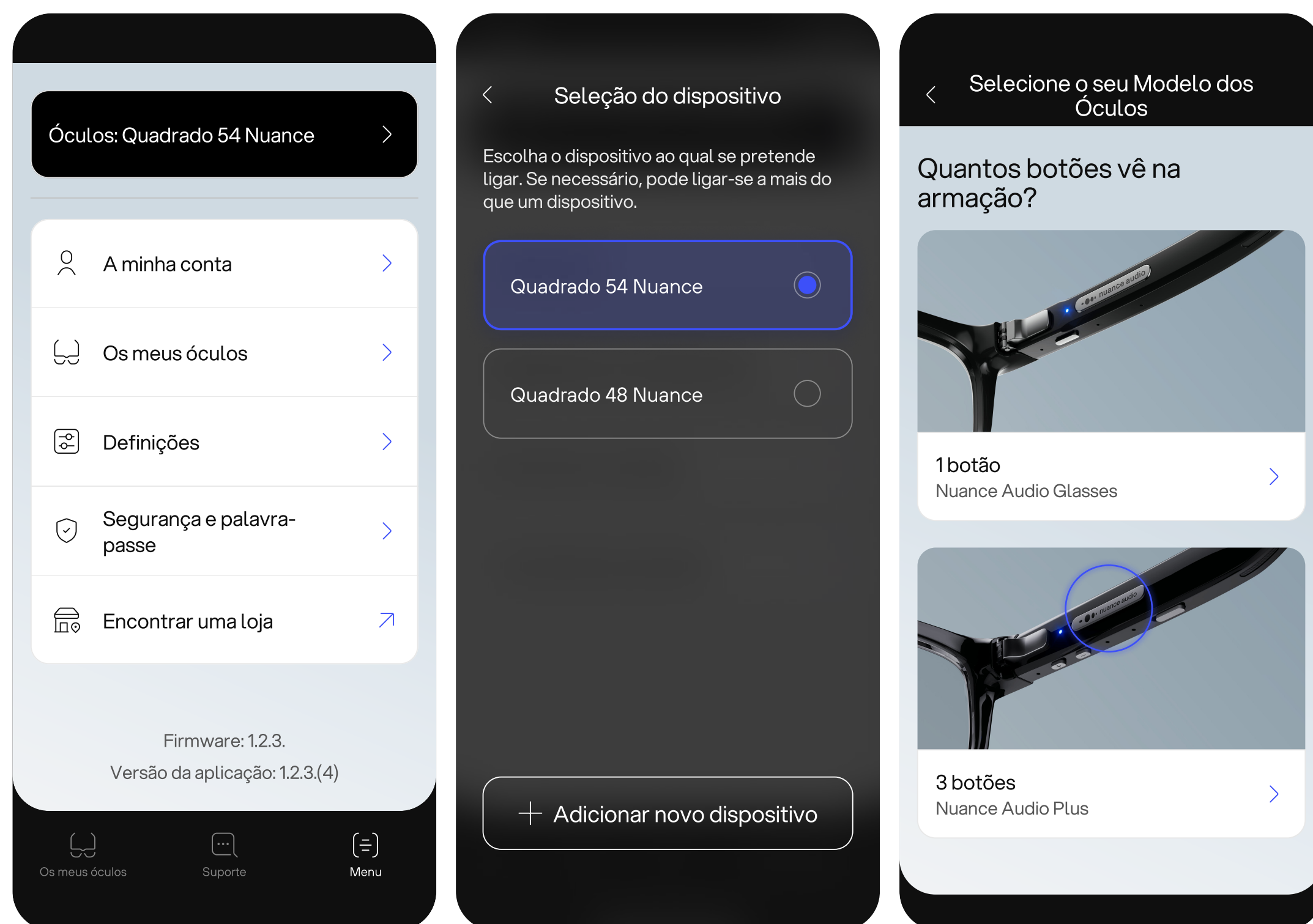

Passo 0.1

Vá ao **Menu**. Toque no ícone dos "Óculos" na barra superior para adicionar um novo par.

Passo 0.2


Selecione os Óculos que pretende ligar. "Adicionar Novo Dispositivo."

Passo 0.3

Escolha o modelo dos seus óculos.


Passo 0.4

Para iniciar o emparelhamento, deslize o botão do slider, pressione **"+"** ou **"-"** e **mantenha pressionado durante 8 segundos** até que o LED azul pisque.

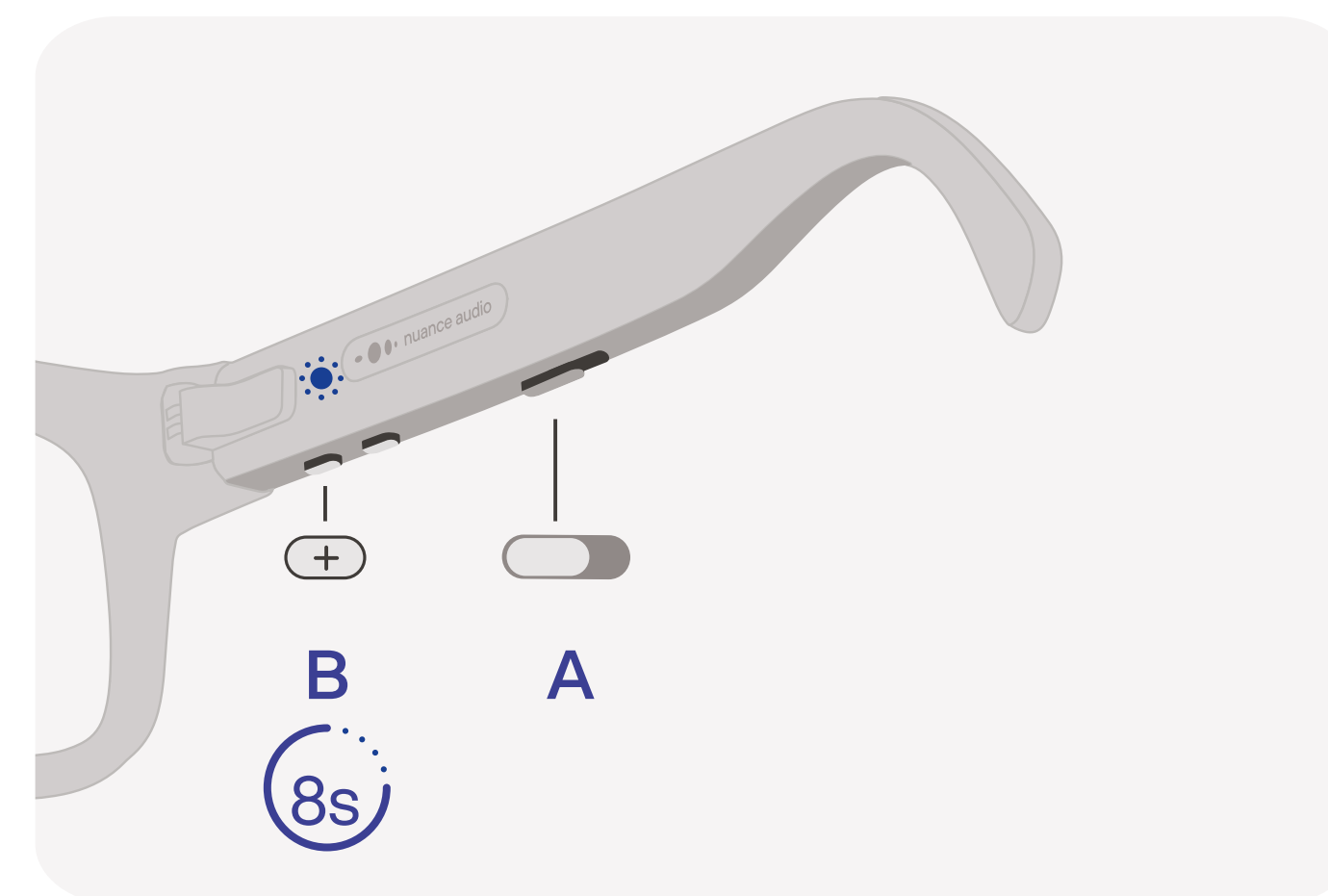





Emparelhamento de um segundo dispositivo na mesma conta

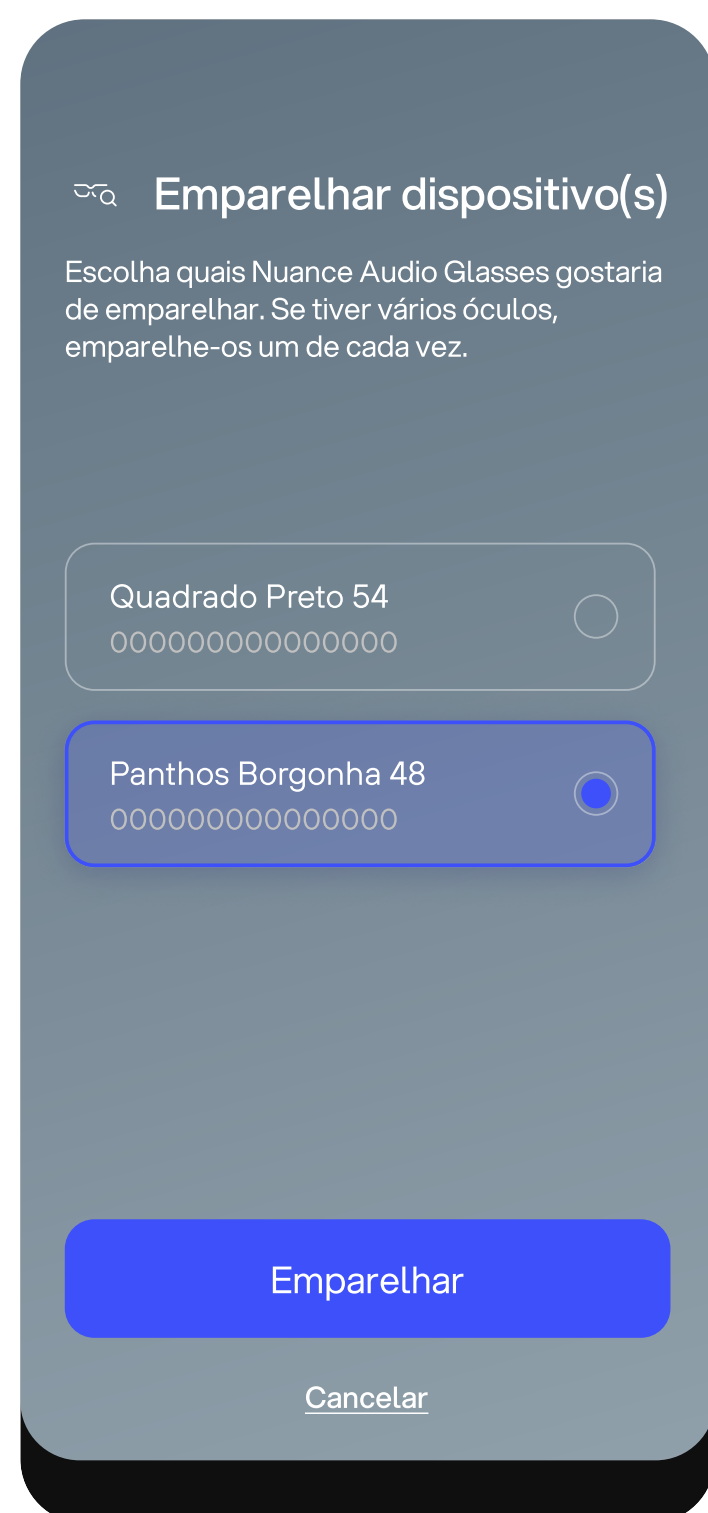

Selecione Nuance Audio Plus da lista. Pressione **Emparelhar**.

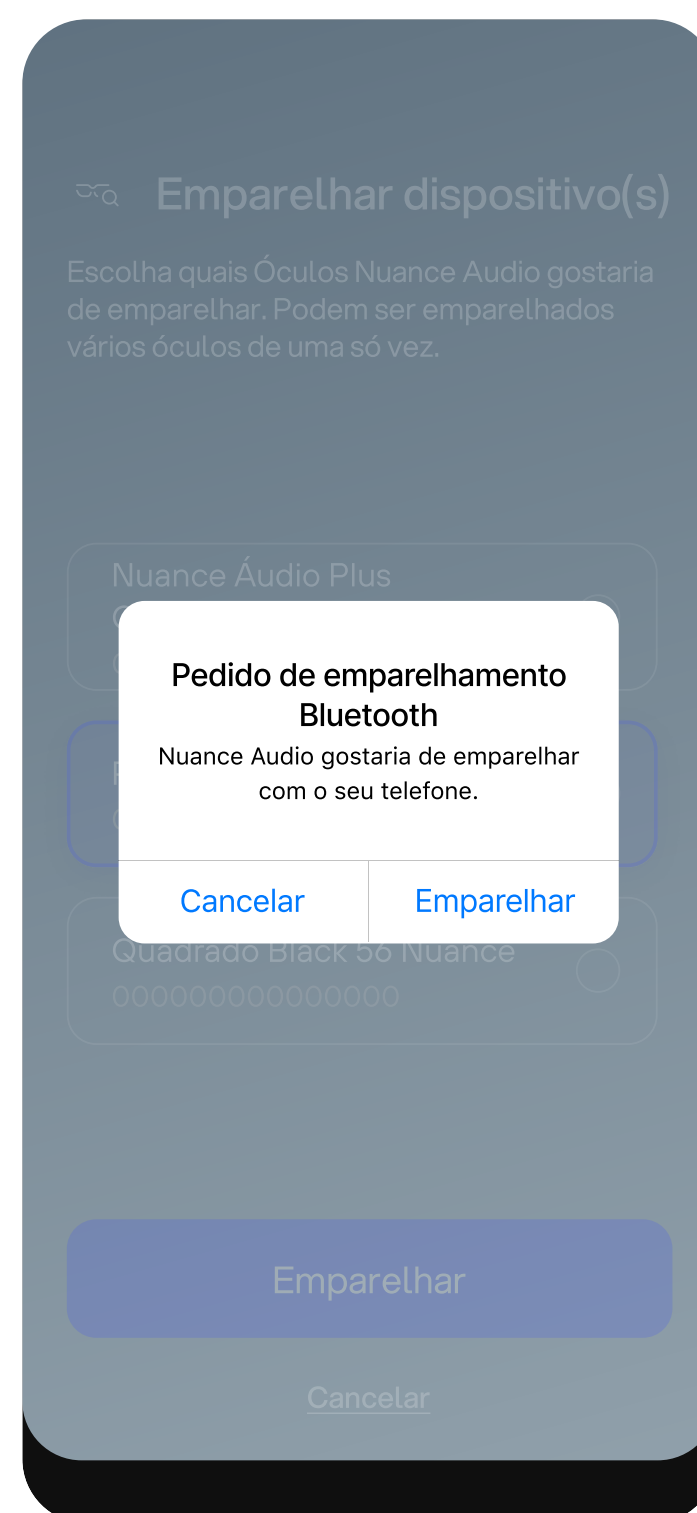

Permitir pedido de emparelhamento Bluetooth. Pressione **Emparelhar**.

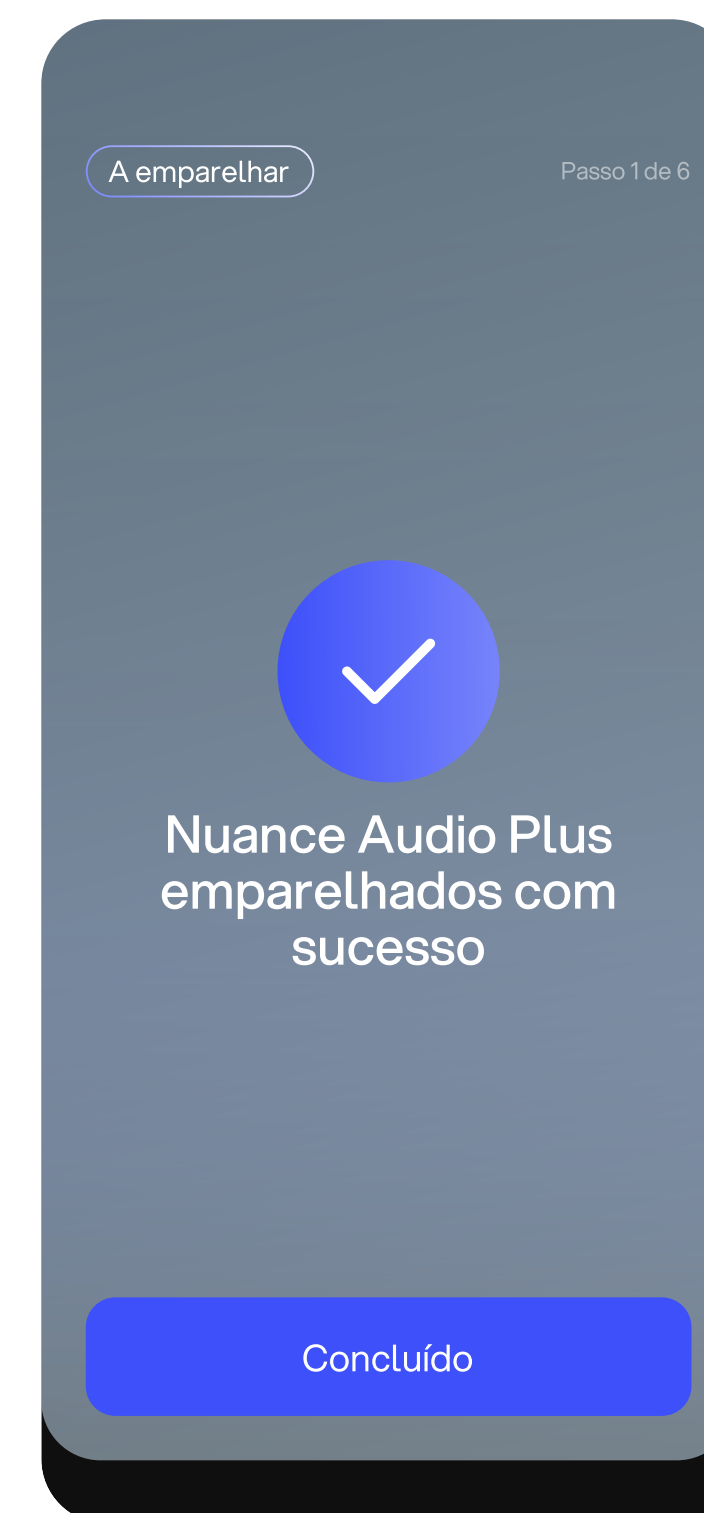

Emparelhamento concluído.



O que é calibração personalizada?

Calibre os seus Nuance Audio Plus para que estejam personalizados e se adaptem às suas necessidades.

A calibração personalizada otimiza o som com base no formato único da sua voz.

Aqui estão duas áreas em que se foca:

- **Som mais claro:** adapta os sons para reduzir o feedback e o ruído, para que ouça com mais clareza.
- **Feedback de voz natural:** regista a sua voz para tornar as suas conversas mais naturais.





Como tirar o máximo partido da sua Calibração?

A calibração demora apenas um minuto, mas ajuda-o a tirar o melhor partido dos seus Nuance Audio Plus.

Se possuir vários pares, calibre cada um individualmente.

Algumas dicas para otimizar Calibração pessoal:

- Encontre um local silencioso na sua casa, evitando espaços grandes ou abertos.
- Mantenha-se afastado de áreas com muitas ou grandes janelas.
- Evite salas com tetos altos onde o ruído de fundo pode ser imprevisível.
- Coloque-se afastado dos cantos e evite ficar de frente para espelhos.
- Idealmente, mantenha-se o mais próximo possível do centro da sala para uma qualidade de som otimizada.
- Dica final: O seu quarto é, muitas vezes, a melhor opção.

Algumas dicas para otimizar Calibração da voz:

- Fale alto, mas sem gritar.
- Projete a sua voz como se estivesse a falar com alguém do outro lado da sala.
- Minimize as pausas tanto quanto possível.
- Se possuir vários pares, calibre cada um individualmente.

Como calibra os seus óculos?




No painel de controlo da App Nuance Audio, toque em

(canto inferior direito na barra de navegação).

Notas


Um indicador azul irá notificá-lo e guiá-lo para o ecrã de calibração

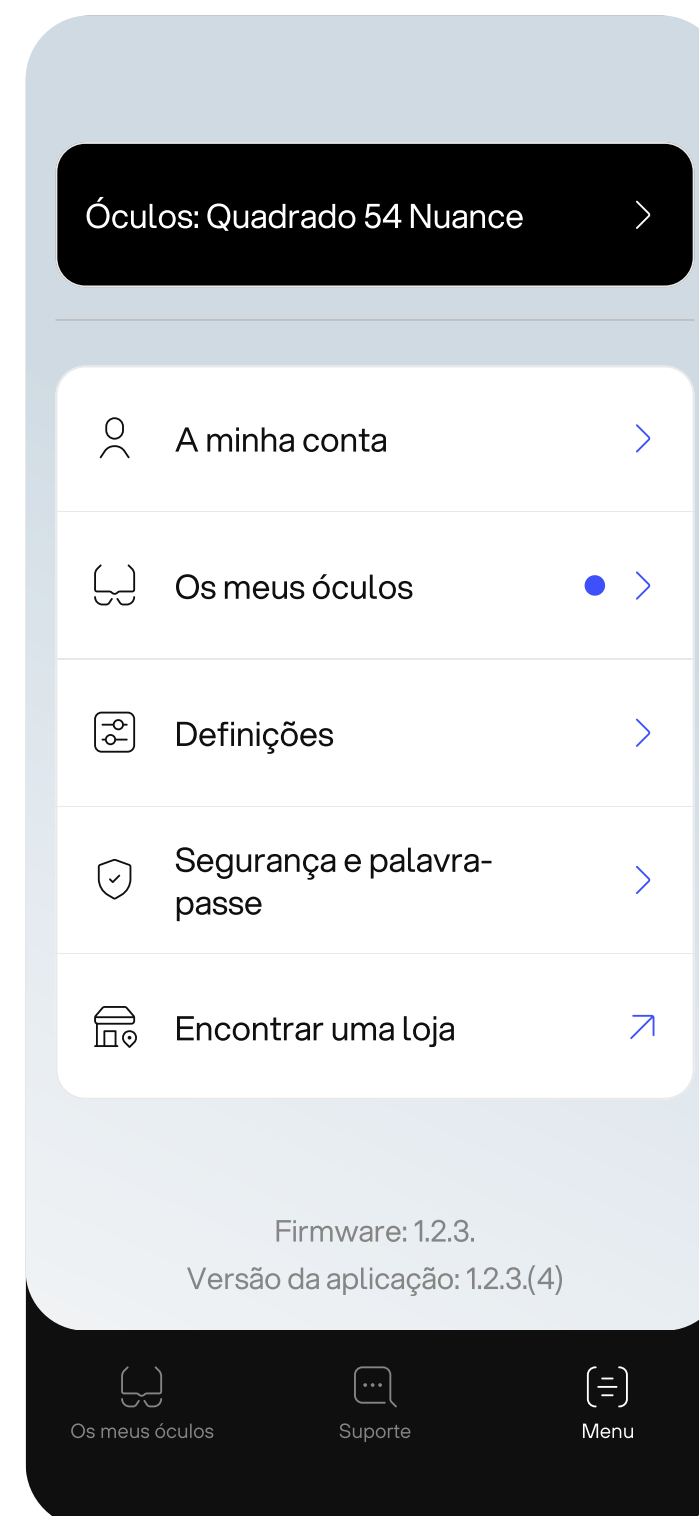

Toque em **Definições**.

Notas

Um indicador azul irá notificá-lo e guiá-lo para o ecrã de calibração

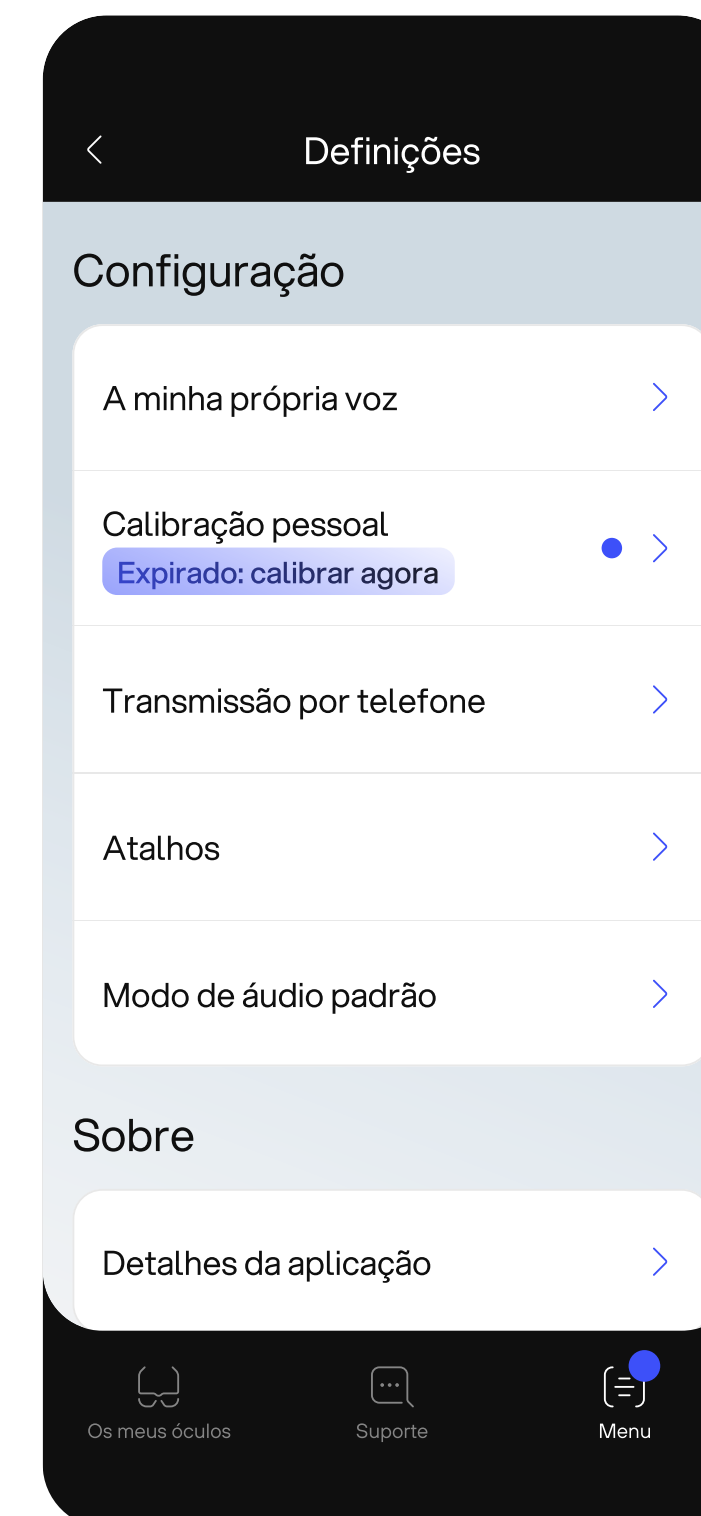

Para iniciar a calibração, toque em **calibração pessoal**.

Notas


Um indicador azul e uma etiqueta dedicada irão notificá-lo para calibrar e atualizar as suas preferências de áudio.




Como calibra os seus óculos?




Para iniciar a calibração, encontre uma sala silenciosa e depois pressione **Iniciar calibração**.

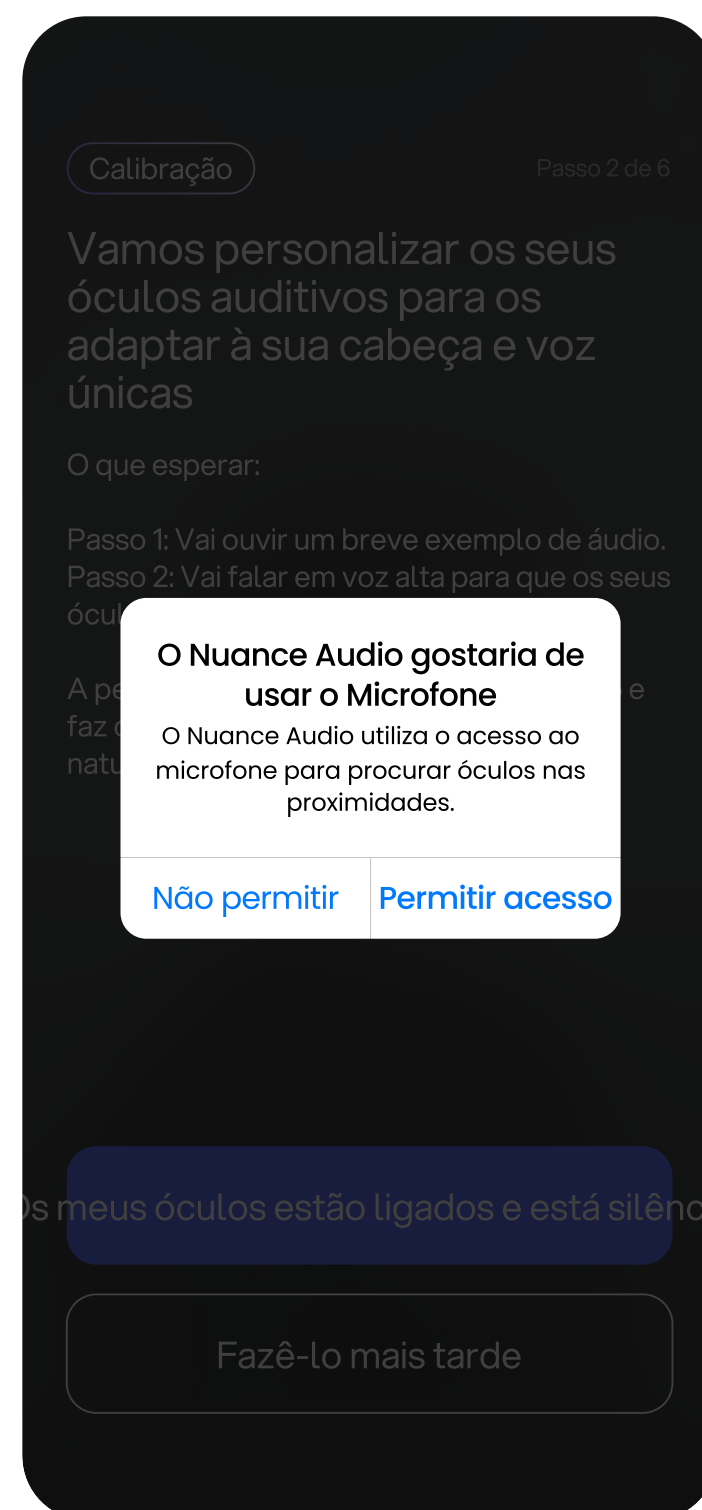

Vai precisar de permitir que o microfone do seu telemóvel meça e analise sons. Prima **Autorizar**.

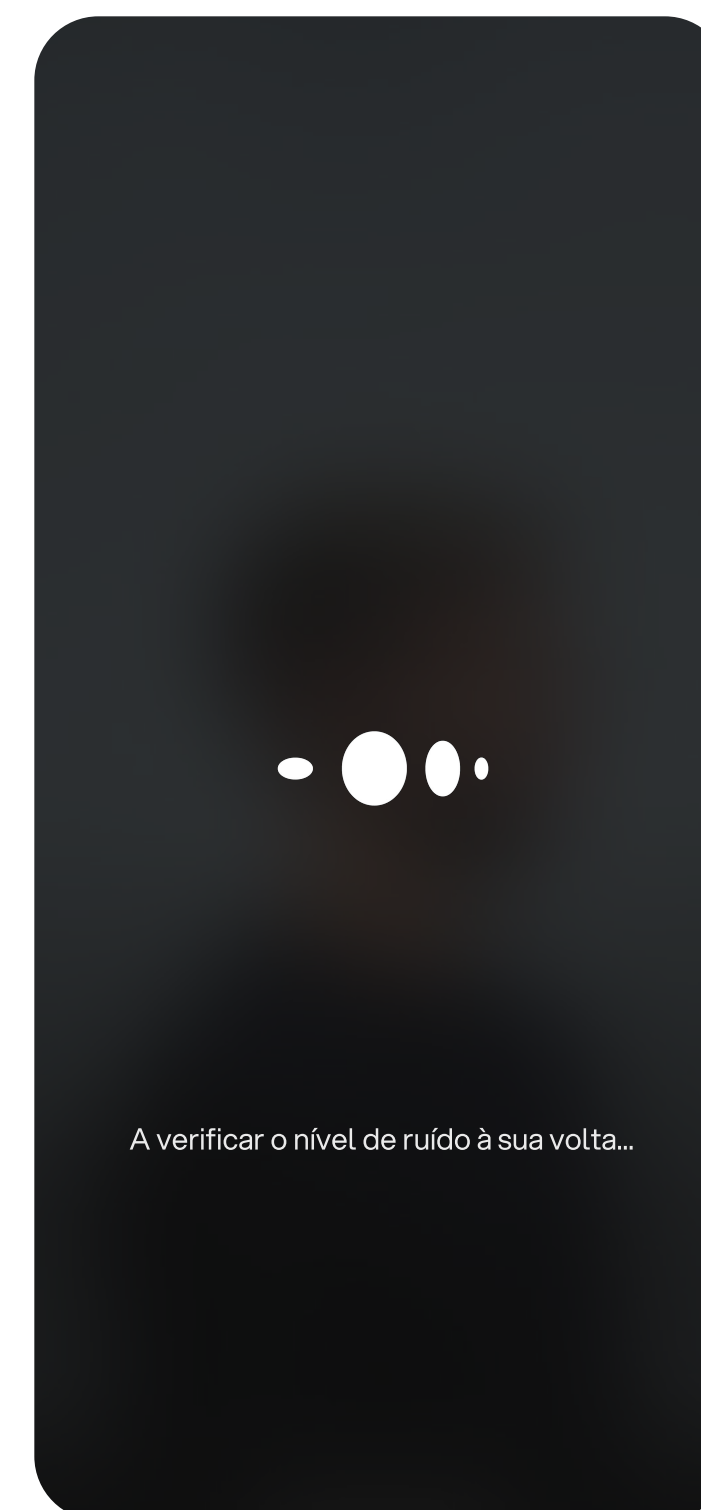

Emparelhamento concluído. Uma janela pop-up irá lembrá-lo de manter os seus Nuance Audio Plus durante todo o processo.

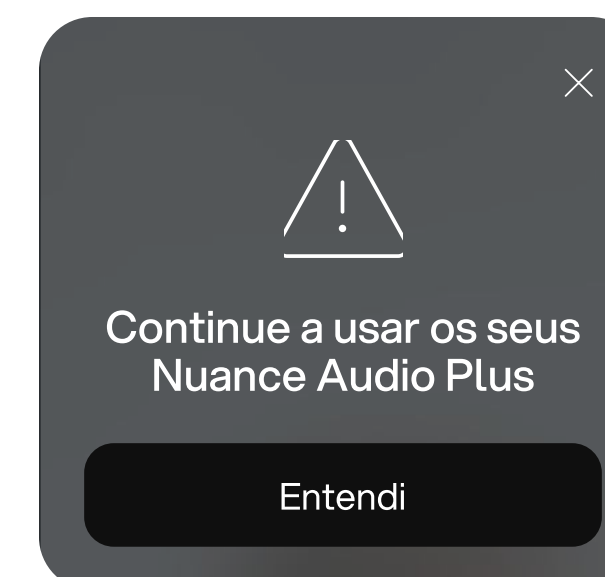





Como calibra os seus óculos?



Passo 1.1
Medição de ruído ambiental.
Mantenha os seus óculos colocados e toque **Reproduzir áudio.**

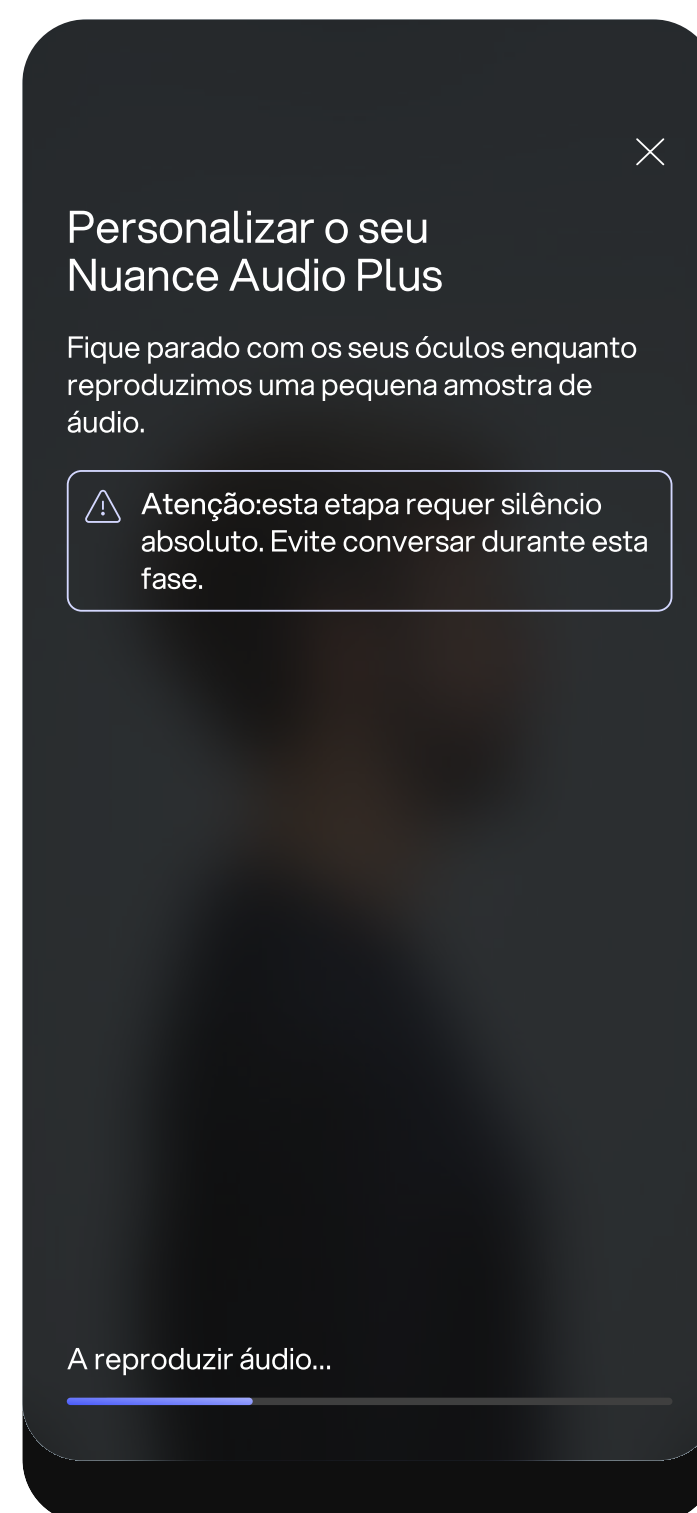

Passo 1.2
Fique parado e não tire os seus óculos, **aguarde até ao final do exemplo de áudio.**

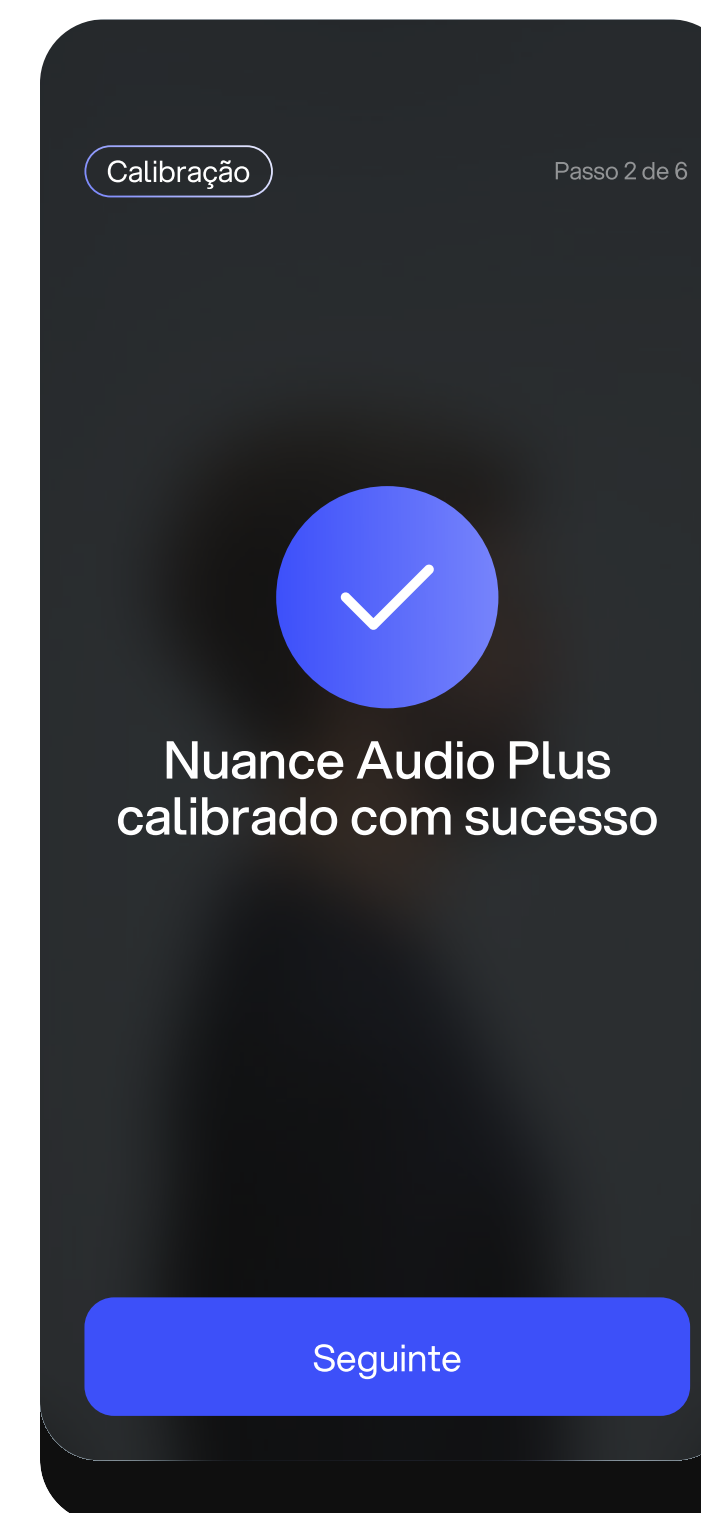


Passo 1.3
Medição de ruído ambiental concluída.




Como calibra os seus óculos?



Passo 2.1
Calibração da própria voz.
Fique parado e não tire os seus óculos.
Pressione Iniciar gravação.

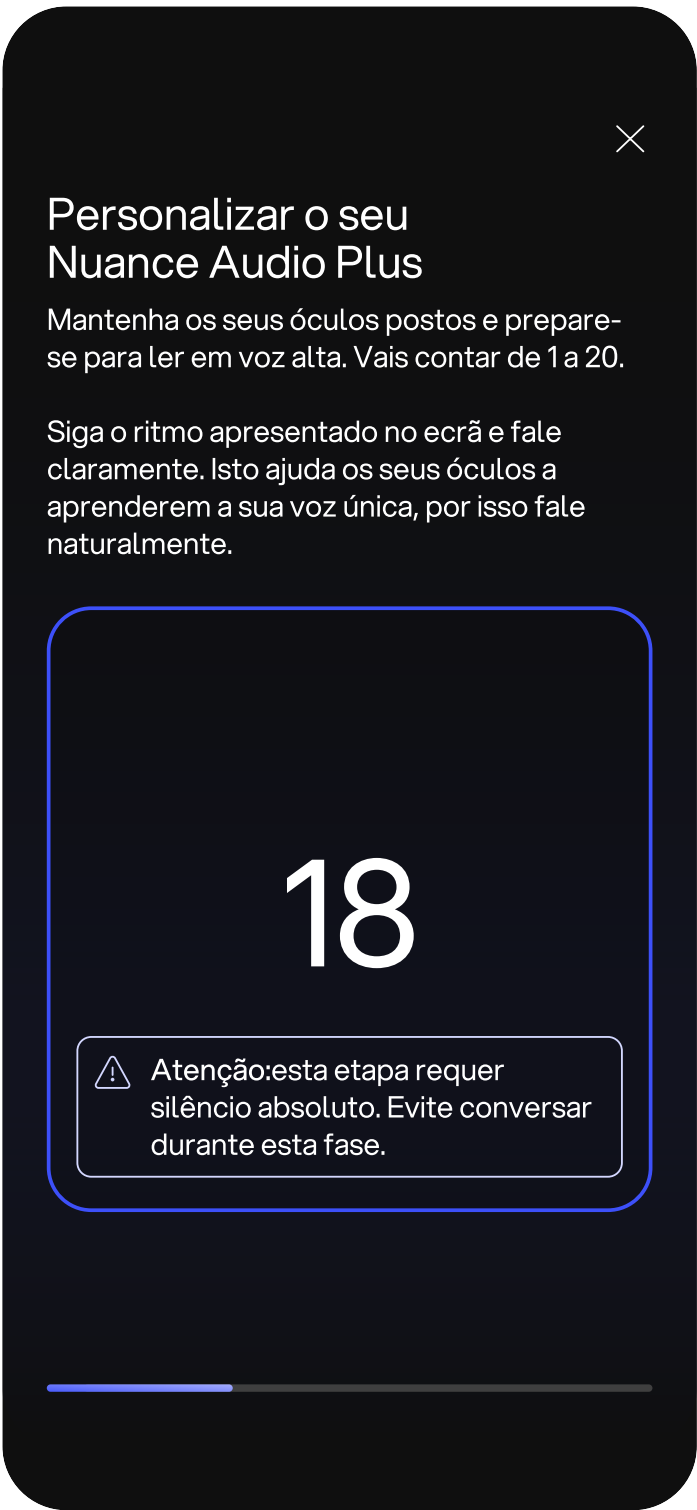

Passo 2.2
Conte em voz alta até que a barra de progresso chegue ao fim.

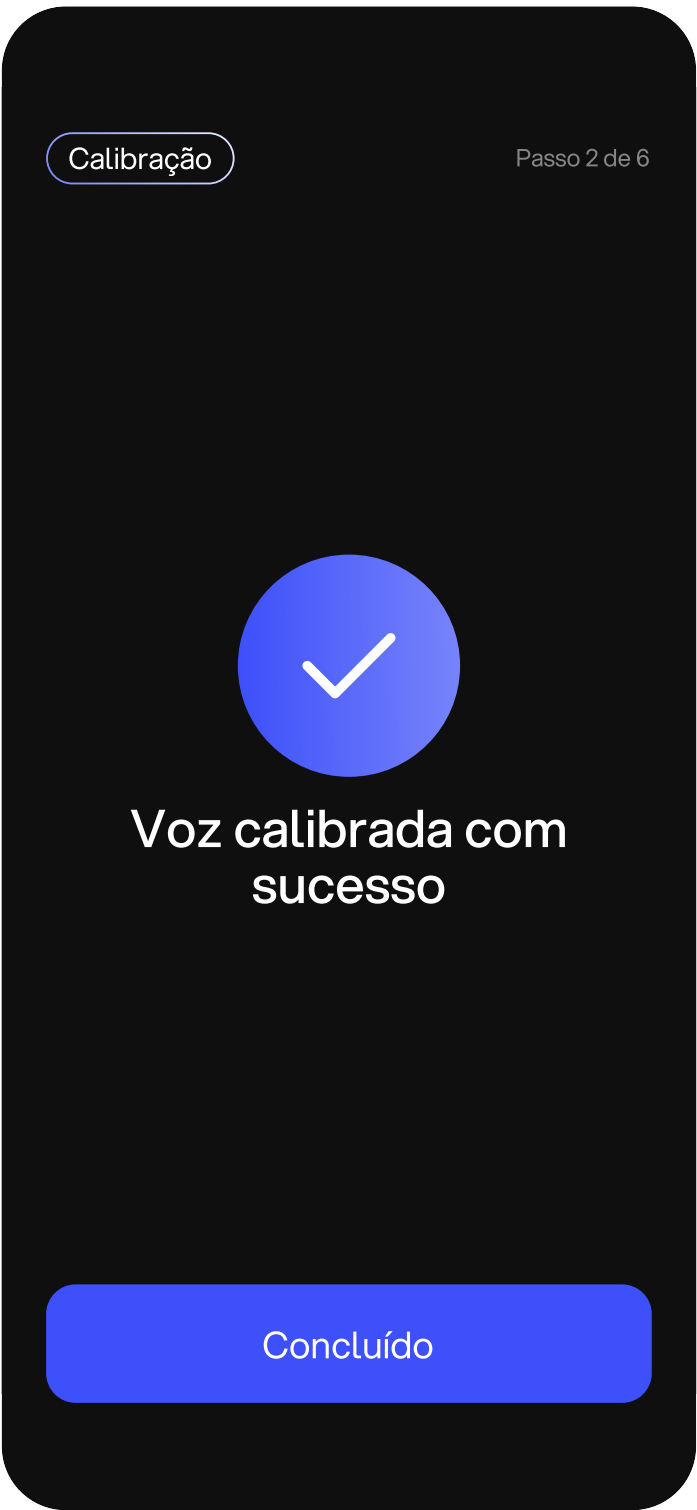

Passo 2.3
Calibração pessoal concluída com sucesso.



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)