

Conseils d'entretien



Les Nuance Audio Plus sont-elles étanches ?

De par leur conception, les Nuance Audio Plus sont conformes à la norme IPX4, y compris au niveau des microphones. Cet indice protège des éclaboussures d'eau, ce qui les rend adaptées aux entraînements ou à la pluie légère. Bien qu'elles ne soient pas adaptées à la plongée, elles sont protégées contre les éclaboussures mineures.





La sueur, le maquillage et d'autres produits chimiques courants peuvent-ils endommager mes Nuance Audio Plus ?

De par leur conception, les Nuance Audio Plus résistent aux produits chimiques courants tels que le désinfectant pour les mains, les produits nettoyants, le savon pour les mains, le gel coiffant et la crème solaire.





Comment dois-je laver les verres et la monture ?

Nettoyage quotidien :

Utilisez un chiffon humide et un savon neutre (vaporisez sur le chiffon, pas directement sur les verres). Évitez tout type de spray, solvant, produit chimique ou solution de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ne tenez pas vos lunettes sous l'eau courante et n'utilisez aucun autre outil de nettoyage (comme une brosse à appareil auditif, un cure-dent ou de l'air comprimé) pour nettoyer.

Nettoyage en profondeur :

Pour nettoyer les verres, utilisez un spray pour verres et vaporisez sur le chiffon et non directement sur les verres. Nettoyez délicatement les parties extérieures des lunettes, y compris les 6 microphones et 2 haut-parleurs.

Protection :

Rangez vos lunettes dans leur étui lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

En cas de contact avec de l'eau salée, de l'eau de piscine ou d'autres produits chimiques tels que des cosmétiques, de la laque, de la crème solaire et des répulsifs pour insectes, nous vous recommandons d'essuyer immédiatement vos lunettes avec un chiffon humide non abrasif.



Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

↗ [Voir les instructions d'utilisation](#)