

Configurações de audição: Voz própria




Como é que calibra a sua própria voz?

Os Nuance Audio Plus permite-lhe calibrar a sua própria voz para que possa decidir quão claramente gostaria de a ouvir para o seu próprio conforto.




Como é que calibra a sua própria voz?

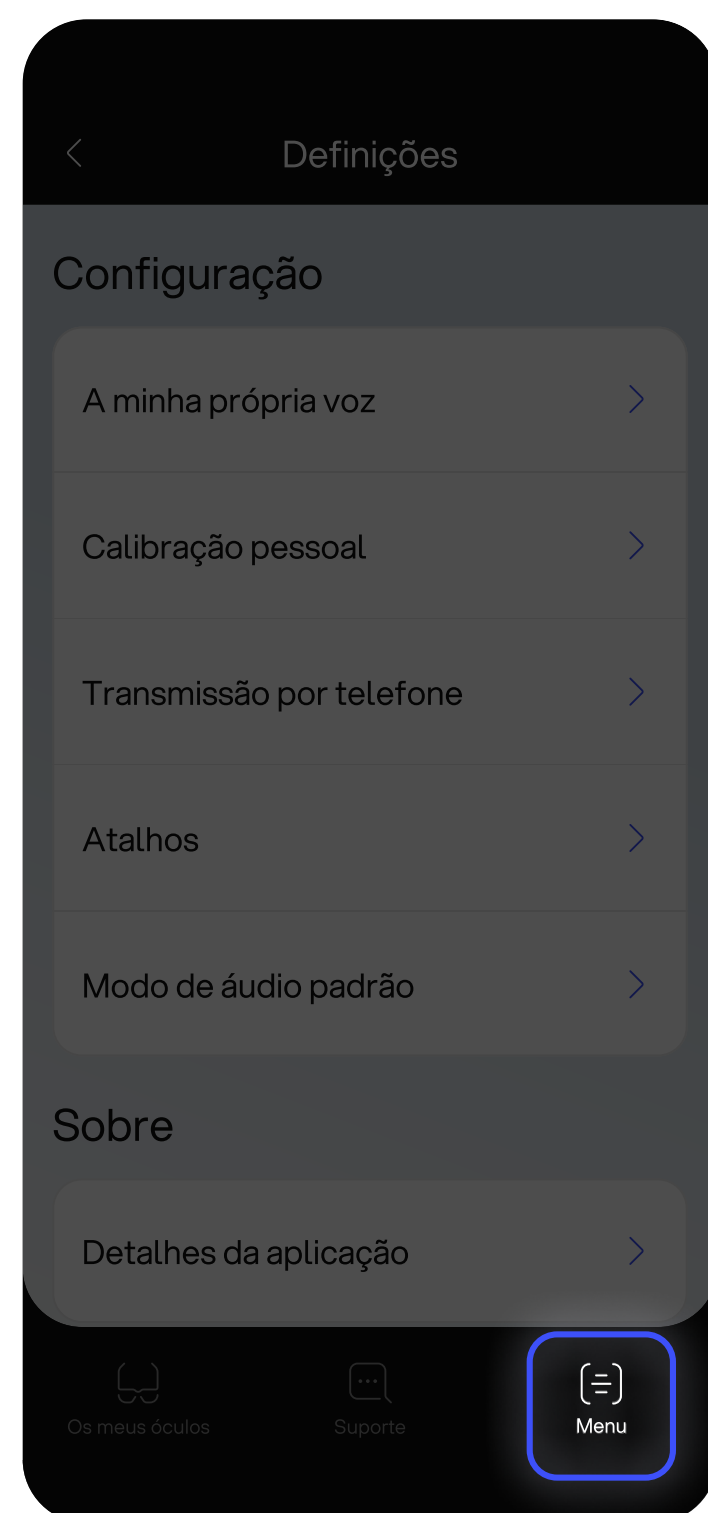


Dentro do painel da App Nuance Audio, toque em **Menu** (canto inferior direito na barra de navegação).

No Menu, toque em **Definições**.

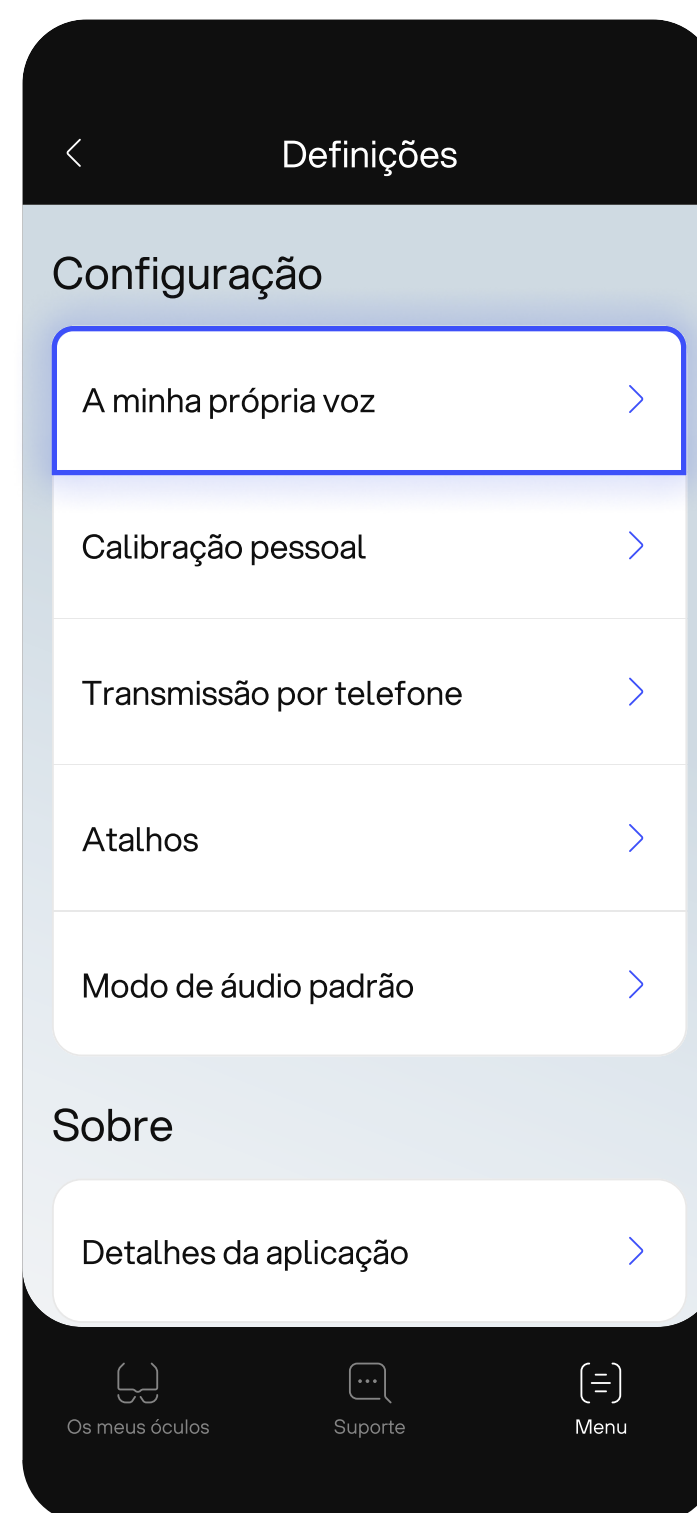

Nas Definições, selecione **A minha própria voz**.

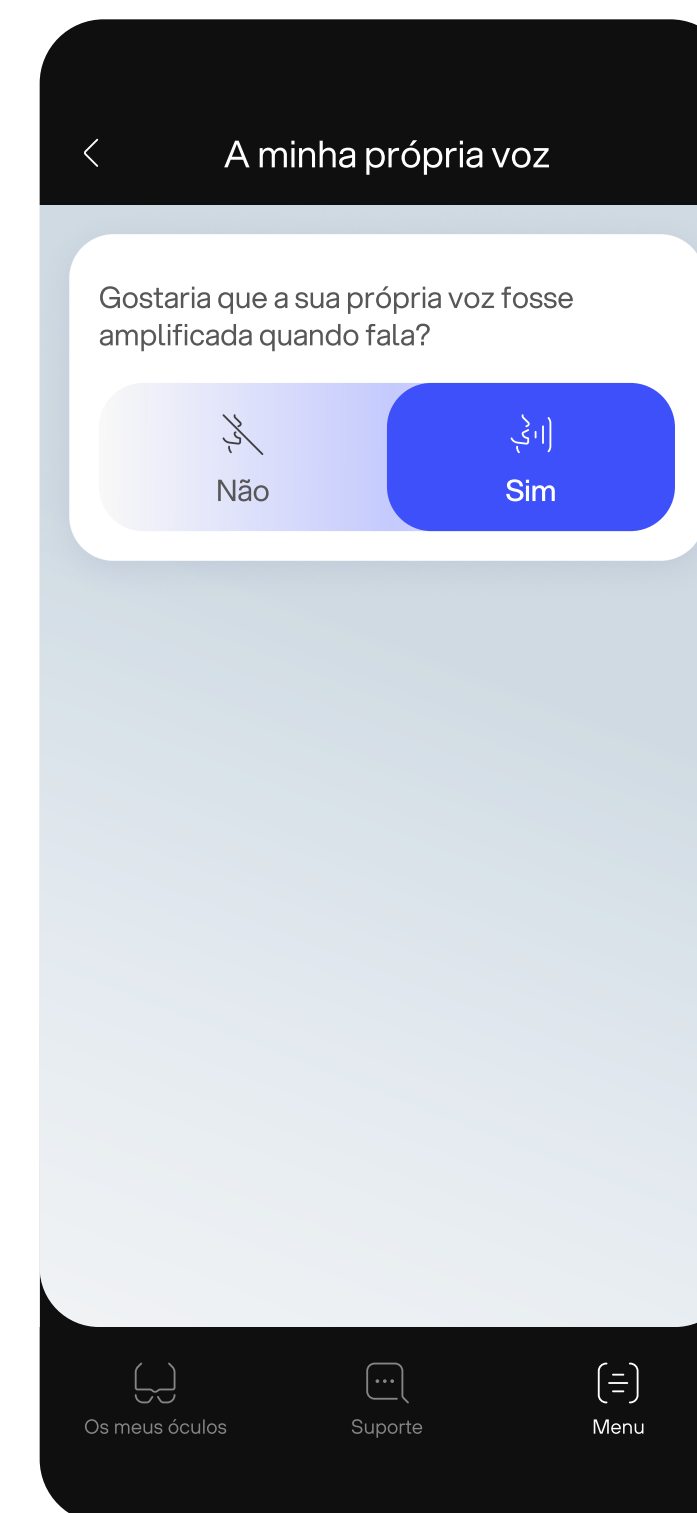

Agora, pode **ajustar livremente os seus níveis de amplificação** para o que melhor se adequa a si e ao seu ambiente.

Notas

Considere que definir a **Calibração Pessoal** também é relevante para otimizar a sua experiência geral, garantindo o som mais natural e a clareza da sua própria voz, assim como para outras configurações de áudio.



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)