

Configurazioni uditive: Profili audio



Analisi dettagliata dei profili

Nuance Audio Plus include **4 profili predefiniti per aiutarti a trovare la configurazione migliore per le tue esigenze uditive.**

I profili sono impostazioni di amplificazione preconfigurate, progettate per migliorare la tua esperienza di ascolto con i Nuance Audio Plus. Ogni profilo è studiato per diverse esigenze di amplificazione tramite la regolazione di varie frequenze.


Anzitutto, calibra i tuoi occhiali in una stanza silenziosa.

Poi apri la pagina iniziale della Nuance Audio App e prova tutti i quattro profili: A, B, C e D.

Ricorda che puoi sempre modificare le impostazioni e adattarle alla vita quotidiana, a seconda delle tue esigenze specifiche e dell'ambiente circostante.

Profilo A Per perdita uditiva lieve uniforme

Impostazione ideale per chi necessita di una leggera amplificazione su tutte le frequenze, ma ha qualche difficoltà di comprensione del parlato e potrebbe beneficiare di una maggiore nitidezza.

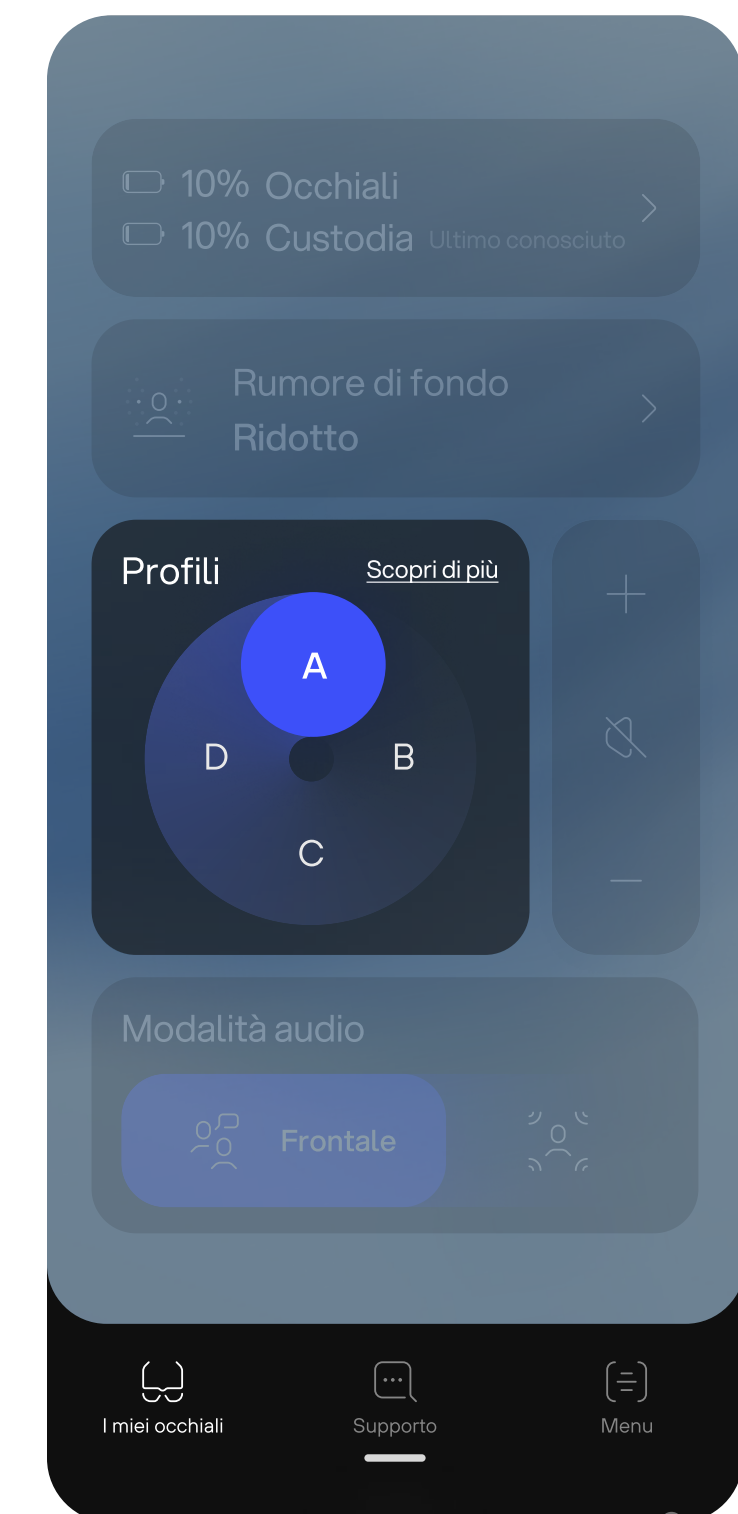



Analisi dettagliata dei profili

Nuance Audio Plus include **4 profili predefiniti** per aiutarti a trovare la **configurazione migliore** per le tue esigenze uditive.

I profili sono impostazioni di amplificazione preconfigurate, progettate per migliorare la tua esperienza di ascolto con i Nuance Audio Plus. Ogni profilo è studiato per diverse esigenze di amplificazione tramite la regolazione di varie frequenze.

Anzitutto, calibra i tuoi occhiali in una stanza silenziosa.


Poi apri la pagina iniziale della Nuance Audio™ App e prova tutti i quattro profili: A, B, C e D.

Ricorda che puoi sempre modificare le impostazioni e adattare alla vita quotidiana, a seconda delle tue esigenze specifiche e dell'ambiente circostante.

Profilo B

Per perdita uditiva lieve e progressiva

Impostazione adatta a chi sente bene le frequenze basse (bassi) ma che richiede un leggero aumento delle frequenze alte (acuti). Questa persona non ha difficoltà significative in condizioni ideali (ambienti silenziosi, un solo interlocutore), ma potrebbe riscontrare alcune difficoltà in situazioni più impegnative (ambienti rumorosi, più oratori).

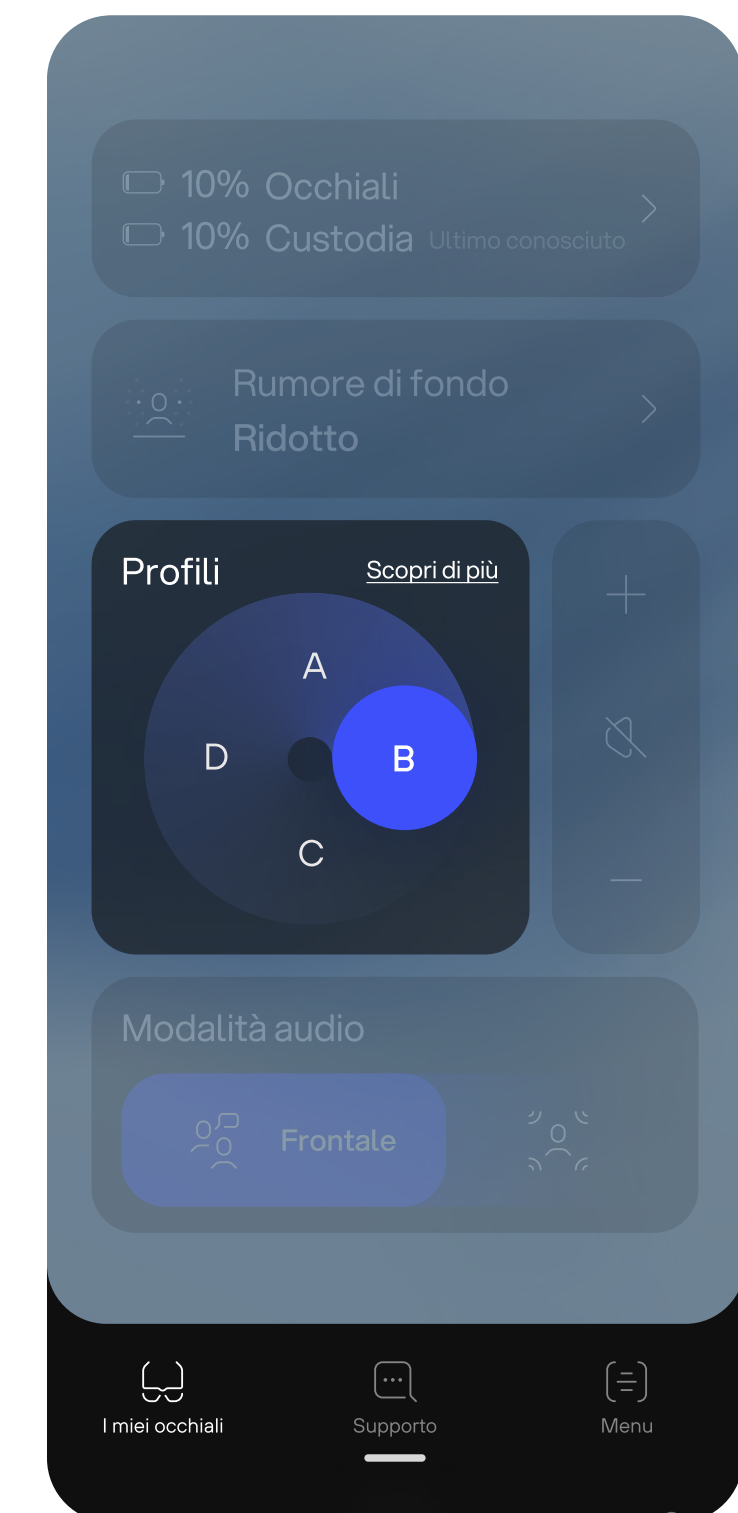



Analisi dettagliata dei profili

Nuance Audio Plus include **4 profili predefiniti per aiutarti a trovare la configurazione migliore per le tue esigenze uditive.**

I profili sono impostazioni di amplificazione preconfigurate, progettate per migliorare la tua esperienza di ascolto con i Nuance Audio Plus. Ogni profilo è studiato per diverse esigenze di amplificazione tramite la regolazione di varie frequenze.

Anzitutto, calibra i tuoi occhiali in una stanza silenziosa.


Poi apri la pagina iniziale della Nuance Audio App e prova tutti i quattro profili: A, B, C e D.

Ricorda che puoi sempre modificare le impostazioni e adattarle alla vita quotidiana, a seconda delle tue esigenze specifiche e dell'ambiente circostante.

Profilo C

Perdita uditiva moderata discendente

Impostazione adatta a chi presenta serie difficoltà di comprensione in situazioni complesse, in cui potrebbero verificarsi fraintendimenti dei suoni del parlato o incomprensioni di alcune parti della conversazione. Questa persona si affida a indizi contestuali e, presumibilmente, alla lettura del labiale per colmare le lacune dell'ascolto.

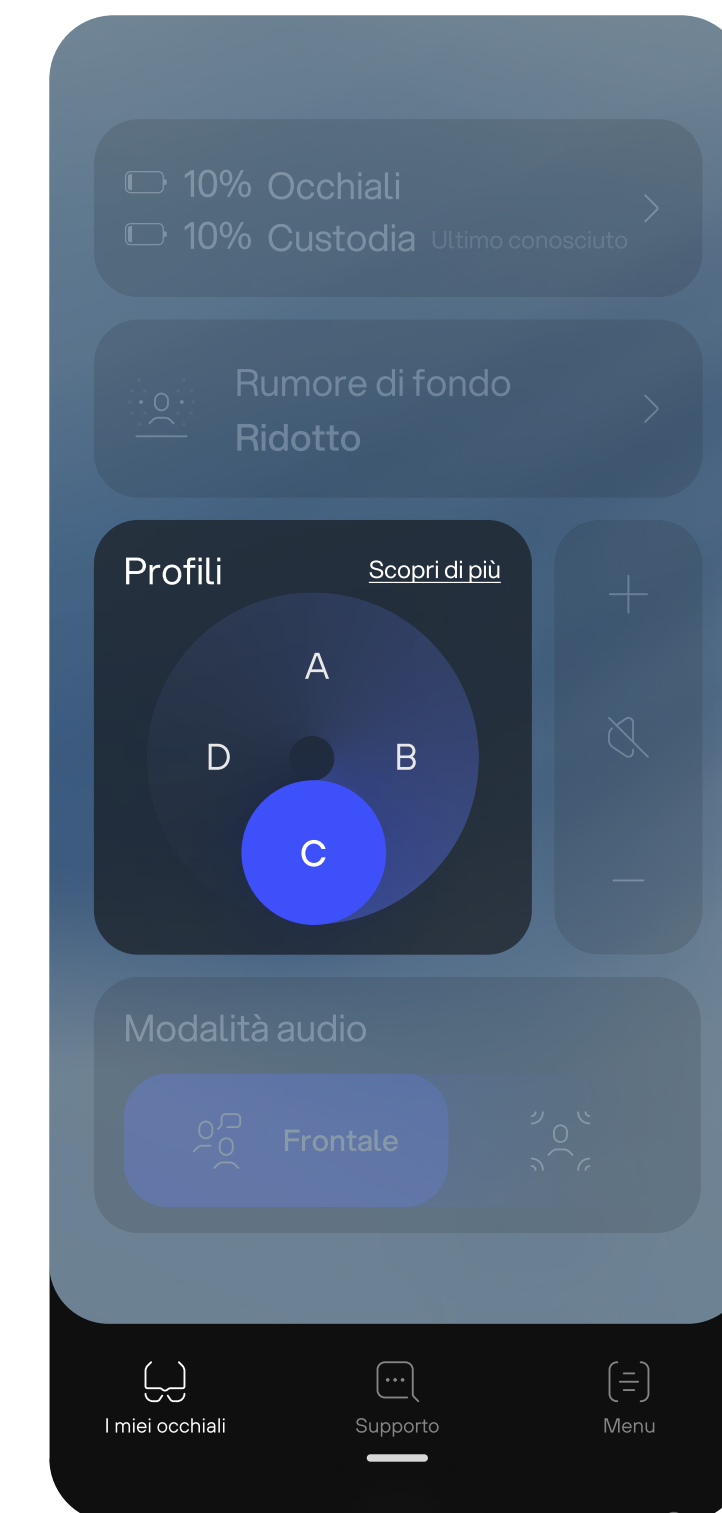



Analisi dettagliata dei profili

Nuance Audio Plus include **4 profili predefiniti** per aiutarti a trovare la **configurazione migliore per le tue esigenze uditive**.

I profili sono impostazioni di amplificazione preconfigurate, progettate per migliorare la tua esperienza di ascolto con i Nuance Audio Plus. Ogni profilo è studiato per diverse esigenze di amplificazione tramite la regolazione di varie frequenze.


Anzitutto, calibra i tuoi occhiali in una stanza silenziosa.

Poi apri la pagina iniziale della Nuance Audio App e prova tutti i quattro profili: A, B, C e D.

Ricorda che puoi sempre modificare le impostazioni e adattare alla vita quotidiana, a seconda delle tue esigenze specifiche e dell'ambiente circostante.

Profilo D Per perdita uditiva moderata uniforme

Impostazione adatta a chi presenta difficoltà anche in ambienti silenziosi, poiché può avvertire il parlato come ovattato o doversi sforzare per comprendere le conversazioni.

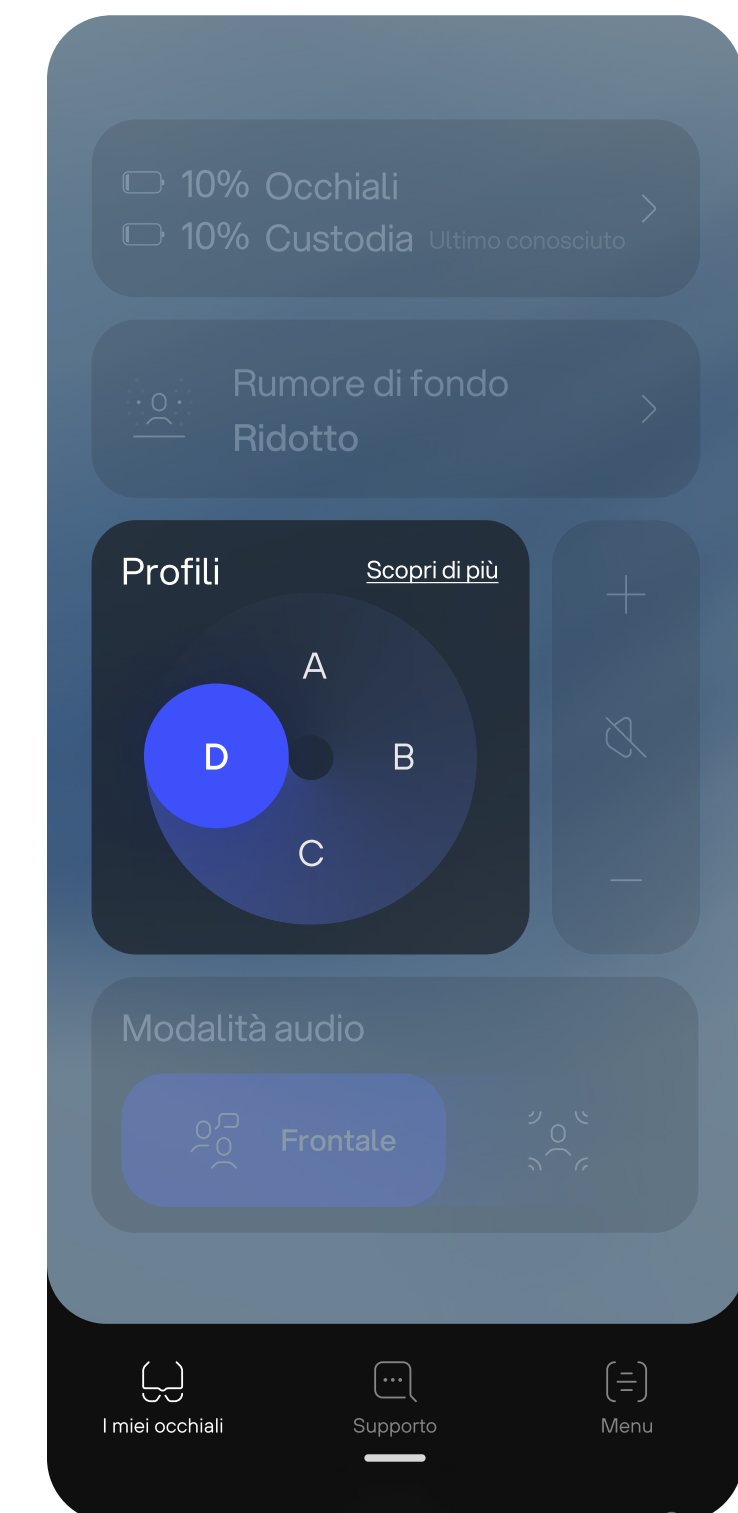



nuance audio

in tune with life

Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
segui questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)