

Configuraciones de audición: volumen de las gafas




¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?

Puedes ajustar los niveles de volumen de las Nuance Audio Plus de varias maneras.


Con Nuance Audio Plus

Para ajustar el volumen, habrá dos botones en la varilla derecha: el botón "+" para **subir** el volumen y "-" para **bajarlo**.

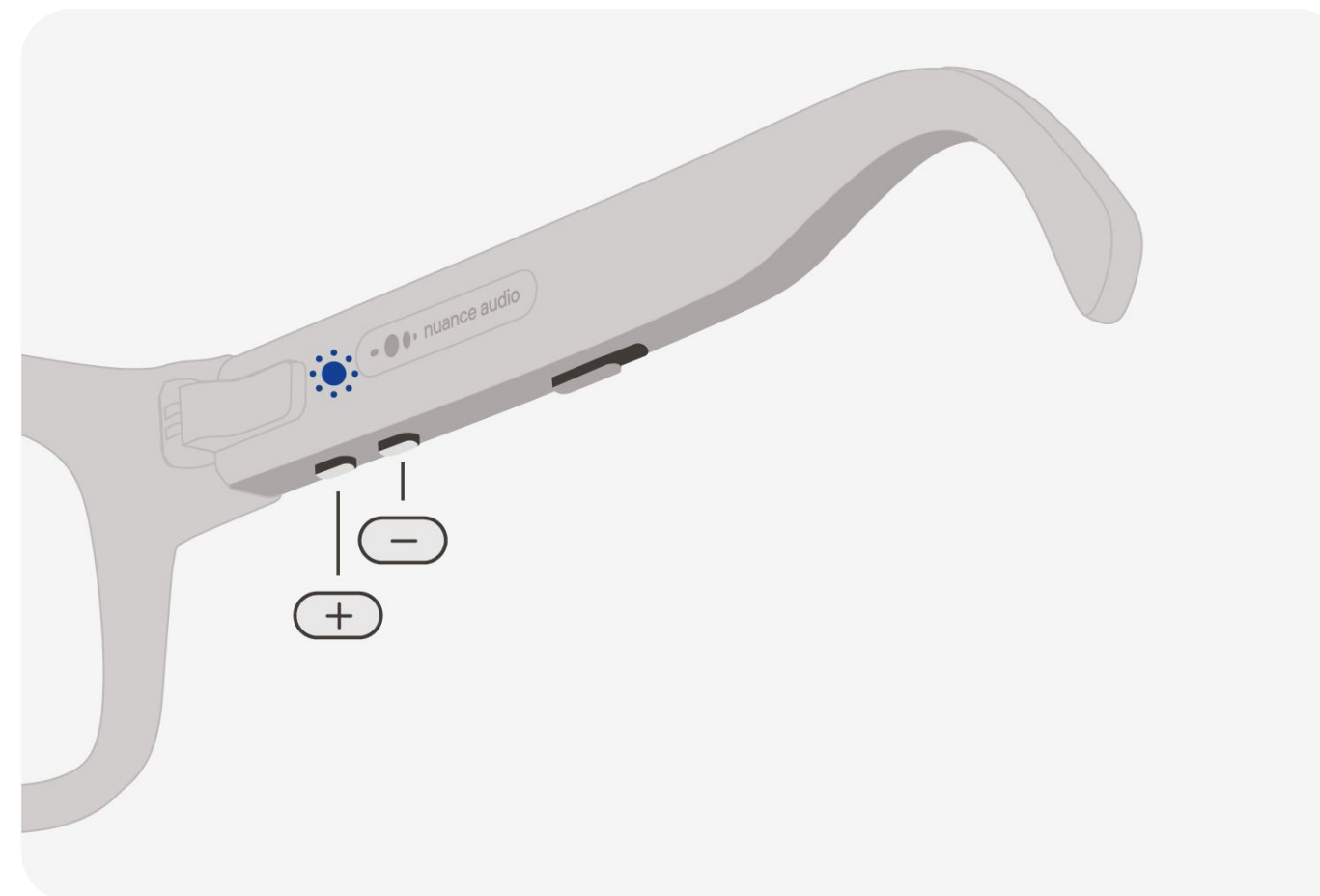

Con Remote Plus


Utiliza los botones "+" y "-" para ajustar el volumen.

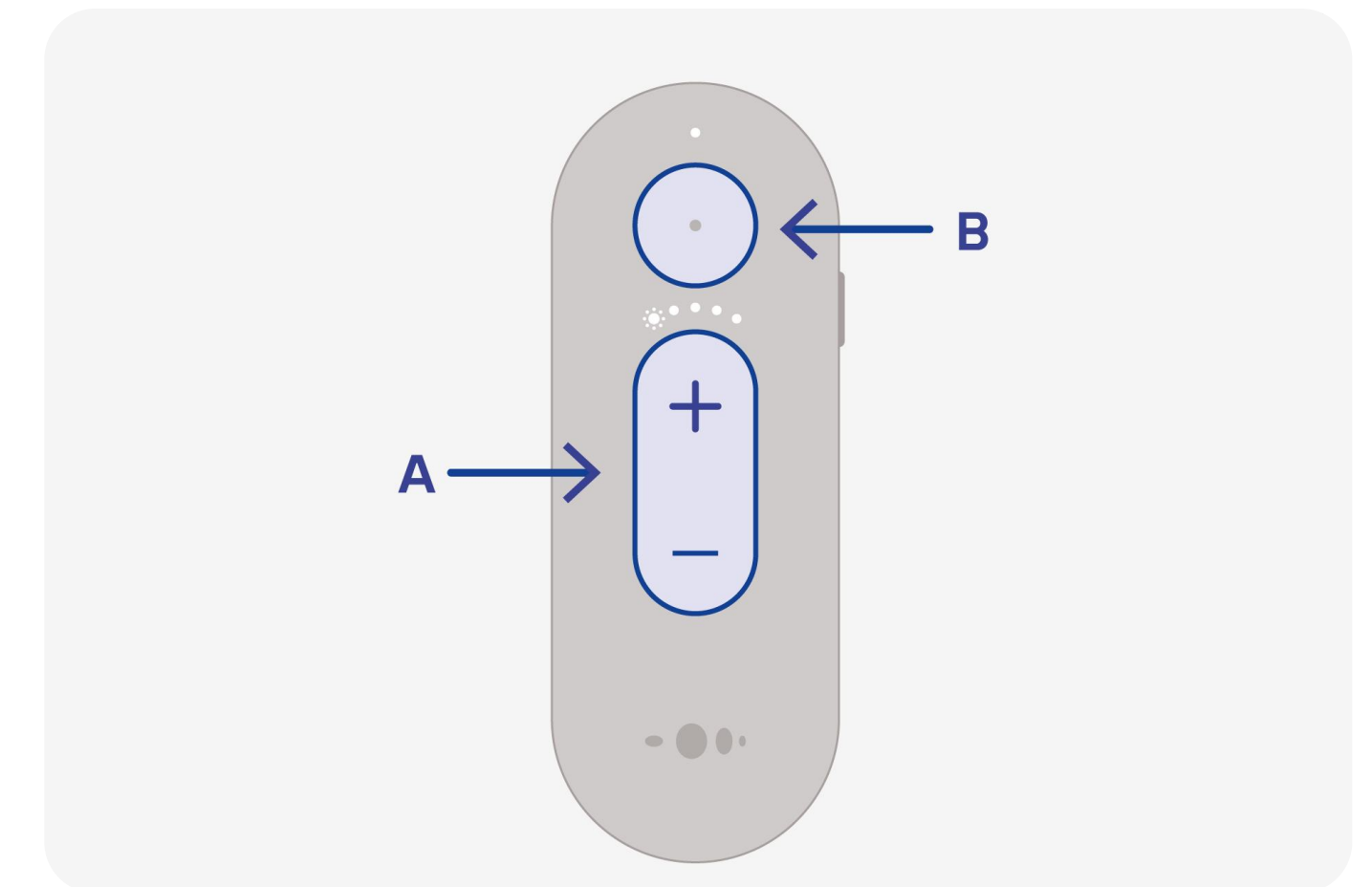



¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?


Con Nuance Audio App
Otra forma es utilizar el control deslizante de volumen que verás en la pantalla de inicio de la aplicación para ajustar el volumen a tu gusto.

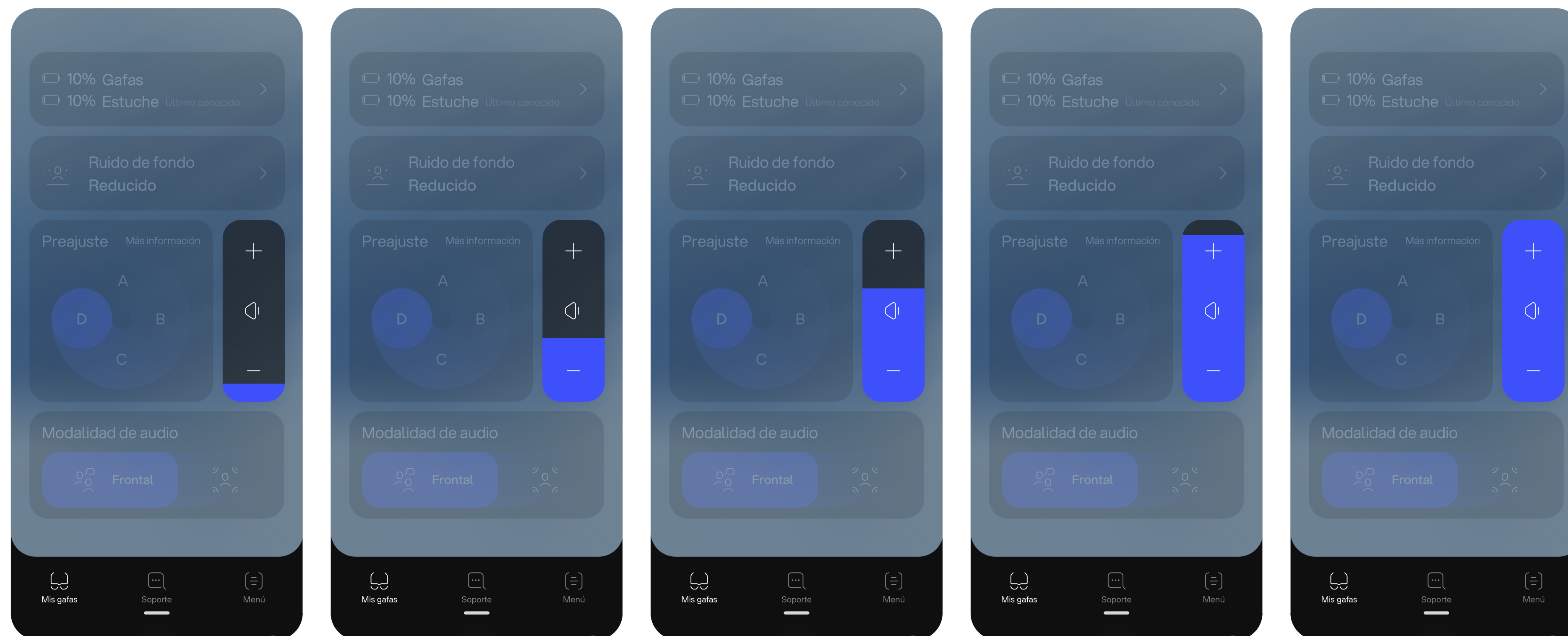



¿Cómo ajustar el volumen de las gafas?

Con Nuance Audio App
Además, en la sección Configuración de la aplicación, puedes seleccionar y configurar cómodamente tus tres rangos de volumen preferidos para un acceso fácil.

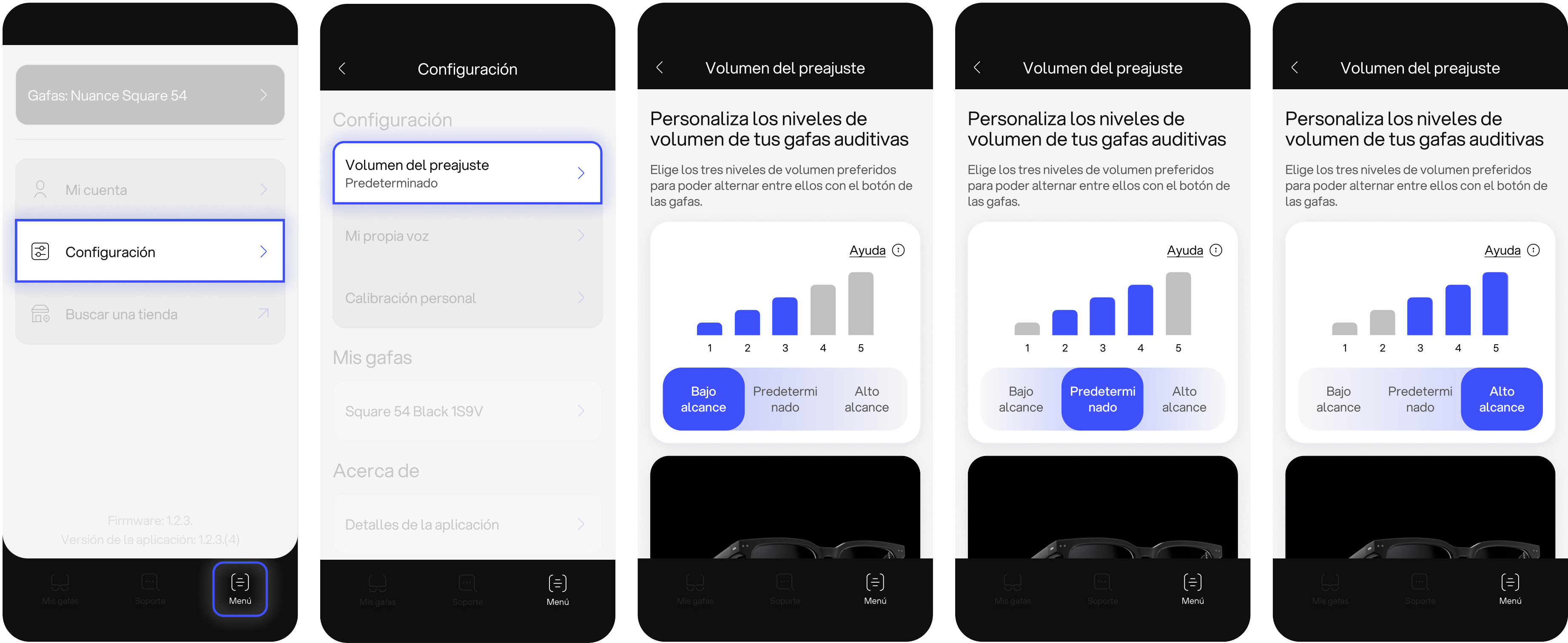



Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)