



Nuance Audio Remote Control

Notice d'utilisation Sécurité et garantie

Premier appairage

- 1 Appuyez et maintenez
- 2 Tirez sur la languette



- LED bleue clignotante : Appairage terminé
- LED bleue fixe : Appairage

Appairage supplémentaire

- 1 A. Repliez les lunettes
B. Appuyez et maintenez le bouton
- 2 Appuyez et maintenez le bouton latéral



- Relâchez lorsque la LED bleue clignote

Indicateurs LED



Reconnexion



Batterie
faible



Glasses
introuvables

Modes audio

Appuyez




Volume

Appuyez
sur +/-



Batterie CR2450

1

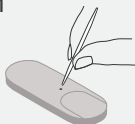

2



3



Notice d'utilisation - Sécurité et garantie
POUR LA SUISSE

Nuance Audio™ Remote Control

* La disponibilité des produits, les exigences réglementaires et les conditions de garantie peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez noter que la catégorie de produit des Nuance Audio™ Glasses sur le marché local peut varier en fonction du marché dans lequel le produit est vendu, et certains pays n'adoptent pas de catégorie locale dédiée (comme le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande). En conséquence, la terminologie utilisée pour désigner la catégorie du produit peut varier selon les versions linguistiques de ces instructions d'utilisation – Sécurité et Garantie (par exemple, « assistant d'écoute » en France contre « aide auditive » ailleurs). Comme ce document est organisé par langue plutôt que par pays, la terminologie utilisée pour désigner le produit dans une version linguistique donnée ne reflète pas nécessairement la catégorie applicable dans tous les pays où cette langue est utilisée. Par exemple, bien que le français soit l'une des langues officielles de la Suisse, la terminologie utilisée dans la version française ne s'applique pas au marché suisse ; pour la Suisse, la terminologie correcte est « aide auditive ».

La Nuance Audio™ Remote Control est également désignée dans cette notice comme « Produit », « Appareil » ou « Équipement ».

UTILISATIONS ET UTILISATEURS PRÉVUS

Description et utilisation prévue. La Nuance Audio™ Remote Control est un accessoire conçu pour faciliter l'utilisation des Nuance Audio™ Glasses en ce qui concerne le contrôle des réglages de l'assistant d'écoute*. La Nuance Audio™ Remote Control est utilisée pour contrôler à distance le volume et les différents modes des Nuance Audio™ Glasses.

Les deux modes possibles de l'assistant d'écoute sont :

- **Frontal** : lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, les sons amplifiés sont ceux provenant de la direction vers laquelle vous regardez, et tous les autres sons sont atténués. En général, cette fonction est utilisée dans un environnement bruyant lorsque vous souhaitez mieux entendre la personne qui vous parle.
- **Ambiant** : cette fonctionnalité amplifie indistinctement tous les sons autour de vous.

La Nuance Audio™ Remote Control a vocation à être utilisée uniquement avec les lunettes Nuance Audio™ et est destinée uniquement aux personnes âgées de 18 ans et plus. La Nuance Audio™ Remote Control fonctionne™ en Bluetooth appairée avec les lunettes, et elle comprend une pile bouton. La pile bouton (CR2450) est remplaçable par l'utilisateur. Les Nuance Audio™ Glasses sont un dispositif médical. La Nuance Audio™ Remote Control doit être utilisée comme un accessoire des Nuance Audio™ Glasses et constitue elle-même un dispositif médical. **Pour les personnes de 18 ans et plus.** La Nuance Audio™ Remote Control est destinée à être utilisée uniquement avec les lunettes Nuance Audio™ et est réservée aux personnes de 18 ans et plus. Ne laissez pas les personnes de moins de 18 ans utiliser la Nuance Audio™ Remote. Les enfants peuvent s'étouffer ou suffoquer en cas d'ingestion de ce produit. Gardez ce Produit hors de portée des enfants. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur pour des images et des explications sur l'utilisation de la Nuance Audio™ Remote Control. **Restrictions de combinaisons.** La Nuance Audio™ Remote Control fonctionne uniquement avec les Nuance Audio™ Glasses, ce qui signifie que le Produit ne peut pas fonctionner avec d'autres appareils. **Lire les instructions.** Lisez et suivez toutes les instructions incluses avec la Nuance Audio™ Remote Control avant de l'utiliser.

Précautions. When adjusting the volume, turn it up gradually until you reach a comfortable listening level.

1. Lors du réglage du volume, augmentez-le progressivement jusqu'à atteindre un niveau d'écoute confortable.
2. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control si une partie de celle-ci est endommagée ou surchauffe. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control, puis veuillez nous rendre visite sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts.

Ne faites pas de modifications non autorisées sur ce produit.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessure personnelle, d'inconfort ou de dommages matériels, veuillez lire et suivre les informations de santé et de sécurité ci-dessous avant d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control.

Interférences avec les dispositifs médicaux personnels. Ce Produit contient des matériaux magnétiques et des composants qui émettent des ondes radio, ce qui pourrait affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux tels que, mais sans s'y limiter, les stimulateurs cardiaques ou autres dispositifs implantables, ou les pompes à insuline, consultez votre médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d'utiliser le produit. Éteignez les fonctionnalités électroniques du Produit si vous remarquez des interférences avec votre dispositif médical.

Interférences. Vérifiez avant d'utiliser la Nuance Audio™ Remote Control dans les zones où les appareils électroniques ou sans fil sont restreints. Cela peut causer des interférences.

Conduite. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control en conduisant.

Eau et liquides. Ne pas exposer ou immerger dans l'eau. Une exposition prolongée à l'eau peut endommager la Nuance Audio™ Remote Control. La Nuance Audio™ Remote Control n'est pas conçue pour résister à l'immersion ou à une exposition prolongée à l'eau ou à d'autres liquides. En cas d'exposition à l'eau, séchez soigneusement la Nuance Audio™ Remote Control avec un chiffon sec.

AVERTISSEMENT Atmosphères potentiellement explosives. Ne pas stocker ou transporter de liquides inflammables, de gaz, ou matériaux explosifs dans le même compartiment que la Nuance Audio™ Remote Control. Éteignez votre Nuance Audio™ Remote Control et ne retirez pas ou n'installez pas les piles lorsque vous vous trouvez dans une zone à l'atmosphère potentiellement explosive. Ne pas utiliser si cassé ou endommagé. Inspectez périodiquement la Nuance Audio™ Remote Control pour détecter des dommages ou des signes d'usure. Ne l'utilisez pas si une partie est endommagée, fissurée ou si un composant interne est exposé. Ne tentez pas de réparer la

Nuance Audio™ Remote Control vous-même, contactez plutôt le support à www.nuanceaudio.com.

Surchauffe. Gardez la Nuance Audio™ Remote Control à l'écart du feu et de la chaleur excessive (par exemple, lors du stockage en plein soleil, près de bougies ou dans une voiture chaude) pour éviter les brûlures ou les dommages à la Nuance Audio™ Remote Control. La Nuance Audio™ Remote Control ne doit pas surchauffer lors d'une utilisation normale. Si c'est le cas, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez le service support. Gardez la Nuance Audio™ Remote Control à l'écart du feu et des sources de chaleur.

Manipulez avec soin et évitez les dommages. La Nuance Audio™ Remote Control est un Équipement électronique sensible, elle contient du matériel électronique sensible et doit être manipulée avec soin. Ne la faites pas chauffer et ne la pliez pas, car elle pourrait être endommagée et même prendre feu. Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas excessivement la Nuance Audio™ Remote Control. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de manipuler la Nuance Audio™ Remote Control. Ne l'exposez pas au soleil. Interactions et environnements. Faites attention. Interagir avec la Nuance Audio™ Remote Control peut vous distraire ou augmenter le temps de réaction face aux dangers. Soyez toujours attentif à votre environnement, y compris la signalisation et les obstacles.

Durée de vie. La durée de vie prévue de la Nuance Audio™ Remote Control est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

Limitations d'utilisation. N'utilisez pas la Nuance Audio™ Remote Control dans des environnements aux champs électriques ou magnétiques forts. La distance d'utilisation effective de la Nuance Audio™ Remote Control est inférieure à 25 mètres.

Voyage aérien. Vérifiez les restrictions de sécurité aérienne applicables aux appareils électroniques personnels avant de voler avec la Nuance Audio™ Remote Control. Utilisez la Nuance Audio™ Remote Control en conformité avec toutes les lois, règles et réglementations locales applicables.

Conditions de fonctionnement. -10°C à +45°C ; 101,3 kPa à 61,9 kPa ; humidité entre 20 % et 60 % sous +35°C pendant 1 000 heures ; altitude maximale de 3 900 mètres pendant 1 heure à 0°C et 35°C.

Transport et stockage. -40°C à +85°C ; humidité entre 20 % et 90 % ; la Nuance Audio™ Remote Control doit rester fonctionnelle après récupération d'une exposition non opérationnelle à une altitude de 12 000 mètres (18,8 kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C.

Nettoyage et entretien. Pour nettoyer la Nuance Audio™ Remote Control, utilisez un chiffon humide et du savon neutre en évitant tous types de sprays, solvants, produits chimiques ou solutions de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniac. N'utilisez pas de chiffons sales ou abrasifs qui pourraient endommager la Nuance Audio™ Remote Control. Si le Produit devient excessivement humide, il y a un risque de l'endommager, séchez-le soigneusement, rangez-le dans un contenant avec des absorbeurs d'humidité ou dans un étui de séchage.

Batterie. La Nuance Audio™ Remote Control contient une pile bouton remplaçable par l'utilisateur. La batterie peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne la laissez pas dans la voiture en plein soleil ou ne l'exposez pas à une chaleur excessive. Éliminez la batterie conformément aux instructions et aux exigences locales. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ou les brûler. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales. Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles, de marques ou de types différents, tels que les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables. La durée de vie prévue de la batterie est d'au moins 6 mois dans des conditions d'utilisation standard à partir du moment où l'onglet de protection de la batterie est retiré. Pour la procédure de remplacement de la batterie, veuillez suivre les indications du guide de l'utilisateur accompagnant la Nuance Audio™ Remote Control et utilisez une épingle aussi petite qu'une pointe de stylo ou un cure-dent pour ouvrir le couvercle de la Nuance Audio™ Remote Control. Soyez prudent lors du remplacement de la batterie pour éviter d'endommager la structure de la Nuance Audio™ Remote Control. Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -). Assurez-vous de toujours de bien sécuriser le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le Produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 100 °C ou ne l'incinerez pas. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques. Les dangers liés à la batterie sont le feu, l'explosion et la brûlure. Ne court-circuitez pas, ne broyez pas, n'incinerez pas la batterie, et n'exposez pas le contenu à l'eau. Gardez toujours vos piles hors de portée des enfants pour éviter l'ingestion. Ne pas ingérer la batterie. Les piles compatibles sont des piles bouton au lithium 3V CR2450. Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort. Appelez un centre antipoison

local pour obtenir des informations sur le traitement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Contrôle du mode audio	Bouton sur l'Appareil
Contrôle du volume	Boutons sur l'Appareil
CONNECTIVITÉ SANS FIL	
Compatibilité Bluetooth®	Oui, BLE
Compatibilité appel téléphonique Bluetooth®	Non
Fréquence de fonctionnement	2480-2402 MHz
Puissance rayonnée maximale	La puissance EIRP maximale en espace libre est de -3,22 dBm
Modulation	GFSK
Espacement des canaux	2MHz
Largeur de bande des canaux	2MHz
Nombre de canaux	40
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Batterie	Pile bouton au lithium 3V CR2450
Durée de vie	5 ans
Durée de conservation	5 ans
CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE	
Température	de -40°C à +85°C
Humidité	de 20 % à une humidité élevée de 90 % et température de +45°C pendant 288 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 12 000 mètres (18,8kPa) pendant 12 heures à la fois à -10°C et +45°C
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température	de -10°C à +45°C
Humidité	de 20 % à une humidité de 60 % sous +35°C pendant 1 000 heures
Altitude et pression atmosphérique	Altitude de 3 900 mètres pendant 1 heure à 0°C et +35°C ; 101,3kPa à 61,9kPa

Note : Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, modifiée, distribuée ou utilisée de quelque manière que ce soit sans une autorisation écrite préalable.

Déclaration de conformité UE

Luxottica Group S.p.A déclare que cet Appareil respecte la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio, le Règlement européen 2017/745 sur les dispositifs médicaux et la Directive RoHS II 2011/65/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de Conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

www.essilorluxottica.com/en/brands/conformity-declaration

Fréquences radio et puissance : BLE du Produit : 2402-2480 MHz < 20 dBm;

Précautions d'utilisation :

- Eloigner la Nuance Audio™ Remote Control du ventre des femmes enceintes.
- Eloigner la Nuance Audio™ Remote Control du bas ventre des adolescents
- Utiliser la Nuance Audio™ Remote Control dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.



L'utilisateur final est tenu de signaler tout incident grave survenant en relation avec l'utilisation de l'Appareil à l'autorité compétente de l'État membre où l'incident s'est Produit (pour la France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et au fabricant de l'appareil.

Informations sur le recyclage

La Nuance Audio™ Remote Control ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers et doit être déposée dans un centre de collecte approprié pour le recyclage. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez visiter www.nuanceaudio.com.

Le symbole de la poubelle barrée ci-dessous signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, la Nuance Audio™ Remote Control et/ou la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control doivent être jetées séparément des déchets ménagers. Lorsque la Nuance Audio™ Remote Control arrive en fin de vie, apportez-la ainsi que la batterie à un point de collecte désigné par les autorités locales. Alternativement, apportez le Produit et la batterie à un magasin affilié. La batterie peut être retirée en toute sécurité par l'utilisateur final selon les indications données dans le guide de l'utilisateur. La collecte séparée et le recyclage du Produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine.



Informations sur les DEEE

Luxottica s'engage à l'élimination, la réutilisation, le recyclage et la récupération appropriés des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (« DEEE »). Les DEEE ne doivent pas être éliminés dans les poubelles domestiques normales. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez consulter l'adresse www.nuanceaudio.com.

Certifications de sécurité pour la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control

Cet article décrit les normes de sécurité internationales que la batterie de la Nuance Audio™ Remote Control respecte. Toutes les batteries de la Nuance Audio™ Remote Control sont testées, certifiées et conformes à ces normes de sécurité internationales :

- Règlement des Nations Unies (ONU) sur le transport UN38.3 : Couvre la sécurité des batteries lors du transport aérien
- Règlement (UE) 2023/1542
- Norme UL1642 pour les batteries au lithium

AVERTISSEMENT La batterie ne contient pas de mercure. Ne pas percer ou incinérer, ne pas mettre dans l'eau.

Nuance Audio™ est une marque déposée d'Essilor International SAS.

GARANTIE LIMITÉE LUXOTTICA

La présente garantie limitée pour les consommateurs (la « Garantie ») est fournie par Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 20123 Milan, Italie (« Luxottica »). Cette garantie couvre les défauts et les dysfonctionnements du produit Luxottica qu'elle accompagne. La garantie reste valable pendant un (1) an à compter de la date d'achat du produit (la « période de garantie limitée »). Cependant, si vous achetez le produit au sein de l'UE, du Royaume-Uni ou de l'AELE, la période de garantie limitée est de deux (2) ans.

Cette garantie s'applique uniquement aux pays où Nuance est officiellement commercialisé et pris en charge, c'est-à-dire aux pays où le produit est certifié et où Luxottica est autorisé à le distribuer (« territoire couvert par la garantie »). Nous garantissons que le produit fonctionnera, dans des conditions d'utilisation normales et prévues, conformément aux spécifications techniques ou à la documentation du produit qui l'accompagne (la « fonctionnalité garantie ») pendant la période de garantie limitée. Pour éviter toute ambiguïté, tout service nécessaire pour atteindre la fonctionnalité garantie peut être mis à jour, modifié ou limité, pour autant qu'il continue de maintenir (ou de dépasser) la fonctionnalité garantie. Cette garantie n'est pas disponible pour les produits achetés auprès d'une source autre que Luxottica ou un revendeur autorisé. Cette garantie n'est valable qu'avec une preuve d'achat indiquant clairement la date d'achat. Si vous nous envoyez un produit sans preuve d'achat valide, nous nous réservons le droit de vous renvoyer le produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez le récupérer.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits en vertu des lois ou règlements de protection des consommateurs en vigueur dans le pays où le produit a été acheté ou, s'il est différent, dans le pays où vous vous trouvez, à condition que ce produit y soit officiellement commercialisé au moment où le service de garantie est nécessaire.

Ces droits varient d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre. Les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent aux droits et recours prévus par les lois et règlements de protection des consommateurs (y compris, sans limitation, les lois nationales mettant en œuvre la directive 1999/44/CE et la directive 2019/771) et ne les affectent pas. Vous avez droit à des recours gratuits si le produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les lois du territoire couvert par la garantie. Les autres recours dont vous disposez en vertu des lois du territoire couvert par la garantie ne sont pas affectés par la présente garantie. Pour des informations complètes sur vos droits conformément à la législation en vigueur dans le territoire couvert par la garantie, veuillez voir ci-dessous et/ou contacter votre organisation locale de défense des droits des consommateurs/bureau d'aide aux citoyens. Rendez-vous sur www.nuanceaudio.com pour connaître les pays pris en charge par Luxottica et pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts. Le support technique offert par Luxottica consiste à aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés aux défauts du produit. Veuillez noter que lorsque vous contactez Luxottica par téléphone, des frais d'appel longue distance peuvent s'appliquer, en fonction de votre zone d'appel.

ENREGISTREMENT

L'enregistrement du produit n'est pas une condition requise pour bénéficier de la présente garantie, mais certains produits Luxottica nécessitent une connexion périodique à un compte en ligne pour assurer leur pleine fonctionnalité.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si vous avez un problème avec votre produit, sauf indication contraire dans la présente garantie et sauf disposition contraire de la législation applicable dans l'État, pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous devez retourner votre produit au revendeur autorisé auprès duquel le produit a été acheté, accompagné de votre preuve d'achat. Rendez-vous sur www.nuanceaudio.com pour obtenir des informations utiles sur le service et les contacts. Si votre réclamation au titre de la garantie est jugée valide et que nous confirmons l'existence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement couvert par la présente garantie, le recours approprié sera déterminé. Selon les circonstances, nous pouvons prendre l'une des mesures suivantes : i) réparer le produit, uniquement lorsque la réparation est techniquement réalisable (étant donné le contenu hautement technologique du produit, la seule réparation possible est le remplacement de verre) ; (ii) remplacer le produit ; ou (iii) rembourser le prix d'achat payé pour le produit, si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles ou appropriés. Sous réserve de vos droits en vertu des lois locales applicables du territoire couvert par la garantie, le choix du recours incombe à l'entreprise. Sous réserve de vos droits en vertu des lois locales, si nous déterminons qu'un produit doit être remplacé, le remplacement peut être un produit neuf, remis à neuf ou reconditionné. La période de garantie limitée est prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle nous avons eu le produit en notre possession pour l'exécution de la garantie, comme décrit ci-dessus. Sous réserve de vos droits et recours disponibles en vertu de la législation locale, la fourniture d'un produit réparé ou de remplacement ne redémarre pas et n'étend pas la période de garantie limitée.

Nous ne pouvons pas vous retourner le produit original. Si votre réclamation au titre de la garantie n'est pas jugée valide, nous nous réservons le droit de vous retourner le produit à vos frais, sous réserve de prépaiement, ou, si ces frais ne sont pas prépayés, nous conserverons le produit pendant trente (30) jours pour que vous puissiez le récupérer avant qu'il ne soit éliminé. Sauf dans la mesure où la loi exige le contraire, tous les frais que vous aurez engagés pour le retour du produit en vue d'une évaluation de la garantie seront pris en charge par Luxottica. Si vous devez retourner votre produit à Luxottica, vous recevrez une étiquette prépayée. Si la réclamation au titre de la garantie est jugée non valide et que nous ne trouvons pas de défaut ou dysfonctionnement couvert par cette garantie, nous vous contacterons pour savoir si vous souhaitez que nous effectuions des réparations à vos frais et, dans tous les cas, vous devrez payer les frais d'expédition pour le retour votre produit selon les tarifs standard de Luxottica.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DE : LA LIVRAISON OU L'INSTALLATION, OU LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR LA CONFIGURATION DU PRODUIT ET/OU LE RÉGLAGE DES COMMANDES DU CLIENT SUR LE PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE, UN ABUS, DES ACCIDENTS, UN INCENDIE, UN VOL, UNE DISPARITION, UNE PERTE, DES FLUCTUATIONS OU SURTENSIONS ÉLECTRIQUES, DES BRANCHEMENTS À UNE TENSION INADÉQUATE OU À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INCORRECTE, DES VIRUS, DES MALWARES, UN COMPORTEMENT IRRÉFLÉCHI, VOLONTAIRE OU INTENTIONNEL, OU UNE NÉGLIGENCE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN ENTRETIEN DU PRODUIT QUI N'A PAS ÉTÉ AUTORISÉ AU PRÉALABLE PAR LUXOTTICA. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS OU À LA DOCUMENTATION DU PRODUIT. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS OU DE

LA DOCUMENTATION DU PRODUIT OU PAR LE DÉFAUT DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA COMBINAISON DU PRODUIT AVEC D'AUTRES PRODUITS, ACCESSOIRES, PIÈCES OU COMPOSANTS NE PORTANT PAS LA MARQUE LUXOTTICA OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS, ÉQUIPEMENTS, SYSTÈMES, SERVICES, LOGICIELS, PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES, APPLICATIONS, INSTALLATIONS, RÉPARATIONS, CÂBLAGES EXTERNES OU CONNECTEURS NON FOURNIS OU AUTORISÉS PAR LUXOTTICA QUI ENDOMMAGENT LE PRODUIT. LES PROBLÈMES DE SIGNAL, DE RÉCEPTION ET DE DISTORSION LIÉS AU BRUIT, À L'ÉCHO, AUX INTERFÉRENCES OU À D'AUTRES PROBLÈMES DE TRANSMISSION ET DE LIVRAISON DU SIGNAL. TOUT ÉQUIPEMENT OU COMPOSANT QUI N'ÉTAIT PAS INCLUS DANS OU AVEC VOTRE PRODUIT TEL QU'IL A ÉTÉ VENDU À L'ORIGINE. L'USURE NORMALE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN TRANSPORT OU UN EMBALLAGE INADÉQUAT LORS DU RENVOI DU PRODUIT À LUXOTTICA OU À UN REVENDEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES MODIFICATIONS OU ADAPTATIONS QUI PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE À UN PRODUIT DE FONCTIONNER DANS UN PAYS AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU, FABRIQUÉ, APPROUVÉ ET/OU AUTORISÉ, OU LA RÉPARATION DU PRODUIT QUI ENTRAÎNE DES DOMMAGES À LA SUITE DE CES MODIFICATIONS. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX PRODUITS DONT LE CODE ANTI-CONTREFAÇON (OU ÉQUIVALENT) A ÉTÉ RETIRÉ, EFFACÉ, ALTÉRÉ, DÉTÉRIORÉ OU RENDU ILLISIBLE.

Cette garantie n'inclut aucune garantie spécifique que le produit sera exempt d'erreurs. Sauf aux États-Unis et dans la mesure où la loi applicable dans tout autre pays l'interdit, cette garantie est nulle si un produit est retourné avec des étiquettes enlevées, endommagées, altérées ou comportant des modifications (y compris le retrait non autorisé d'un composant ou d'un couvercle externe).

GARANTIES IMPLICITES

SAUF DANS L'UE, L'AELE ET LE ROYAUME-UNI ET SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE DANS TOUT AUTRE PAYS, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DES DROITS EST EXCLUE. POUR LES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LOI QUÉBÉCOISE SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, L'EXCLUSION DE GARANTIE CONTENUE DANS LA PRÉSENTE SECTION NE LIMITE PAS VOS DROITS ET RECOURS EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE FAIRE UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES PRÉVUES AUX ARTICLES 34 À 54 DE CETTE LOI.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR TOUTE LOI APPLICABLE, EN VERTU DE CETTE GARANTIE, LUXOTTICA NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE LUXOTTICA POUR TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU LIÉE À CETTE GARANTIE EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT PLUS TOUT INTÉRÊT AUTORISÉ PAR LA LOI, QUEL QUE SOIT LA FORME DE LA RÉCLAMATION. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LUXOTTICA N'EST PAS RESPONSABLE DES ÉVÉNEMENTS INDÉPENDANTS DE SA VOLONTÉ, TELS QUE LES CAS DE FORCE MAJEURE, LES VIRUS, LES DOMMAGES MATÉRIELS, LA PERTE D'USAGE, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, LE MANQUE À GAGNER, LA PERTE DE DONNÉES OU D'AUTRES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU DE DÉLIT (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE).

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu de toute loi nationale ou d'État applicable régissant la vente de biens de consommation.

Certains pays, États, provinces et territoires (y compris l'UE, l'AELE et le Royaume-Uni) n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, l'exclusion ou la limitation de certains dommages ou types de pertes, ou la limitation de la durée d'une garantie ou d'une condition implicite, de sorte que les limitations ou exclusions décrites dans la présente garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RETOURS ET ÉCHANGES :

Si vous avez acheté des produits Nuance Audio™ depuis une bannière EssilorLuxottica, vous pouvez les retourner dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat, ou dans un délai plus long expressément prévu par la loi en vigueur ou par la bannière EssilorLuxottica. Les produits Nuance Audio™ achetés auprès d'autres revendeurs doivent être retournés à ces revendeurs conformément à leurs politiques de retour. Pour plus d'informations sur les retours d'EssilorLuxottica, rendez-vous sur : <http://www.nuanceaudio.com/en-us/c/support/shipping-and-returns>.



Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Cadorna 3,
20123 Milan, Italy



Made in China
Fabriqué en Chine



www.nuanceaudio.com



Pour obtenir les instructions les plus récentes et à jour concernant l'utilisation, la sécurité et la garantie, veuillez consulter les instructions disponibles dans la section Support de l'application Nuanca Audio™ ainsi que sur la page suivante : nuanceaudio.com/support/manual-guide.



Assistance: nuanceaudio.com/contact-us

Ce guide de démarrage rapide s'applique aux modèles de Nuanca Audio™
Remote Control AAW0002EL et REB0080AO



Raccolta carta
Papel y cartón

