

Was ist Nuance Audio™ Plus?

Nuance Audio™ Plus ist kein bloßer „Klangverstärker“, sondern ein echtes medizinisches Gerät. Es handelt sich um Brillenfassungen, die mit bahnbrechender Technologie ausgestattet sind und ein Luftleitungshörgerät (Medizinisches Gerät der Klasse IIa, in Deutschland als rezeptfreies „OTC“-Hörgerät verkauft) nahtlos integrieren, das dazu gedacht ist, Geräusche für erwachsene Nutzer*innen (18 Jahre und älter) mit einer wahrgenommenen leichten bis moderaten Hörschwäche zu verstärken. Nuance Audio™ Plus kann, falls erforderlich, in Verbindung mit Korrekturgläsern für Erwachsene verwendet werden, die auch eine Korrektur von Sehfehlern benötigen. Nuance Audio™ Plus kann den ganzen Tag über getragen werden und lässt sich über die App einfach konfigurieren, um sie an jede Situation anzupassen, von Geschäftsbesprechungen bis hin zum Familienleben.

Nuance Audio™ Plus überzeugt durch:

- **Diskrete Open-Ear-Technologie**
- **Bequemes und stilvolles Design**
- **Einfache Handhabung und das Aussehen einer traditionellen Brille**
- **Seh- und Hörvorteile in einer integrierten Lösung (optional)**

Warum ist Nuance Audio™ Plus die richtige Lösung für meinen Hörverlust?

Nuance Audio™ Plus bieten die perfekte Lösung für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust oder für diejenigen, die in geräuschvollen Umgebungen Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen.

Die Nuance Audio™ Plus sind ideal, wenn Sie:

- mehr soziale Interaktionen suchen und eine Lösung benötigen, die Ihre Fähigkeit verbessert, mit Familie und Freunden zu kommunizieren;
- nach einer Lösung suchen, die Ihre Lebensqualität, Ihr sensorisches Erleben und Ihr allgemeines Wohlbefinden steigert;
- Wert auf Stil und Aussehen legen und Produkte bevorzugen, die Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen und Ihnen Komfort bieten.

Die Nuance Audio™ Plus sind für Menschen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust konzipiert und bieten eine unsichtbare, einfache und komfortable Lösung zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Tragen der Nuance Audio™ Plus verbessert die akustische Wahrnehmung, indem die Sprachverständlichkeit der Person, mit der Sie sprechen, verstärkt wird. Diese Brille ist mit einem innovativen Mikrofon-Array und einer fortschrittlichen „Beamforming“-Technologie ausgestattet, die einen fokussierten Klangstrahl in die Richtung lenkt, in die Sie schauen. Der Ton in diesem Bereich wird verstärkt, während umliegende Geräusche unverändert bleiben. Dadurch wird die Sprachverständlichkeit für die Person direkt vor Ihnen optimiert, was insbesondere in lauten Umgebungen eine große Hilfe für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust darstellt. Mit der „Beamforming“-Technologie und dem offenen Ohr-Design hören Sie klaren, natürlichen Klang und fangen Geräusche ein, die Sie vielleicht sonst überhört hätten. Nuance Audio™ Plus bieten nicht nur Komfort und Funktionalität, sondern auch eine hervorragende Klangqualität.

Würde ich trotzdem von Nuance Audio™ Plus profitieren, wenn ich ein normales Gehör habe und keinen Hörtest machen möchte?

Es gibt mehrere Unterschiede zwischen Nuance Audio™ Plus und herkömmlichen Hörgeräten:

Der Stil: Nuance Audio™ Plus stützt sich auf EssilorLuxottica's F&E-Fähigkeiten, handwerkliche Kompetenz und Designerfahrung. Das Ergebnis ist eine Nuance Audio™ Plus, die ihre Technologie nahtlos in ein elegantes Gestell integriert.

Komfort: Menschen, die andere freiverkäufliche oder herkömmliche Hörgeräte verwenden, klagen häufig über ein unangenehmes Gefühl im Gehörgang. Nuance Audio™ Plus bietet Seh- und Hörvorteile in einem einzigen, nahtlosen Produkt. Die Open-Ear-Lösung vermeidet die Unannehmlichkeiten, die mit herkömmlichen Innenohrgeräten verbunden sind.

Direktionalität: Bei der Verwendung des Audiomodus „Frontal“ kann sich der Hörer auf den Sprecher gegenüber konzentrieren. Für die Momente, in denen Sie Ihre Umgebung lieber ohne Betonung der Vorderseite wahrnehmen möchten, bietet Nuance Audio™ Plus auch den „Rundum“-Audiomodus, der ohne Verwendung des Beamforming-Algorithmus verstärkt.

Einfachheit: Da keine Anpassung/Konfiguration erforderlich ist, können Sie die Einstellungen Ihrer Nuance Audio™ Plus ganz einfach über Ihre Nuance Audio™ App vornehmen. Nuance Audio™ Plus wurde so konzipiert, dass sie sehr einfach zu bedienen ist und keine technischen Vorkenntnisse voraussetzt. Sie können die Nuance Audio™ Plus ganz einfach über die dazugehörige Nuance Audio™ App konfigurieren, indem Sie das (i) voreingestellte Programm (vier Optionen stehen zur Verfügung) auswählen, das am besten zu Ihrem Profil passt, und die Hörunterstützung weiter personalisieren, indem Sie die Einstellungen (ii) „Lautstärke“, (iii) „Hintergrundgeräusche“ und (iv) „Audio-Modus“ nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Alle diese 4 Einstellungen sind auf der Startseite der Nuance Audio™ App verfügbar.

Zugänglichkeit: Im Gegensatz zu herkömmlichen Hörgeräten ist Nuance Audio™ Plus ein rezeptfreies Produkt, das direkt im [Geschäft](#) gekauft werden kann. Es ist weder ein Hörtest noch eine Bescheinigung über den Hörstatus erforderlich.

Verwendet Nuance Audio™ Plus Knochenleitung?

Nein, die Brille nutzt nicht die Knochenleitung, sondern die Luftleitung. Sie ist mit Lautsprechern ausgestattet, die in das Gestell in der Nähe Ihrer Ohren eingebettet sind.

Können Leute in der Nähe das verstärkte Audio hören?

Menschen in Ihrer Umgebung (in geringer Entfernung) sollten die verstärkten Geräusche nicht hören oder dadurch gestört werden.