

Qu'est-ce que Nuance Audio™ Plus ?

Les Nuance Audio™ Plus ne sont pas un simple "amplificateur sonore", mais un véritable assistant d'écoute. Ce sont des montures de lunettes dotées d'une technologie révolutionnaire qui intègrent en toute harmonie un assistant d'écoute à conduction aérienne (dispositif médical de classe IIa, assistant d'écoute vendu en vente libre "OTC", en France) destiné à amplifier le son pour les utilisateurs et utilisatrices adultes (18 ans et plus) ayant une perte auditive perçue légère à modérée. Les Nuance Audio™ Plus peuvent, si nécessaire, être associées à des verres correcteurs pour les adultes ayant également besoin d'une correction visuelle.

Les Nuance Audio™ Plus peuvent être portées toute la journée et facilement configurées via l'Application pour s'adapter à n'importe quelle situation, des réunions professionnelles aux moments passés en famille.

Caractéristiques des Nuance Audio™ Plus :

- **Technologie discrète en oreille ouverte**
- **Design confortable et élégant**
- **Faciles à utiliser, semblables à des lunettes de vue traditionnelles**
- **Aide auditive et correction visuelle dans une seule et même solution (en option)**

Pourquoi les lunettes Nuance Audio™ Plus peuvent elles être la bonne solution réponse à ma perte auditive?

Les lunettes Nuance Audio™ Plus amplifient les sons pour aider les personnes présentant une perte auditive légère à modérée, ou celles qui ont du mal à entendre dans des environnements bruyants en garantissant discrétion, simplicité et confort.

Les lunettes Nuance Audio™ Plus offrent une amplification sonore et améliorent la clarté du discours du locuteur qui se trouve face à vous. Ces lunettes sont dotées d'un système de microphones innovant et d'une technologie de pointe d'amplification directionnelle, créant un faisceau focalisé dans la direction où vous regardez. Le son est amplifié dans cette zone ciblée, tandis que celui des zones environnantes reste inchangé. Cela se traduit par une amplification maximale pour la personne directement en face de vous, et répond au besoin de comprendre le langage parlé dans des environnements bruyants, pour les personnes atteintes d'une perte auditive légère à modérée. Notre technologie avancée d'amplification directionnelle, associée à l'oreille ouverte et à un son naturel, vous permet de capter sans effort les sons que vous pourriez manquer, également dans des environnements bruyants.

Les lunettes Nuance Audio™ Plus sont-elles utiles si j'ai une audition normale ?

Il existe plusieurs différences entre les Nuance Audio™ Plus et les assistants d'écoute traditionnels :

- **Style** : les Nuance Audio™ Plus s'appuient sur les compétences d'EssilorLuxottica en recherche et développement, sur son savoir-faire ainsi que sur son expertise en conception. Le résultat ? Les Nuance Audio™ Plus intègrent harmonieusement leur technologie dans une monture élégante.
- **Confort** : les personnes qui utilisent d'autres assistants d'écoute en vente libre ou traditionnels ont tendance à se plaindre d'une gêne dans le conduit auditif. Les Nuance Audio™ Plus améliorent votre vue et votre ouïe harmonieusement, avec un seul et même produit. La solution en oreille ouverte élimine la gêne généralement provoquée par les appareils auditifs à insérer dans l'oreille.
- **Orientation** : vous pouvez vous focaliser sur la personne qui parle en face de vous lorsque vous utilisez le mode audio Frontal. Lorsque vous préférez entendre ce qui vous entoure sans mettre l'accent sur la personne devant vous, les Nuance Audio™ Plus proposent également le mode audio à 360° qui amplifie les sons sans avoir recours à l'algorithme directionnel.
- **Simplicité** : étant donné qu'aucun ajustement ni aucune configuration ne sont requis, vous pouvez très facilement ajuster les réglages de vos Nuance Audio™ Plus via la Nuance Audio™ App. Les Nuance Audio™ Plus ont été pensées pour être très simples à utiliser, sans nécessiter de connaissances technologiques.

Vous pouvez facilement configurer vos Nuance Audio™ Plus via la Nuance Audio™ App en choisissant le (i) programme préréglé (quatre options disponibles) qui convient le mieux à votre profil, ainsi qu'en personnalisant davantage l'aide auditive en jouant avec les réglages de (ii) "volume", de (iii) "bruit de fond" et de (iv) "mode audio". Ces quatre réglages sont tous disponibles sur la page d'accueil de la Nuance Audio™ App.

- Accessibilité : contrairement aux assistants d'écoute traditionnels, les Nuance Audio™ Plus sont un produit en vente libre qui peut être acheté directement en magasin . Il n'est pas nécessaire de passer des tests auditifs ni de certifier vos capacités auditives.

Le son amplifié peut-il être entendu par quelqu'un se trouvant à proximité ?

Non, les lunettes n'utilisent pas la conduction osseuse, mais la conduction aérienne. Elles utilisent des haut-parleurs intégrés à la monture, situés près de vos oreilles.

Le son amplifié peut-il être entendu par quelqu'un se trouvant à proximité ?

Les personnes autour de vous (à une distance raisonnable) ne devraient pas entendre ni être dérangées par les sons amplifiés.